


# Brugsanvisning OPUS 3



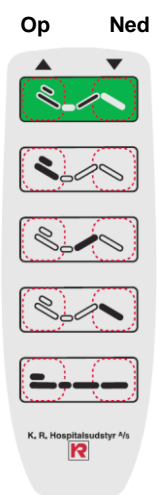
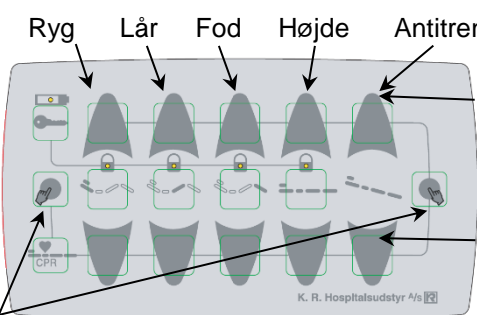
August 2016

<b>Sikkerhedsregler</b>	<b>Læs brugsanvisningen og følg dens anvisninger:</b> <b>Advarsel:</b> Der er klemningsfare når sengen sænkes fra hævet position. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kig altid på sengen, mens du bruger håndbetjeningen.</li> <li>• Sørg altid for at ingen er i klemme når sengen betjenes.</li> <li>• Overlad kun håndbetjeningen til en anden, som du ved kan bruge den.</li> <li>• Kør helst sengen i bund før den forlades.</li> <li>• Brug ikke sengen, hvis den er i stykker.</li> <li>• Kryb aldrig ind under sengen.</li> </ul>
<b>Anvendelse</b>  SWL= 250 kg	OPUS-3 sengen er specielt velegnet til hospitaler. Den kan bruges, hvor vægten af bruger (max. 185kg) + madras (max. 25kg) + tilbehør (max. 40kg), ikke overstiger 250 kg. Sengen er kun beregnet for personer over 12 år.  Anbefalet madrastykkelse: 12cm.



<b>Trendelenburg</b>	Udløs BØJLEN: Løft op eller tryk ned på sengerammen, for at justere trendelenburg vinklen.
<b>Sengehest</b>	<b>Udløsning af sengehest.</b> 


<b>Nødsænk rygdel</b>	Tryk det RØDE BØJLEHÅNDTAG ind, for at koble rygmotor fri.
-----------------------	--

<b>Betjening</b>	Patient <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <span>Op</span> <span>Ned</span> </div>  <div style="margin-left: 20px;"> <p>Rygdel / Lådel</p> <p>Rygdel</p> <p>Lårdel</p> <p>Fodende</p> <p>Højde</p> </div> <p style="font-size: small; margin-top: 10px;">K. R. Hospitalsudstyr A/S</p>	Personale <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <span>Ryg</span> <span>Lår</span> <span>Fod</span> <span>Højde</span> <span>Antitrend.</span> </div>  <div style="margin-left: 20px;"> <p>Op</p> <p>Ned</p> </div> <p style="font-size: small; margin-top: 10px;">K. R. Hospitalsudstyr A/S</p> <p>Hold knappen inde ved betjening</p> <p>Låsning af funktioner:                  Tryk  +  for at låse/åbne funktion. (Lys = Låst)</p>
------------------	---	--

# Brugsanvisning OPUS 3



August 2016

<b>Galge</b>	Den sættes i bøsninger ved hovedgærdet. (Max. last 75kg)
<b>Sengeforlænger</b> (Indbygget) madrasmål =220cm	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Frigør låsen under sengesiderne og træk samtidig gavlen lidt ud.</li><li>2 Tips (en side af gangen)</li><li>3 Aktiver låsen så den kan falde i hak når gavlen trækkes helt ud.</li><li>4 Træk gavlen 20cm ud. (Kontroller at den bliver låst i begge sider)</li><li>5 Løsn fingerskruerne under madrasbøjlen i fodenden.</li><li>6 Træk madrasbøjlen 20cm ud til stop og spænd den fast.</li></ol> <p><b>Vigtigt:</b> Juster altid madrassyret i fodenden, så der er mere end 25mm afstand til gavl.</p>
	
<b>Hjulremse</b>  Vandret pedal=Fri  Grøn=kør  Rød=stop	<p>Centralbremse</p> <p>Neutral. Hjulene er frit bevægelig i alle retninger.</p> <p>RETNINGSSTYR Træd GRØN pedal helt ned: Bremsen er frigjort og styrehjulene låser i kørselsretning.</p> <p>Træd RØD pedal helt ned, i begge ender af sengen.: Hjulene er låst og sengen står fast.</p> <p>Tips! SORT pedal kan anvendes til at frigøre bremse/retningsstyr, når sengen er i laveste position.</p>
<b>Dropstativ</b>	Kan sættes i hver side, ved hoved-, eller fodgalv.
<b>Rengøring</b>	OPUS 3 kan rengøres med almindelige rengøringsmidler. Lejefladen kan vippe op, det letter arbejdet. Sengen må IKKE renses med højtryksrensere, og den skal tørres efter vask.
<b>Lydniveau</b>	Sengen støjer mindre end 48 dB
<b>Service</b>	Se servicevejledning