

## Monteringsvejledning

DA

Fastgør de 2 L-formede beslag til Alto toiletsæde: vend toiletsædet på hovedet på et fladt underlag og isæt de L-formede beslag i hullerne. Pres forsigtigt på beslaget og drej grebet med uret indtil gevindet går i indgreb.

Placer beslagene således at de nemt kan gå ned på siden af toiletkummen.

Fjern det eksisterende toiletsæde og placer Alto sædet direkte på toiletkummen, idet beslagene placeres mod bagsiden af toiletkummen, og læben mod forsiden.

Drej grebet med uret indtil der mærkes modstand, og sædet ikke længere kan bevæges fra side til side.

Det er vigtigt at sikre sig at sædet sidder korrekt for det benyttes.

**VIGTIGT!:** Beslagene er designet således at sædet er nemt at montere. Stop derfor med at dreje når modstand mærkes.

## Rengøringsvejledning

Alle dele kan rengøres med varmt vand og neutralt rengøringsmiddel. Alternativt kan sædet dypes i vand og/eller kan steriliseres (uden beslag) i en autoklave i 1 minut ved 85° C.

**NB. Tåler ikke vask i bækkenkoger eller opvaskemaskine**

## Advarsler

Overskrid ikke maksimum bruger vægt: 200kg

Det skal altid sikres at sædet er korrekt fastspændt før brug.

Hold ikke på sædet for støtte når du sætter dig på hhv. løfter dig fra sædet.

## Tekniske detaljer

Max brugervægt: 200kg, Dimensioner: 40.7 x 36.6 cm. Åbning: 26 x 20cm.

**Garanti & rustgaranti:** Der ydes 2 års garanti på Alto, dog dækkes skader som følge af tab på hårdt underlag m.m. ikke. Alto indeholder ingen dele, der kan ruste.

## Tilbehør & Reservedele:

### Alto Bidet-Indsats (Bestillingsnummer: RI-AP-BDT-PP)

Forenkler personlig hygiejne. Let og nemt at medbringe. Adgang såvel forfra som bagfra Bidet der anvendes sammen med Alto forhøjede toiletsæder. God pasning der muliggør enkel transfer. Sæbe skål placeret foran på bidet'et.

### Alto Blødt betræk til Toiletforhøjer (Bestillingsnummer: RI-AP-SC-PU)

Blødt betræk, som passer til samtlige Alto toiletforhøjere. Lægges oven på toiletsædet og holder sig herefter selv på plads. Rengøres med alm. sæbevand og en klud.

### Fastspændingsbeslag og Skruer (AP-LSPA-KIT-B)

Skulle du miste eller beskadige fastspændingsbeslag eller skruer kan disse leveres som reservedele.

## Miljø-Hensyn:

Alle Alto produkter er produceret i miljøvenlige plasttyper (polypropylen & nylon), som alle kan recycles eller forbrændes uden udvikling a toksiske stoffer.

## Monteringsinstruktion:

S

Lägg toalettsitsen uppochner på ett plant underlag och sätt de L-formade beslagen i hållarna. Tryck försiktigt på beslaget och skruva samtidigt på ratten medurs tills skruven har fått fäste i sitsen.

Skruva inte in beslagen så mycket att de inte går ner på utsidan av stolen.

Ta bort den befintliga toalettsitsen och placera toalettförhöjaren direkt på stolen, med beslagen placerade mot baksidan av toalettstolen.

Skruva beslagen medurs intill det blir motstånd, och sitsen inte längre kan flyttas från sida till sida.

Det är viktigt att kontrollera att sitsen sitter riktigt innan den tas i bruk.

**VIKTIGT!:** Beslagen är designade, så att sitsen är lätt att montera. Dra därför inte åt beslagen mer än att det börjar kännas motstånd.

## Rengöring:

Alla delar kan rengöras med varmt vatten och neutralt rengöringsmedel. Alternativt kan sitsen läggas i blöt och/eller tvättas (utan beslag) i 85°C i max 1 minut.

## Viktigt

Överskrid inte den maximala brukar vikten: 200kg

Kontrollera alltid att sitsen sitter ordentligt innan den används.

Stöd dig inte på sitsen när du sätter eller reser dig.

## Tekniska detaljer

Maximal brukarvikt: 200kg, Mått: 40.7 x 36.6 cm. Öppning 26 x 20cm.

## Tillbehör:

### Alto Bidéinsats (Nr: RI-AP-BDT-PP)

Förenklar personlig hygien. Lätt och enkel att använda. Öppning både framifrån och bakifrån. Bidén användes tillsammans med Alto toalettforhöjare. God passform vilket medför enkel hantering. En tvålskal är placerad i framkant på bidéinsatsen.

### Alto Mjuksitts (Nr: RI-AP-SC-PU)

Användes tillsammans med alla Alto toalettforhöjare. Kan rengöras med varmt vatten och neutralt rengöringsmedel.

### Extra Monteringsbeslag ock Skruvar (AP-LSPA-KIT-B)

*Designed and manufactured  
in the EU by IT 01059470110 for*

**BORRINGIA**

## Borringia A/S

Hejreskovvej 18B-C

DK – 3490 Kvistgård, Denmark

Tel. +45 4913 8855

Fax +45 4913 9955

e-mail [info@borringia.com](mailto:info@borringia.com)

web site [www.borringia.com](http://www.borringia.com)

CE

Alto

DA ALTO Brugervejledning - Gyldig for følgende modeller: ALTO 6/10/14cm med låg - ALTO 6/10/14cm uden låg

S ALTO bruksanvisning för ALTO 6/10/14cm med lock - ALTO 6/10/14cm utan lock