


Kredsløbsdiagram og funktionstestkrav fås på anmodning.

#### Tekniske data



Model	SC525
Spænding	~230V
Kapacitet	250 W
Frekvens	50 Hz
Driftstemperatur	16° C - 35° C
Vægt	1,4 kg
Størrelse	102 x 330 mm
Klassificering	93/42/EEC, Klasse 1 – IEC 601-1, IEC 601-1-2. (Cispr 11, IEC 801- 4, IEC 801-5)

 Pumpen bør ikke bruges på operationsstuer, når brandfarlige narkoseblandinger med luft, O<sub>2</sub> eller N<sub>2</sub>O er i brug.

#### Brugsanvisning

## Sof•Care Fyldepumpe



Vare nr. 80-10283  
HMI nr. 37445

Ved fejl kontaktes kundeservice

#### Forhandler

Alu Rehab ApS  
Kløftehøj 8  
DK-8680 Ry  
Telefon: 87 88 73 00  
Fax: 87 88 73 19  
info@alurehab.dk

Autoriseret CE repræsentant  
(Europa)

INVATECH GmbH & Co.  
Wandsbeker Königstraße 27-29  
D 22041 Hamburg  
Tyskland

Maj-10

## Brugsanvisning Sof•Care Fyldepumpe

Pumpen er fremstillet alene til brug i forbindelse med Sof•Care statiske luftmadrasser type 460 og 840.

### Etablering

Sof•Care madrassen rulles ud på sengens madras.

Et lagen lægges ovenpå madrassen.

Brugeren lægges på den tømte Sof•Care madras.

Den medfølgende ledning sættes i kontakten (220V).

Pumpens tætsluttende mundstykke sættes i madrassens påfyldningsstuds og der blæses i 1 minut.




Indblæsningen stoppes automatisk.

Pumpen måler meget præcist det modtryk der opstår på grund af brugerens vægt, og når brugeren er fri af sengens underlag og ”flyder” på luft, stopper fyldningen automatisk.

### Brugere under 40 kg og over 125 kg


Til brugere under 40 kg og over 125 kg fyldes madrassen før brugeren lægges på. Der-efter tømmes evt. overskydende luft ud som vist på billede.

Til slut fastgøres fyldestudsens skruelåg.

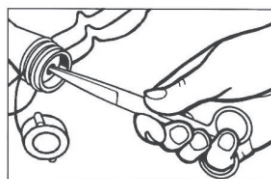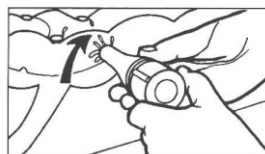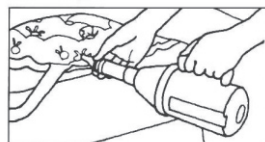

### Håndcheck


Håndcheck udføres altid som kontrol. Der skal være min. 2 cm luft mellem bruger og madras.

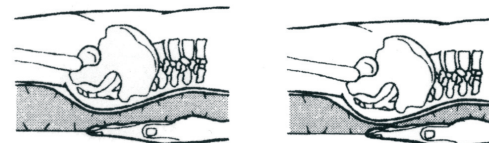

Et sikkerhedstjek, som vist på illustrationen, udføres altid efter fyldning. En flad hånd, med håndfladen opad, føres ind under brugerens sædeparti, mellem topmadras og eksisterende madras. Der skal være ca. 2 cm mellem bruger og madras. Udfør håndkontrol løbende f.eks. ved vagtskifte.

### Hjertemassage (CPR-kardiopulmonal genoplivning)

Sikringsdækslet afskrues og ventilen rykkes ud. Madrassen tømmes på 10 sekunder.

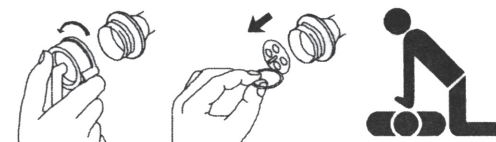



### Rengøring

Pumpehuset rengøres efter hver bruger.

Afbryd pumpen ved kontakten inden rengøring.

Gør pumpen ren med et mildt rengøringsmiddel og en fugtig klud.

Tør pumpen efter med en ren klud, inden den tages i brug.

-  Må ikke nedsænkes i væske, og ikke autoklaveres.
-  Der er ingen dele i pumpen, der kan repareres af brugeren. Medicinsk udstyr må kun repareres af en autoriseret forhandler.