

# Cobi lejringspuder

*Til særlige lejringsbehov*

20-100 KG



**Kan med fordel anvendes til:**

- Personer med pareser.
- Sclerose.
- Hjerneskadede.
- Neurologiske patienter.
- Smertepatienter.
- Alvorligt syge patienter.



## ⚠ ADVARSEL ⚠ ADVARSEL ⚠

- Dette produkt må ikke anvendes uden grundig instruktion fra uddannet personale.
- Bruges produktet til personer, der vejer mere end den maksimale brugervægt, er der risiko for at beskadige produktet.
- Cobi Rehab påtager sig intet ansvar for eventuelle skader på produktet eller personskader forårsaget af forkert installation, forkert montering eller forkert anvendelse af dette produkt.
- Hvis dele er beskadiget eller mangler, kontakt Cobi Rehab med det samme. Brug IKKE erstatnings reservedele.
- Cobi Rehab kan ikke holdes ansvarlig for fejl eller ulykker, der opstår efter reparationer uden skriftlig tilladelse fra Cobi Rehab.

⚠ For at sikre korrekt brug af Cobi lejringspuder skal brugsanvisningen læses grundigt før brug. Der skal rettes opmærksomhed specielt mod advarslerne mærket med ⚠.

Desuden må lejringspuderne kun betjenes af uddannet personale eller af personer, der har fået instruktion i deres brug, da der ellers er fare for, at brugeren kan komme til skade.

## Anvendelse

Puderne er anvendelige til mange patientgrupper, og særdeles velegnet til lejring af brugere med blandt andet pareser, sclerose, hjerneskadede, neurologiske patienter, smertepatienter og alvorligt syge patienter, hvor få og selv små bevægelser vil udløse smerter. Fælles for disse grupper af patienter er, at langt de fleste af dem er i høj risiko for at udvikle vævsskade og tryksår.

Puderne fremmer og sikrer den optimale lejring i sengen på en simpel og effektiv måde. Materialets fleksible sammensætning tilgodeser alle typer af underlag uden at øge risikoen for tryk og shear af huden.

## Beskrivelse

Lejringspuderne er lufttætte og fyldt med små Krøyer kugler, hvilket sikrer, at stillingen holdes og puderne ikke ændrer form.

Betrækket er et utroligt strækbart PU materiale, antibakterielt forseglet med sølvcoating og CIC-Ag+ (krydsbærekontrol), som gør det ekstra modstandsdygtigt og uigennemtrængeligt for bakterier, og derfor meget hygiejnisk i brug.

## Specifikationer

Kuglemateriale	Eksponeret polystyren
Kuglestørrelse	Ca. 3 mm
Pudeoverflade	Polyester, polyuretan polycarbonat
Pudebetræk	67% bomuld, 33% polyester
Rengøring	Pudebetrækket er vaskbart. Puderne kan rengøres med almindelige rengøringsmidler eller desinficeres.
ISO - klassifikation	ISO 18 12 15 - 09



Scan koden og få flere produktinformationer.



## Før brug



### Forebyggelse af liggesår

Følgende illustrationer viser hvordan lejringspuderne kan anvendes til at forebygge liggesår forskellige steder på kroppen.

Direkte kontakt med det udsatte hudområde udgør ingen risiko for brugeren.

Cobi Rehab lejringspuder kan bruges i mange sammenhæng og i mange forskellige lejringsituationer. Her er overordnede forslag til brug af lejringspuderne.

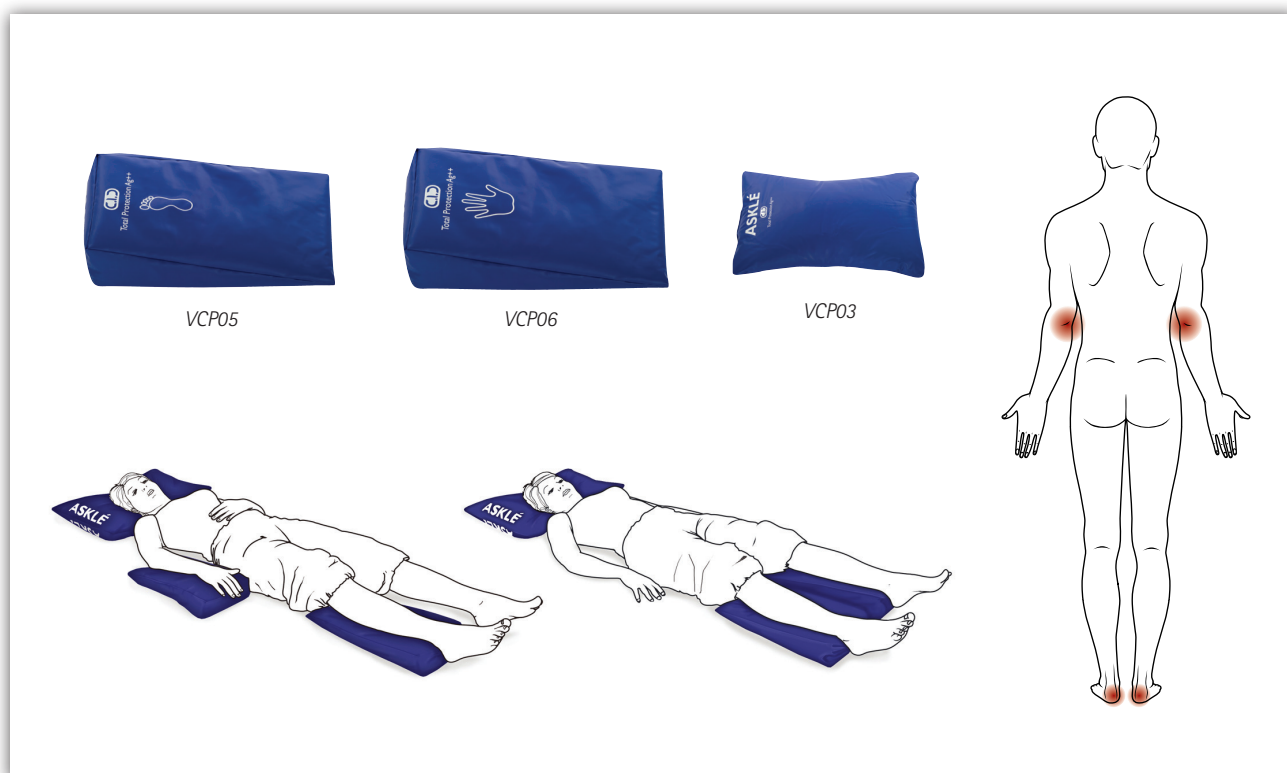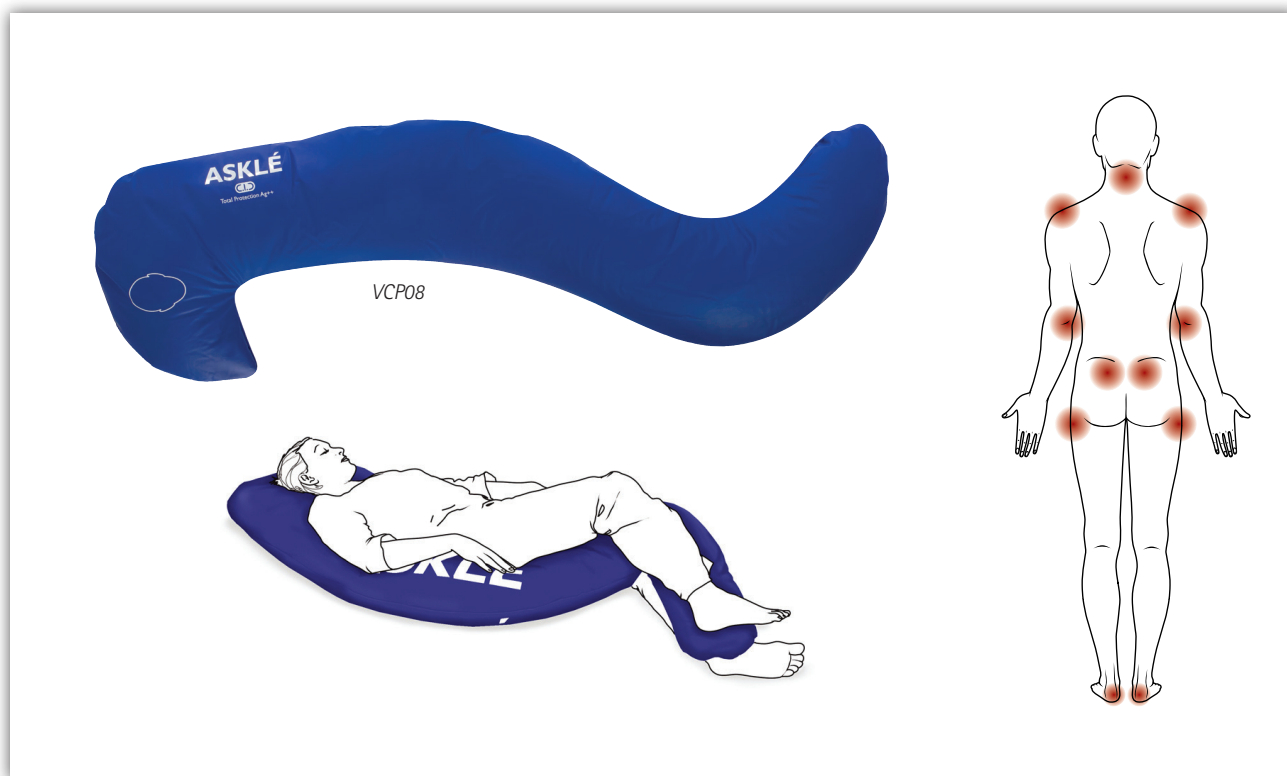

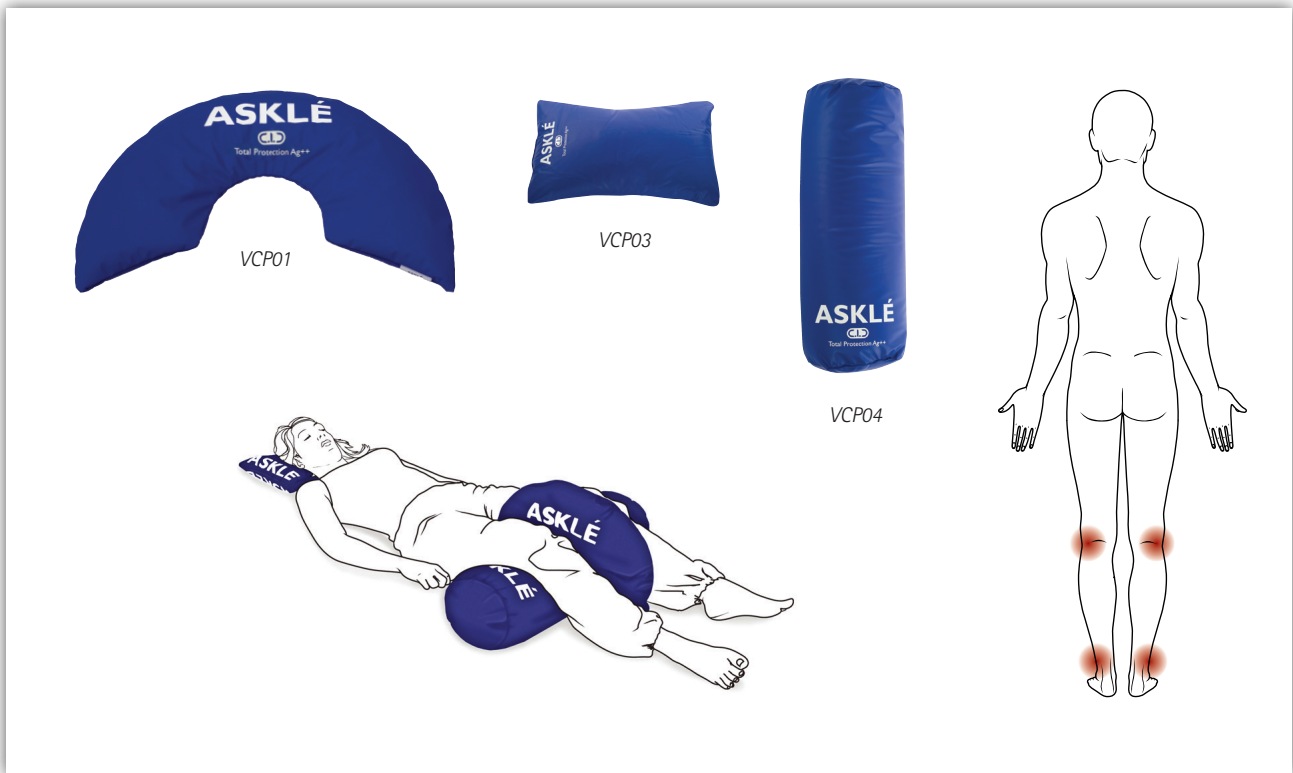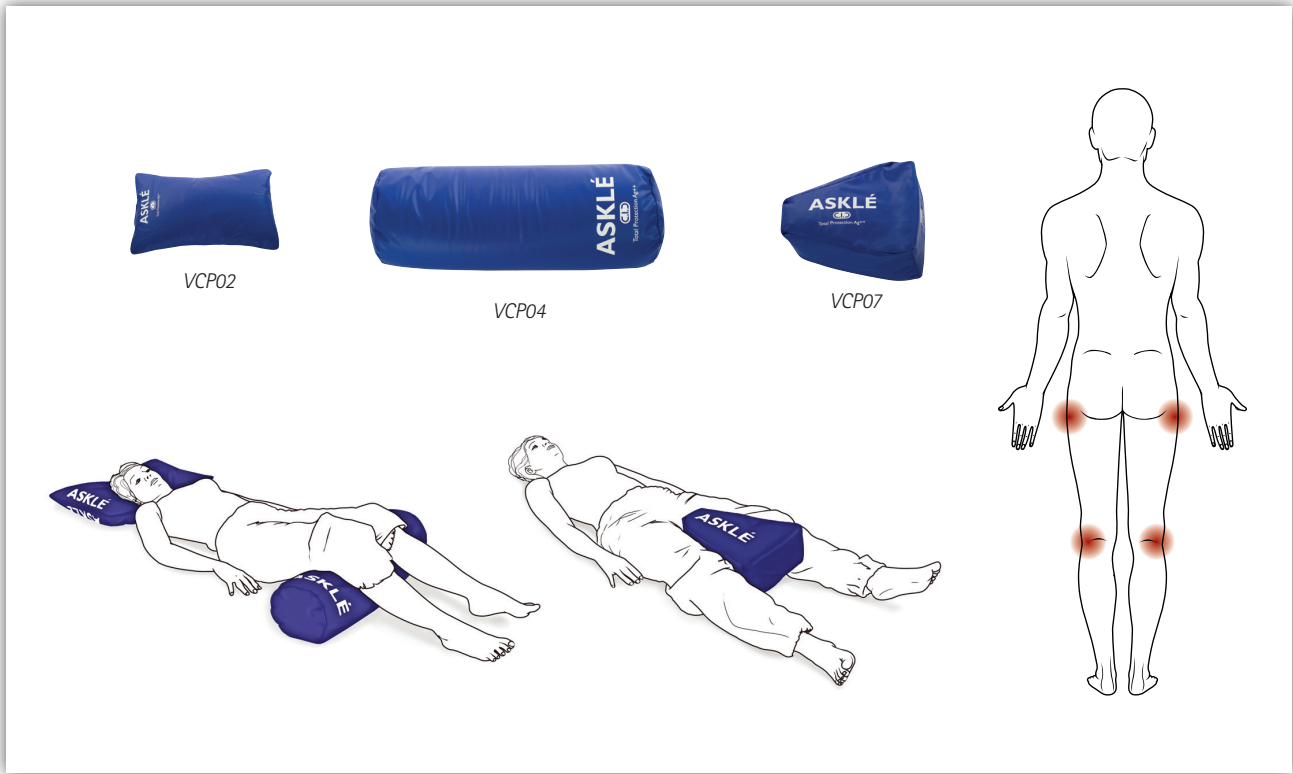



VCP09




VCP03



VCP02



VCP04

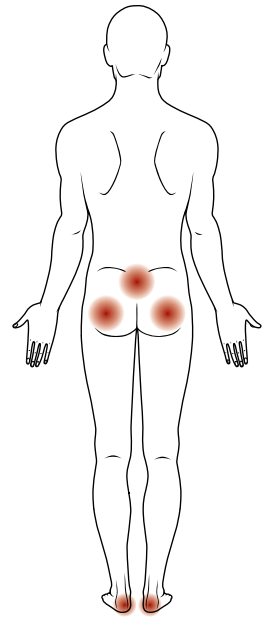

#### **VCP01 Nakkestøttepude / abduktions halvcirkel**

Abduktions halvcirklen kan anvendes sammen med cylinderpuden, for at tilgodese knæ flexion og hindre adduktion. Nakkestøttepuden/abduktions halvcirkelen kan også anvendes som lejringspude for en hemiplegisk arm med mere.

#### **VCP02 Lille hovedpude**

Denne hovedpude kan også anvendes til at lægge under maven i maveliggende, eller under læggene, når man lejrer i Semi-Fowler liggestilling.

#### **VCP03 Stor hovedpude**

Den store hovedpude anvendes til rygstøtte, når man lejrer i Semi-Fowler liggestilling. Derudover giver den store hovedpude en øget komfort, da den giver en utrolig god støtte til nakken.

#### **VCP04 Cylinderpude**

Knæ og hase pude, som er uundværlig, når der skal lejres i Semi-Fowler liggestilling og ved flexion af knæet. Puden kan også anvendes ved sidelejring, som stopper i ryggen.

#### **VCP05 Læg / hælepude**

Puden anvendes til at elevere hælen fra madrassen ved behandling af tryksår. Puden kan også anvendes, hvor hele underbenet eleveres for at undgå ødem-dannelser med mere.

#### **VCP06 Arm / håndpude**

Puden kan anvendes til at lejre en hemiplegisk arm. Kan også anvendes til brugere med nedsat tonus.

#### **VCP07 Abduktionskile**

Anvendes for at sikre hofte abduktion, og for at mindske risikoen ved hofte dislokation, når en bruger vendes fra ryg til sidelejring.

#### **VCP08 Sidelejringspude "Søhesten"**

Den komplette sidelejringspude. Alle de nødvendige komponenter for en god sidelejring er samlet i en og samme pude.

Puden er mærket, således at man ikke er i tvivl om, hvad der er op og ned.

Puden fås i 2 størrelser afhængig af brugerens højde.

#### **VCP09 Kropsstøttepude (rede med flex arme)**

På grund af sin U-form er denne pude særlig velegnet til at give brugeren en god kropsstøtte.

Puden kan enten placeres bag, foran eller rundt om brugeren. Kropsstøttepuden er en af grundstenene i Semi-Fowler lejringsstilling.

 Vær opmærksom på brugers diagnose og stadie i sygdommen.

## Under brug

Puderne kan anvendes med eller uden betræk for komfortenssyn.

⚠ Undersøg jævnligt lejringspuderne for at sikre at de ikke er beskadigede eller defekte.

## Vedligeholdelse og rengøring

Daglige rengøringer kan udføres med desinfektions midler og vand samt en ren og tør klud. Alle ikke-phenolholdige midler kan bruges.

Lejringspuderne kan evt. desinficeres med Virkon fra KeboMed hvis der er spor af blod, urin eller andre kropsvæsker.

- ⚠ Kan ikke maskinvaskes eller rengøres ved kemisk rensning.
- ⚠ Kan ikke stryges.
- ⚠ Brug ikke pulverformede skuremidler, opløsningsmidler eller ridsende og skarpe genstande direkte på betrækket.
- ⚠ Skal tørres ved nedsat varme.
- ⚠ Må ikke tørretumbles.
- ⚠ Klorholdige midler skal undgås (1 volumen klor i 200 volumen vand).
- ⚠ Der skal foretages en visuel kontrol af puderne en til flere gange om året for at sikre, at de er i god stand. Hvis der konstateres en forandring af puderne eller af sammenføjningerne, skal produktet fjernes og bortskaffes.
- ⚠ Puderne må ikke opbevares i direkte sollys eller udsættes for kraftig fugt.

## Garanti

Garantiperioden for Cobi lejringspuder er 1 år fra købsdato. Fakturaen er "garantibevis".

Produkter, der er blevet anvendt til andre formål end den tilsigtede anvendelse; eller som har været genstand for forsømmelighed, misbrug, forkert opbevaring eller håndtering, fejlbetjening, uautoriserede modifikationer eller skader uden normal slitage, som er afgjort af Cobi Rehab, er ikke omfattet af denne garanti.

Enhver uautoriseret reparation af produktet / del af produktet, samt manipulation med nogle af komponenterne, vil ugyldiggøre garantien.



### PRODUCENT

AskléSanté  
200 rue Charles Tellier  
F-30034 Nîmes cedex 1  
Frankrig

### FORHANDLER

Cobi Rehab  
Fuglebækvej 1D  
DK-2770 Kastrup  
Danmark  
Tlf.: +45 70 25 25 22  
Fax: +45 70 25 25 44  
[www.cobi.dk](http://www.cobi.dk)

09/2014/JP



Fuglebækvej 1D  
DK-2770 Kastrup · Danmark

Tlf.: +45 7025 2522 · Fax: +45 7025 2544  
cobi@cobi.dk · www.cobi.dk