

# Zitzi™ CloZitt

## Størrelser:

Zitzi CloZitt tilbydes i 4 størrelser.  
Justeringer kan udføres, i takt med at barnet vokser.  
Max brugervægt: 130 kg.

## Grundkonfiguration:

- Farve rør: Hvid
- Farve betræk: Blå
- Sædedel inkl. blødt betræk
- Ryggdel inkl. blødt betræk
- Justerbar ryghøjde
- Vinkeljustérbar ryglæn
- Vinkling af hele sædeenheden
- Stel med låsbare hjul

## Tilbehør:

- \* Hoftebælte
- \* Brystbælte
- \* H-sele
- \* Sternumstøtte
- \* Armlæn
- \* Hovedstøtte
- \* Fodstøtte
- \* Ankelbespænding
- \* Bord med kant
- \* Stænkskjold
- \* Drivhjul



## Indholdsfortegnelse:

Punkt

- |   |  |
|---|--|
| 2:1 Indledning / Fakta                    | 4:3 Montering, armlæn  |
| 2:2 Montering af mellemrør/sædedel        | 4:4 Breddejustering, armlæn                                      |
| 2:3 Tippepedal for løft af forreste hjul  | 4:5 Dybdejustering, armlæn                                       |
| 2:4 Låsning af hjul                       | 4:6 Montering, justering af hoftebælte                           |
| 3:1 Aftagelig kørebøjle                   | 5:1 Montering, justering af Sternumstøtte/<br>Krydssele / H-sele |
| 3:2 Justering af ryghøjde                 | 5:2 Montering af bord  |
| 3:3 Tilt af sædeenhed                     | 6:1 Justerbar Ryg  |
| 3:4 Vinkeljustering af ryg                | 6:2 Vedligeholdelse & vaskeanvisning                             |
| 3:5 Montering af fodstøtte                | 6:3 Demontering/ skrotning                                       |
| 3:6 Fodstøtte, vinkeljustering ved knæled | 6:4 Sammenfatning / efterkontrol                                 |
| 3:7 Fodstøtte, vinkeljustering ved fodled | 6:5 Kombinationer  |
| 3:8 Højdejustering, fodplade              | 6:6 Reservedele  |
| 3:9 Dybdejustering af fodplade            | 6:7 Mærkning   |
| 4:1 Lægstøtte                             | 6:8 Garanti  |
| 4:2 Montering, justering hovedstøtte      |  |

Tilvare: Anatomic SITT AB  
Box 6137, SE-600 06 NORRKÖPING  
SWEDEN - Phone. +46 (0)11-16 18 00



Svensk kvalitet & design.

Søndersøvej 2-6, 8240 RISSKOV, Tel. 86- 17 01 74, Fax: 86- 17 01 75

[www.anatomiccsitt.com](http://www.anatomiccsitt.com)




### 2:1) Indledning & fakta

For at I skal kunne udnytte Zitzi CloZitt til fulde, er det vigtigt at I læser denne brugervejledning igennem. Dette gælder alle personer, som er i kontakt med brugeren. Tilpasning/afprøvning af Zitzi CloZitt skal udføres af Fysioterapeut eller anden faglig kompetent person.

- \* Anvend medfølgende unbrakonøgle for at udføre justeringer.
- \* Brugeren skal ikke sidde i stolen, når justeringerne udføres.
- \* For at gøre tilpasningen så let som mulig, er det en god idé at gennemtænke hvilket tilbehør, som skal monteres. Den mest hensigtsmæssige rækkefølge kan variere, men et godt udgangspunkt er, oppe fra og ned:

- 1) Hovedstøttefæste
- 2) Øvre beslag for krydssele
- 3) Øvre beslag gaspatron
- 4) Beslag for armlæn
- 5) Nedre beslag for H-sele

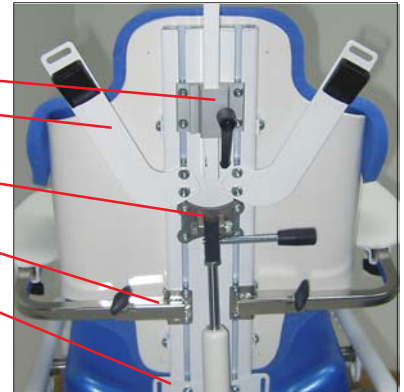

**Tips! Montér altid det tilbehør, som skal sidde længst nede på ryggrammen først.**

Hvis du skal eftermontere noget tilbehør, skal du afmontere endestoppen på toppen af rygstammen og placere dit tilbehør i korrekt rækkefølge.

### 2:2) Montering af mellemrør/Sæde:

Sædeenheden kan monteres i forskellige niveauer:

#### Montering af bagerste mellemrør:

Det bagerste mellemrør kan monteres i 6 forskellige højdeindstillinger. Denne justering kan udføres af to omgange:


- \* Hvis sædeenhedens tiltnings skal ændres.
- \* Hvis fastgørelsesbøjlen til rygstammen kommer i karambolage med en anden fastgørelsesbøjle på rygstammen.

#### Montering af "sædeenheden":

Sædeenheden kan monteres i 2 forskellige højdeindstillinger.

#### Ved montering af mellemrøret, bør man tænke på:

- \* Mellemrøret /sædedel skal drejes med 25 NM.
- \* Gør sådan her, for at få venstre og højre rammedel vinkelrette:
- \* Tag skruerne ud, se pos. A, billede 2.
- \* Stil enheden på et plant gulv og påfør belastning på begge rammedele, så at alle hjul har kontakt med gulvet. (ved eksempelvis at sidde på rammen.)
- \* Drej skruerne ved pos. A ud, billede 2 med 25 NM i udgangsposition.

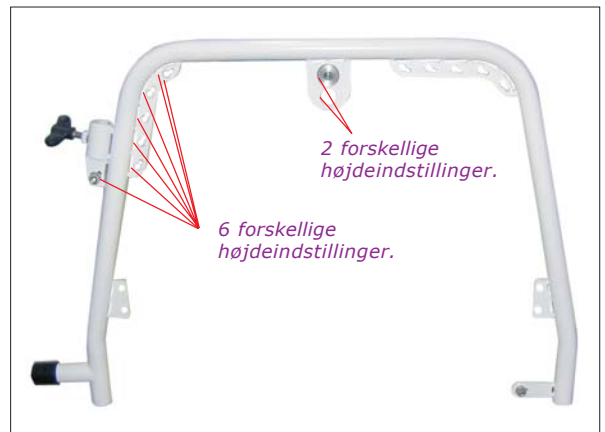


### 2:3) Tippepedal:

CloZitt er udstyret med tippepedal for løft af forreste hjul.

- \* For at løfte forreste hjul over f.eks. dørtrin:
- Træd på tippepedalen med foden og træk samtidig kørebøjlen mod dig.

### 2:4) Låsning af hjul:

- \* Tryk ned på bremsesystemet med foden for at låse hjulene. (Se billede.)
- Vip bremsesystemet op, for at frigøre hjulet.

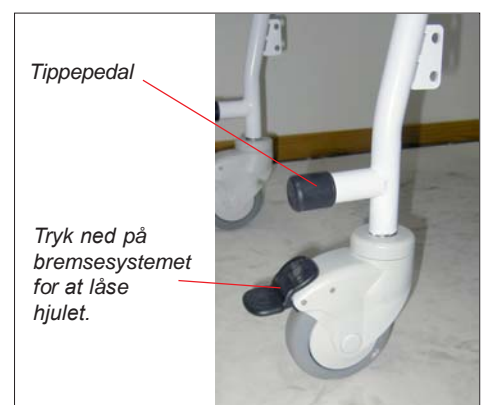

**3:1) Aftagelig kørebøjle:**

Ved behov kan kørebøjlen afmonteres.

- \* Løsn skrue, se pos. A.
- \* Træk kørebøjlen lige op. Kørebøjlen påvirker Zitti CloZitts stabilitet. Den bør derfor ikke fjernes, med mindre den er i vejen, eller ved transport.

Pos. A

**3:2) Justering, ryghøjde:**


- \* Løsn unbrako skrue, se pos. A.
- \* Justér til korrekt højde.
- \* Spænd skrue.

**OBSERVER!**  
Er hovedet over ryglænet, SKAL der altid anvendes hovedstøtte.

Pos. A

**3:3) Tilt af sædeenhed:**


Aktivér gaspatronen ved at løfte eller trykke ned på håndtaget, se pos. A. Justér til ønskede vinkel og slip derefter håndtaget.

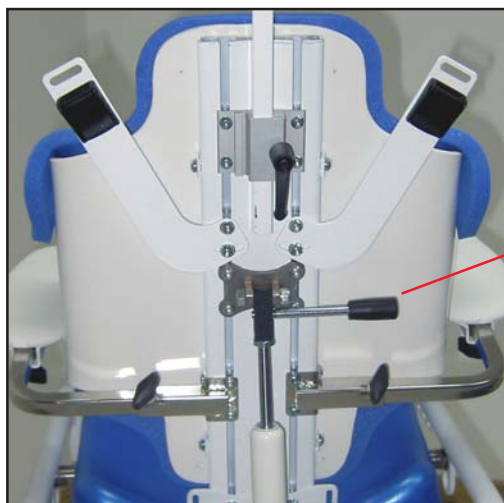

Pos. A

**3:4) Vinkeljustering af ryglænet:**

- \* Løsn unbrako skrue, se pos. A.
- \* Justér til ønskede ryg vinkel.
- \* Spænd skrue.

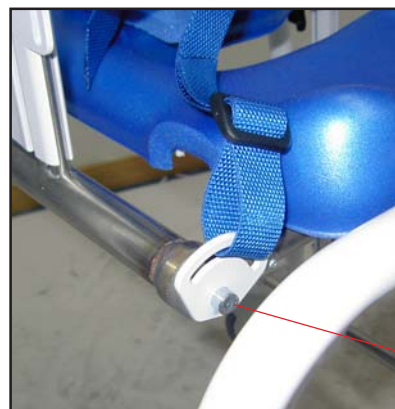

Pos. A

**3:5) Montering af fodstøtte:**


\* Montering af fodstøtten, se billede. Løsn vingskrue, se pos. A.

**3:6) Justering af vinkel ved knæled:**

- \* Løsn skruerne, se pos. B.
- \* Justér til ønskede vinkel.
- \* Tag skrue ud.

Pos. B

Pos. A

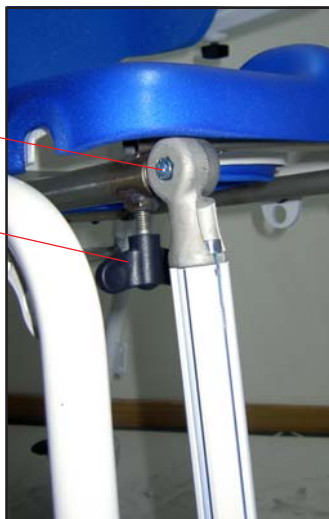**3:7) Justering af vinkel ved ankel:**

Kan Justeres på to måder:

- 1 - Justér vinklen ved at justere skruen, se pos. A.
- 2 - Flyt nedre fastgørelse til det "forreste" hul, se pos. B.

**3:8) Højdejustering af fodplade:**

- \* Løsn skrue, se pos. C.
- \* Justér til ønskede højde.
- \* Spænd skrue.

**3:9) Dybdejustering af fodplade:**

- \* Løsn skruen på begge sider, se pos. D.
- \* Justér til ønskede dybde.
- \* Spænd skruen.




Pos. A

Pos. B

Pos. C

Pos. D

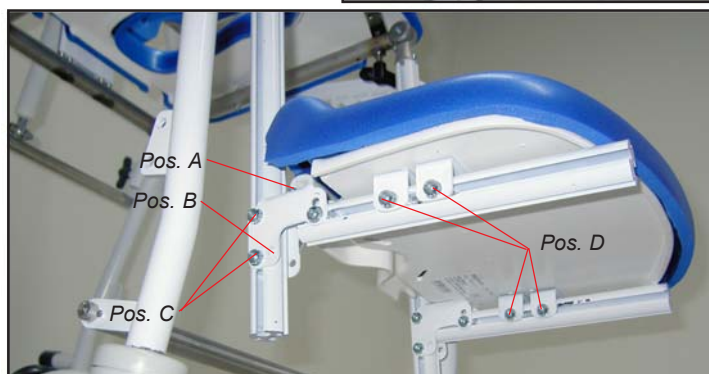

**4:1) Montering / justering af hovedstøtte:**

- \* Fjern plastendeprofilen fra rygprofilen.
- \* Montér hovedstøttebeslaget på rygprofilen, se billede.
- \* Løsn skuerne, se pos. A. løsn så meget, så det er muligt at justere med hånden.
- \* Placér brugeren i sædet og justér til ønsket position.
- \* Genmontér plastendeprofilen.

Hovedstøtten er enkel at afmonteret:

- \* Løsn vingeskruen og afmontér hovedstøtten.

Pos. A - Justering i højde


Pos. B - Justering i bredde

**4:1) Montering / justering af Hovedstøtte:**

- \* Fjern plastendeprofilen fra rygprofilen.
- \* Montér hovedstøttebeslaget på rygprofilen, se billede.
- \* Løsn skuerne, se pos. A. løsn så meget, så det er muligt at justere med hånden.
- \* Placér brugeren i sædet og justér til ønsket position.
- \* Genmontér plastendeprofilen.

Hovedstøtten er enkel at afmonteret:

- \* Løsn vingeskruen og afmontér hovedstøtten.

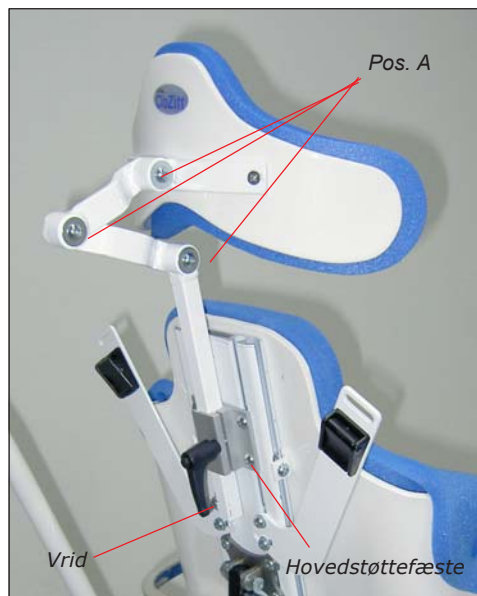**4:2) Montering, armlæn:**

Armlænene skal monteres på rygprofilen.


- \* Montér armlænsbeslagt, se billede
- \* Justere til ønsket højde.
- \* Spænd skuerne, se pos. A.

**4:3) Justering af armlænsbredde:**

- \* Løsn vingeskruen, se pos. B.
- \* Justere til den ønskede bredde.
- \* Spænd vingeskruen.

**4:4) Dybdejustering, armlæn:**

- \* Løsn unbrakoskruen, se pos. C.
- \* Justér til ønskede position.
- \* Spænd umbraccoskruen.

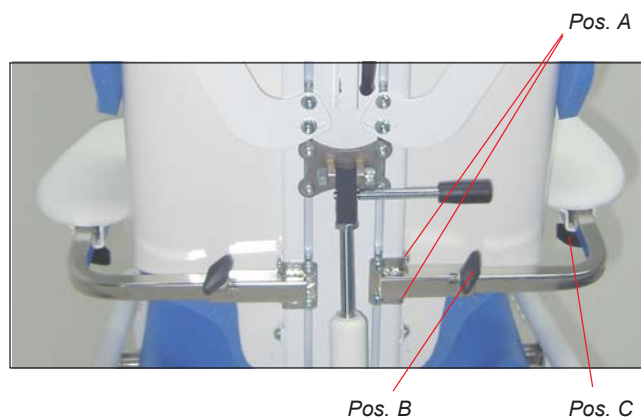**4:5) Montering / justering af hoftebælte:**

Montering:


- \* Montér selen i respektive slisser, (to på hver side).
- OBS! selen til hoftebæltet skal monteres i de nedre slidser, se billede 1 & 2.

Justering:

- \* Træk selen ud på begge sider af spændet for at få det centreret. (Se billede)
- \* Justere bæltepuderne for at give optimal komfort.
- \* Såfremt remmene er for lange, klippes det overflødige af og enderne brændes.



Montering med  
Tri-glide  
sænde.

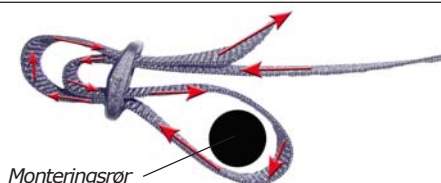

**5:1) Montering / Justering af Krydssele , sternumstøtte og H-sele:****Montering:****Øvrebeslag:**

- \* Fjern plastendeprofilen fra rygstammen.
- \* Afmontér hovedstøttebeslag.
- \* Montér øvre fladjern til seler, se billede 1.
- \* Åben spændet, se pos. B, træk selen igennem og lås spændet.

**Nedre beslag til H-sele (Billede 2):**

Nedre beslag skal monteres, se billede 2.  
Selen skal også igennem samme beslag som hoftebæltet.  
Lås selen ved hjælp af "Tri-glide" spændet, se billede 4  
Justere monteringsbeslaget efter behov.

**Nedre beslag til Krydssele, Sternumstøtte (Billede 3):**




Nedre beslag skal monteres, se billede 3.  
Selen skal igennem samme beslag som hoftebæltet.  
Lås bandet ved hjælp af "Tri-glide" spændet, se billede 4

**Justering:**

- Placér brugeren i sædet og løsn umbracomskruen, se pos. C & D, billede 1.
- Justér armene, således at trækretningen for de øvre fixpinkter er i samme højde som skulderpartiet.
- \* Løsn skruen, se pos. C, billede 1.
  - \* Justér til ønskede bredde ved at vinkle fladjernet til højre eller venstre. (Der bør være tilstrækkelig plads ved halsen.)
  - \* Lås D- skruen.
  - \* Justér bæltepuderne for at give optimal komfort.

**Efterkontrol:**

- \* Tjek at der er tilstrækkelig friplads ved halsen.
- \* Trykket på selen.
- \* placeringen af bæltepuderne.

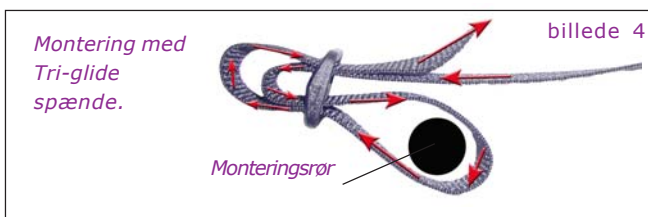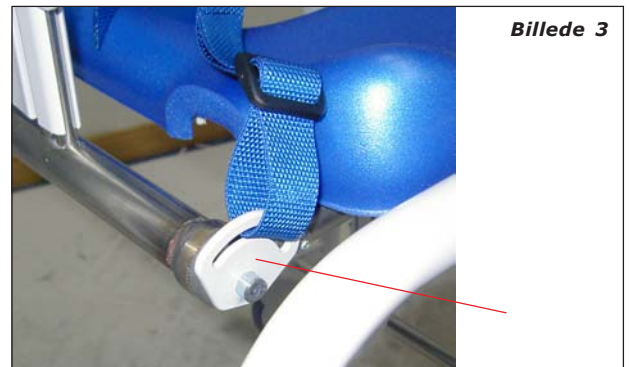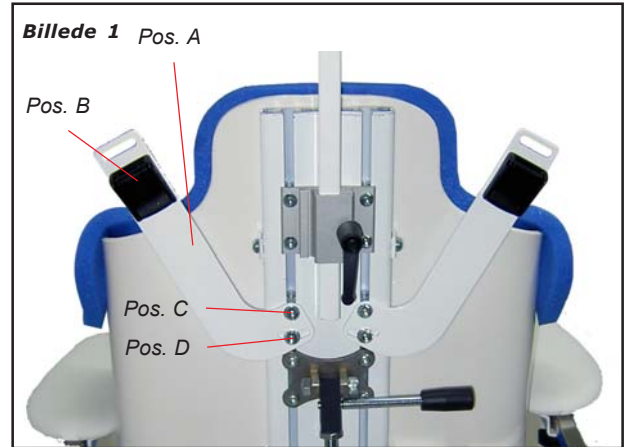**5:2) Montering af bord:**

- 1) Læg bordet på armlænsbolstringerne.
- 2) Vrid monteringsbeslaget under armlænsbolstringen på plads, se billede. Beslaget skal vrides til det er indenfor undersiden af armlænsbolstringen.



**6:1) Justerbar ryg****Justering i højde:**

- 1) Løsn skuerne (se billede).
- 2) Justere til ønskede bredde
- 3) Spænd skruerne.

**Justering i bredde:**

- 1) Løsn skuerne (se billede).
- 2) Justere til ønskede bredde
- 3) Spænd skruerne.

**6:2) Vedligeholdelse & vaskeanvisning:**

- \* Efter bad, afmonter sæde- & rygbetrækket for at det kan tørre.
- \* Puder & bæltepuder: 40o, fin vask. Må ikke tørretumbles.
- \* Plast & metaldele: Tør plast og metaldele af med en fugtig klud. Vær opmærksom på stellet reservedele og den almene kondition. Udskift dele efter behov. Ved rengøring af stel anvendes almindelige desinfektionsmidler. (miljøvenligt alternativ) Farve kod: RAL9010

**6:3) Afmontering/ skrotning**

En defekt del eller produkt afmonteres og skrottes.

Delene skal sorteres efter materiale type.

**Metal** = ramme, mellemrør, rør, sæde- & rygramme, kørebøjle m.m.

**Hård plast** = sæde- & rygdæl, bord, potte m.m

**Brændbart** = betræk, polstring, hoftebælte, krydssele m.m.

**6:4) Sammenfattning / efterkontrol:**

- \* Fortsæt kontinuerligt med at kontrollere diverse dele.
- \* Kontrollér regelmæssigt at alle skruer er ordentligt spændte.
- \* Kontrollér regelmæssigt slitage på sler og bæltepuder.
- \* Såfremt seler eller bæltepuder ser slitte ud, bør disse skiftes.
- \* Sørg for at sædet ikke er vinklet for langt frem, når barnet sidder i sædet.
- \* Max brugervægt: 130 kg.

**6:5) Kombinationer:**

Zitzi CloZitt er et CE-mærket produkt, som kan kombineres med alt tilbehør, som beskrives i denne brugsvejledning.

**6:6) Reservdele:**

Der må kun benyttes reservedele til Zitzi CloZitt, som er leveret af Anatomic SITT AB

**6:7) Mærkning:**

Zitzi CloZitt med tilbehør som beskrives i denne vejledning er et CE mærket produkt. Et unikt serienummer er placeret på det bagerste mellemrør. Serienumret skal angives ved al korrespondence vedrørende produktet.

**6:8) Garanti:**

2 års reklamationsret.

**Produceret af:**  
Anatomic SITT AB  
Box 6137  
SE- 600 06 NORRKÖPING  
SVERIGE  
Tfn. +46(0) 11-16 18 00

