

Glidelagen

Brugsanvisning

Læs venligst brugsanvisningen igennem før brug af dette produkt påbegyndes

Formål

Glidelaget gør det muligt at flytte en bruger ved at mindske friktionen mellem bruger og underlag, og derved mindske arbejdsbelastningen for plejepersonalet.

Glidelaget er ikke beregnet til løft og forflytning fra liggende til siddende stilling. Ved sådanne behov anbefaler vi løft med løftesejl.

Anvendelse til alm. forflytning

Start med at folde 1 eller 2 lidelagner sammen i lange folder, til hele længden er sammenfoldet. Anbring det

sammenfoldede glidelagen under brugerens læg, ned mod madrassen. Hjælperen skal herefter tage fat i den nederste del af glidelaget med armene placeret så tæt på brugeren som muligt, og den første fold trækkes samtidig op under brugeren. Gentag bevægelsen til Glidelaget ligger under hele brugeren.




Anvendelse til flytning af bruger højere op i sengen med én medhjælper

Placér Glidelaget under brugerens hoved og skuldre. Brugeren bøjer benene, og medhjælperen trykker brugerens fødder ned for at få en større friktion. Brugeren selv letter på vægten under bagdelen og "trykker" sig samtidig opad i sengen.

Til denne metode kræves det, at brugeren har en vis styrke/funktion i ben og krop.

Hæv sengens fodende for yderligere at lette forflytningen! Se billede på næste side.

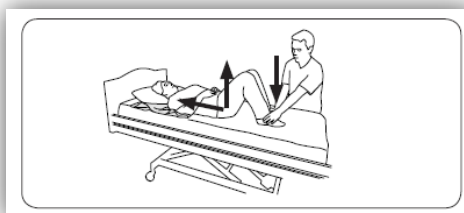


Med 2 hjælpere

Placér Glidelaget fra brugerens hoved og ned til bagdelen, under et trækragen. Medhjælperne placerer sig ud for brugerens skuldre med det ene ben foran det andet og tager fat i hver sin ende af trækragen. Medhjælperne flytter brugeren højere op i sengen ved at foretage en tyngdeoverføring til det bagerste ben.

Proceduren gentages, indtil brugeren ligger i den ønskede position.

Vær opmærksom på ergonomien – undgå at trække med armene! Hæv sengens fodende for yderligere at lette forflytningen!

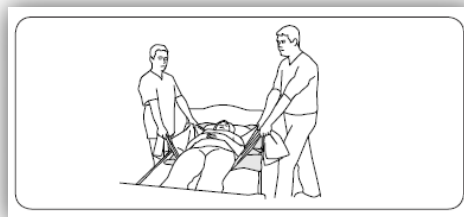

Vedligeholdelse

Rengør glidelaget med danske rengøringsprodukter, som ikke indeholder grove eller ætsende kemikalier. Benyt ikke opløsningsmiddel og klorin til rengøring!



Glidelaget kan vaskes ved max. 65 grader, og tørretumbles ved middel temperatur.

Faaborg Rehab Technic
Smedemestervej 9, DK-5600 Faaborg.
Tlf. + 45 70 20 55 53

E-mail: fr@faaborg-rehab.dk www.faaborg-rehab.dk