


Brugsanvisning badebænk med plastlameller



Indstilling:

Indstil badebænkens teleskopben i den korrekte højde inden den anvendes
Ved siddeposition skal brugerens fødder støtte fladt på gulvet
Ved skrå indstilling af badebænkens for- og bagside - parvis - må forskydningen maks. være 2 huller i teleskopbenene

- 1) Træk teleskopbenets låseclips  ud
- 2) Træk/skub teleskopbenet, indtil den ønskede højde nås
- 3) Sæt låseclipsen i teleskopbenet igen - sørg for at ALLE låseclips er forsvarligt isat



Montering af ryglæn: (ikke til XXL model)

- 1) Læg badebænken på siden
- 2) Placér ryglænet således, at de to huller glider ind over de to bolte, som er monteret på undersiden af sædet
- 3) Ryglænet fastgøres forsvarligt med de 2 medfølgende låseskruer



Vedligeholdelse:

Kontrollér jævnligt ryglæns låseskruerne under sædet - efterspænd hvis nødvendigt samt efterse regelmæssigt sæde, låseclips, teleskopben og dupsko for skader - udskift hvis nødvendigt

Rengøring kan foretages med alle gængse- dog ikke ætsende rengøringsmidler

Maks. belastning: XL =150 kg. og XXL = 250 kg.