

Brugsanvisning Ashby Easy Fit Toiletforhøjer



Montering:

- 1) Løft det eksisterende sæde, og læg toiletforhøjerens ned på toiletkummen - læg den forreste bøjede kant op mod forsiden af toiletkummen
- 2) Drej begge justeringsskruer i urets retning, indtil gummistødpuden berører toiletkummen - sørg for, at sædet sidder stramt til
- 3) Før hvert brug, kontrolleres om sædet sidder ordentligt fast

Maks. brugervægt 190 kg.

Rengøring:

Kan foretages med sæbevand samt alle gængse- dog ikke ætsende og slibende rengøringsmidler