

## Brugsanvisning Ashby Toiletforhøjer



### Montering:

- 1) Skru de tre knopper under sædet ud, og vend fastgøringsbeslaget - Bemærk: Beslag for 5 cm. er allerede korrekt monteret
- 2) Løft det eksisterende sæde, og læg det hævede toilet-sæde på toilettet
- 3) Justér beslagene for at opnå en stram pasning til toppen af toilettet - pas på med ikke at stramme for meget
- 4) Før hvert brug, kontrolleres om sædet sidder ordentligt fast

**Maks. brugervægt 190 kg.**

### Rengøring:

Kan foretages med sæbevand samt alle gængse- dog ikke ætsende og slibende rengøringsmidler, eller termisk desinficering ved 85° i et minut