

Brugsanvisning Elbowlift® albueløfter



1. Frigør den brede og let bøjelige strop
2. Placér spidsen af patientens albue over det midterste hul
3. Fastgør velco-stroppen så den sidder godt fast, men uden at den trykker

VIGTIGT:

Albuen tjekkes for trykspor hver 6-8 time, for at tjekke hud-/sårstatus

Sterilisering:

Kan autoklaveres ved 121 grader C

Efterfølgende køles Elbowlift® et par timer til den er helt tør

Vaskeanvisning:

Anvend vaskepose, og husk at velcrobåndene skal lukkes

Maskinvask ved maks. 60 grader C med efterfølgende lufttørring