

MEMOmessenger

Varenr :402570



ABILIA

GEWA AB | FALCK IGEL

Indhold

MEMOmessenger	5
Beskrivelse af produktet MEMOmessenger.....	5
MEMObase består af:	5
Justering af kontrast på MEMObase	6
Ind- og udgange på bagsiden af MEMObase.....	6
MEMOgo består af:.....	7
Klistermærker	7
Hørepropper	7
Halssnor	7
Knapper på MEMOgo	7
Opladning af MEMOgo	8
At sætte MEMOgo i MEMObase	8
Før man tager tidsdisplayet i brug.....	8
Grundlæggende funktioner	8
MEMObase uden at MEMOgo er docket	8
MEMOgo når den ikke er docket.....	8
MEMObase med MEMOgo docket	8
Tænd/sluk	9
Lav batterispænding	9
Lysdiode	9
Kvitteringslyde	9
Adoption (sammenknytning mellem MEMOgo og MEMObase)	10
Backup	10
Funktioner i MEMOgo	10
Oplæsning af tid	10
Beskeder	11
Varslingsfunktion	12
Vækning	12
Oplæsning af tidligere beskeder	12
Oplæsning af kommende beskeder	13
Huskeseddel	13
Volumenindstilling.....	14
Funktioner i MEMObase.....	15
Tidsfunktion	15
Månesymbol, døgninformation og datoinformation	15
Digitalt ur i kombination med engelsk sprog	15
Markering af beskeder.....	15
Nedtælling til næste besked – elektronisk timeglas	16
Ingen tidsinformation	16
Programmering af MEMOmessenger	16
Menu – Beskeder.....	16
Indstil enkelt, ugentlig, månedlig og årlig besked.....	17
Tjek/ændre beskeder	20

Afslut	21
Menu - Opsætning.....	21
Indstil tid	21
Indstilling af tiden direkte på MEMOgo.....	22
Displayvisning	23
Tidspunkt på dagen.....	24
Forvarsling	25
Huskersedler	25
Avanceret	26
Sprog.....	26
Adoptér MEMOgo	26
Tilbagefør backup	26
Kalibrér display.....	27
Fabriksindstillinger	27
Afslut	28
Rengøring.....	29
Artikelnummer og tilbehør.....	29
Tekniske data.....	30
Sikkerhed og ansvar	30
Miljø	31

MEMOmessenger

MEMOmessenger er et talende ur, som hjælper dig med at huske. Alarm med besked gives i form af lydssignal og indlæst talebesked.

MEMOmessenger er udviklet i samarbejde med brugere og fagpersoner inden for områderne demens, udviklingshæmning, erhvervet hjerneskade og psykiatri i Norge og Sverige. Udviklingen af MEMOmessenger er støttet af Norges Forskningsråd. MEMOmessenger kan bidrage til at gøre hverdagen lettere for personer med kognitiv nedsættelse. Er det en udfordring at planlægge – og strukturere – sin hverdag, eller har man hukommelsesvanskeligheder, kan man få meget hjælp af MEMOmessenger.

MEMOmessenger leveres med

MEMObase

MEMOgo

Indstillingspen

Bæltetaske

Hørepropper (til diskrete beskeder)

Klistermærker til markering af knapperne på MEMOgo

Snor til at bære MEMOgo om halsen

Strømforsyning

Brugervejledning

Beskrivelse af produktet MEMOmessenger

MEMOmessenger består af en stationær enhed, *MEMObase*, og en bærbar enhed *MEMOgo*. MEMOgo kan stå i MEMObase hele tiden, eller tages med.

MEMObase består af:

- Touchscreen, som kan betjenes med indstillingspen eller med en finger
- indstillingspen til at betjene din touchscreen
- plads til MEMOgo



Metalpladen fungerer som fod ved placering af ved MEMObase på et bord eller som ophæng på væggen.


Justering af kontrast på MEMObase

MEMObase bliver ved produktion indstillet til optimal kontrast. Over tid og/eller ved store temperatursvingninger kan det være nødvendigt at justere kontrasten. Det gøres ved at skrue på indstillingskruen bag på MEMObase.

Justering af kontrast



Ind- og udgange på bagsiden af MEMObase

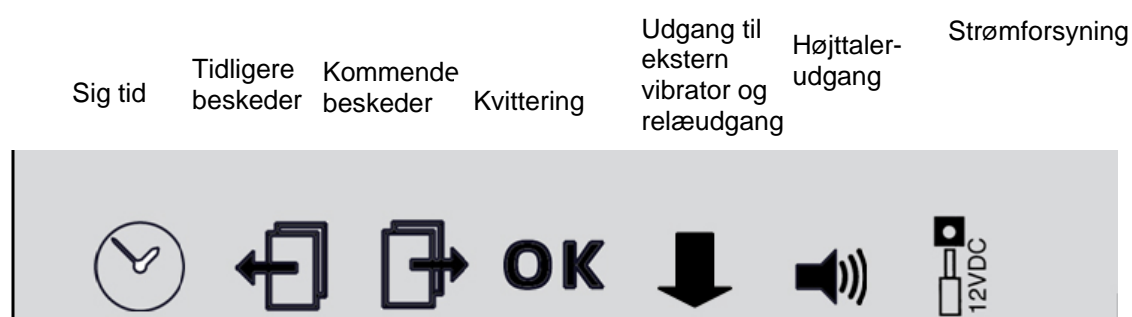

MEMOgo består af:

knapper
udgang til hørepropper
indgang til strømforsyning
kontakt til docking i MEMObase

Klistermærker

De medfølgende klistermærker kan bruges til at dække knapper, som ikke er i brug, så de ikke forvirrer. De kan også bruges til alternativ mærkning (man foretrækker/forstår bedst uens symboler), og de kan bruges til at orientere MEMOgo i stående position i stedet for liggende.

Hørepropper

Hørepropperne bruges, når man ønsker diskrete beskeder. Når hørepropperne er tilkoblet, vil beskeden kun kunne høres i dem – ikke i højttaleren. Når man indsætter hørepropperne, kan man også afbryde MEMOgo (MEMOgo kan også afbrydes ved at holde begge volumenknapper samtidig i to sekunder – uddybende beskrivelse findes andetsteds i vejledningen).

Halssnor

Halssnoren fastgøres i toppen af MEMOgo, hvis man ønsker at bære den om halsen i stedet for i tasken.

Knapper på MEMOgo




* Huskesedler indspilles direkte på MEMOgo (som på en diktafon), og er ikke knyttet til et bestemt tidspunkt, som det er tilfældet for beskeder indspillet via MEMObase.

Opladning af MEMOgo

MEMOgo har et opladeligt batteri og oplades normalt ved at lægge den (docke den) i MEMObase. Den kan også oplades med strømforsyningen, som følger med, og som normalt er tilsluttet et stik i MEMObase.

At sætte MEMOgo i MEMObase

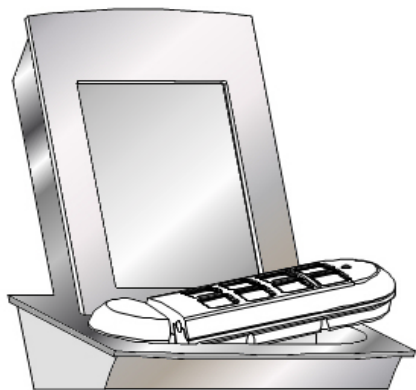

Skub MEMOgo fra højre mod venstre i MEMObases dockingstation (se billede).

OBS! Sæt ikke MEMOgo lodret ned i MEMObase. Dette kan skade stikket på MEMObase.

Et "pling" bekræfter, at MEMOgo er rigtigt placeret.

En gul lampe på MEMOgo indikerer,

at opladningen er begyndt.

Før man tager tidsdisplayet i brug

MEMOmessenger skal være opladet eller tilkoblet strøm for at fungere.

Grundlæggende funktioner

MEMObase uden at MEMOgo er docket

Viser kun tidsdisplay. Ingen andre funktioner er tilgængelige, når MEMOgo ikke er docket.

MEMOgo når den ikke er docket

Fungerer som ur og beskedgiver.

Beskederne høres i højttaler i MEMOgo, når hørepropperne ikke er koblet til.

Beskederne høres kun i hørepropperne, når disse er koblet til.

MEMObase med MEMOgo docket

Adgang til Beskedmenuen og Indstillingsmenuen.

Alle funktioner, som er tilgængelige i MEMOgo, når den ikke er docket, er også tilgængelige, når den er docket.

Beskeder læses op i højttaler på MEMObase og i ekstern højttaler, hvis en sådan er koblet til.

Ved tidspunktet for en besked aktiveres vibratorudgangen på MEMObase, men ikke på MEMOgo.
Eksterne afbryderindgange på MEMObase får samme funktion som de tilhørende afbrydere på MEMOgo.
Der tages backup af MEMOgo, som gemmes i MEMObase
Synkronisering af urene mellem enhederne sker hver gang, MEMOgo dockes, og hver gang der bliver taget backup.

Tænd/sluk

MEMObase slukkes ved at tage stikkontakten ud.

MEMOgo slukkes ved at trykke på tasterne *Volumen op* og *Volumen ned* samtidig i 2 sekunder, både i docket og i ikke docket tilstand. MEMOgo tændes igen ved et tryk på en vilkårlig tast på MEMOgo.

Hvis MEMOgo dockes i slukket tilstand eller slukkes, mens den er docket, kommer teksten "MEMOgo er slukket" på displayet (sammen med tidsdisplayet).

Lav batterispænding

Når der er 10 % restkapacitet (eller mindre) i batteriene, siger MEMOmessenger "*MEMOgo skal lades op*" hver time.

Lysdiode

MEMOgo docket:

Oplader:	Fast gul
Opladning afsluttet:	Fast grøn

Fælles for docket og ikke docket:

Indspilning af huskeseddel	Blinkende gul
Sletning af huskeseddel:	Blinkende gul

Kvitteringslyde

MEMOgo har følgende kvitteringslyde:

Ding-dong: Ved forhåndsvarsel af beskeder.

Pling: Ved annullering af vækkeur, ved afslutning af oplæsning af tidligere og kommende beskeder og ved afslutning af huskesedler.

Pling-Pling: Når opladerenheden kobles til, eller når MEMOgo dockes.

Adoption (sammenknytning mellem MEMOgo og MEMObase)

Ved leveringen er MEMOgo adopteret af sin MEMObase. Det betyder, at alle beskeder, som gemmes i MEMOgo, også overføres til MEMObase (backup).

Det er muligt for andre brugere at docke MEMOgo i en fremmed MEMObase, både til opladning og til oplæsning af beskeder. Data vil ikke blive overført til backup, og enheden vil ikke blive linket, medmindre man bevidst vælger det (via "avanceret" i menuen).

Mister man sin MEMOgo og får en ny, vil den kunne adopteres af MEMObase, så alle beskederne, man har gemt, tilbageføres til MEMOgo.

MEMOgo kan være adopteret af flere MEMObaser. Hvis man for har behov for at bruge sin MEMOgo, fx skiftevis hos mor og far, som ikke bor sammen, kan de have hver sin MEMObase, hvor man kan lægge nye beskeder ind. Disse beskeder gemmes i MEMOgo, som overfører dem til den anden MEMObase næste nat, den dockes der.

Backup

Komplet backup af MEMOgo gemmes i MEMObase hver nat kl. 02.00. Er MEMOgo ikke docket på backup-tidspunktet, tages der backup, så snart MEMOgo dockes igen. Samtidig slettes gamle beskeder (dvs. ældre end i går).

Eventuel alarm og andre hændelser, som opstår, mens backup er i gang, prioriteres.

Funktioner i MEMOgo

Oplæsning af tid

Når *urtasten* trykkes ned, læses tiden op. Oplæsning af ugedage, dato, år og tid vil stå i forhold til de indstillinger, der er foretaget i Indstillingsmenuerne.

Eksempel 1:

Når der er valgt tale for alle tidsfunktioner, og der er valgt analogt ur, læses tiden op i følgende formå:

"Klokken er to minutter over halv tre, det er torsdag nå den fjerde juni to tusind og otte"

Eksempel 2:

Når der er valgt tale for alle tidsfunktioner, og der er valgt digitalt ur, læses tiden op i følgende format:

"Klokken er to toogtredive, det er torsdag osv.."

Rækkefølgen i oplæsningen giver mulighed for at afbryde talen efter at have hørt fx klokkeslettet. Trykker man *OK* under oplæsning af tiden, standser oplæsningen straks.

Beskeder

Når tidspunktet for en besked indtræffer, varsler MEMOmessenger på følgende måde:

Display

Når MEMOgo er docket, lyser displayet i max. lysstyrke i et minut, før det går tilbage til den normale indstillede lysstyrke. Ved varsling betyder det, at displayet er tændt i max. lysstyrke i 10 minutter, eller man trykker *OK*.

Vibrator

Når MEMOgo ikke er docket, og vibratorfunktionen er valgt, aktiveres vibratoren for MEMOgo tre gange, før en besked kommer – henholdsvis ti sekunder før, fem sekunder før og et sekund før.

Udgang til vibratorudgang og personsøger

Når MEMOgo er docket, aktiveres vibratorudgangen (12VDC) på MEMObase altid ti sekunder, før beskeden kommer.

Udgang til personsøger (normalt åben), lukkes, mens beskeden afspilles. Pin-konfigurationen er vist i afsnittet "Tekniske data" i slutningen af denne brugervejledning.

OBS! Man må vælge mellem vibrator og personsøger, idet det er samme kontakt.

Lyd

Forvarsel (ding-dong)

Hvis "Forvarsel lyd" er valgt, lyder der et "*Ding-dong*" lydsignal lige før talebeskeden.

Oplæsning af tid

Tiden læses op efter "*Ding-dong*" lydsignalet.

Talebesked

Indspillede talebeskeder aflæses, når oplæsning af tid er færdig. Det er muligt at lægge flere talebeskeder ind på samme tidspunkt. Oplæsning af flere beskeder på samme tidspunkt sker med 5 sekunders interval.

Eksterne højttalere

Har man brug for at få beskeder afspillet i et andet lokale ud over det, hvor MEMOmessenger står, kan man koble eksterne højttalere med indbygget forstærker (PC højttalere) til MEMObase. Ønsker man højttalere i flere lokaler, må man koble udgangen mærket "Line Out" på MEMObase til "Line In" på en forstærker (stereoanlæg). "Line Out" på uret er en stereoudgang til 3,5 mm Jack-stik.

Hvis en besked kommer, mens MEMOmessenger er optaget af andre funktioner (læse tid op, lægge huskesedler ind osv.), vil funktionen blive afbrudt, og beskeden varsles.

Det er ikke muligt at afbryde en besked første gang, den kommer. Ønsker man at standse talen, kan man koble hørepropperne til.

Varslingsfunktion

Vælger man varslingsfunktionen, repeteres varslingen hvert minut op til 10 gange, eller indtil *OK-knappen trykkes ned*. Der varsles på samme måde som ved en besked, bortset fra at oplæsning af tid ikke er med.

Når varslingsfunktionen er slået til, kan man ikke kvittere for en besked første gang, den kommer. Det kan man først de næste gange, beskeden læses op.

Hvis der er flere beskeder med varsling samtidig, kvitteres der for den besked, som aktuelt læses op, ved at trykke OK.

Hvis antallet af talebeskeder overstiger intervallet for varsling på 60 sekunder, afsluttes varslingen af de ældste beskeder, så de nye beskeder får prioritet.

Vækning

Vælges vækkeursfunktionen, repeteres vækningen hvert 3. minut op til 10 gange, eller indtil vækkeuret slås fra ved å trykke *OK og holde knappen nede* i 2 sekunder (varsles med et "*Pling*").

Vækkerursfunktionen virker på samme måde som en besked, bortset fra at oplæsning af tid ikke er med. Den 10. vækning er kraftigere end de foregående.

Oplæsning af tidligere beskeder

Trykker man på tasten *Tidligere beskeder*, læser MEMOmessenger tidligere beskeder op. Oplæsningen begynder med, at der siges "*Tidligere beskeder*". Det er muligt at bladre tilbage til midnat dagen før. Den nyeste besked læses først, og

den ældste sidst. Man kan spole baglæns i beskederne ved at trykke *Tidligere beskeder* inden 5 sekunder, efter at beskeden er læst færdig. Trykker man på tasten, før en besked er læst færdig, afbrydes den, og næste besked læses op (hurtigspoling).

Trykker man *OK* under oplæsning af en besked, standser talen straks.

MEMOmessenger siger ugedag og dato en gang - derefter læses kun tidspunkt i starten af beskederne. Blader man længere tilbage end midnat dagen før, siges der "*I går*" samt ugedag og dato for i går en gang. Derefter læses kun tidspunktet op i starten af beskederne. Når der ikke er flere beskeder, og der trykkes på tasten, siger MEMOmessenger "*Pling*".

Oplæsning af kommende beskeder

Kommende beskeder læses op, når man trykker tasten *Kommende beskeder*. Oplæsningen begynder med, at der siges "Kommende beskeder". Man spoler frem i beskederne ved at trykke *kommende beskeder* inden for 5 sekunder efter, at beskeden er læst færdig. Trykke man på tasten, før en besked er læst færdig, afbrydes beskeden, og næste besked læses op. Trykker man *OK* under oplæsningen af en besked, standser talen straks.

Tidspunktet læses op i starten af hver besked. Udover aktuell dag læses ugedag og dato også op én gang (eksempel: *mandag den tyvende marts, klokken halv to*).

Når det ikke er flere beskeder, og tasten trykkes ned, siger MEMOmessenger "*Pling*".

Huskerseddel

Huskerseddel er, i modsætning til beskeder, ikke knyttet til en bestemt tid.

Det er muligt at indspille huskesedler direkte på MEMOgo, selv om den ikke er docket i MEMObase. Det er valgfrit (fra *indstillingsmenuen*), om MEMOmessenger skal have 1 eller 10 huskesedler. Længden på en huskeseddel er begrænset af den samlede tilbageværende talehukommelse. Har man kun valgt 1 huskeseddel, vil den foregående gamle huskeseddel blive overskrevet af den ny. Er der valgt 10 huskesedler, oevrskrives den 11. huskeseddel af den første.

Indspilning

Ny huskeseddel indspilles ved at holde *mikrofontasten nede* i 2 sekunder. Efter 2 sekunder begynder den gule lysdiode at blinke (medmindre hele hukommelsen er opbrugt), og indspilningen indledes. Lysdioden blinker under indspilningen, så længe tasten holdes nede, eller indtil hele hukommelsen er brugt op. Når hukommelsen er brugt op, siger MEMOgo "Hukommelsen er fuld".

Afspilning af indlæste huskesedler

Trykker man på *højttalertasten*, afspilles indlæste huskesedler. Rækkefølgen er altid nyeste huskeseddel først og ældste huskeseddel sidst. Man bladrer i huskesedlerne ved at trykke på *højttalertasten* senest 5 sekunder, efter at huskesedlen er læst færdig.. Trykker man på tasten, før en huskeseddel er læst færdig, afbrydes oplæsningen, og næste huskeseddel læses op.(hurtigspoling).

Kun indlæste huskesedler afspilles (ikke tid eller nummer på huskesedlen). Når der ikke er flere huskesedler, og man trykker på tasten, siger MEMOmessenger "*Pling*".

Trykker man OK under afspilningen, standser talen straks.

Sletning

Sletning af en huskeseddel sker ved at trykke OK. Sletning vises ved, at den gule lysdiode blinker i 3 sekunder. Der er ingen fortrydefunktion. Talebeskeden "*Beskeden er slettet*" høres, når en huskeseddel slettes.

Trykker man OK i 2 sekunder under afspilning af en huskeseddel, afbrydes afspilningen, og huskesedlen slettes. Trykker man OK i 2 sekunder inden 5 sekunder efter afspilningen af en huskeseddel, slettes beskeden.

Volumenindstilling

Volumenindstilling på MEMOgo sker altid ved at trykke på tasterne *Volumen op* eller *Volumen ned*. Volumen har fem trin, og indstillingerne gemmes. Det er ikke muligt at sætte volumen til nul. Volumenindstilling i docket modus gælder for højttaleren i MEMObase. Når MEMOgo ikke er docket, er volumenindstillingen fælles for højttaleren i MEMOgo og for hørepropper.

Tryk på volumentasterne udløser et "*Pling*" på det lydniveau, man har valgt.

På displayet vises et billede med grafisk fremstilling af volumen ved ændring af volumen i MEMObase. Billedet vises, så længe man stiller på volumenknappen, og i 1 påfølgende sekund.

Funktioner i MEMObase

Tidsfunktion

Tidsdisplayet vises enten analogt eller digitalt, efter eget valg. Når man er inde i en indstillingsmenu, men er inaktiv i et minut, går MEMOmessenger tilbage til tidsdisplayet.

Visningsformat på MEMObase følger formatet i den MEMOgo, som til enhver tid er docket. En bruger, som låner en MEMObase, vil få samme funktioner til rådighed, uanset hvor dockinggen finder sted. Når dockinggen ophører, vælges det visningsformat på MEMObase, som blev konfigureret sammen med den adopterede MEMOgo. Klikker man midt i tidsdisplayet, og MEMOgo er docket, vil tidspunktet blive læst op.

Månesymbol, døgninformation og datoinformation

Månesymbol giver information, om det er nat eller dag. Døgninformation giver information om, hvornår på døgnet det er (morgen, formiddag, eftermiddag, aften og nat). Det er muligt at vælge, om dato og årstal skal præsenteres på displayet.

Digitalt ur i kombination med engelsk sprog

Vælger man digitalt ur med 12-timers format fra indstillingsmenuen, og der også er valgt engelsk sprog, vises AM/PM.

Markering af beskeder

Når MEMOgo er docket, og det analoge ur og *beskedmarkeringer* er valgt i indstillingsmenuene, vil beskeder for de kommende 12 timer vises som en prik i kanten af urskiven.

Trykker man på *beskedmarkering* på displayet, læses den eller de beskeder, som ligger i tidsintervallet til markeringen, op. Beskedmarkeringene opløses efter 30 minutter.

Flere beskeder under samme prik læses op fortløbende efter hinanden. Opplæsningen af en talebesked kan afbrydes ved et nyt tryk – så læses næste besked op. I starten af hver besked læses tidspunktet op.

Nedtælling til næste besked – elektronisk timeglas

Når MEMOgo er docket, vises Timeglas (nedtælling til næste alarm), såfremt funktionen *nedtælling* er valgt fra indstillingsmenuen. Timeglasset vil være synligt fra det tidspunkt, hvor der er 8 timer til en alarm. Timeglasset tæller så ned med en 1/4 cirkel hvert kvarter, indtil nedtællingen omfatter alle 8 cirkler. Den sidste 1/4 cirkel slettes, når varsling / forvarsling begynder. Når tidspunktet for førstkomende besked er passeret, vises tiden til næste besked.

Ingen tidsinformation

Har MEMObase været uden spænding, og har MEMObase et dårligt batteri, så klokkeslettet ikke længere er gyldigt, vil tidsdisplayet ikke blive vist. I stedet vises billedet "Sæt MEMOGO i".


Programmering af MEMOmessenger

MEMOmessenger har to hovedmenuer – én til at lægge **beskeder** ind, og én til at foretage mere grundlæggende **indstillinger**. Al programmering sker på touchscreen'et.

Tryk på knappen på venstre side af MEMObase og hold den inde for at komme ind til menuerne. Brug indstillingspennen, som følger med MEMOmessenger.

Menu – Beskeder

Programmeringstast

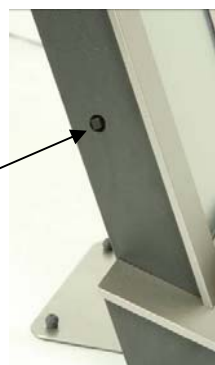

Trykkes *programmeringstasten* ind og holdes i 3 sekunder, vises hovedmenuen Beskeder. Følgende funktioner kan vælges:

Hvis der ikke er plads til flere beskeder, vises teksten "Hukommelsen er fuld" i stedet for de 4 valg, man kan foretage.

Tjek / ændre-tasten vises kun, når der er lagt beskeder ind.

Indstil enkelt, ugentlig, månedlig og årlig besked

Når "Indstil besked" er valgt, vises følgende:



- Aktuel tid, samt pile til at bladre i tid
- Tjebokse til VARSLING og VÆKNING
- Taster til INDSPILNING og TILBAGE.
- Til ugentlig besked vises tjebokse til valg af ugedage.
- Til ugentlig, månedlig og årlig besked vises tast til tidsbegrænsning af beskeder. det kan være aktuelt i fx ferieperioder.

Tasterne HØR BESKED og GEMME vises ikke, før der er indspillet en talebesked.

Menuerne starter altid med at vise aktuel tid, og tiden opdateres ikke, efterhånden som tiden går. Er tidspunktet for besked overskredet, når man trykker på GEMME-tasten, vil tidspunktet for besked blive gemt 1 minut senere end gemmetidspunktet.

Varsling og vækkeur kan ikke vælges samtidig. Det seneste valg går foran de forrige.

Man bruger pilene til at bladre frem og tilbage. Det er ikke muligt at gå længere tilbage end til aktuel tid.

Derfor er det nødvendigt at indstille dag/dato først, hvis det ønskede tidspunkt på dagen ligger tidligere end den aktuelle tid.


Et tryk udløser en enhed i bladringen, fx 1 minut pr. tryk. Trykkes en pil ned i mere end 0,8 sekund, sker bladringen automatisk med 4 gange pr. sekund. Da begynder minutterne at løbe med en faktor 10.

Er der andre beskeder på et tidspunkt, vises det ved et særligt bjældesymbol. Bjældesymbolet vises, uanset om beskeden er

deaktiveret eller uden for en eventuel tidsbegrænsning. Det er muligt at høre beskeden ved at trykke på bjældesymbolet. Beskeder læses op, fortløbende efter hinanden, og oplæsning af en talebesked kan afbrydes ved et nyt tryk. Så høres næste talebesked, hvis der er flere.

INDSPILNING

Når tasten trykkes, vises en særlig indspilningsmenu.

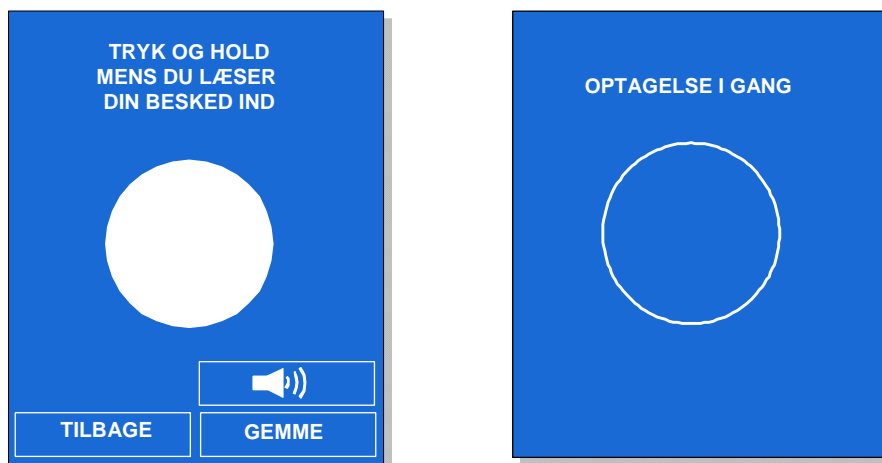

Stor cirkel (tryk og hold).

TILBAGE for at afbryde indspilningen og komme tilbage til "Sæt besked" menu.

Teksten "TRYK OG HOLD MENS DU LÆSER DIN BESKED IND". Teksten "LEDIG TALETID XX MIN/SEK", der XX minut eller sekund viser status på den tilbageværende talehukommelse. Går over til at vise sekunder, hvis det er mindre end 5 minutter tilbage af talehukommelsen.

Trykker man på optagelsesymbolet (fyldt cirkel), starter indspilling og displayet viser billede med hvid cirkel (uden fyld) samt teksten "OPTAGELSE I GANG", så længe tasten trykkes ned. Bliver talehukommelsen brugt op under optagelsen, afbrydes indspilningen, og teksten "HUKOMMELSEN ER FULD" vises. Optagelser indtil da gemmes.

Når tasten slippes, vises "Indspil besked" menu igen.

Kommerder en besked, mens man er i gang med at indtale, tjekke eller ændre andre beskeder, afbrydes eventuel ind- og afspilning,

uden at man forlader indstillingsmenuen, og beskeden læses op. Afbrydes en optagelse, gemmes det, der er optaget indtil da, og teksten "AFBRYDER PÅ GRUND AF OPLÆSNING AF BESKED" vises.

HØR BESKED

En højttalertast vises, når der er optaget en talebesked. Når en talebesked er optaget, og tasten trykkes ned, afspilles beskeden. Et nyt tryk standser afspilningen.

Tips: For det bedste resultat: Tal med normal stemme tæt på MEMOGOS mikrofon.

TIDSBEGRÆNSNING

Når tasten trykkes ned, viser displayet egen side for tidsbegrænsning. Start- og stoptid svarer til aktuel tid.



Tidsbegrænsningen er normalt slået fra, men aktiveres automatisk, når start- og stoptid er forskellige. Det er ikke muligt at gå længere tilbage end aktuel tid.

Når tiden er indstillet, kan man vælge mellem SLUKKET og TÆNDT.

TILBAGE-tasten returnerer til forrige menubillede. Teksten i tasten til tidsbegrænsning (TIDSBEGRÆNSNING SLUKKET/TÆNDT) opdateres i forhold til indstillingen i Tidsbegrænsning-menuen.

TILBAGE

Tasten afbryder uden at gemme beskeden, og forrige menubillede vises.

GEMME

Tasten vises først, når en talebesked er optaget, så man undgår at gemme beskeder, hvor der ikke er indspillet talebesked. Et tryk på tasten betyder, at alarmen gemmes, og forrige menu vises.

Tjek/ændre beskeder

Når TJEK/ÆNDRE vælges, vises følgende:



"TJEK/ÆNDRE" vises øverst på displayet.

Aktuel tid vises sammen med tilhørende pile til at bladre i tid.

Tjekkboxe til at definere søgekriterier for enkelte, ugentlige, månedlige eller årlige beskeder.

Beskedtaster til at søge i beskederne ud fra en given starttid og den valgte type besked.

Tasterne SLET, HØR BESKED og ÆNDRE vises kun, når der er en besked i den valgte tid.

Man kan bladre frem og tilbage i tiden med pilene. Det er ikke muligt at gå længere tilbage end aktuel tid. Bladringen sker med en enhed pr. tryk, f.eks. 1 minut pr tryk. Trykkes en pil ned og holdes i mere end 0,8 sekund, starter bladringen fortløbende med 4 gange pr. sekund.

Er der en besked på et tidspunkt, vises følgende:

Type besked.

Eventuel information om tidsbegrænsning.

Eventuel information om deaktivering.

I det øverste højre hjørne vises antallet af beskeder på det aktuelle tidspunkt, samt hvilken besked der vises, f.eks. er 1/4 den første af fire beskeder, som er gemt på dette tidspunkt.

SLET

Tasten vises kun, når en besked er valgt. Når tasten trykkes ned, afbrydes eventuel oplæsning, og en ny menu til at bekræfte sletning vises. Den nye menu gentager al relevant information om beskeden. Afbryd-tasten afbryder uden at slette, og forrige menubillede vises. SLET sletter beskeden, og det forrige menubillede vises i opdateret form med samme tidspunkt.

HØR BESKED

Højttalertasten vises kun, når en besked er valgt. Et tryk på tasten afspiller talebeskeden, og et nyt tryk standser afspilningen.

TILBAGE

Et tryk på tasten afbryder eventuel oplæsning, og menuen "Beskeder" vises.

ÆNDRE

Når tasten trykkes ned, går MEMOmessenger til den tilhørende menu til at "Ændre besked". Den øvrige funktionalitet svarer til Sæt besked.

Afslut

Ved at trykke på AFSLUT-tasten forlader man menuen "Beskeder" og tidsdisplayet vises.

Menu - Opsætning



Trykker man *Programmeringskontakten* ned og holder den i 6 sekunder, vises hovedmenuen Opsætning. Kommer der en besked, mens man er i gang med opsætningen, læses beskeden op, uden at man forlader opsætningsmenuerne. Fra menuen kan man vælge mellem følgende taster:

Indstil tid

Når INDSTIL TID vælges, vises følgende:



"INDSTIL TID" vises øverst på displayet. Aktuel tid vises sammen med tilhørende pile til at baldre i tid. Tjeboks til at vælge 12 timers visning Tjeboks til automatisk justering af sommertid Taster til TILBAGE og GEMME.

tiden går.

Menuerne vises altid aktuel tid, og tiden opdateres ikke, efterhånden som

Man bladrer frem og tilbage med pilene. Det er ikke muligt at gå længere tilbage end 01.01.2007. Hvert tryk udløse en bladring, fx 1 minut pr tryk. Trykkes man på en pil og holder den nede i mere end 0,8 sekund, starter bladringen fortløbende med 4 gange pr. sekund. Derefter begynder minutterne å gå med en faktor 10.

TILBAGE

Tasten afbryder uden at gemme, og forrige menu vises.

GEMME

Et Tryk på tasten gemmer tid og dato-information, sekundviseren i uret nulstilles, og forrige menu vises.

Indstilling af tiden direkte på MEMOgo

OBS! Tidsindstilling sker meget lettere på displayet på MEMObase. Se afsnittet herover. At stille tiden direkte på MEMOgo er kun hensigtsmæssigt, hvis man rejser over tidszoner og ikke har MEMObase med sig.

Tryk på *indstil tid-tasten* og hold den nede i 10 sekunder. Efter 10 sekunder starter indstillingen af tid ved, at årstal først indstilles. Det sker ved, at MEMOmessenger først siger årstallet for at indikere, å det kan ændres.

Følgende taster benyttes til at indstille tiden:

OK:	Starter næste indstilling, og siger værdien for denne indstilling. Starter med årstal, derefter følger måned, dato, timer og minutter. Trykker man på tasten under indstillingen af minutter, afsluttes programmeringen, og tiden opdateres.
Volum op og ned:	Øger og mindsker indstillingen af volumen og siger værdien.
Indstil tid-tasten:	Afslutter programmeringen uden at opdatere tiden.

Eksempel på tale ved opsætning af tidspunktet 02.10.2008, klokken 15:45:

Indstillings- sekvenser:	Talebesked:
Årstal	To tusind og otte
Måned	Oktober
Dato	Anden oktober
Timer	Klokken femten
Minutter	Klokken femten femogfyrre

Stilles tiden frem, og der er meldinger i det mellemliggende tidsrum, varsler MEMOmessenger ikke disse beskeder.

Displayvisning

Når DISPLAYVISNING vælges, kan man bestemme, om følgende skal vises på displayet:

The screenshot shows a blue menu titled 'DISPLAYVISNING'. It contains two columns of options, each with a checkbox. The first column is labeled 'DISPLAY' and includes: DIGITALT UR, KUN TIMEVISER, BESKED INDIKATOR, NATSYMBOL, NEDTÆLLING, DØGNVISNING, UGEDAG, DATO, and ÅR. The second column is labeled 'TALE' and includes: DØGNVISNING, UGEDAG, DATO, and ÅR. At the bottom of the menu are two buttons: 'TILBAGE' and 'GEMME'.

Digitalt ur

Kun timeviser med analogt ur

Markering af beskeder til analogt ur

Natsymbol

Nedtælling til næste alarm

Døgnvisning

Ugedag

Dato

År

Derudover findes der tjekbokse, hvor man kan vælge, om følgende skal siges i en besked:

Døgnvisning

Ugedag

Dato

År

TILBAGE

Tasten afbryder uden at gemme, og forrige menu vises.

GEMME

Et tryk på tasten gemmer indstillingerne, og forrige menu vises.

Tidspunkt på dagen

Når TIDSPUNKT PÅ DAGEN vælges, kan man indstille starttidspunktet til:

TIDSPUNKT PÅ DAGEN		
MORGEN:	◀ 06:00 ▶	
FORMIDDAG:	◀ 09:00 ▶	
EFTERMIDDAG:	◀ 12:00 ▶	
AFTEN:	◀ 18:00 ▶	
NAT:	◀ 23:00 ▶	
LYS DAG	◀ 70% ▶	
LYS NAT	◀ 30% ▶	
TILBAGE		GEMME

Morgen
Formiddag
Eftermiddag
Aften
Nat

Med pilene kan man bladere frem og tilbage for hvert tidspunkt på dagen i trin á en halv time. Det gældende interval om morgenen er fra kl 04:00 til 12:00, mens det er fra kl 18:00 til

02:00 om natten. Det er ikke muligt at vælge tidsintervaller, som overlapper andre tidspunkter om dagen eller om natten.


Når MEMOmessenger er sat op på engelsk, findes der ikke formiddagsindstilling. I det tilfælde er morgen-intervallet (morning) fra 6 til 12, eftermiddag (afternoon) fra 12 til 18, aften (evening) fra 18 til 23 og nat (night) fra 23 til 6.

Menuen indeholder mulighed for justering af backlight lysstyrke, til henholdsvis dag og nat. Ved at trykke på de tilhørende pile reguleres lysstyrken op og ned i trin på 1%. Styrken i Backlight ændres i takt med indstillingen. Efter et langt tryk ændres styrken 4 gange i sekundet. Lys til dag og nat kan stilles helt frit i forhold til hverandre (det er f.eks. muligt at have kraftigere lys om natten.)

I menuen findes der taster for TILBAGE og GEMME, ligesom i displayvisning-menuen.

Forvarsling

Når FORVARSLING vælges, kan man via tjekbokse vælge, om beskederne skal have:

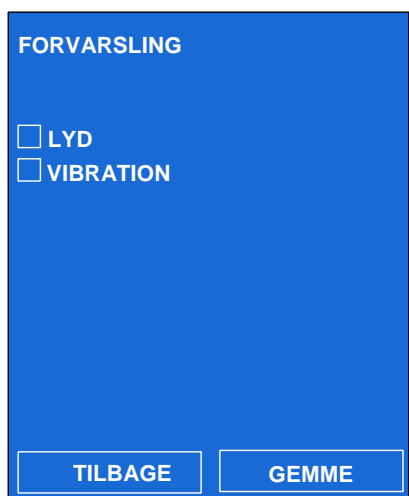


The screenshot shows a blue menu titled "FORVARSLING". It contains two checkboxes: "LYD" and "VIBRATION", both of which are currently unchecked. At the bottom of the menu, there are two buttons: "TILBAGE" on the left and "GEMME" on the right.

Forvarsel med lyd
Forvarsel med vibration

På menubilledet er der taster til TILBAGE og GEMME med samme funktion som i displayvisningsmenuen.

Huskesedler


Når man vælger HUSKESEDLER, kan man via tjekbokse vælge om MEMOMESSENGER skal vise 1 eller 10 huskesedler. Det er ikke muligt at vælge begge dele. Det seneste valg har prioritet.

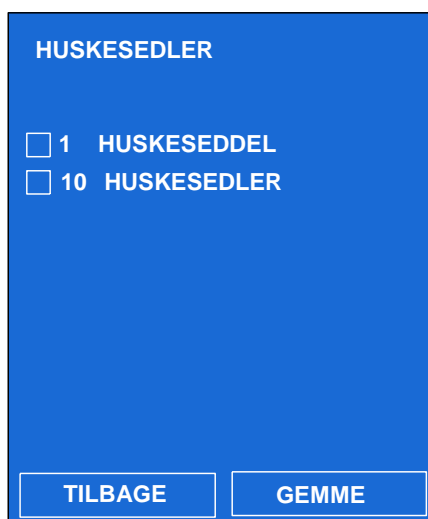

The screenshot shows a blue menu titled "HUSKESEDLER". It contains two checkboxes: "1 HUSKESEDEL" and "10 HUSKESEDLER", both of which are currently unchecked. At the bottom of the menu, there are two buttons: "TILBAGE" on the left and "GEMME" on the right.

På menuen er der taster for TILBAGE og GEMME med samme funktionalitet i "Displayvisning" menuen.

Avanceret

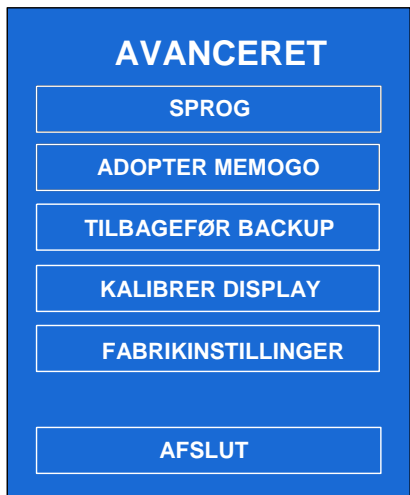

Når man vælger AVANCERET, vises en menu med følgende valg:

SPROG
ADOPTÉR MEMOGO
TILBAGEFØR BACKUP

KALIBRER DISPLAY
FABRIKSINDSTILLINGER

AFSLUT

Sprog

På MEMOmessenger kan man vælge mellem dansk, norsk og svensk tale og tekst, med enten mands- og og kvindestemme.



Når man vælger menuen SPROG, vises det valgte sprog med tilhørende pile til at bladre i de forskellige sprogmuligheder.

Tjebk bokse anvendes til at vælge mands- eller kvindestemme. Begge dele kan ikke vælges samtidig, og det sidst valgte har prioritet.

Adoptér MEMOgo

Vælger man ADOPTÉR MEMOGO i menuen, linkes MEMOgo til MEMObase. Teksten "MEMOGO ER ADOPTERET" vises i 5 sekunder - derefter vises "Avanceret" menuen igen. Eventuelle tidligere links til andre MEMOgo vil blive slettet i MEMObase.

Tilbagefør backup

OBS! Dette er aktuelt, hvis man mister sin MEMOgo og får en ny, og man vil overføre beskeder, som ligger i backup på MEMObase. Alt som er gemt på MEMOgo slettes..

Vælger man TILBAGEFØR BACKUP fra menuen, og MEMOgo samtidig er docket i en MEMObase, som den er linket sammen med, skal man gennemføre en fuldstændig backup fra MEMObase til MEMOgo. Displayet viser "BACKUP KOPIERES TIL MEMOGO", mens kopieringen er i gang. Derefter vises "Avanceret" menuen igen.


OBS! Backup-kopiering tager ca.30 minutter.

Hvis MEMOgo og MEMObase ikke er linket sammen, vises teksten "MEMOGO ER IKKE ADOPTERET" i 5 sekunder, og derefter vises "Avanceret" menuen igen.

Findes der ikke en gyldig backup, vises teksten "INGEN GYLDIG BACKUP" i 5 sekunder, og derefter vises "Avanceret" menuen igen.

Alarmer med varslingsstidspunkt under tilbageføringen af backup, ignoreres.

Kalibrér display

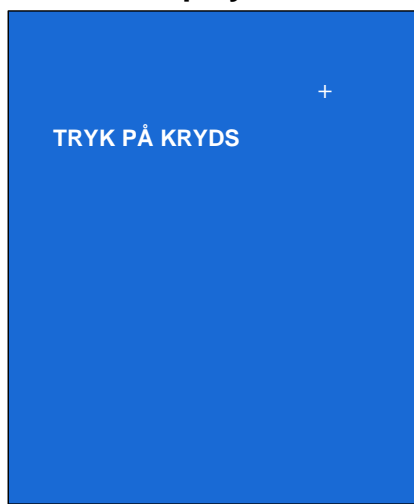

Vælger man KALIBRÉR DISPLAY, vises et kryds i øverste højre hjørne, og en tekst midt i displayet "TRYK PÅ KRYDS". Når brugeren har trykket på krydset, forsvinder det, og der vises nu et kryds i nederste venstre hjørne med samme tekst. Når brugeren trykker her, vises "Avanceret" menuen igen.

Fabriksindstillinger

OBS! Her slettes alle gemte beskeder i både MEMOgo og MEMObase.

Vælger man FABRIKSINDSTILLINGER, er der følgende funktioner:

Ingen beskeder.

Ingen huskeseddel-beskeder.

10 huskesedler.

Automatisk indstilling af sommertid.

Analogt ur.

24-timers format.

Fuld visning af ur, tid på døgnet, ugedag, dato og år.

Markering af beskeder, natsymbol og nedtælling.
Dag begynder kl. 06:00 med 80% lysintensitet på displayet.
Nat begynder kl. 23:00 med 20% lysintensitet på displayet.
Forvarsling lyd.
Forvarsling vibration.
Information om, at link til MEMObase slettes.
Valg af sprog påvirkes ikke.
Sletter al backup i MEMObase.

Kalibrering af displayet forbliver uændret, når man vælger
Fabriksindstillinger.

Når man vælger FABRIKSINDSTILLING vises teksten ”
PRODUKTET ER INDSTILLET EFTER FABRIKSINDSTILLINGER”
i 5 sekunder, og derefter viser MEMOmessenger
tidsindstillingsdisplayet.

Tilbage

Ved å trykke TILBAGE, vises menuen ”Indstilling”.

Afslut

Trykkekr man AFSLUT forlader man menuen "Indstilling", og
tidsdisplayet vises.

Rengøring

MEMOmessenger gøres ren med en klud, der er let fugtet i sæbevand, men produktet må ikke komme ned i vand. Husk at koble strømforsyningen fra under rengøringen.

Artikelnummer og tilbehør

402570 MEMOmessenger
MEMOmessenger består af
402571 MEMObase
402572 MEMOgo

Fast tilbehør MEMOmessenger
Pegepen
Hørepropper
Halssnor
Symbolsæt (klistermærker)
Bæltetaske
Strømforsyning

Tilkøb tilbehør MEMOmessenger
402518 Vibrator
402824 Højtalere med forstærker
402820 Hovedtelefoner
402 xxx Diverse kontakter
404523/404240 Falck 6705 Armbåndssender og -modtager (til fjernbetjening af funktionerne)
402020 JellyBeamer, trådløs afbryder (til fjernbetjening af funktionerne)

Tekniske data

MEMObase:

Vægt:710g

Mål:200x185x150 mm

Displaystørrelse 7 tommer (88x116mm)

MEMOgo

Vægt:115g

Mål:123x50x26 mm

Taletid: 26 min 20 sek (inkl. huskesedler)

Batteri:3.6V Lilo 600 mA (batteriskifte skal ske hos leverandøren)

Opladningstid fra tomt til fuldladet batteri; 4 timer

Forbrug standby; 380µA. Teoretisk standbytid 2 måneder

Aktivt middel lydniveau: Typisk 290 mA. Teoretisk taletid på ca. 2 timer

Aktivt højt lydniveau: Typisk 360 mA. Teoretisk taletid på mindst 1.5 timer
Strømforsyning:12V 0.8A

Sikkerhed og ansvar

Falck Igel AS har udarbejdet risikoanalyse for produktet i henhold til NS-EN 1441 til Medicinsk udstyr. Produktets brugervejledning og tekniske specifikation er udarbejdet med henblik på de sikkerhedsvurderinger, som er foretaget i dette dokument.

Ved ibrugtagning og daglig brug af produktet er det altid vigtigt at tænke på sikkerheden. Det er ikke muligt at beskrive alle de måder, man ikke må bruge produktet på, i en brugervejledning. Hvis man er i tvivl om, man har taget produktet korrekt i brug og indstillet det korrekt, anbefaler vi, at man tager kontakt til sin leverandør.

Vær specielt opmærksom på, at selv om MEMOmessenger giver besked om at udføre handlinger, er det ikke en garanti for, at handlingerne faktisk bliver udført. MEMOmessenger må derfor ikke bruges som den eneste måde at give besked på, hvis det kan medføre skader, såfremt handlingen ikke udføres eller udføres flere gange (i tilfælde af en "varslingsbesked"). Vær i denne sammenhæng specielt forsigtig med beskeder, som indebærer indtagelse af medicin.

Falck Igel AS er ikke ansvarlig for eventuelle skader, følgeskader eller tab som følge af brug, forkert brug, manglende opfølgning, forkert indstilling, forkert opkobling eller lignende. Falck Igel AS' økonomiske ansvar er i alle tilfælde begrænset til værdien af selve produktet.

Miljø

Den ydre emballage skal recirkuleres som papiraffald.

Den indre emballage skal recirkuleres som plastaffald.

Selve produktet skal recirkuleres som elektronikkaffald, når det kasseres.

Det kan leveres til alle udsalgssteder, som sælger elektronikprodukter, til din leverandør, eller til kommunale adresser.



