

# Brugsanvisning

## Blue Line mobil bade-/toiletstol

### Buzz 1-2-5

#### Ved sidelæns forflytning:

- 1) Slå stolens armlæn op og lås ALLE hjulene
- 2) Slå armlænet ned igen, når brugeren sidder bekvemt på stolen
- 3) Til urolige brugere anbefales at anvende en armlænslås, så armlænet ikke utilsigtet slås op

#### Ved forflytning:

- 1) Låsemekanismen (A) på de 2 forhjul skal altid pege udad, så låsning af hjulene kan foretages inden forflytning
- 2) Håndbremsen (B) - en i hver side - aktiveres inden brugeren tager plads i stolen
- 3) Sørg for at ALLE hjulene er låst, inden brugeren tager plads i stolen

#### Ved toiletbrug:

- 1) Stolen placeres over toiletkummen, og hjulene låses - eller hjulene låses, og et bækken placeres i bækkenophænget under sædet

#### Ved badebrug:

- 1) For- og baghjul låses
- 2) Stolen kan forsynes med et sædelåg, som passer i sædets åbning

#### Fodhvilere:

- 1) Anbring fodhvileren i beslaget (C) som er påsvejsset stolens forben
- 2) For at svinge fodhvileren til side, løftes den ca. 1 cm. lodret, og drejes herefter
- 3) Fodhvileren kan indstilles i længden ved at fjerne dens låseclips (D) - træk/skub herefter inderrøret indtil den ønskede længde nås

#### Vedligeholdelse:

Kontrollér jævnligt hjulene - efterspænd hvis nødvendigt samt efterse regelmæssigt sæde, ryg, og armlæn for skader - udskift hvis nødvendigt

Rengøring kan foretages med alle gængse- dog ikke ætsende rengøringsmidler

**Maks. belastning: 150 kg.**

