

BRUGSANVISNING FOR sengelæsebord HANDI 2

(HMI-nummer 14489)



Ved udpakning af kassen vil De finde:

1. Understel med fire hjul
2. Overdel med en træplade monteret på stålstativ. Et spændehandtag er isat dette.
3. To mellemrør, hvoraf det ene er vinklet (X=det forkromede) og forsynet med en 5 mm skrue i den ene ende. X-røret er indsat i det andet (Y=det malede).
Det malede rør har isat en 10 x 50 mm bolt og en spændeskive i den yderste ende - i den anden ende et spændehandtag.
4. En 10 mm unbracho-nøgle.

Montering af sengelæsebordet sker nemmest på følgende måde:

- a. Tag X-røret ud af Y-røret.
- b. Skru 10 x 50 mm bolt (med spændeskive) ud af Y-røret.
- c. Placér Y-røret oven på den lille firkantede studs, som er svejset på understellet (med hjulene).
- d. Indsæt 10 x 50 mm bolt (med spændeskiven) fra undersiden af understellet op i Y-røret og spænd dette fast med unbrachonøglen.
- e. Læg bordets overdel med træpladens overside nedad. Skru 5 mm skruen i X-rørets runde del af og skub X-røret ind i overdelens stel. Isæt 5 mm skruen igen.
- f. Vend derefter overdelen og stik X-rørets firkantede del ned i Y-røret. Bordet er nu klar til brug.

Indstilling af sengebordet:

- A. Træk overdelen op i den foretrukne brugshøjde.
- B. Fastspænd indstillingen med Y-rørets spændehandtag.
- C. Ønskes træpladen vinklet, løsnes overdelen spændehandtag - pladen vinkles - spændehandtaget strammes igen.
- D. Vinkel- og højdeindstillingen foregår uafhængigt af hinanden.

VEDLIGEHOLEDSE:

** Efterse jævnligt træpladen og dens fastspænding. Hjulene holdes fri af bl.a. hår for at bevare den maksimale køreevne og efterspændes om nødvendigt.


Udskift slidte eller ødelagte dele:

Hellere én gang for meget end én for lidt !


** Bordet rengøres med almindelige *ikke-ætsende* rengøringsmidle.
Den efterfølgende aftørring sker bedst med en blød klud.

Vi - dan-rehab a/s, Messingvej 13-15, DK-8900 Randers - erklærer på eget ansvar, at HANDI 2 er i overensstemmelse med European Standard EN 1441 (1997) i henhold til bestemmelserne i EU Direktiv 93/42 EEC.


I.

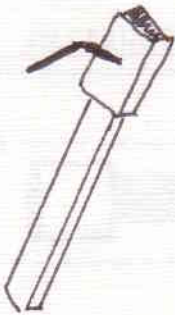


II.

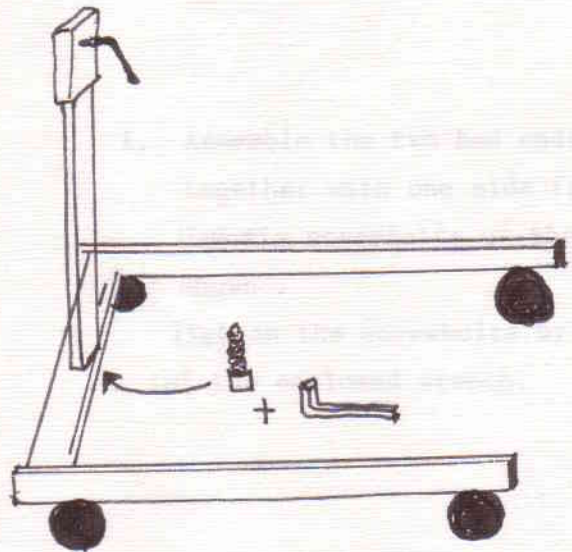

III.

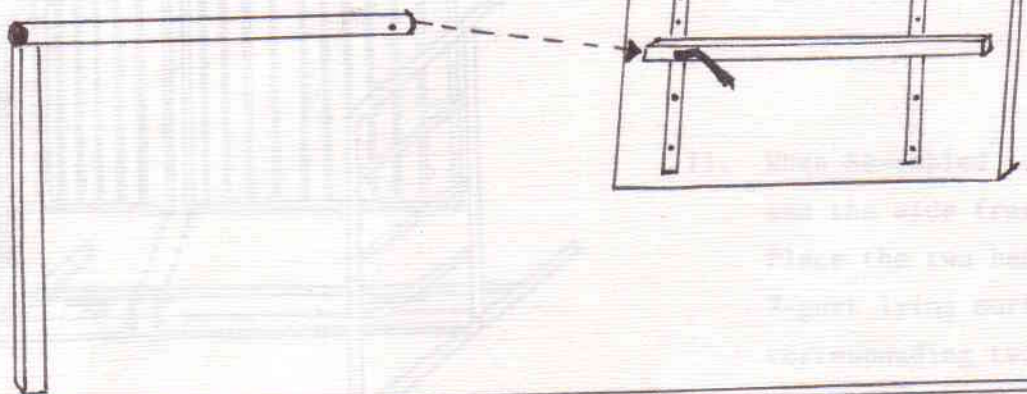

IV.

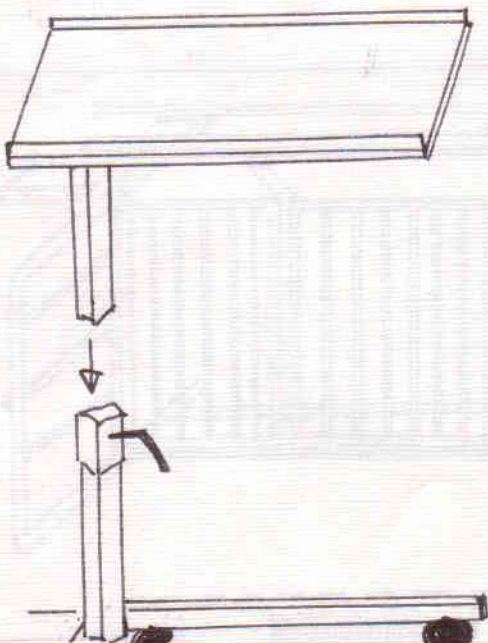

V.

