

Brugervejledning Badebænk med pursæde

Formål

Robust og rengøringsvenlig badebænk med stel af rustfrit stål. De skridsikre gummidupper, gør, at badebænken altid står fast og stabilt. Pursæde giver god siddekomfort, og de let betjente clips på benene gør, at højden nemt kan justeres.



Tilpasningsmuligheder



Badebænken kan indstilles i højden ved hjælp af den grå plastic clips monteret på hvert teleskop ben, og kan indstilles til en siddehøjde på 42-60 cm.

På hvert ben udtages den grå clips, benet trækkes til den ønskede længde, og clipsen påsættes igen.

HUSK at påsætte alle fire clips igen før brug!

Rengøring og vedligeholdelse

Rengør badebænken med rengøringsprodukter, som ikke indeholder grove eller ætsende kemikalier. Benyt ikke opløsningsmiddel og klorin til rengøring!

Advarsel!

Check altid MAX. Brugervægt fra 150 op til 300 Kg.



Faaborg Rehab Technic
Smedemestervej 9, DK-5600 Faaborg.
Tlf. + 45 70 20 55 53

E-mail: fr@faaborg-rehab.dk www.faaborg-rehab.dk