

Brugsanvisning Obus Forme® Rygpuder



Ved brug:

- 1) Åben den elastiske strop på bagsiden af rygpuden, og træk den over stolen/sædet
- 2) Placér rygpuden på stolen/sædet
- 3) Placér lændepuden[Ⓐ], hvor det føles behageligt



Vaskeanvisning:

Håndvaskes med mild sæbe

Betrækket kan fjernes og håndvaskes i koldt vand -
tørretumbler må ikke anvendes

Betrækket kan stryges ved lav varme