

## Timestokken 20 minutter

Varenr: 402 114



### Timestokken 20 minutter

Timestokken 20 minutter er et timeglas, som viser tiden konkret ved hjælp af lysprikker. En lysende prik svarer til 1 minut.



**ABILIA**

GEWA AB | FALCK IGEL

## Sådan bruger du Timestokken

Tryk på den knap, som svarer til den ønskede tid, for eksempel 15 minutter (gul knap). Nu tændes 15 lysende prikker.

Du kan nedtælle 20, 15, 10 eller 5 minutter.

Ved start tændes

- 5 lysprikker / blå knap
- 10 lysprikker / grøn knap
- 15 lysprikker / gul knap
- 20 lysprikker / rød knap



Derefter slukkes en prik for hvert minut, til alle er slukket. Så blinker alle prikkerne, og et kort lydssignal høres fem gange som tegn på, at tiden er udløbet. Du kan afbryde et igangværende lydssignal ved at trykke på en tilfældigt valgt knap.


Du kan slette en startet nedtælling ved at trykke den røde og den blå knap ind samtidig og holde dem indtrykket, til lyssøjlen er slukket (4 sekunder). Derefter kan du starte en ny nedtælling.

På Timestokkens kortsider finder du lydreguleringen for ændring af lydfrekvens. Når denne er stillet lavest, er lyden helt væk, og signalet bliver kun givet som blinkende prikker.



Ændring af lydssignal  
Maks. Min.

Timestokken leveres med klistermærker i samme farver som knapperne. Klistermærkerne kan bruges til at afmærke de aktiviteter, som skal nedtælles, med farver.

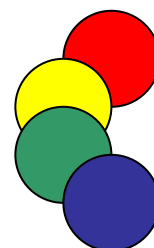

For at vise hvilke aktiviteter, der er tale om, kan der f.eks. benyttes PCS-symboler.

Disse kan enten afmærkes med farver ved hjælp af de klistermærker, som følger med, eller med farvede rammer rundt om symbolerne.

Timestokken kan benyttes som personlig støtte ved f. eks. kogning af ris, hvilepausens længde, øget tid på trampolinen eller for at afgrænse en aktivitet.



## Batteri

Når lysdioderne begynder at lyse svagt, er tiden inde til at udskifte batteriet.

Leveres med 2 stk. AA alkaline- batterier (1,5V type R6).

Disse vil række til mindst 60 timers brug.

Der kan også benyttes genopladelige batterier.

Batterilugen finder du på boksens underside.

Den er låst med en skrue.

For korrekt anbringelse af batterierne er batterirummet mærket med + og – .

Stjerneskrue  
til låsning



## Teknisk specifikation

Mål (h x b x d): 111 x 52 x 27 mm

Vægt: 115 g

## Vedligeholdelse

- Produktet er beregnet til indendørs brug og må ikke komme i kontakt med vand.
- Produktet kan rengøres med en klud, som er let fugtet i lunkent sæbevand, men må ikke nedsænkes i væske.
- Tag batteriet ud, når produktet ikke skal bruges i længere tid.
- Når produktet eller batteriet skal kasseres, skal disse behandles som specialaffald eller returneres til din leverandør.
- Batteriudskiftning efter behov

## Sikkerhed

Abilia har udarbejdet risikoanalyse for produktet i henhold til NS-EN ISO 14971 for Medicinsk udstyr. Produktets brugsvejledning og tekniske specifikation er udarbejdet under hensyntagen til de sikkerhedsvurderinger, som er anført i dette dokument. Ved ibrugtagning og daglig anvendelse af produktet er det altid vigtigt at tænke på sikkerheden. Det er ikke muligt i en brugsvejledning at beskrive alle måder, som produktet ikke må bruges på. Hvis du er i tvivl, om du har brugt eller indstillet produktet korrekt, anbefaler vi, at du kontakter din leverandør. Abilia AS er ikke ansvarlig for eventuelle skader, følgeskader eller tab som følge af brug, fejlanvendelse, manglende opfølgning, fejlindstilling, forkert tilslutning eller lignende. Abilia AS' økonomiske ansvar er i alle tilfælde begrænset til værdien af selve produktet.

*Version september 2010*

