

Active[®]

by

ACCESS[™]



www.active-walker.com

Active walker - user manual

Active

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. Indhold | 6. Transport og klargøring |
| 2. Introduktion | 7. Personlig sikkerhed |
| 3. Produktbeskrivelse | 8. Brugsanvisning |
| 4. Vedligeholdelse | 9. Tekniske specifikationer |
| 5. Tilpasning af rollatoren | 10. Garanti |


Active kombinerer alle de gode egenskaber med et moderne design. Rollatoren er udviklet til at hjælpe brugeren i alle hverdagsituationer.

Active kan bruges både inde og ude. De store forhjul gør det meget enkelt at forcere de fleste forhindringer på vejen.

Active er udviklet og testet efter gældende standarder for medicinsk udstyr og er CE-mærket.

3.

PRODUKTBESKRIVELSE

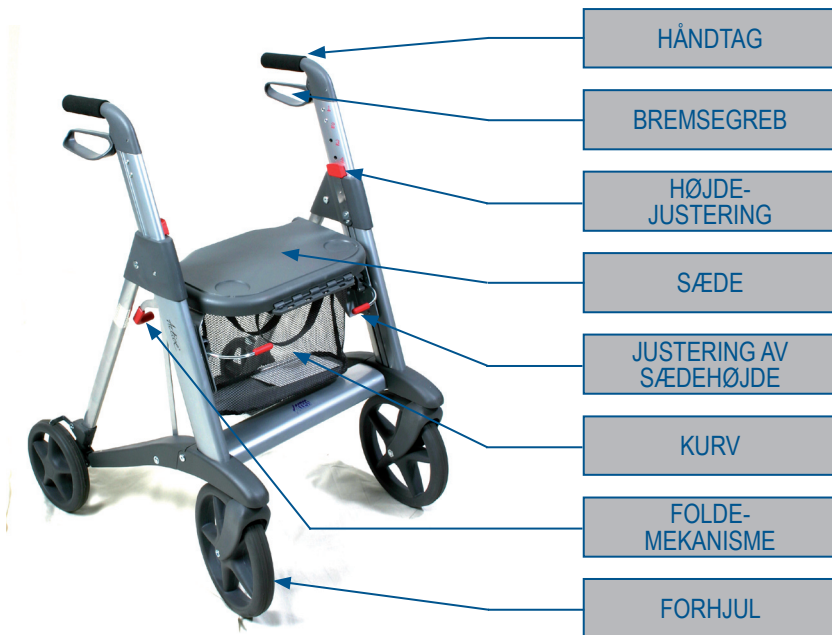

DANSK

4.

VEDLIGEHOJDELSE

- * Rollatoren skal kun benyttes som ganghjælpemiddel.
- * Hold rollatoren ren. Brug en klud og lidt sæbevand. Rollatoren kan også vaskes med højtryksrensere eller haveslange.
- * Kontroller jævnligt bevægelige dele såsom hjul og sædejustering.
- * Sørg for at bremserne er justeret rigtigt og at de virker som beskrevet.
- * Alle skruer, bolte og nitter skal kontrolleres jævnligt. Sørg for at spænde efter eller erstatte løse eller manglende dele.
- * Eventuel reparation skal foretages af autoriseret personale.

5.

TILPASNING AV ROLLATOREN

**Justering af håndtagshøjden.**

Træk den røde justeringsfjeder på indersiden af det teleskopiske rør ud. Med den anden hånd kan håndtaget justeres til den rigtige højde. Den røde justeringsfjeder slippes, så håndtaget låses i den rigtige position. Foretag samme justering i modsatte side, så håndtagene står i ens position.

**Justering af sædehøjden.**

Træk op i de to røde greb under sædet og flyt sædet til den rigtige position. Slip grebene og tryk sædet ned, så det låser i positionen. Vær sikker på at sædet er låst i samme position i begge sider, inden du sætter dig.

6.

TRANSPORT OG KLARGØRING



- * Active leveres færdigmonteret. Værktøj er ikke nødvendigt for at klargøre rollatoren.
- * For at folde rollatoren sammen til parkering eller transport - tag fat i det røde greb til højre på rollatoren. Før grebet forover til det kommer i slutposition. Billedet til venstre viser, hvordan rollatoren skal være, når den er klar til brug.
- * For at folde rollatoren ud føres det røde håndtag tilbage til startpositionen.
- * Vis forsigtighed når du løfter rollatoren ind og ud af bagagerummet på en bil.



7.

PERSONLIG SIKKERHED

- * Indstil rollatoren så den passer til din størrelse og så du let kan betjene bremsegrebene.
- * Opbevar rollatoren på et sikkert sted.
- * Fold rollatoren helt ud før du tager den i brug.
- * Vær sikker på at alle 4 hjul er i kontakt med underlaget, inden du begynder at køre med rollatoren.
- * Vær sikker på at bremserne er justeret rigtigt og at de fungerer, før du tager rollatoren i brug.
- * Vær sikker på at sædet er låst i positionen, inden du sætter dig.
- * Sid altid midt på sædet og hav det i en position, så brugerens ben altid kan nå underlaget.
- * Rollatoren skal altid være låst før brugeren sætter sig på sædet.
- * Sid aldrig på sædet hvis rollatoren er slået sammen.
- * Stå aldrig på rollatorens sæde.
- * Køb aldrig med rollatoren, hvis en person sidder på sædet.
- * Løft eller bær ikke unødigt på rollatoren. Det er meget enklere at flytte den på hjulene.

8.

BRUGSANVISNING



Netkurv

For at få adgang til kurven løftes siddepladen op. Nettet kan let tages ud og bæres med sig.



Forcing af forhindringer


Rollatoren er udstyret med ekstra store forhjul og vippepedal, som gør det let at komme over orhindringer. Pres pedalen ned med foden og træk håndtagene let tilbage for at løfte forhjulene over forhindringen.



Bremser

Bremserne er specialudviklet og en vigtig del af Active. Der er ingen udvendige bremsekabler og det patenterede indbyggede bremsesystem er sikrere og kræver mindre vedligehold end traditionelle bremsesystemer med udvendige bremsekabler.

For at bremse rollatoren presses bremsegrebene let mod håndtagene på rollatoren. For at sætte parkeringsbremsen til trykkes bremsegrebene ned til man føler et klik. For at udløse parkeringsbremse trækkes grebene let tilbage mod håndtagene på rollatoren. Man hører et klik, når parkeringsbremsen slås fra og grebene vender tilbage til neutralpositionen.

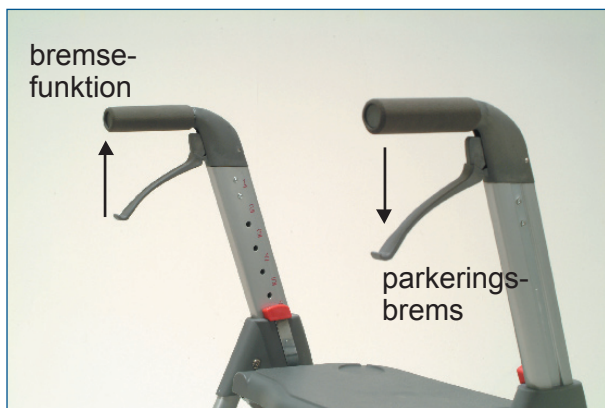

Vedligehold av bremser

Før du tager Active i brug skal du kontrollere at bremserne virker hensigtsmæssigt. Bremserne bør kontrolleres og eventuelt justeres med jævne mellemrum, da slitage på bremsesystemet og hjul kan føre til svækkelse af bremserne over tid.

Justering af bremserne sker ved hjælp af skruen som sidder i bunden af det bagerste aluminiumsrør. Justér skruen, så du har tilstrækkelig god bremsefunktion samtidig med at parkeringsbremsen fungerer som foreskrevet. Skru mod højre for at stramme bremsen. Det er to separate bremsesystemer, så justeringen skal foretages på både højre og venstre side.



Type	Active
Max. brugervægt	125kg
Håndtakshøjde	79 - 100 cm
Mål i cm	60 x 72 cm
Mål sammenfoldet	60 x 50 x 89
Sædehøjde	50 x 63 cm
Vægt	ca. 9kg
Materialer	Aluminum og fiberarmert plast
Rengøring	Sæbe og vand, højtryksrens, eller dampvask

Din Active rollator kan udstyres med forskellige typer af ekstraudstyr for at tilpasse dine behov. Kontakt din leverandør, hvis du behøver noget af det ekstraudstyr som er listet nedenfor:

- * Rygstøtte - polstret rygstøtte som spændes fast til sædet.
- * Stokkeholder.
- * Iltflaskeholder - leveres i forskellige størrelser alt efter behov.
- * Retningslås - låser rotationen på forhjulene, således at rollatoren kun kan køre fremad.
- * Slæbebremse - trinløs justering af modstand mod hjulene.
- * Ski - til vinterbrug
- * Serveringsbrett - til mat og drikke
- * Ekstra bag - ca. 15 liter (og 5 kg) kapacitet, med lommer
- * Putesett – komfortable Active puter til sæde og rygstøtte. Kommer i 7 forskellige farver. Putetrek kan vaskes i vaske maskin.

www.active-walker.com