



Version 002

IBRUGSVEJLEDNING

Multiseat

Maks brugervægt: 100 kg
Produktets vægt 50 kg



Vigtig information: Disse instruktioner skal altid forefindes sammen med produktet. Dette produkt er en ordineret medicinsk anordning. Må kun anvendes under vejledning af en terapeut eller praktiserende læge. Du skal læse disse instruktioner omhyggeligt inden brug.

BRUGSVEJLEDNING

Multiseat

Bemærk: Farverne på stoffer og plastik kan variere.
Justeringer bliver ikke påvirket.



Indhold:

Sikkerhedsinformation

Sikkerhedsetiketter	5
Vigtig sikkerhedsinformation	6
Basal sikker konfiguration	7

Generel information

Nøgle	9
Instruktioner for pasning og rengøring	10
Vedligeholdelse	11
Indføring i produkt og overdragelse	12
Specifikationer og garanti	13
De vigtigste funktioner og fordele	14

Indledende samling

Skubbebøjle	17
Interface-plade	18
Lændestøtte	19
Bagsøjle	20

Hyppe justeringer

Hjul	23
Sikkerhedsremme	24
Skumstøtte med hukommelse	26
Dæksler (tilvalg)	27

Kliniske justeringer

Hældning i rummet	29
Sædedybde	31
Lændestøtte	32
Abduktionsstøtte	33
Ryglæn	34
Fodhviler	36
Vinkeljusterbar fodhviler	38
Abduktionsblok	39
Opfødelig fodhviler	40

Valgfri komponenter

Montering af armlæn	42
Armlæn	43
Bord	44
Albueblokke	45
Skulderstøtter	46
Hoftestøtter	48
Sandaler	50
Fodkasse	51
Afstandsstykker for hævnning af sandaler	52
Nakkestøtte	53
Thorakale	58
Benkontrol	60
Ischialbjælke	62
Sele	63

Vedligehold og kontrol

Ofte stillede spørgsmål	67
Noter	67



KAPITEL ET

Sikkerhedsinformation




Sikkerhedsetiketter



Serienummer/ CE-certificering

Serienummeret står på CE-etiketten (se billede), som findes på produktet. Oplys venligst dette nummer ved enhver korrespondance.

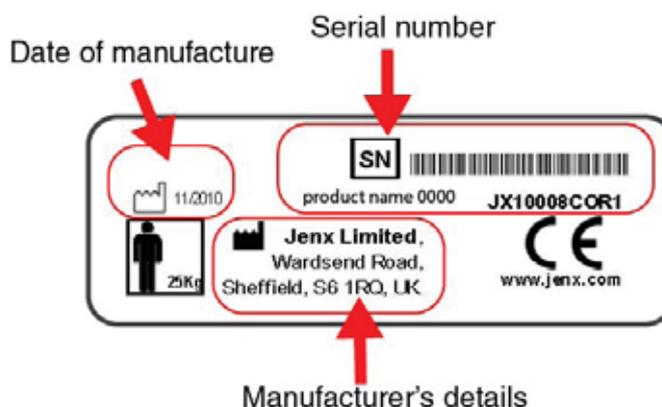

Produktetiketter

Ethvert produkt fra Jenx har et antal sikkerhedsetiketter med piktogrammer placeret. Se venligst nærmere forklaring herunder.



Pas på/Advarsel



Læs venligst instruktion for anvendelse



Kun til indendørs brug




Stropper og remme skal altid fastgøres og placering justeres således de passer til barnet. Juster også for at kompensere for tøjvalg. Juster således der er plads til én finger mellem remmen og barnet



Efterlad ikke barnet uden opsyn (se side 4 for fuld advarsel)



MÅ IKKE ANVENDES som et mobilitetsapparat
Produktet må aldrig bruges i uvejsomt terræn eller på ujævne overflader

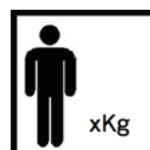

Klientvægt maks. (afhænger af model og størrelse)



Overholder regulativer for CE-mærkning
Medical Devices Directive (MDD) 93/42 EEC)

Vigtig sikkerhedsinformation



Dette produkt skal kontrolleres af en kvalificeret person mindst en gang om året



Du skal sikre dig at din terapeut har bekræftet at produktet er korrekt sat op, ved at underskrive afsnittet "Opsætning" i logbogen før dette produkt tages i brug. ANVEND IKKE produktet, hvis det ikke er blevet sat op af din terapeut.



Jenx Limited anbefaler at børn aldrig efterlades uden opsyn mens de benytter denne medicinske anordning. Børn kan glide eller falde mens de er uden opsyn og kan komme slemt til skade. Den person, som tager sig af det barn, som bruger denne medicinske anordning, bærer det fulde ansvar for sikkerheden for barnet i anordningen, hvis barnet efterlades uden opsyn.



Læs altid instruktionerne inden brug. Læses og følges instruktionerne for anvendelse ikke, specielt med hensyn til bevægelige dele, kan det betyde en risiko for brugeren.



Anvend ikke dette produkt, hvis der er mistanke eller viden om, at det er i stykker eller fejlbehæftet. Kontakt venligst straks Jenx Limited for rådgivning: Jenx Limited, Tlf.: +44 (0)114 285 3376.



Dette produkt indeholder små dele som kan udgøre en kvælingsfare for små børn.



Alle produkter fra Jenx Limited er testet til at overholde gældende brandsikkerhedsregulativer. Hold altid produkter væk fra ild, cigaretter og varmekilder som f.eks. varmeapparater.



Jenx Limited leverer de nødvendige værktøjer til at justere hvert enkelt produkt. Disse værktøjer er leveret med henblik på, kun at blive anvendt af en kvalificeret terapeut. Opbevar værktøjerne et sikkert sted, som er utilgængelig for børn



Produktet skal samles helt, inden det tages i brug. Kontakt venligst Jenx Limited, hvis der opstår problemer med dette. Jenx Limited, Tlf.: +44 (0)114 285 3376.



Sørg for god pasning af produktet: rengør jævnligt. Anvend ikke slibende rensmidler. Når produktet ikke bruges, bør det opbevares på et tørt sted, som ikke udsættes for ekstreme temperaturer. Produktet bør ikke opbevares i garager, pulterkamre eller haveskure og lignende steder.



Alle remme og seler bør altid anvendes. Til terapiformål kan det være nødvendigt at afvige fra denne regel. Enhver afvigelse bør dokumenteres fuldt ud som en del af en risikovurdering eller et terapi-program, og alt relevant personale og plejere har modtaget passende undervisning. Klienten skal sikres med remme, inden produktet justeres. Der skal være plads til en finger mellem sikkerhedsremmen og klienten. Dette hindrer, at remmen spændes for hårdt, eller at klienten kan indtage uhensigtsmæssige stillinger. Juster remme for hver enkelt klient og ved tøjskift. Minimum Velcro® overlæg: 7,5cm (3 inches) for alle remme. Hvis en rem ikke er lang nok: ANVEND IKKE PRODUKTET.



Dette produkt overholder European Medical Devices Directive. Produktet er ikke blevet testet i samspil med produkter fra andre producenter. Tilføj ikke noget tilbehør til dette produkt andre end de fra Jenx Limited. I tvivlstilfælde kontakt da Jenx for rådgivning +44 (0)114 285 3376.



Enhver ændring eller modifikation, der foretages af personer, som ikke er servicepersonel autoriseret af Jenx, vil sætte garantien ud af kraft, og Jenx kan ikke holdes ansvarlig for nogen kvæstelse eller skade som følge af dette.



Alle Jenx produkter er medicinske anordninger, og sælges under forudsætning af, at de vil blive ordineret, udleveret og vedligeholdt i overensstemmelse med forskrifterne i gældende nationale retningslinjer for service.

Basal sikker konfiguration



Disse elementer skal altid forefindes på Multiseat: Sædebase, Sæderyg, Skumstøtte med hukommelse, Lændestøtte, Hoftese og et sædeovertræk (Hygiejnisk eller farvet). Anvendes disse basale elementer ikke, kan det betyde en risiko for brugeren. Andet tilbehør kan tilføjes, men disse basale elementer skal altid anvendes.



Hvis denne stol skal anvendes uden fodplade, skal stolehøjden indstilles således, at brugerens fødder altid kan hvile fladt på gulvet.



KAPITEL TO

Generel information



Nøgle



Nøgle til komponenter



Fløjskrue



Unbrakoskrue




Klemlås




T-møtrik



Fløjmøtrik

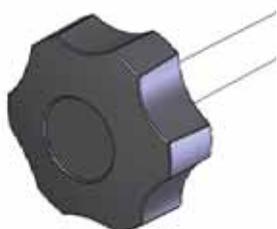

Stjernegreb

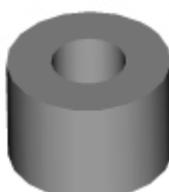

Afstandsstykke,
plastik



Spændeskive, plastik



Håndgreb



Knop til håndgreb

Bemærk: Udseende
kan variere

Nøgle for brugere



Instruktioner for pasning og rengøring

Stoffer, Vinyl og PU (polyuretan)

- Mindre spild kan fjernes med en fugtig klud
- Spild bør fjernes hurtigst muligt efter hændelsen. Dub pletten, gnid ikke
- Gør ikke pletten unødigt våd
- Anvend ikke organiske opløsningsmidler, rensmidler beregnet til kemisk rensning, slibende rengøringsmidler eller industrielle blegemidler
- Antibakteriel spray eller servietter kan anvendes
- Produktet skal være helt tørt, inden det igen tages i anvendelse

Produkter og dele af træ

- For grundig rengøring kan en lavtryksdamprenser bruges
- Anvend ikke organiske opløsningsmidler til rengøring af produkter fra Jenx
- Sæbe og vand eller antibakteriel spray kan anvendes
- Kontroller produktet for brud og splinter før det igen udleveres
- Daglig rengøring: Spray-polish eller voks-polish kan benyttes

Metalstel og malede dele

- For grundig rengøring kan en lavtryksdamprenser bruges
- Anvend ikke organiske opløsningsmidler til rengøring af produkter fra Jenx
- Sæbe og vand eller antibakteriel spray kan anvendes
- Daglig rengøring: Tør om nødvendigt stellet over med en fugtig klud

Vedligeholdelse



Kontrolleres dagligt

Daily checks of the equipment should be carried out by carers. These checks are not technical but a basic understanding of the product is needed. Multiple daily checks may be needed in schools or therapy rooms where the products are used by multiple users. The checks should include the following points:

- Udskift enhver mistet eller slidt spændeskive eller bolt
- Kontroller bordet for skader. Det skal sikres at bordkanten er sikker, og at bordet er rent og fri for ru eller skarpe hjørner
- Kontroller al polstring for ethvert tegn på slid eller rifter
- Børst Velcro® for at fjerne fnug og nullermænd
- Kontroller at alle dele af træ er hele og fri for splinter
- Kontroller remme for frynser og manglende eller ødelagte spænder
- Rengør alle pletter og spildte væsker
- Kontakt Jenx Limited, hvis noget tilbehør er blevet monteret på produktet, som ikke er fremstillet af Jenx Limited. Uautoriseret tilbehør kan påvirke produktets sikkerhed og sætte garantien ud af kraft
- Kontroller at håndtagene til gastryksfjedrene ikke er bøjeede. Anvend ikke produktet, hvis et eller flere håndtag er blevet bøjet. Kontakt Jenx Limited for at arrangere en udskiftning

Månedlige kontroller

Vi anbefaler en kontrol en gang om måneden. Denne mere detaljerede kontrol bør udføres af en person med indgående kendskab til dette udstyr, og som er blevet oplært i dets anvendelse:

- Kontroller at alle skruer og møtrikker er på plads og spændt
- Kontroller at alle bevægelige dele fungerer korrekt
- Kontroller stel og andre bærende dele for tegn på svækkelse af materialet
- Hjul: Løft basen og kontroller hvert hjul for at sikre, at det ikke sidder løst eller er slidt. Fjern fedt eller skidt, som har samlet sig på hjulene. Kontroller at bremsen kan stoppe hjulenes rotation (hvor dette er relevant)
- Kontroller gasfjedre for normal funktion og modstand. Kontrol af om gasfjedrene synker, foregår ved at observere enhedens position i et stykke tid
- Kontroller at håndtagene til gastryksfjedrene ikke er bøjeede. Anvend ikke produktet, hvis et eller flere håndtag er blevet bøjet. Kontakt Jenx Limited for at arrangere en udskiftning

Hvis din inspektions-logbog for produktet er fyldt, kan en ny printes fra www.jenx.com



Dette produkt skal kontrolleres af en kvalificeret person mindst en gang om året.

Indføring i produkt og overdragelse



Dette produkt er et ordineret medicinsk udstyr, og som sådan er det vigtigt, at alle brugere forstår brug og de justeringer, produktet giver mulighed for. Denne pjece viser omfanget af justeringer, og giver retningslinjer, som hver brugertype kan følge

Professionelle / tekniske brugere

Dette refererer til terapeuter og ordinerende praktiserende læge.

Du skal sikre dig, at du har læst hele pjecen, og har fuldt kendskab til alle justeringer. Såvel som valg, ordinerer og opsætning af produktet til at imødekomme klientens behov, er det den tekniske brugers ansvar at instruere plejeren, således det sikres at plejeren:

- Har en forståelse for sikkerhedsaspekterne ved produktet
- Har indgående kendskab til produktet, og vide hvad der bør bruges, og hvad der ikke bør bruges
- Ved hvilket tilbehør der er monteret og hvilke daglige justeringer, der skal foretages
- Har kendskab og forståelse for procedurerne for produktets pleje og rengøring

Der bør indføres en formel overdragelses-procedure for dette produkt. Hav en separat inspektions-logbog, hvor opsætning og ændringer på produktet indføres. Jenx Limited udbyder produktkurser for tekniske brugere. Kontakt os venligst for yderligere information.

Plejer (Dette afsnit refererer til den daglige plejer)

Dette produkt er en ordineret medicinsk anordning. Det bør kun anvendes under vejledning af en ordinerende professionel person. Foretag ikke andre justeringer end de, du er blevet instrueret i at foretage.

Plejer-afsnittet i denne vejledning viser kun de justeringer, som er nødvendige for at fremme daglig brug. Alle andre justeringer må kun udføres af terapeuten.

Gen-udlevering (Dette afsnit refererer til lagerpersonale)

Lagerpersonale skal følge vejledningen for kontrol og vedligehold før produktet gen-udleveres. Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) udgiver jævnligt bulletiner om produktopdateringer og -problemer. Dette bør overvåges.

- Der bør føres logbog over alle produkter, som får foretaget service og bliver gen-udleveret
- Reparationer og udskiftede dele skal være sporbare
- Serienummeret fra Jenx skal altid forblive på produktet, og må ikke fjernes
- Instruktioner skal altid udleveres sammen med produktet. Instruktioner kan fås fra Jenx Limited eller kan downloades fra www.jenx.com
- Informer altid den tekniske bruger, inden et produkt udleveres til et hjem for at blive justeret til en ny bruger.
- Hvis produktet skal leveres, skal tilstrækkelig og sikker emballage benyttes
- Hvis der er den mindste tvivl om sikkerheden, må produktet ikke udleveres. Kontakt Jenx Limited for rådgivning
- Produkter må kun udleveres fuldt samlede, rengjorte og i god funktionsdygtig stand. Betjeningsvejledning skal udleveres med produktet.

Jenx Limited udbyder tekniske bruger-kurser for lagerpersonale. Kurset vejleder i: vedligehold, inspektion af produktet, rengøring og information om relevante regulativer. Kontakt os venligst for yderligere information.

Specifikationer og garanti



Specifikation	
Maks. brugervægt:	100 Kg
Basedimensioner (Z-base)	830 x 640 mm
Vinkelområde	10 ° prone - 25 ° supine
Stolehøjde fra gulv (Z-base)	Min: 440 mm Max: 640 mm

Beskrivelse	Størrelse 4	Størrelse 5
Sædedybde (fra sædefront til front af lændestøtte)	Min.: 285 mm Maks.: 450 mm	Min.: 355 mm Maks.: 520 mm
Hoftebredde	Min.: 200 mm Maks.: 440 mm	Min.: 200 mm Maks.: 440 mm
Bredde på sædehynde (i centrum)	395 mm	435 mm
Ryghøjde (fra sæde til top af ryglæn)	Min.: 465 mm Maks.: 590 mm	Min.: 525 mm Maks.: 660 mm
Længde for underben (fra top af fodplade til top af sæde)	Min: 250 mm Max: 470 mm	Min: 250 mm Max: 470 mm

Garanti

Instruktionerne for anvendelse af dette produkt bør følges nøje. Det er ikke muligt at eliminere alle risici, som i sagens natur er forbundet med anvendelsen af dette produkt. Produktet kan svigte eller andre utilsigtede konsekvenser kan opstå på grund af uheldsmæssig opbevaring, brug eller vedligehold, uautoriseret og uheldsmæssig modificering eller reparation, eller uheldsmæssig eller voldsom behandling, overdreven belastning, brug af ukorrekte reservedele, eller på grund af normalt slid, som alle er uden for producentens eller sælgerens kontrol. Køber og bruger påtager alle disse risici.

Producent og sælger garanterer, at dette produkt vil være fri for defekter i materiale og håndværk i en periode på 24 måneder fra købsdato, og er egnet til de anvendelser, der er beskrevet i brugsvejledningen under iagttagelse af de risici, der i sagens natur forekommer under normalt brug. Denne garanti dækker ikke anvendelser af produktet, som er i modstrid med brugsvejledningen, eller under unormale forhold eller under forhold, som ikke med rimelighed kan forudses, eller er uden for producentens eller sælgerens kontrol. Køber og brug påtager ethvert ansvar for den slags anvendelse. PRODUCENTEN GARANTERER IKKE TILSTRÆKKELIG KVALITET ELLER EGNETHED I FORHOLD TIL SPECIELLE FORMÅL, HELLER IKKE ANDRE EXPLICITTE ELLER IMPLICITTE GARANTIER UNDTAGEN SOM BESKREVET OVENFOR.

I intet tilfælde skal producenten eller sælgeren holdes ansvarlig for hændelige, følgeskader eller specielle skader, som er resultatet af brugen af dette produkt. DEN ENESTE KORRIGERENDE HANDLING OVERFOR BRUGER ELLER KØBER, OG DET ENESTE ANSVAR SOM PRODUCENT OG SÆLGER KAN PÅDRAGE SIG I FORHOLD TIL FORDRINGER AF ENHVER ART, TAB ELLER SKADE (HERUNDER FORDRINGER BASERET PÅ BRUD PÅ GARANTIEN, MISLIGHOLDELSE, KONTRAKT, OBJEKTIVT ANSVAR ELLER ANDET), SOM ER ET RESULTAT AF BRUG AF DETTE PRODUKT, SKAL VÆRE PRODUKTETS KØBSPRIS ELLER ERSTATNING AF PRODUKTET.

Producenten og sælgeren udbyder dette produkt, og køber og bruger accepterer det på de forudbeskrevne betingelser for salg og begrænsning af erstatningsansvar, som ikke må ændres uden en skriftlig aftale underskrevet af en behørig repræsentant for producenten.

De vigtigste funktioner og fordele

Side
48

Foldbar hoftestøtte

Fordele: Hurtig og men at folde væk eller at justere vinklen på støtten.



Side
44

Aftageligt bord

Fordele: Giver brugeren en flade at arbejde på. Både vinkel og højde kan justeres.



Side
26

Skumstøtte med hukommelse og valgfri Ischialbjælke

Fordele: Den valgfri Ischialbjælke forhindrer barnet i at glide ind i en sakral siddeposition.



Side
60

Benkontrol

Fordele: Kan give abduktionsstøtte til hvert enkelt ben





Nøgle

Side
XX

Justeringen kan findes på den specificerede side



Side
53

Nakkestøtte

Fordele: Der er en række nakkestøtter tilgængelige for bedst at imødekomme brugerens behov

Side
58

Foldbar thorakalstøtte

Fordele: Hurtig og men at folde væk eller at justere vinklen på støtten.

Side
29

Hældning i rummet

Fordele: Hældning i rummet giver mulighed for både fremadlænedede siddepositioner og tilbagelænedede siddepositioner

Side
40

Opfoldelig fodhviler

Fordele: Fodhvileren foldes op således stående overflytning er mulig


KAPITEL TRE

Indledende samling



Skubbebøjle

Påsætning af skubbebøjle

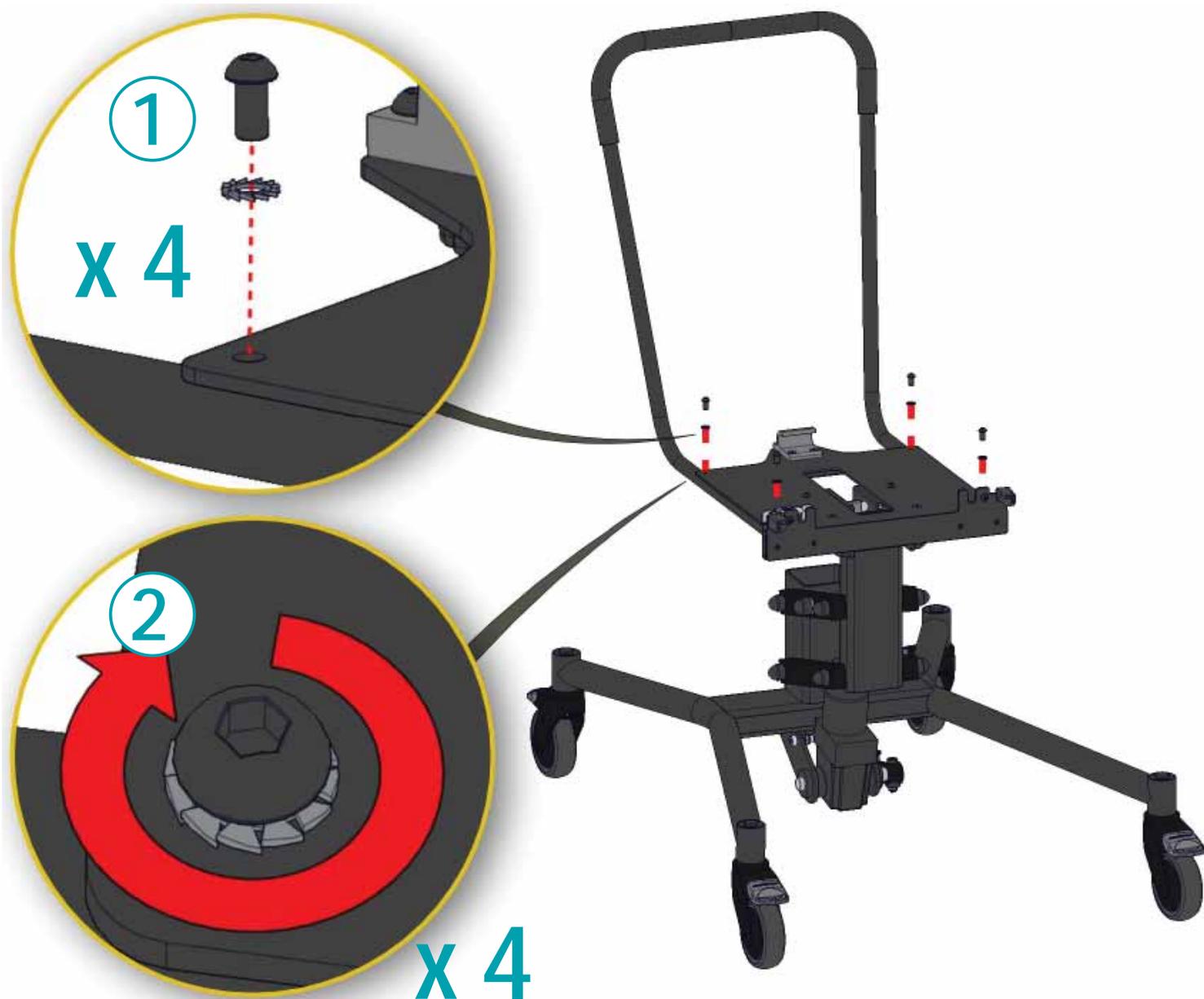


Interface-plade



Interface-pladens anvendelse




TSæde-enheden bør løftes af to personer

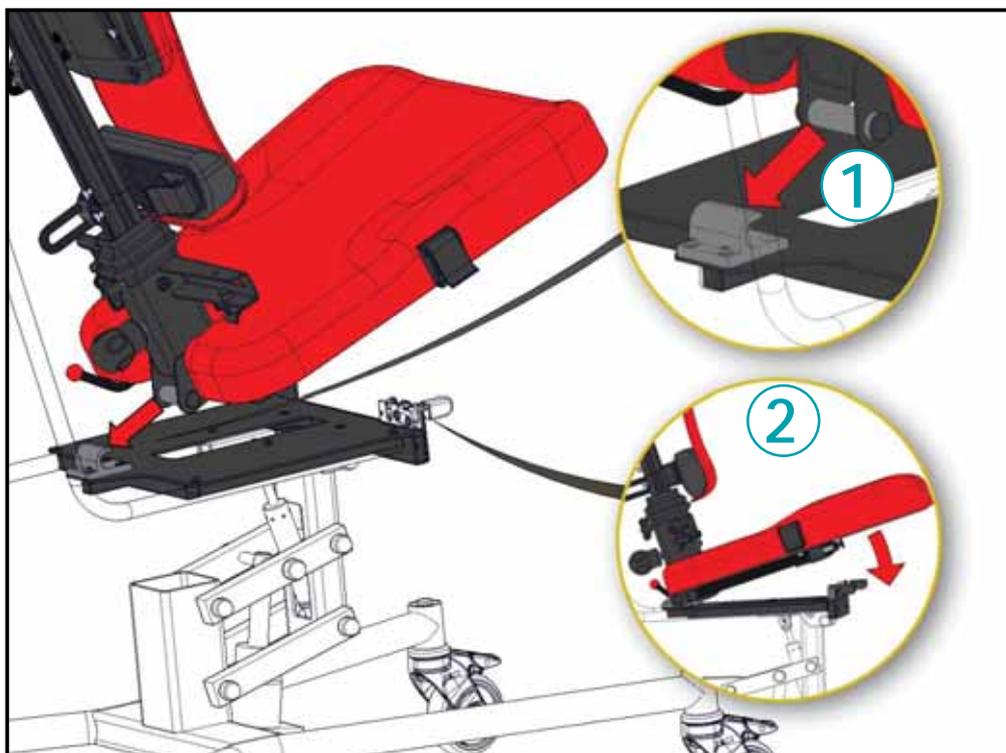


Lændestøtte

Påsætning af lændestøtte

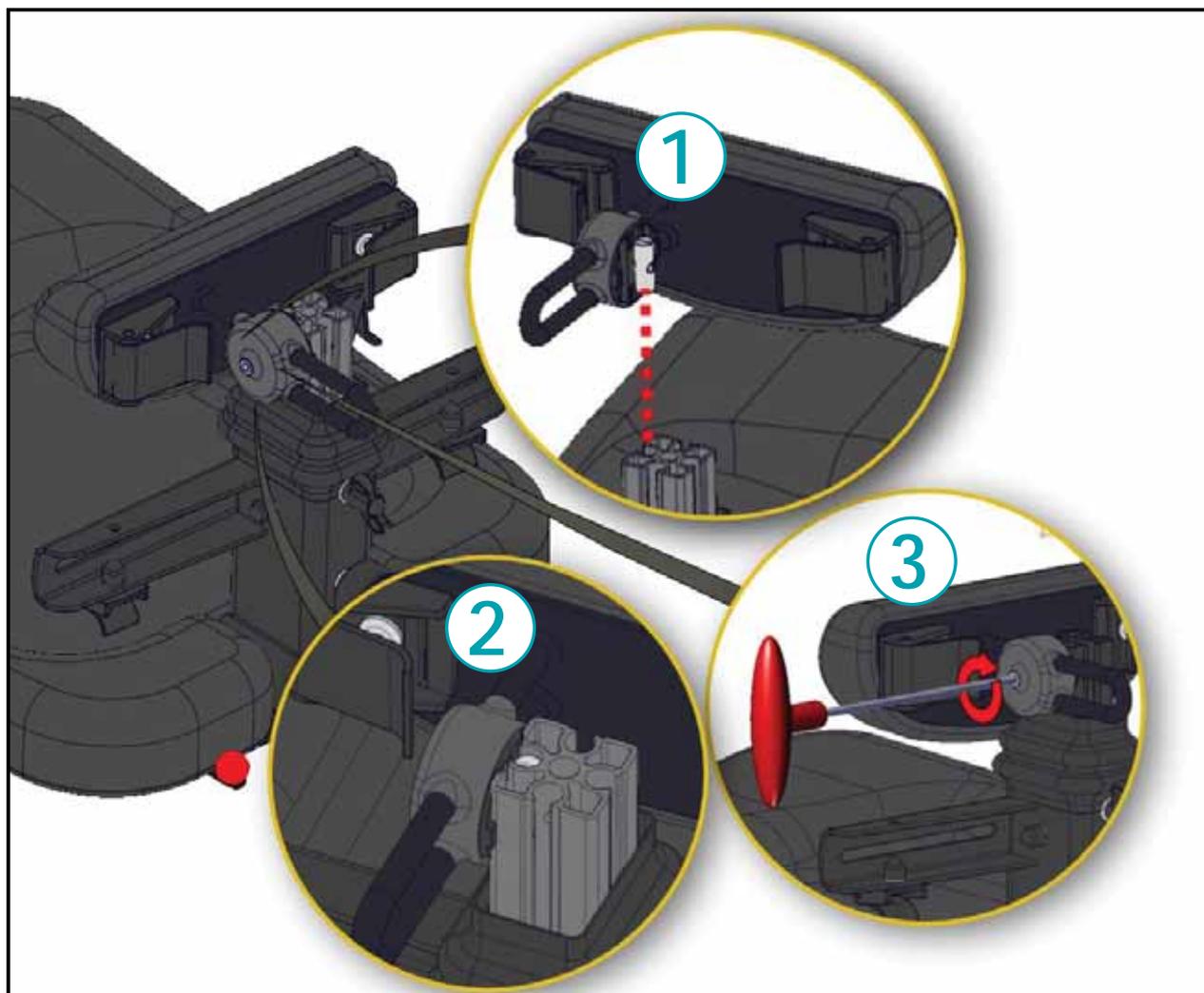



Bagsøjle

Påsætning af bagsøjle

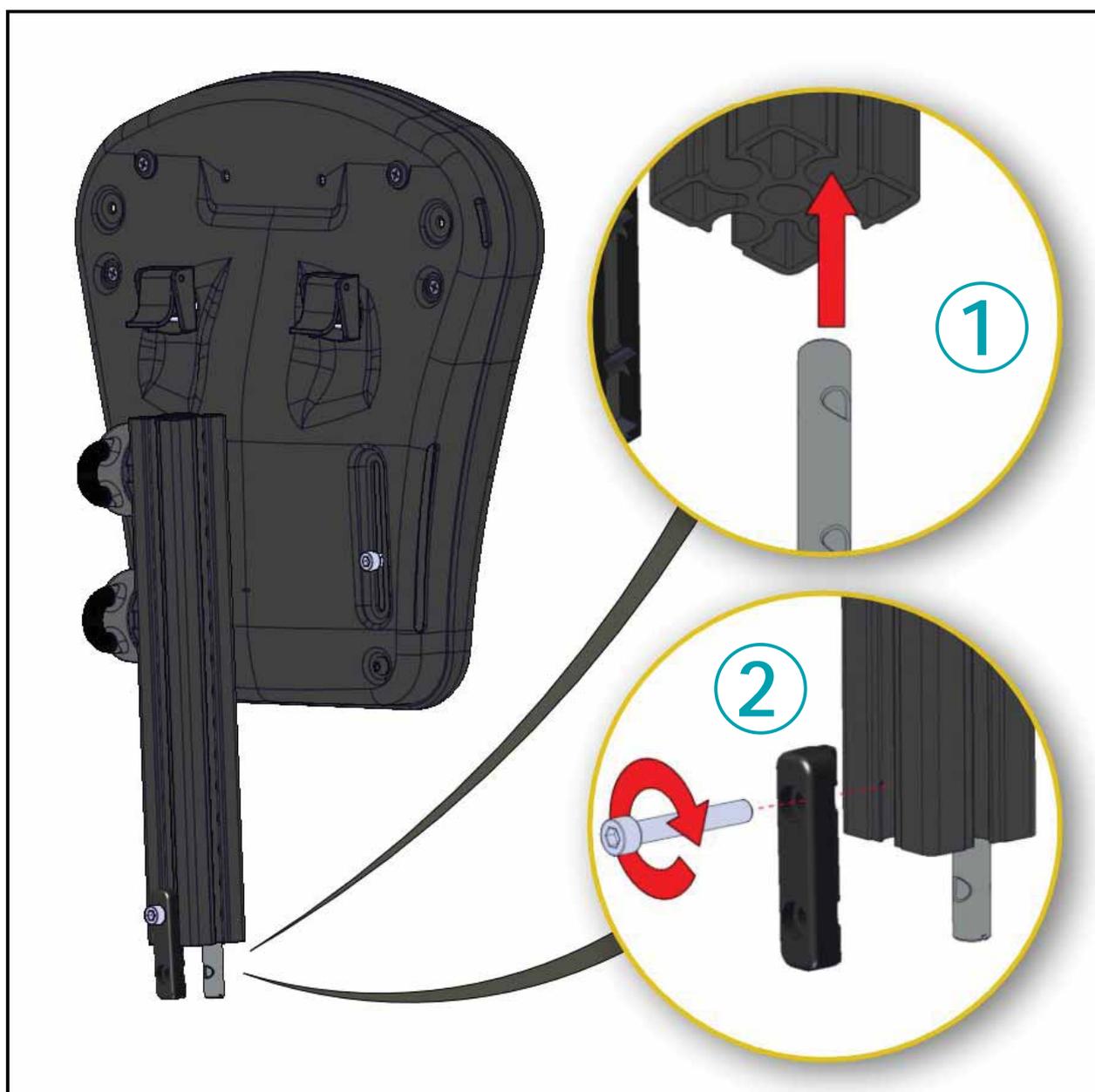

Bagsøjle

Påsætning af bagsøjle

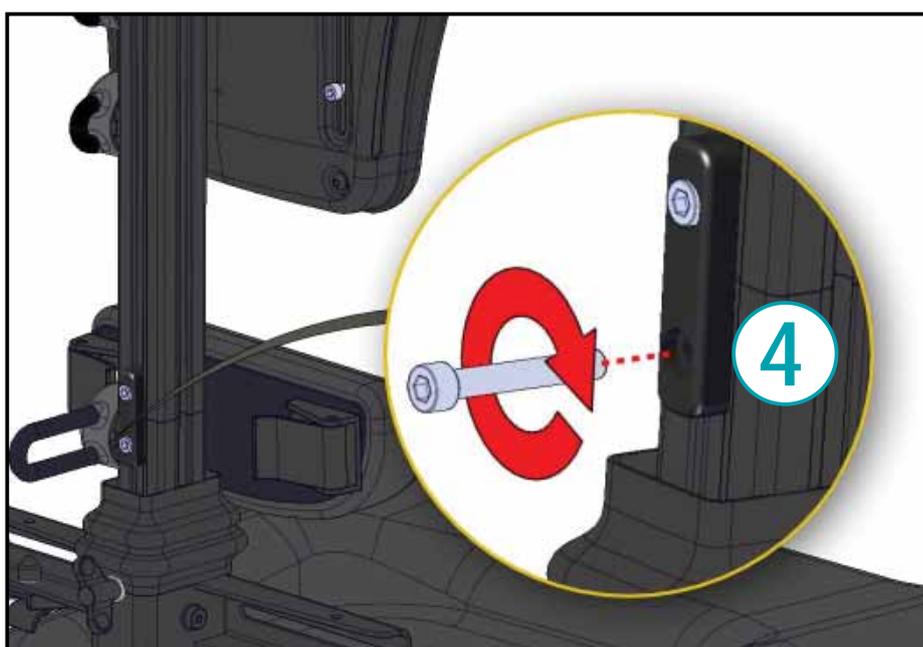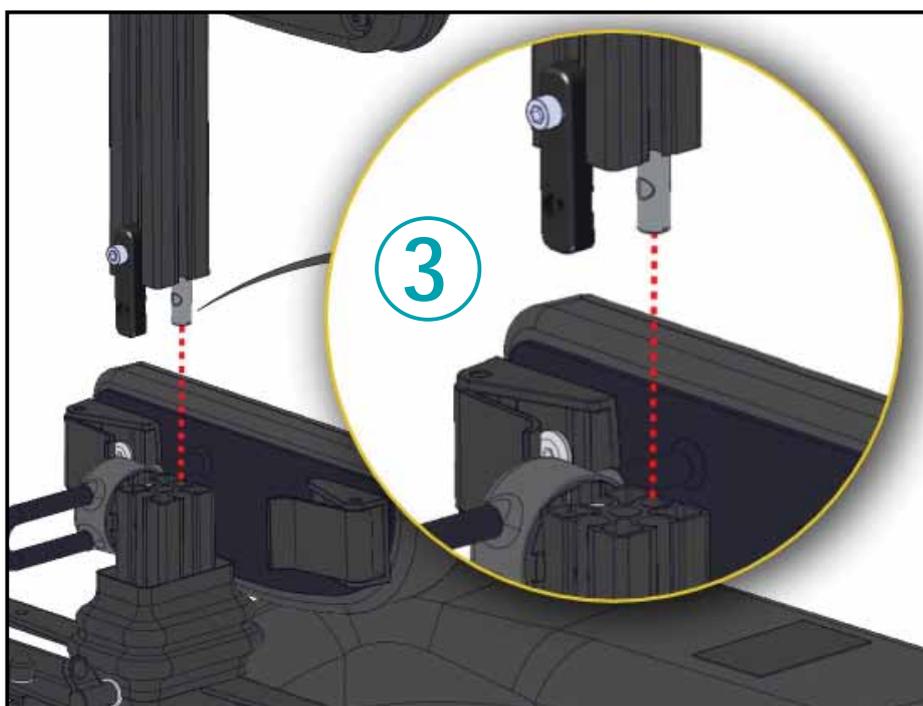

KAPITEL FIRE

Hyppige justeringer



Hjul



 Lås hjulene før vippelejet tages i brug.




Sikkerhedsremme



Hoftesele: fastgørelse og justering








Hoftesele kan justeres ved hjælp af klemlås, som er placeret fire steder som vist. To på siden af sædet og to på bagsiden af lændestøtten.

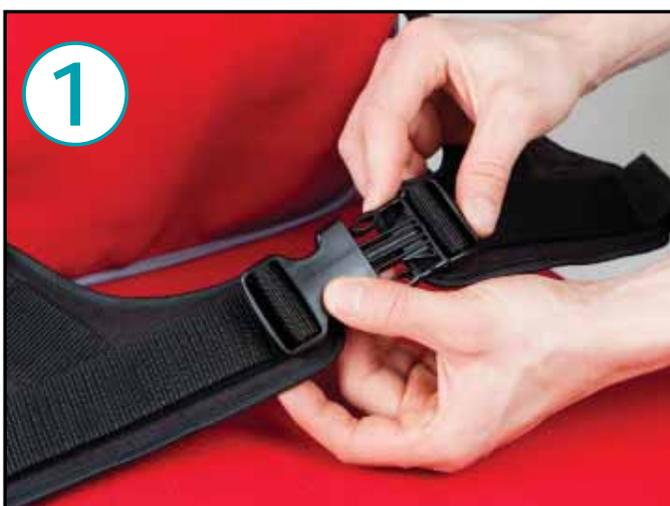

Sikkerhedsremme



Thorakalsele: fastgørelse og justering

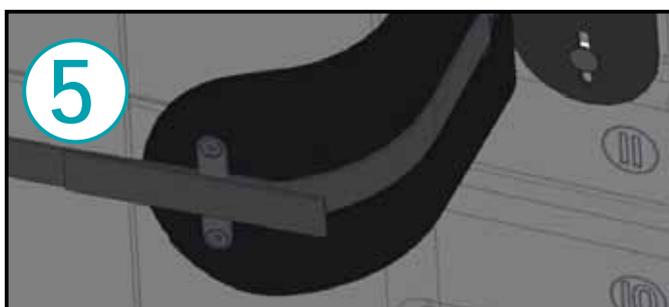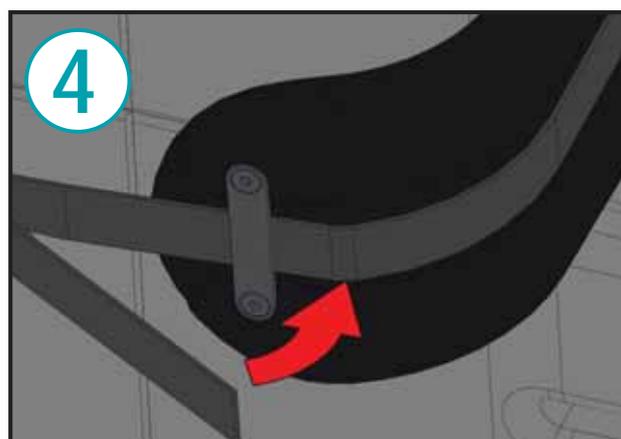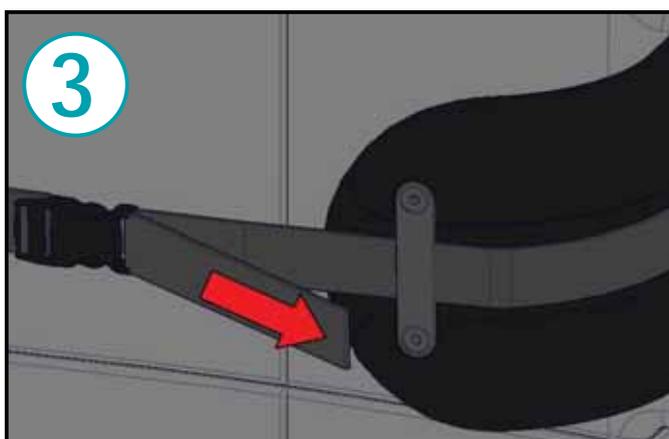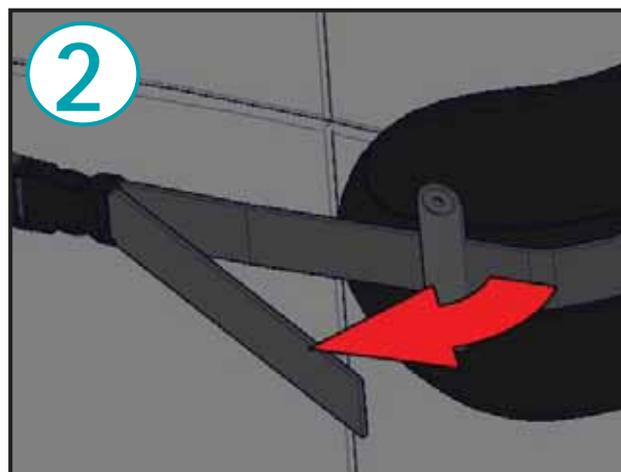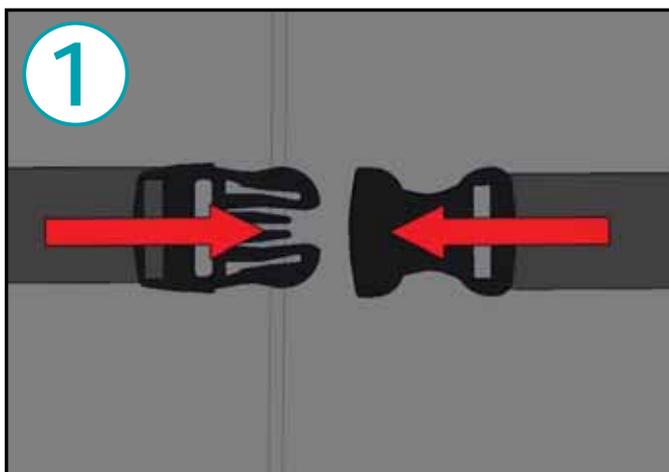


Alle remme og seler bør altid anvendes. Til terapiformål kan det være nødvendigt at afvige fra denne regel. Enhver afvigelse bør dokumenteres fuldt ud som en del af en risikovurdering eller et terapi-program, og alt relevant personale og plejere har modtaget passende undervisning. Klienten skal sikres med remme, inden produktet justeres. Der skal være plads til en finger mellem sikkerhedsremmen og klienten. Dette hindrer, at remmen spændes for hårdt, eller at klienten kan indtage uheldige stillinger. Juster remme for hver enkelt klient og ved tøjskift. Minimum Velcro® overlæg: 7,5cm (3 inches) for alle remme. Hvis en rem ikke er lang nok: ANVEND IKKE PRODUKTET.

Skumstøtte med hukommelse



Påsætning af skumstøtte med hukommelse

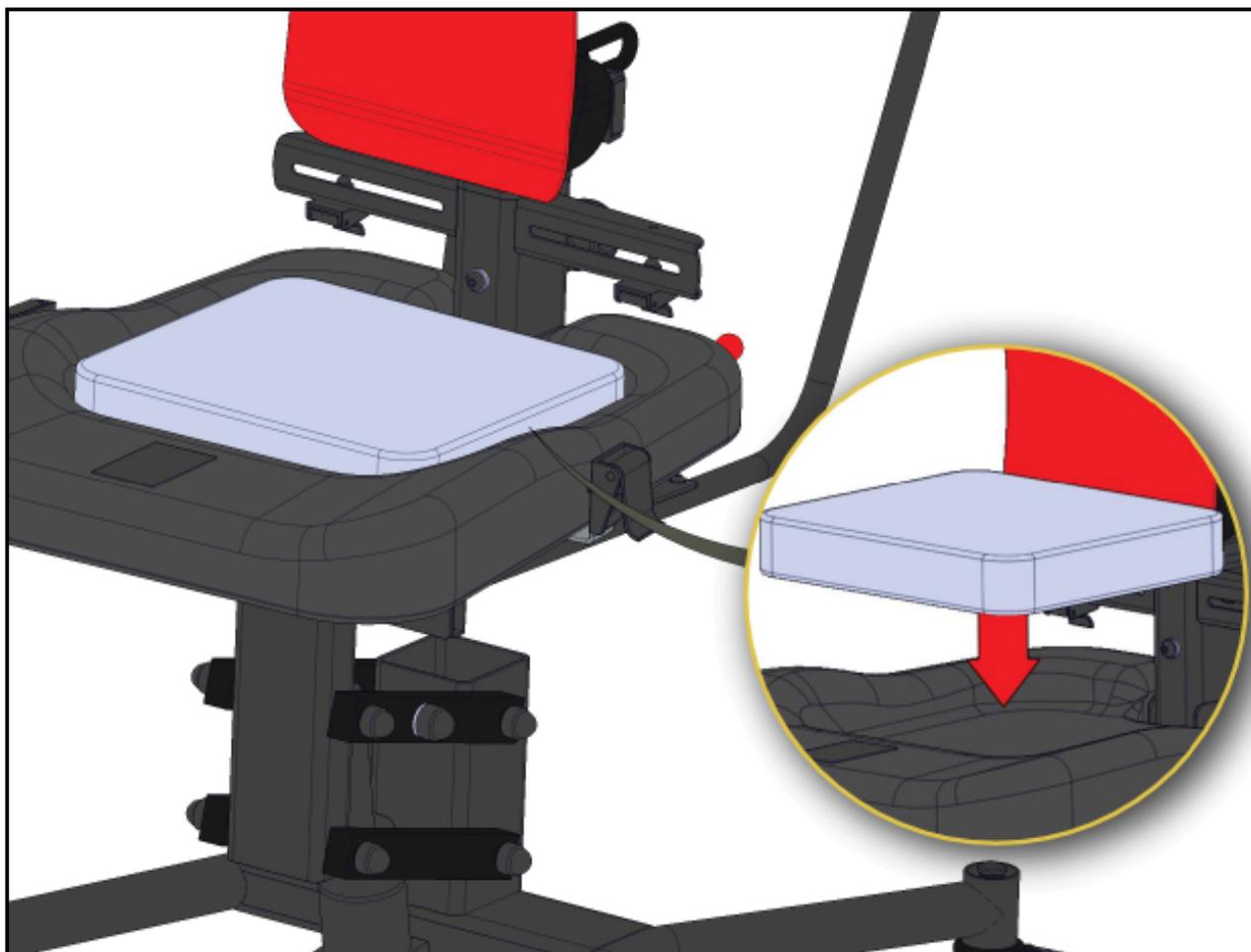


Overtræk (tilvalg)



Overtræk for ryglæn



Overtræk for sæde

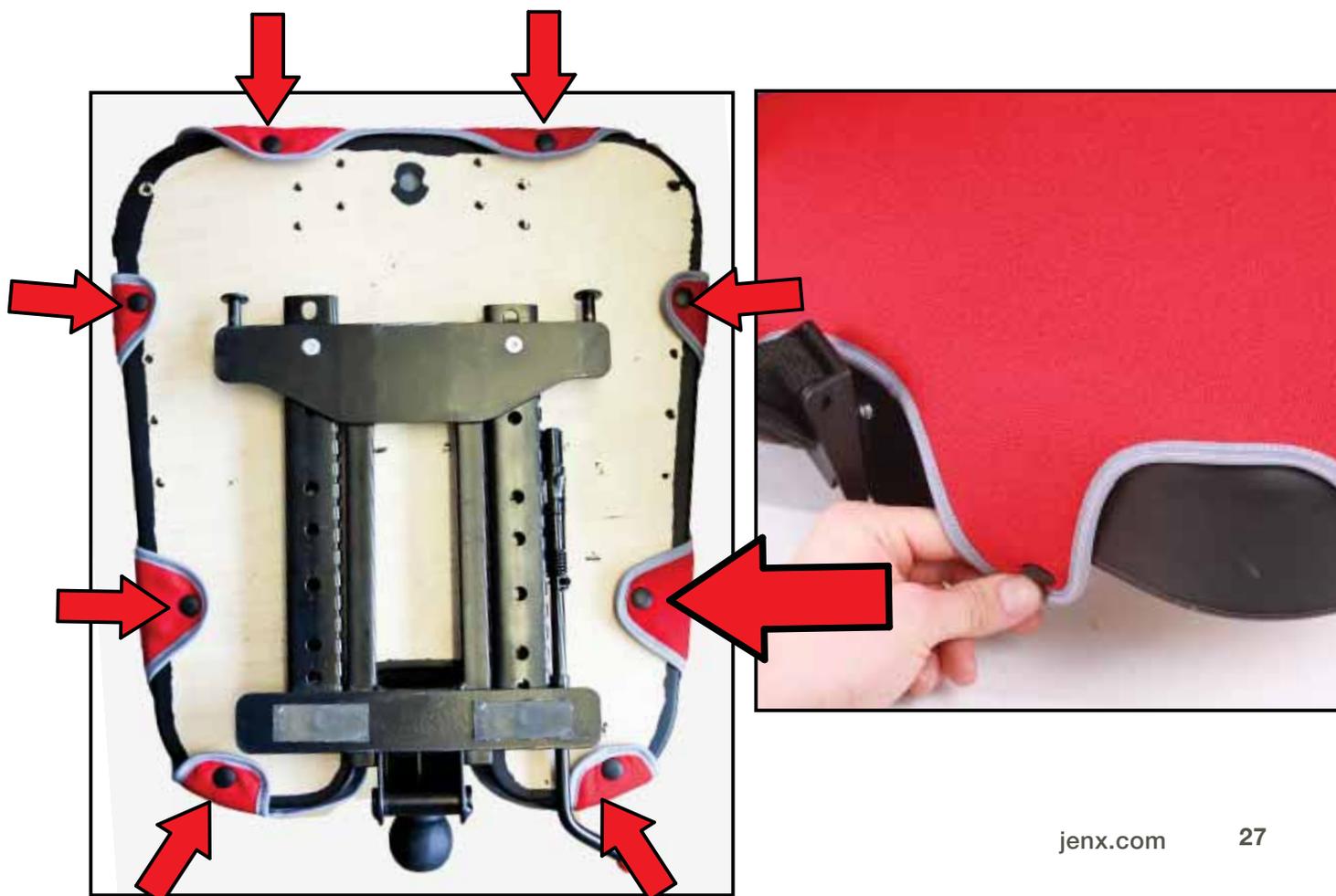


KAPITEL FEM

Kliniske justeringer





Hældning i rummet

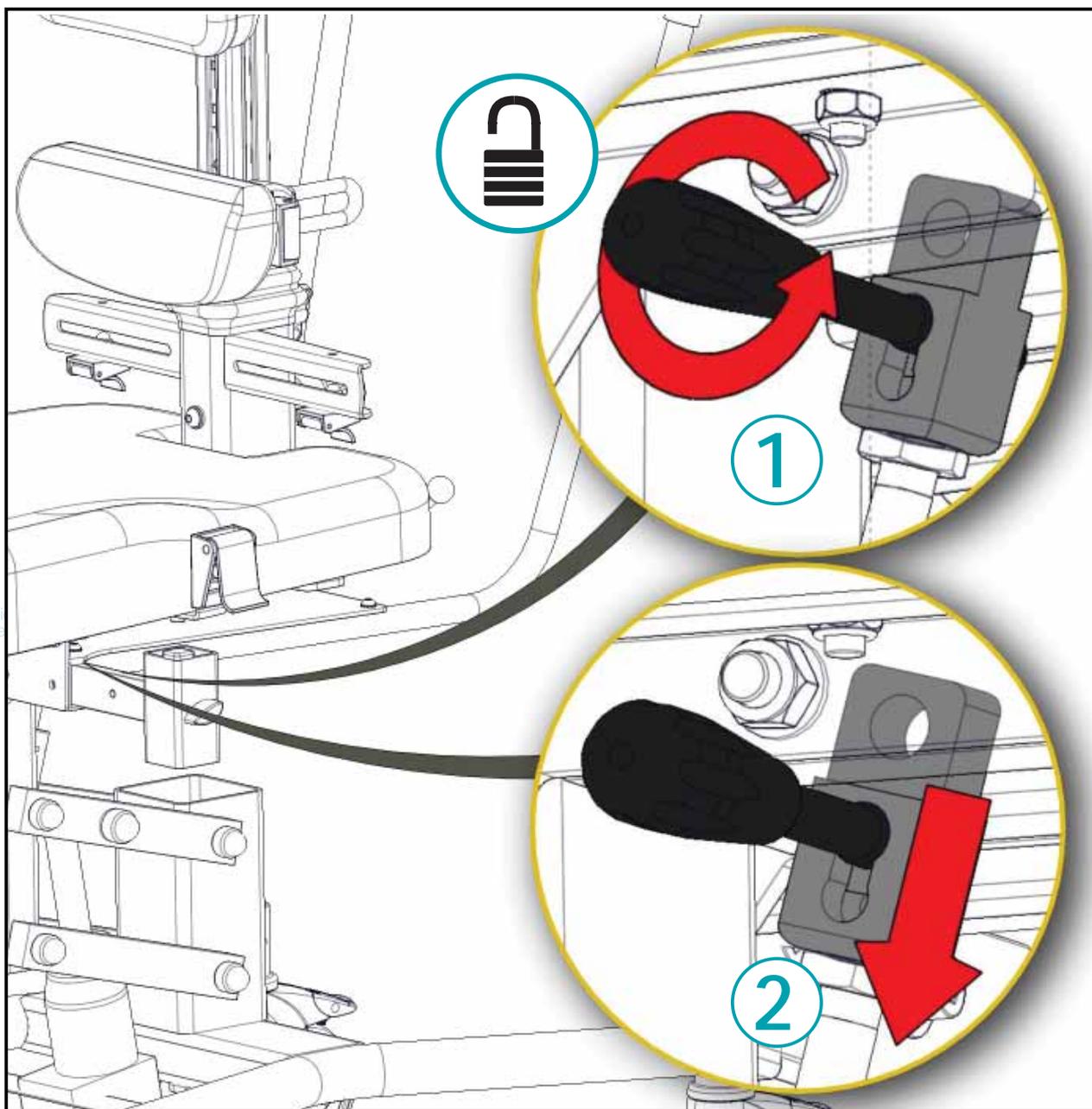


Profess
tekniske

Hældning i rummet

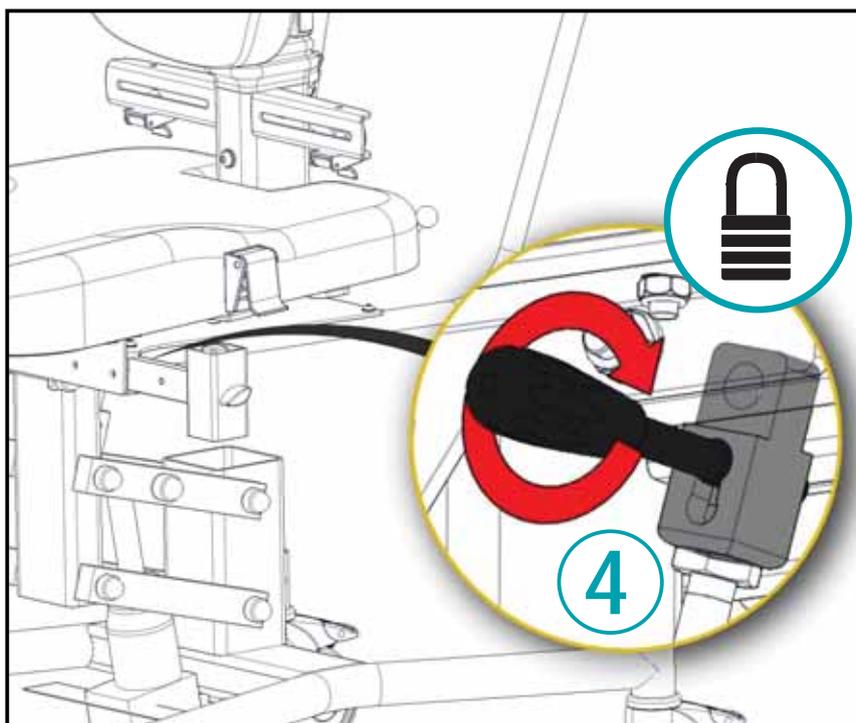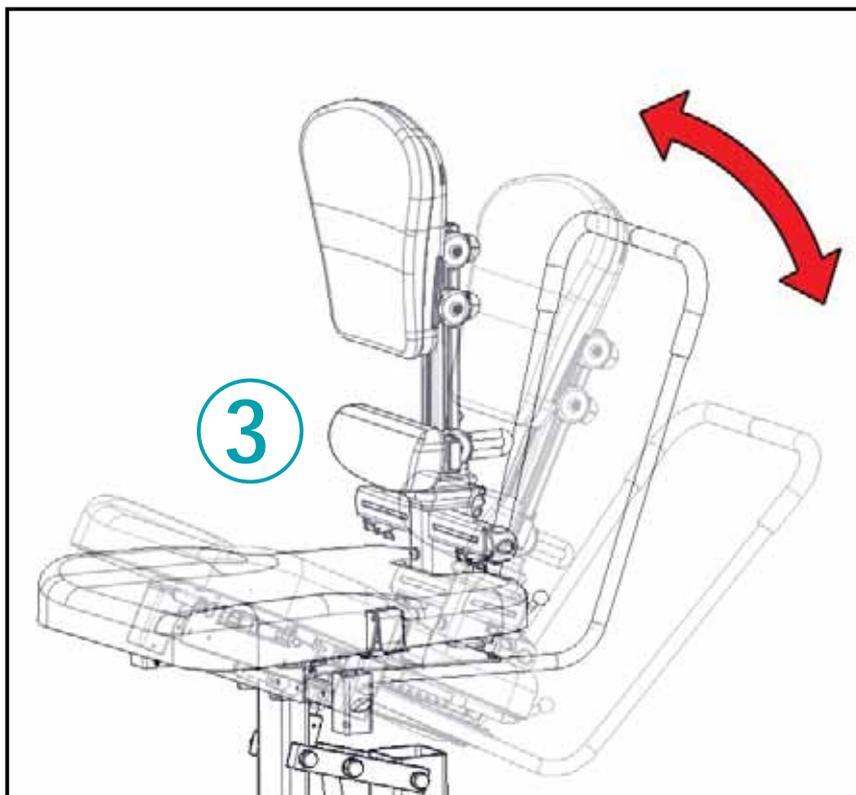


Sædedybde

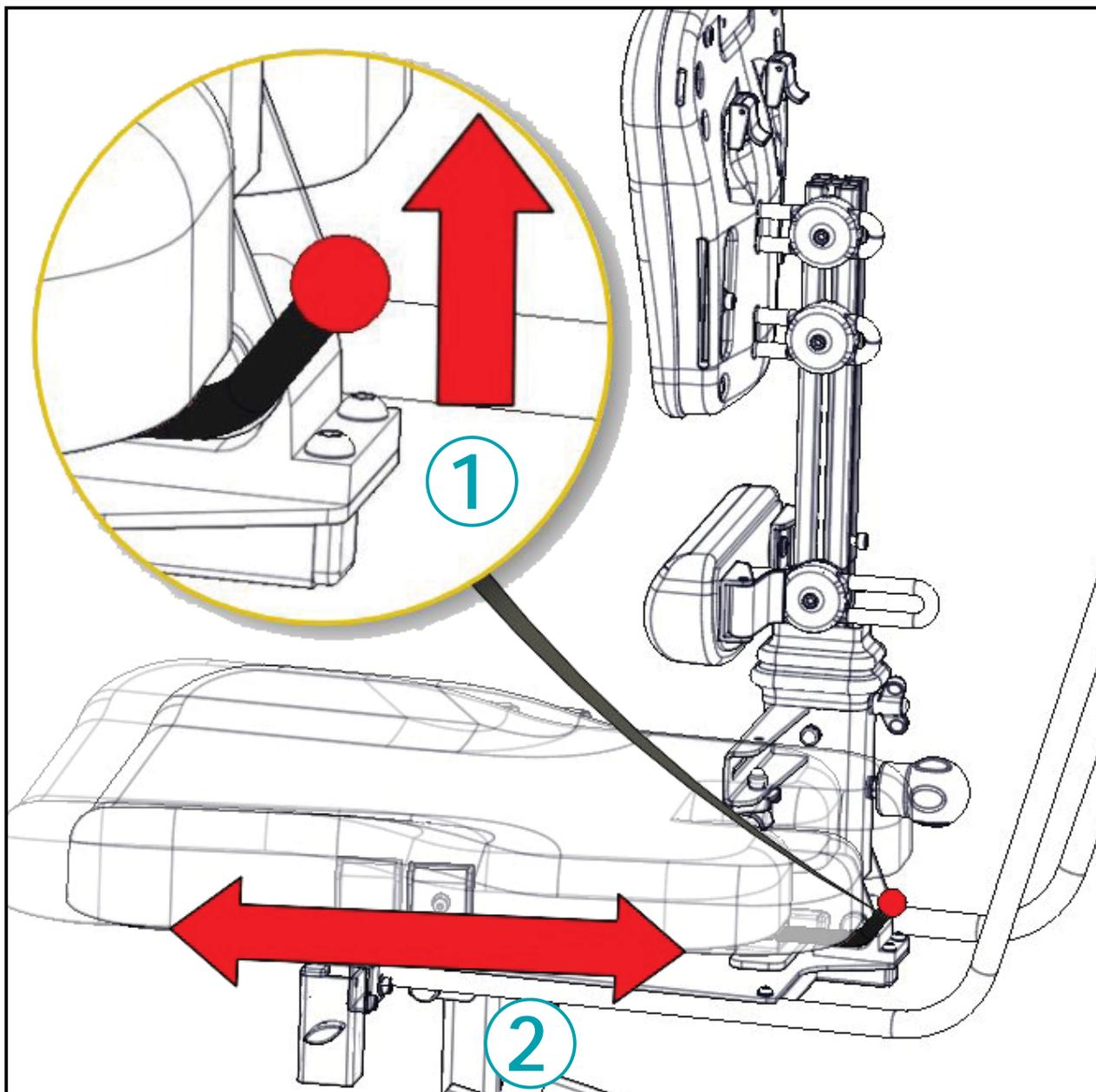

Lændestøtte




Vinkel-, højde- og dybdejustering

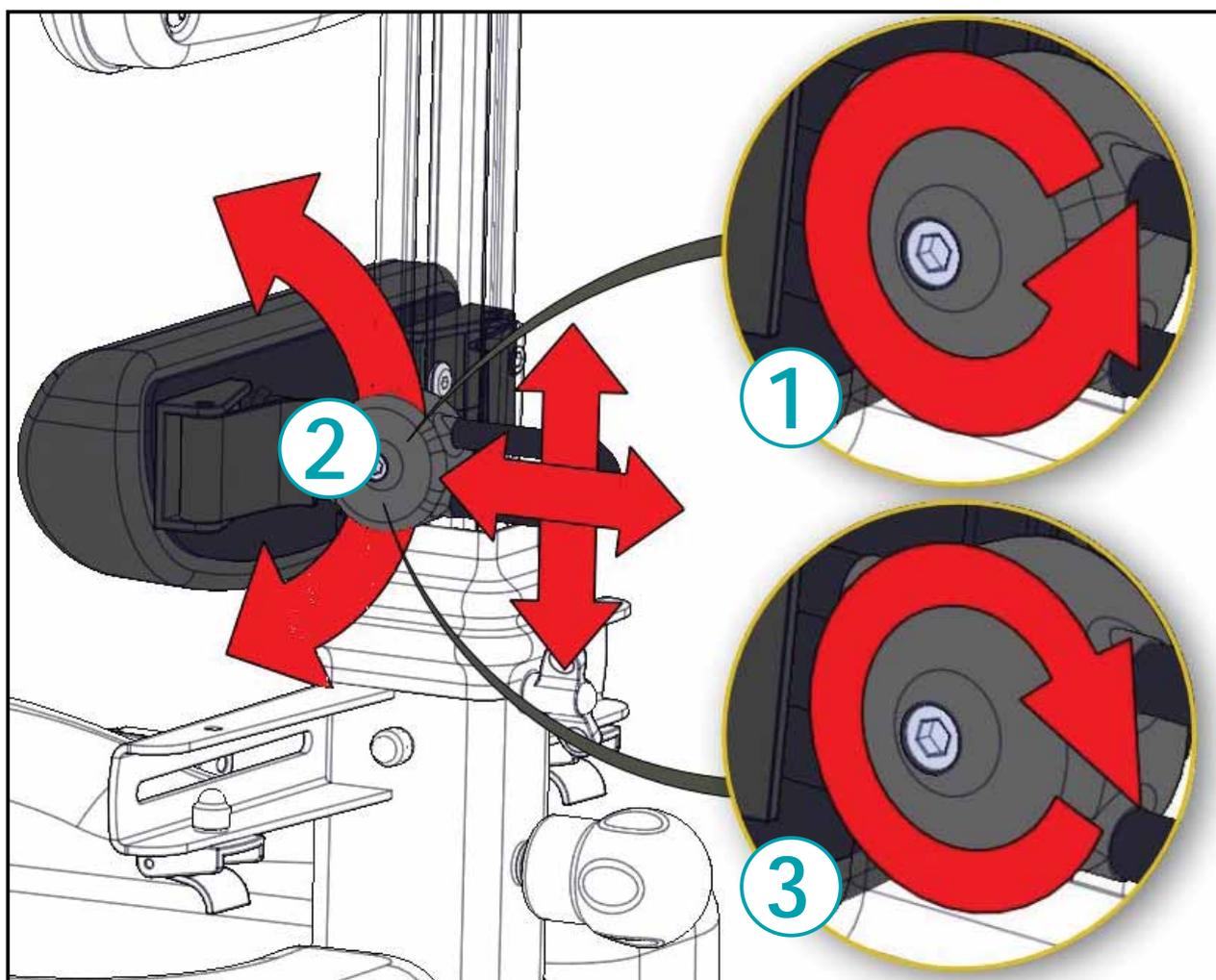

Abduktionsstøtte




Påsætning af abduktionsstøtte

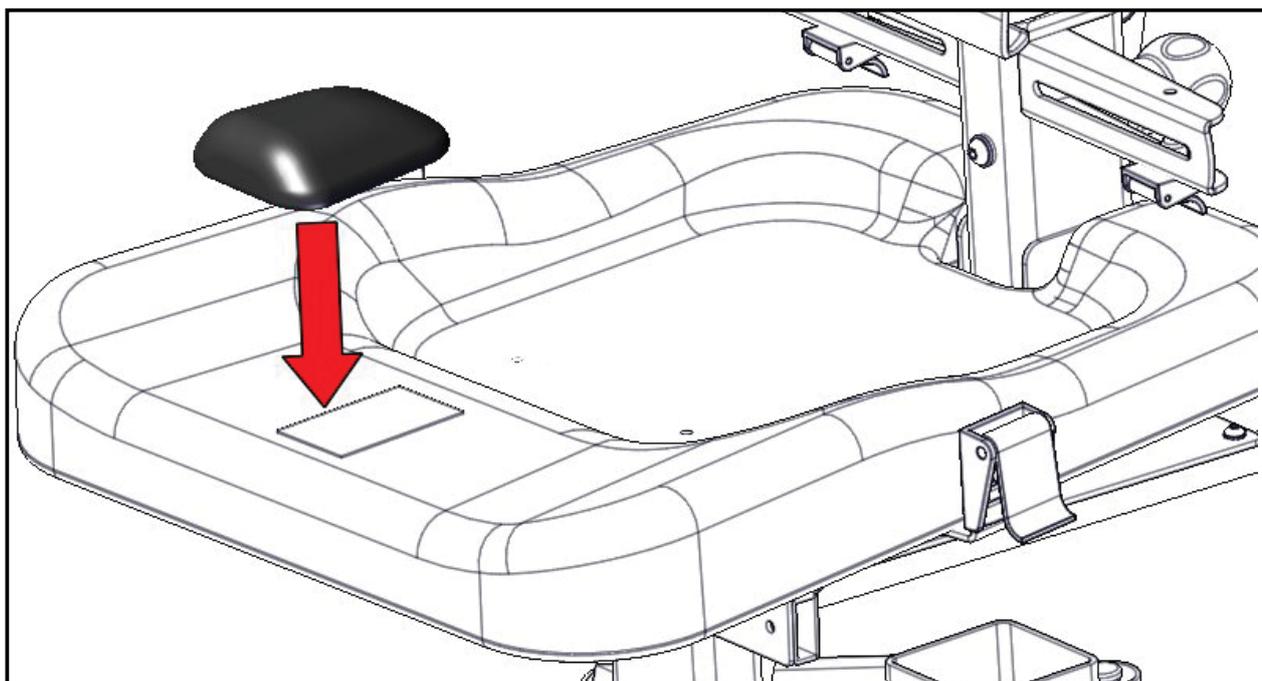

Ryglæn




Påsætning af ryglæn på bagsøjle

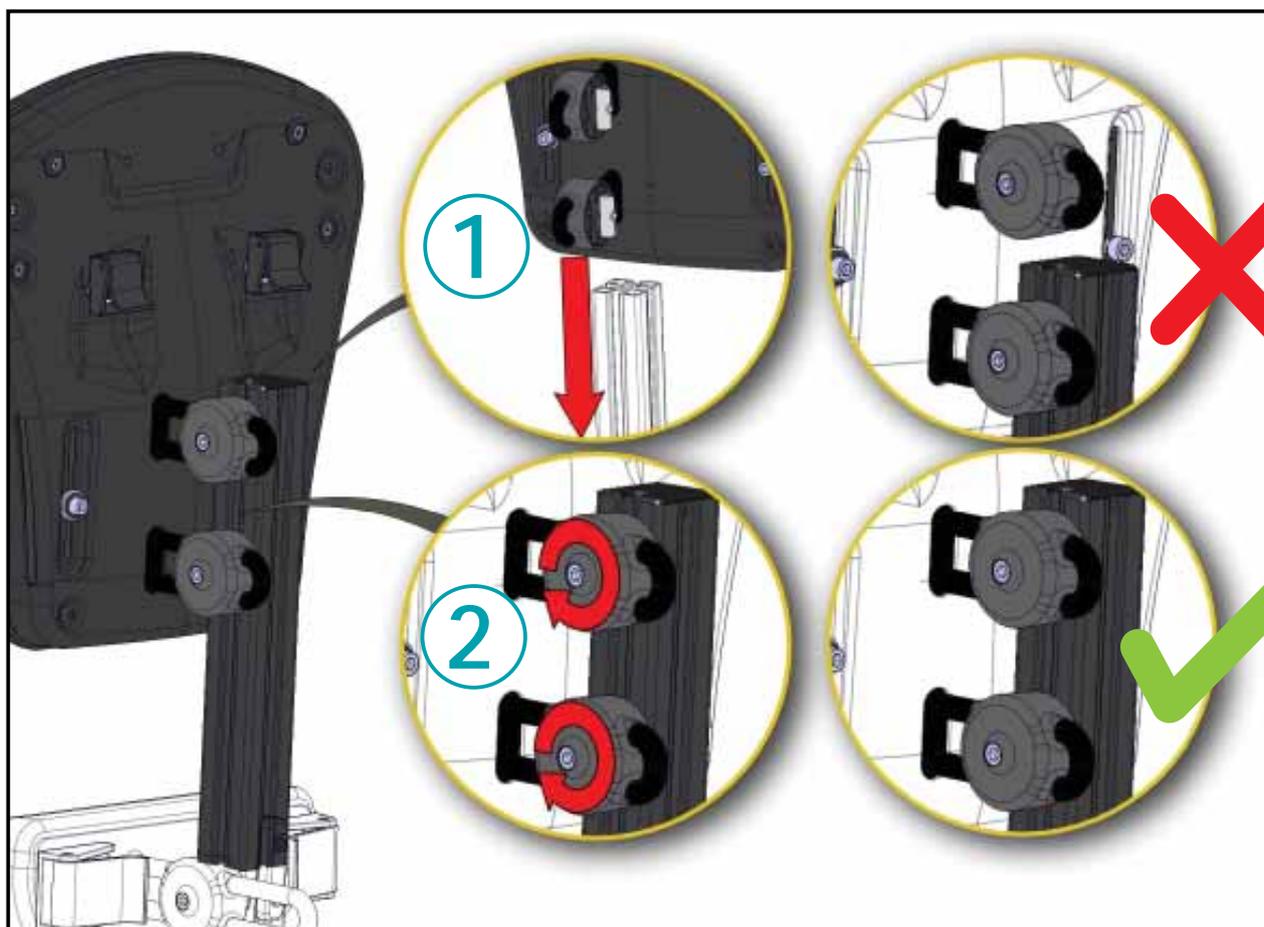

Ryglæn



Justering af højde, dybde og vinkel på ryglæn

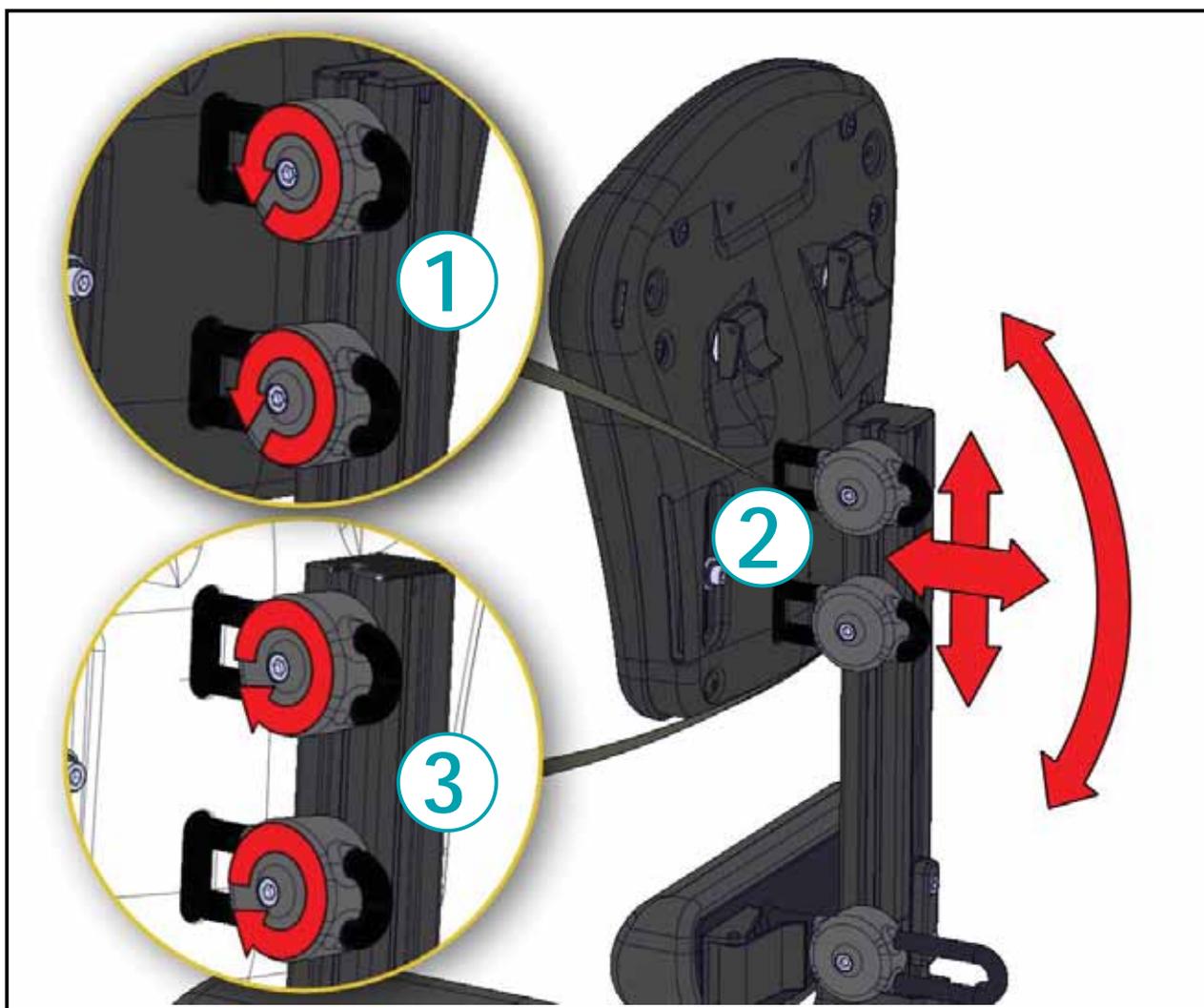

Stang til fodhviler




Montering af stang til fodhviler (fast og med justerbar vinkel)




Fodhvilere

Montering af fodhvilere

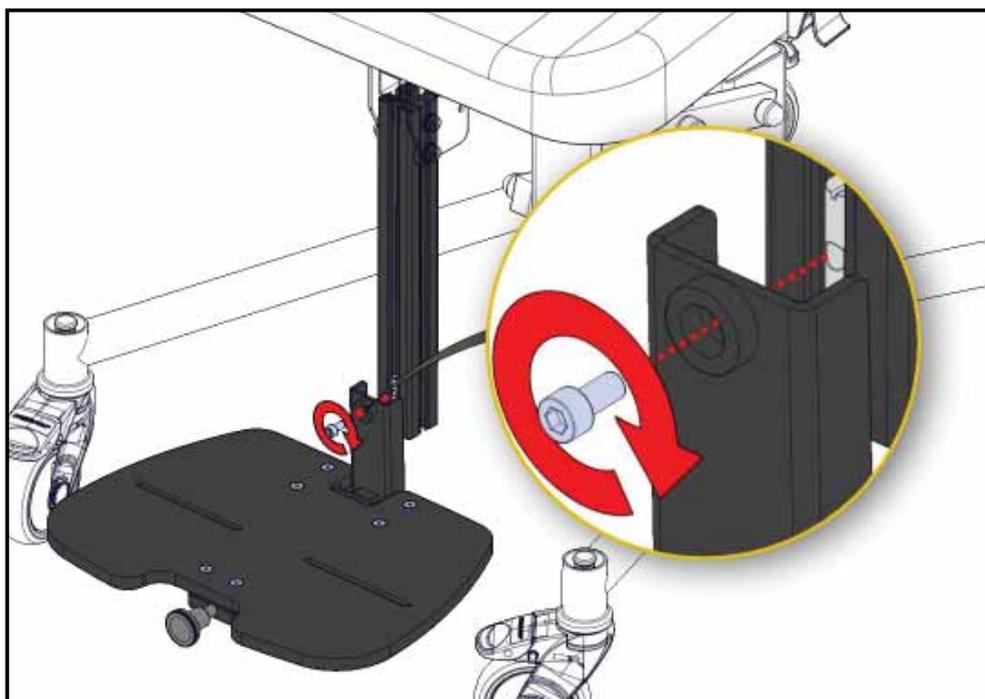




Justering af fodhvilere

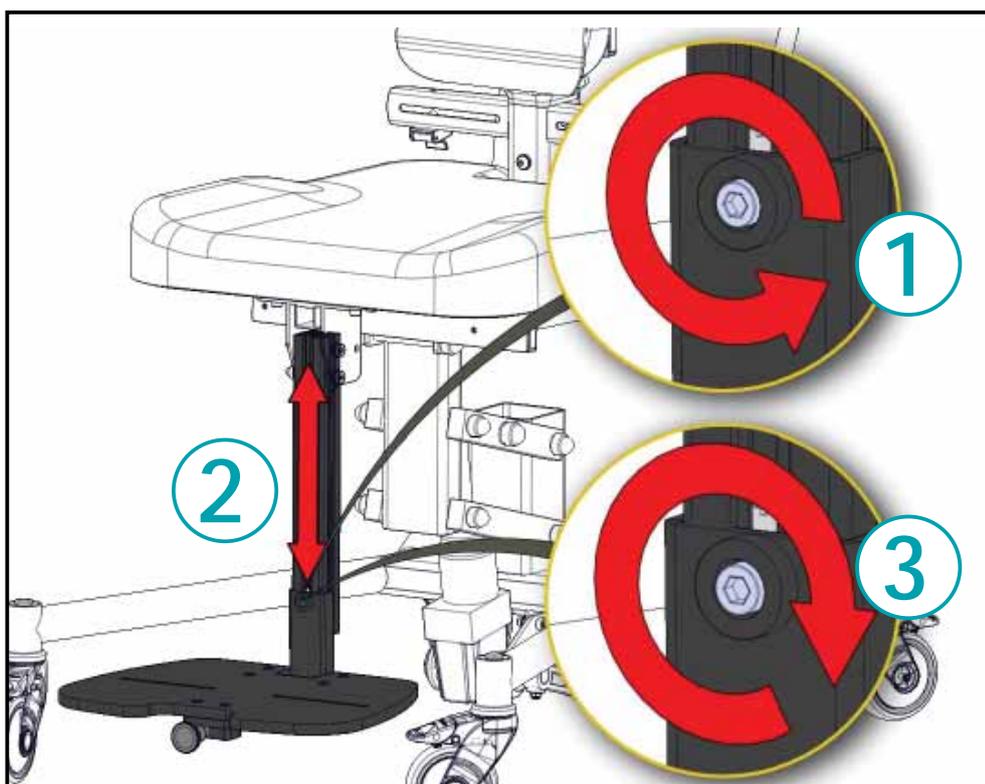

Vinkeljusterbar fodhviler





Justering af vinkel på fodhviler

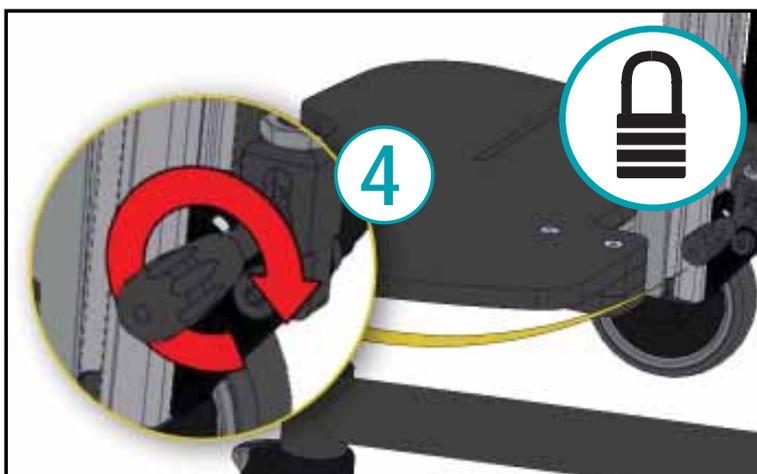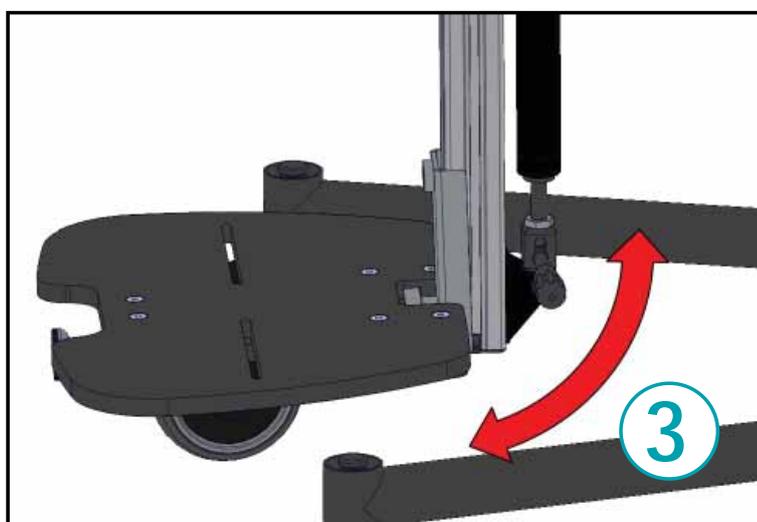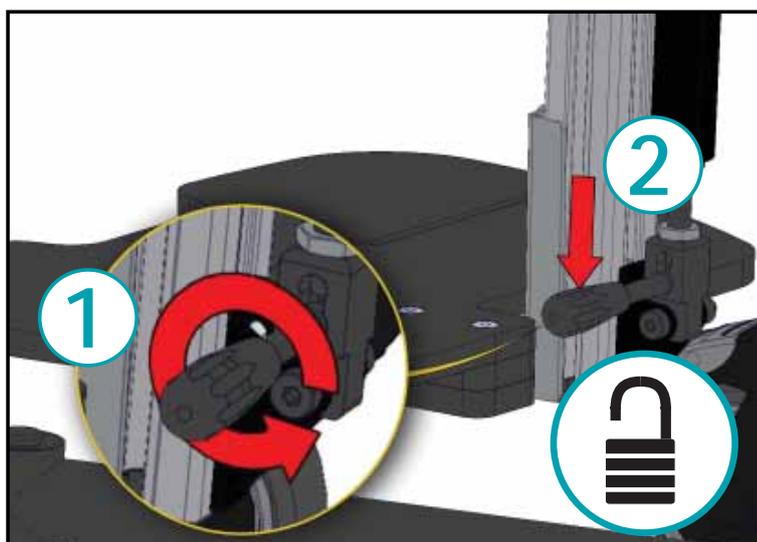


Abduktionsblok




Montering af abduktionsblok

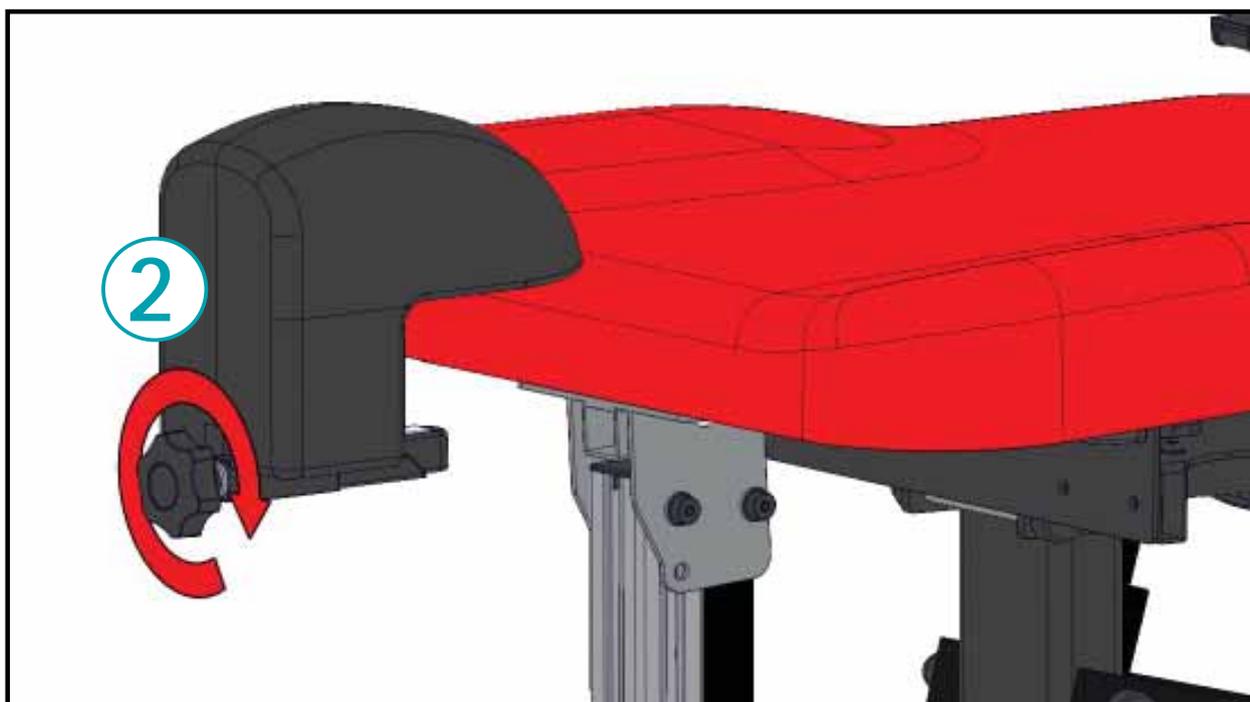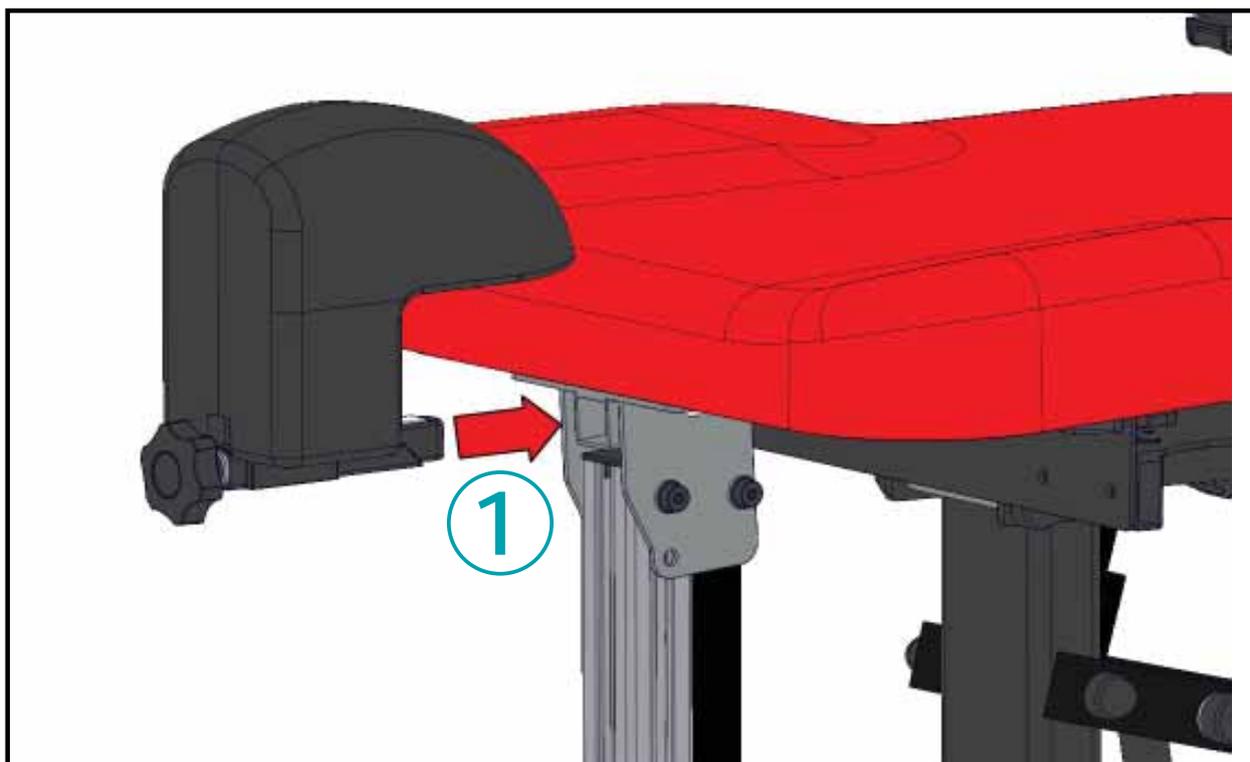

Foldbar fodhviler

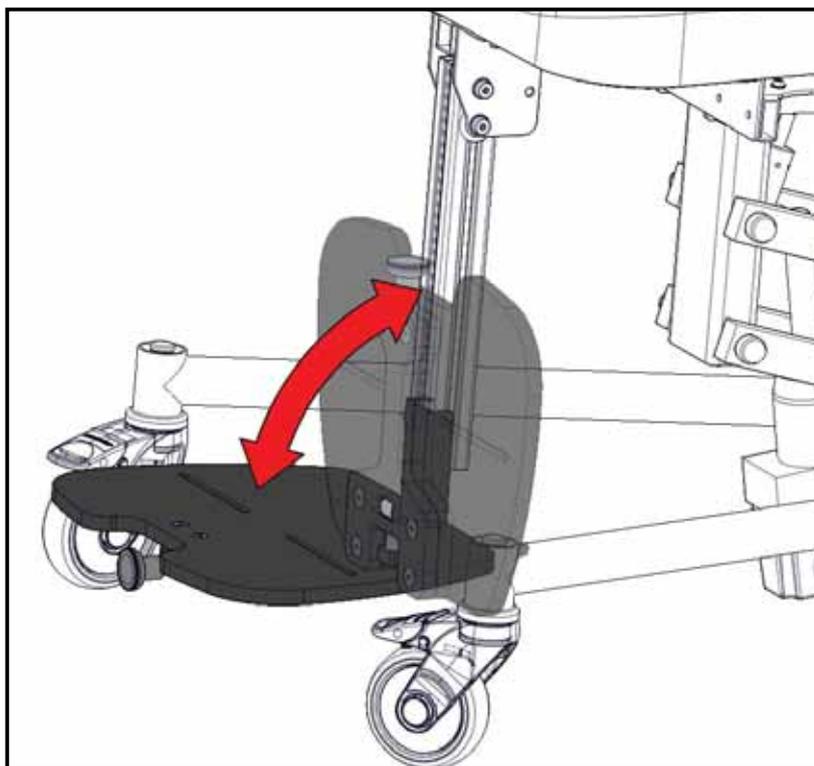

Vinkel på fodhviler

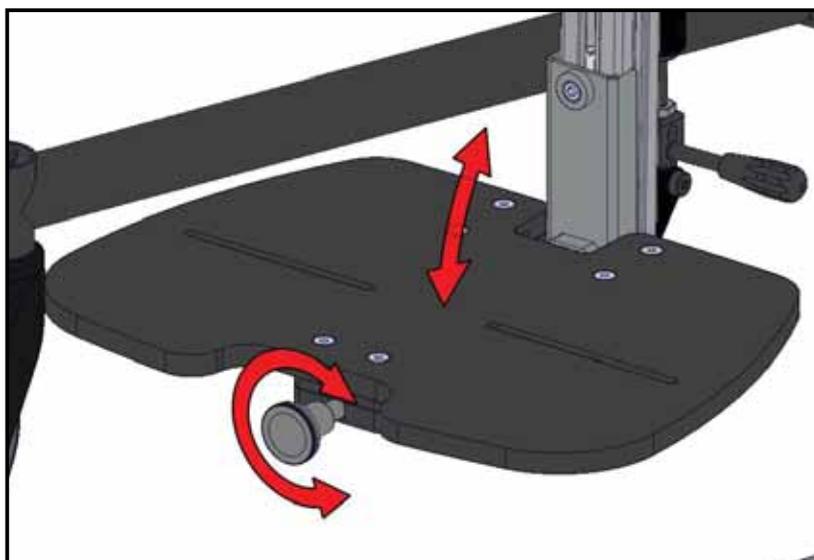

KAPITEL SEKS


Valgfri komponenter



Monteringsbeslag til armlæn




Påsætning af monteringsbeslag til armlæn

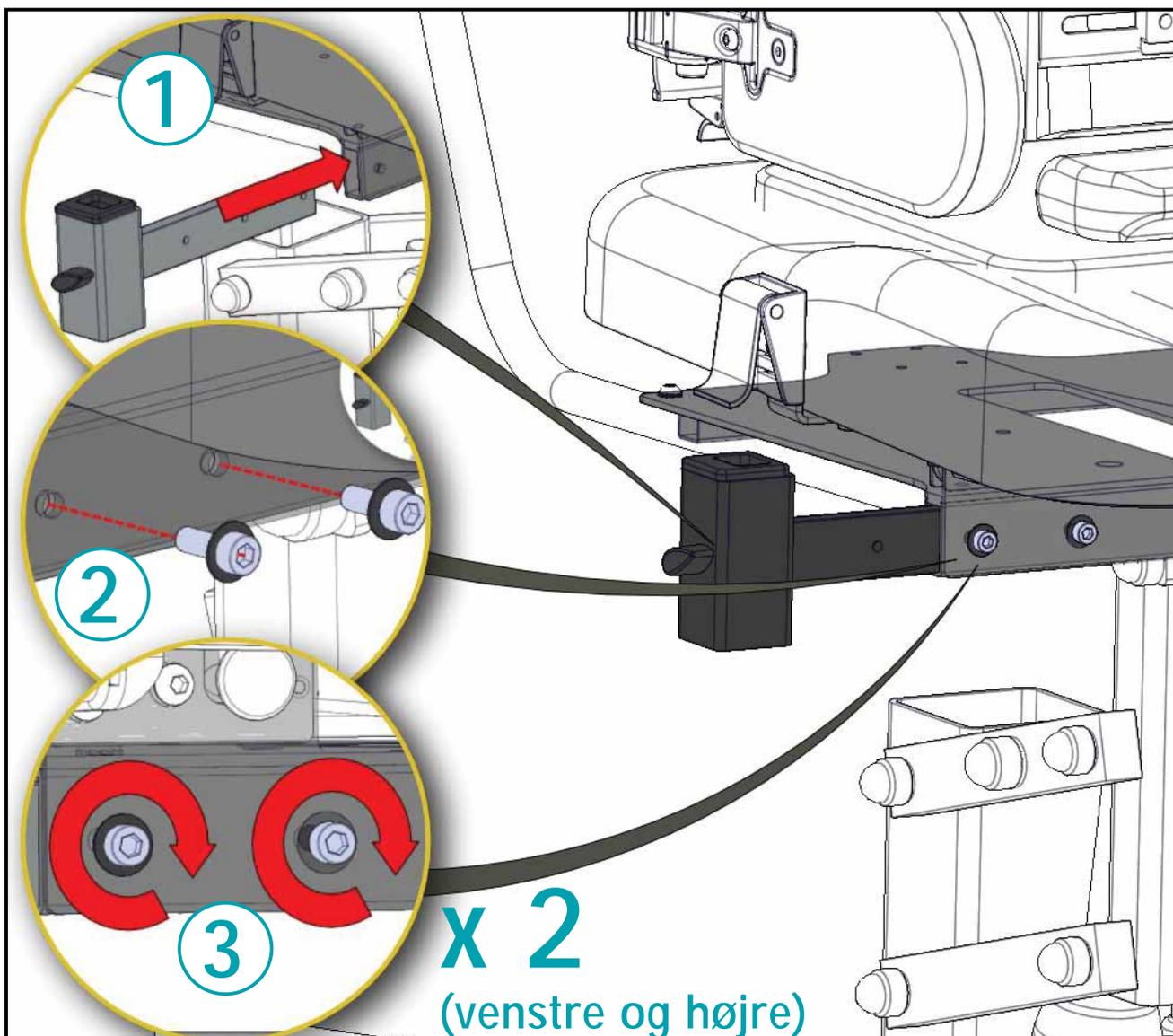


Armlæn



Montering af armlæn

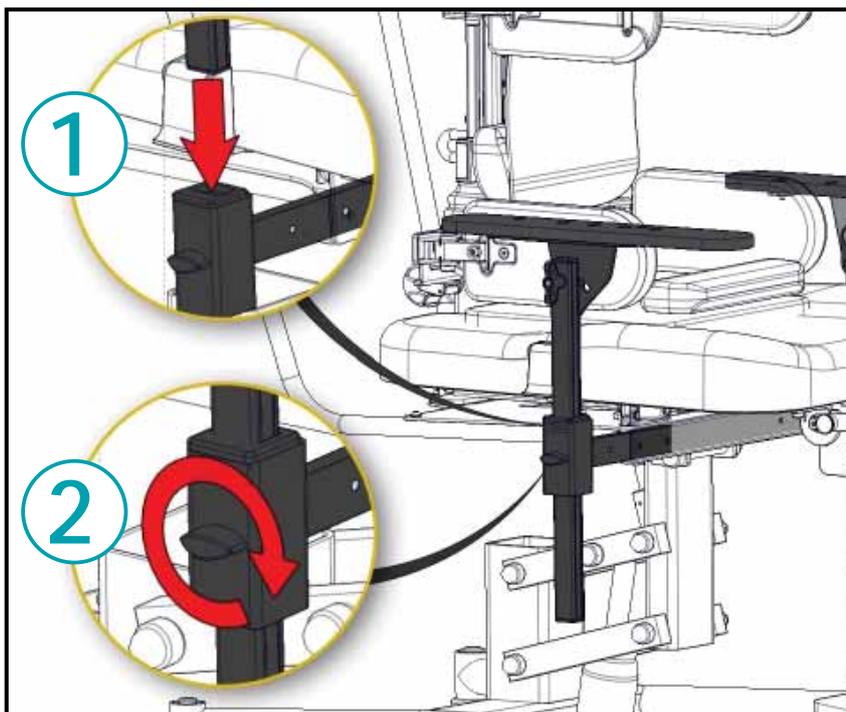


Justering af armlæn

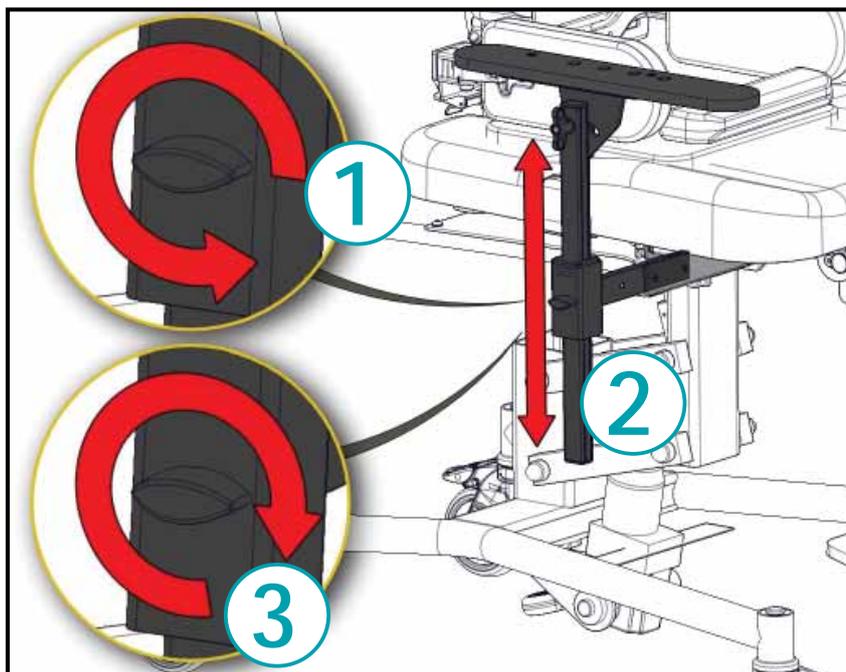


Bord



Påsætning af bord

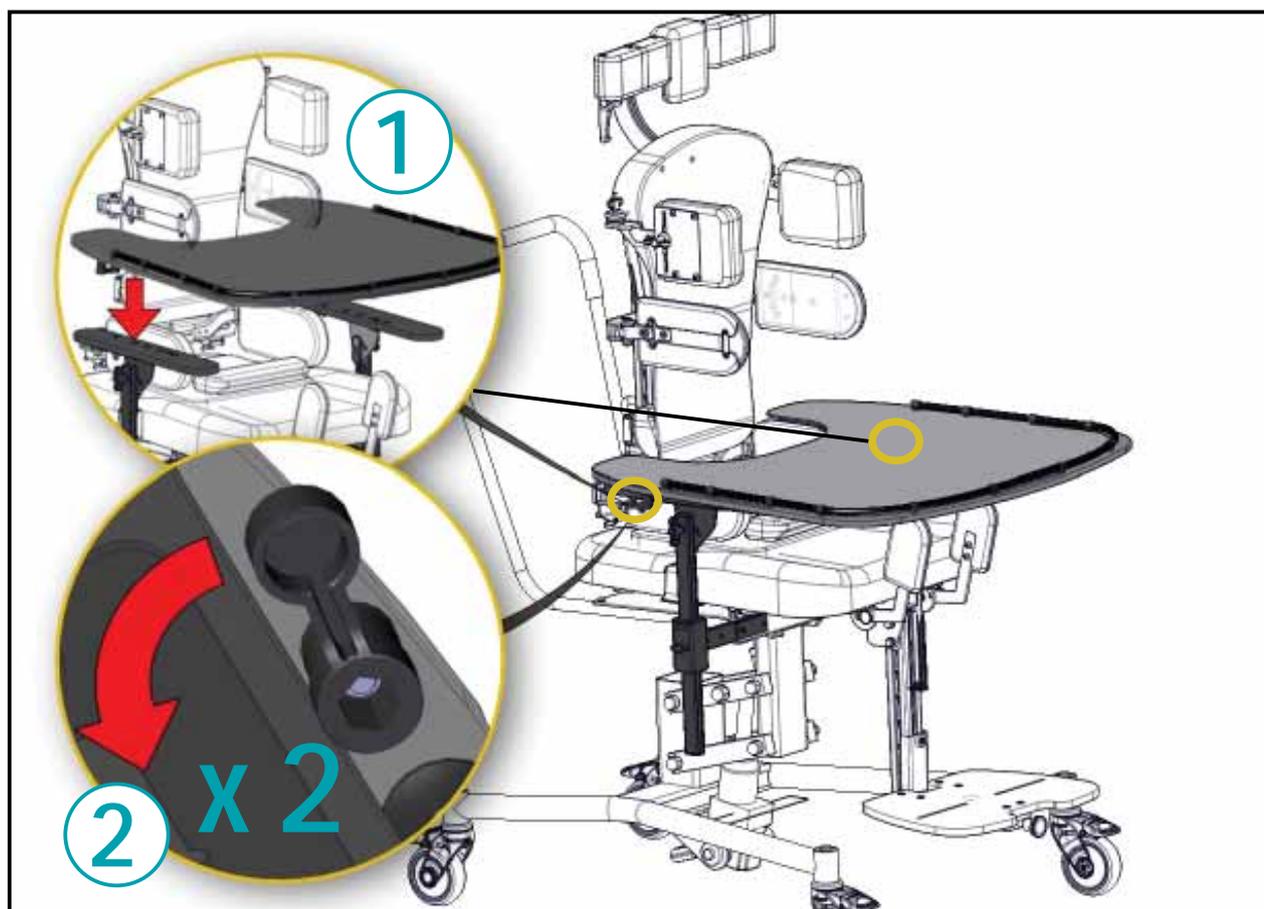


Påsætning af bordskåner

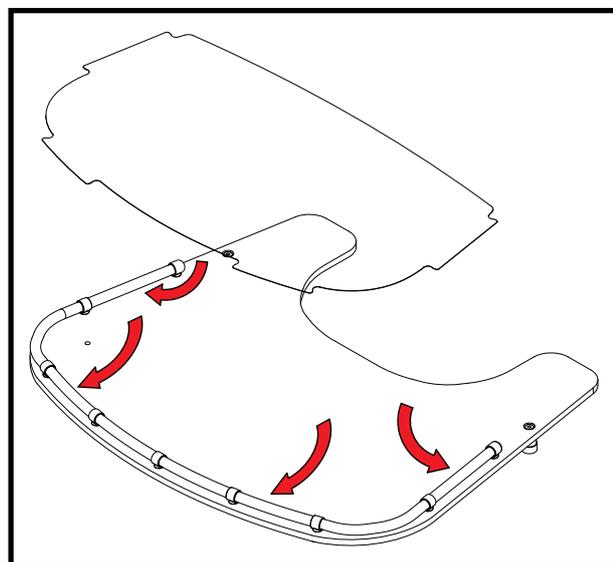

Albueblokke




Montering af albueblokke

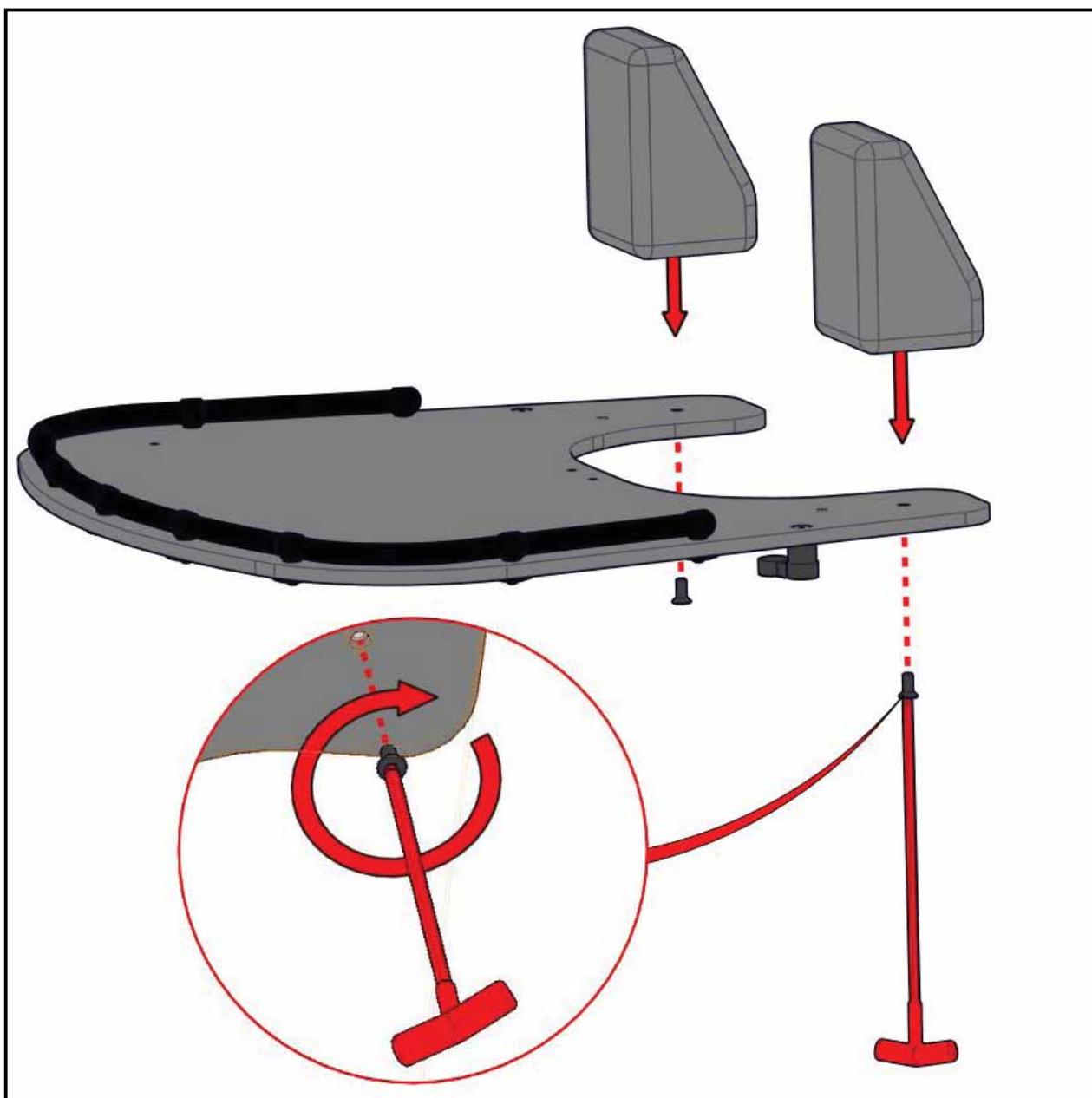


Skulderstøtter



Montering af skulderstøtter

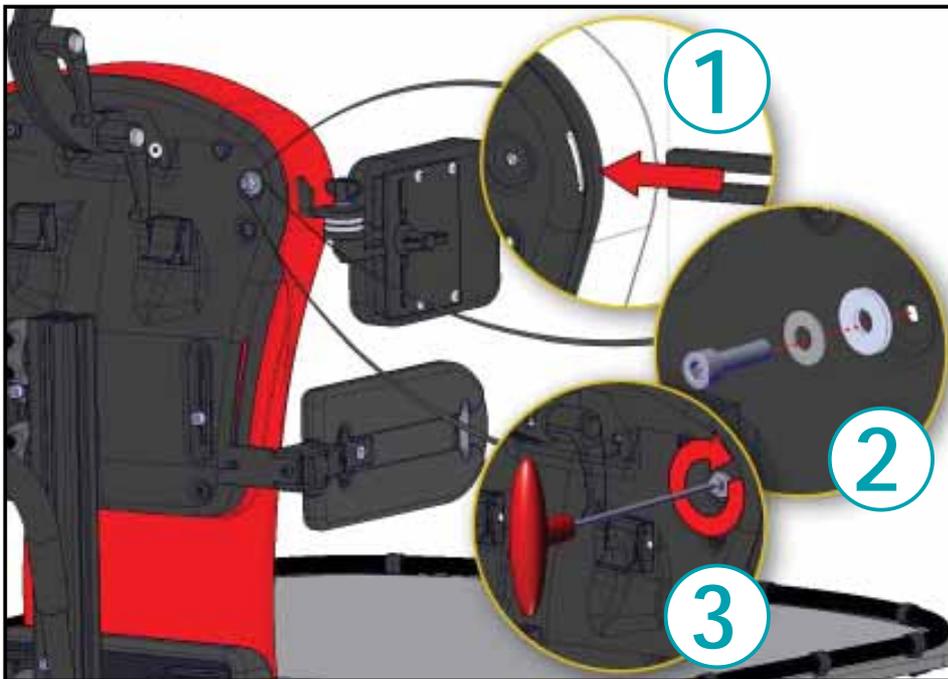


Justering af højde og dybde på skulderstøtter

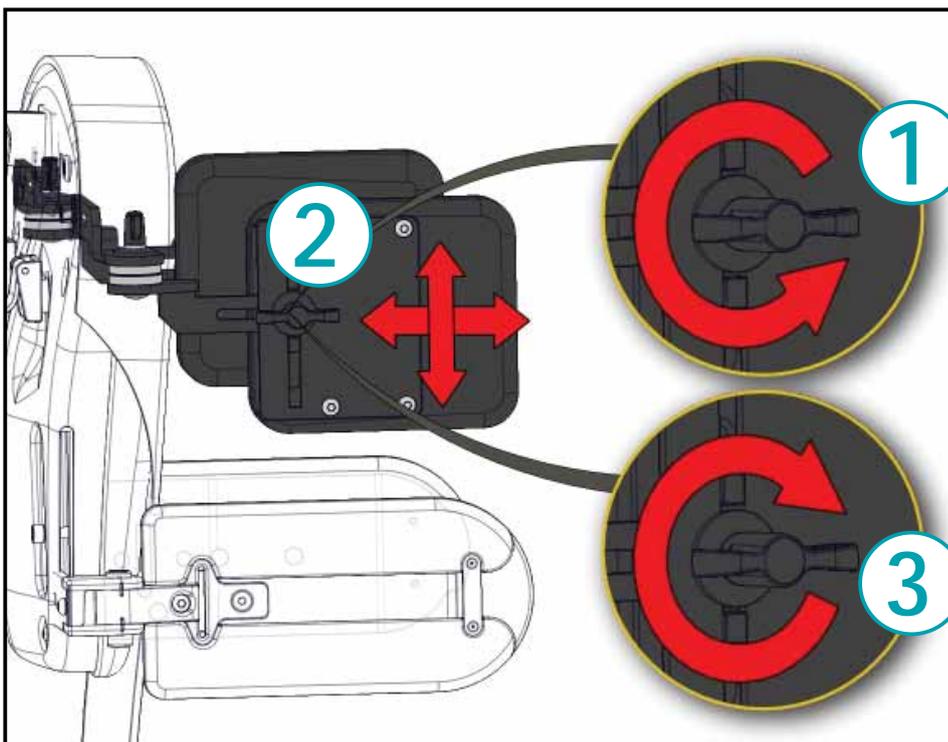


Skulderstøtter



Justering af vinkel på skulderstøtter

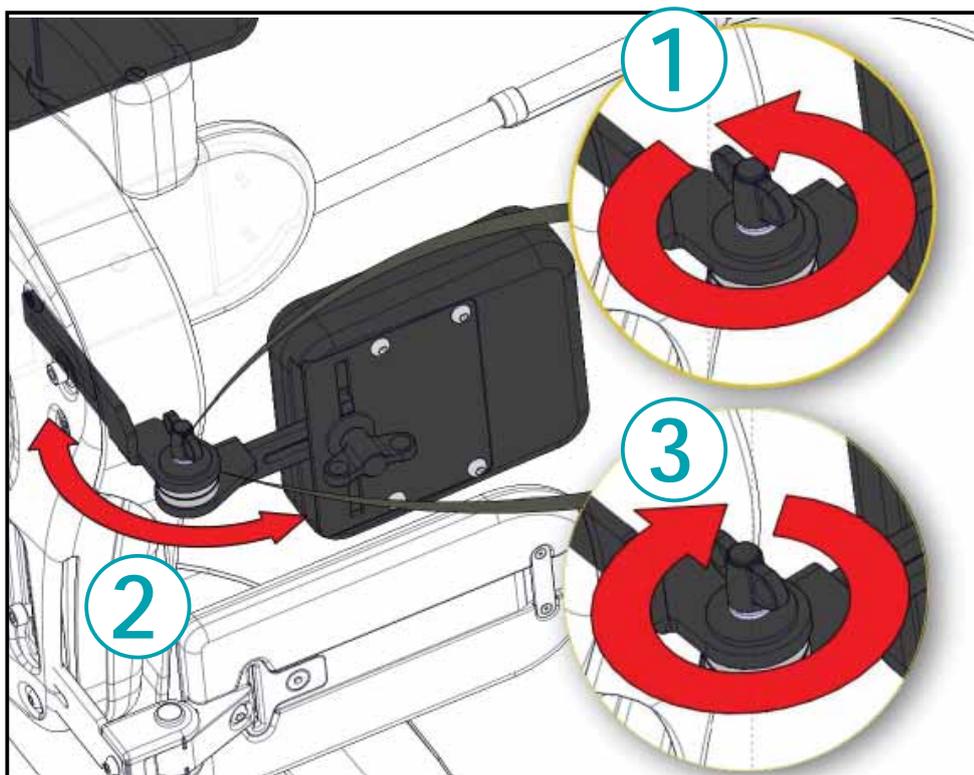


Justering af bredde på skulderstøtter

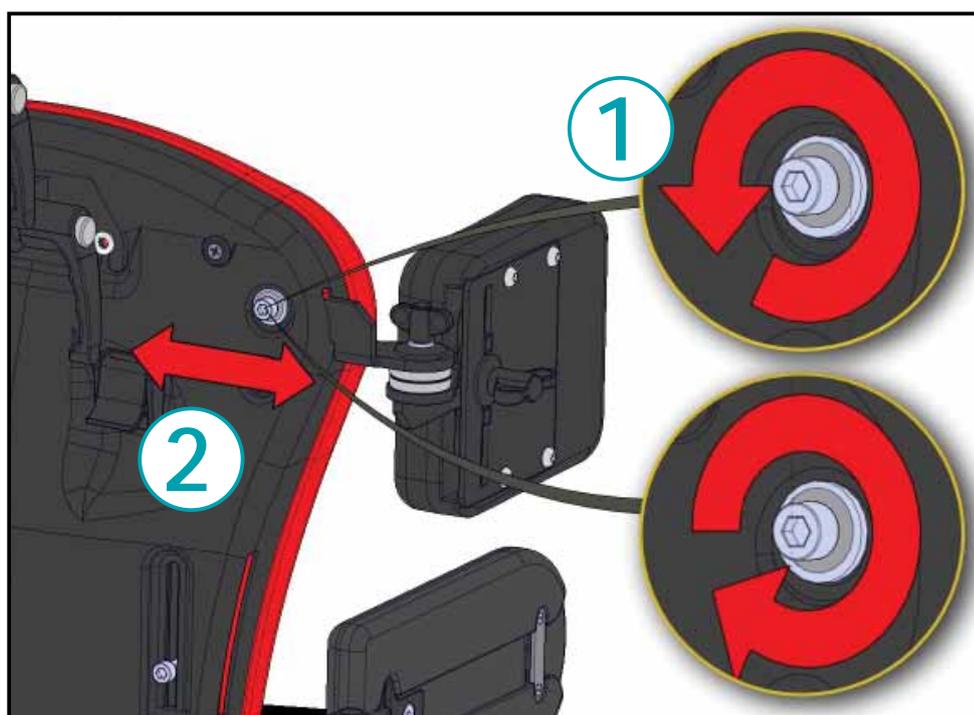

Hoftestøtter




Montering af hoftestøtter

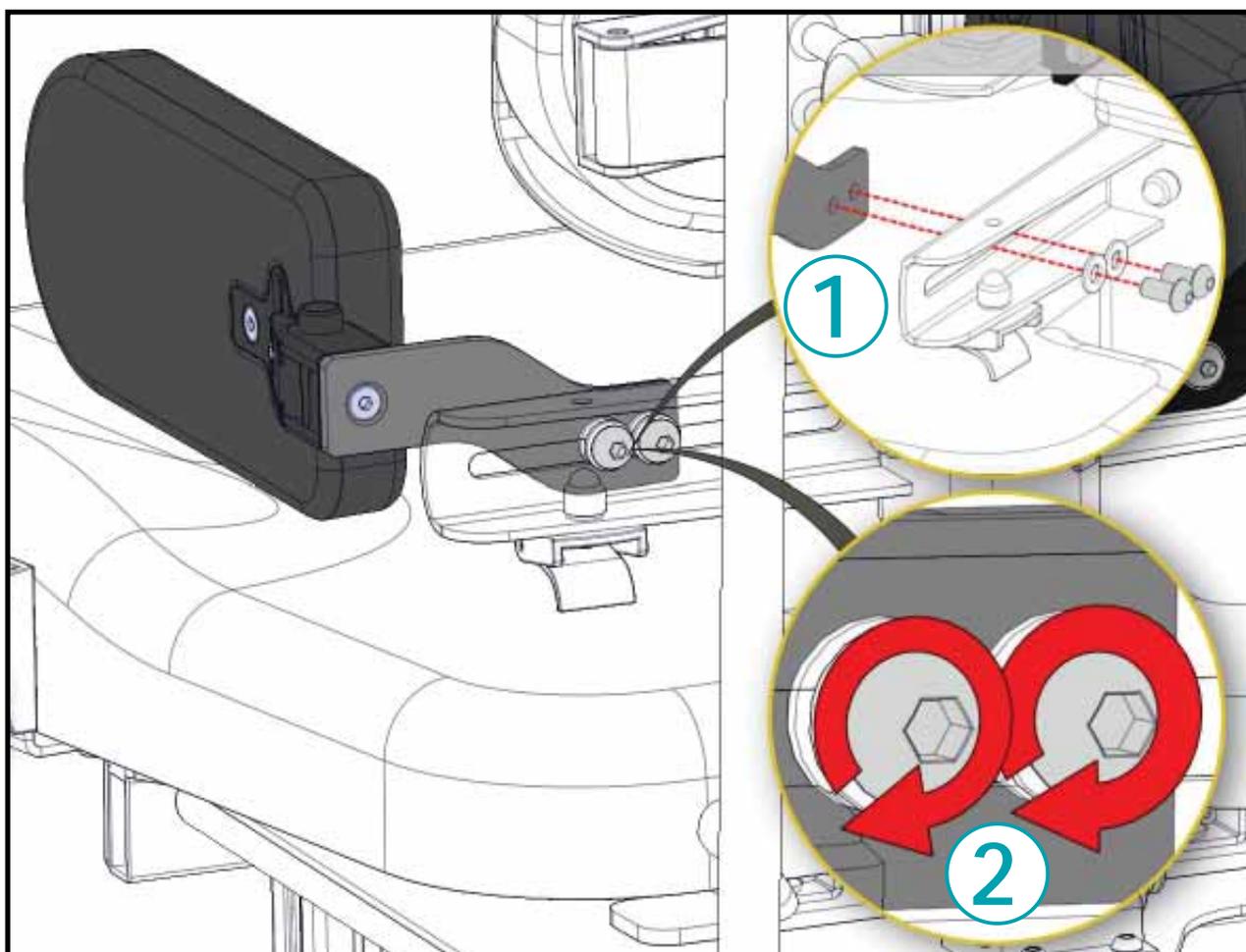


Hoftestøtter



Justering af bredde på hoftestøtter


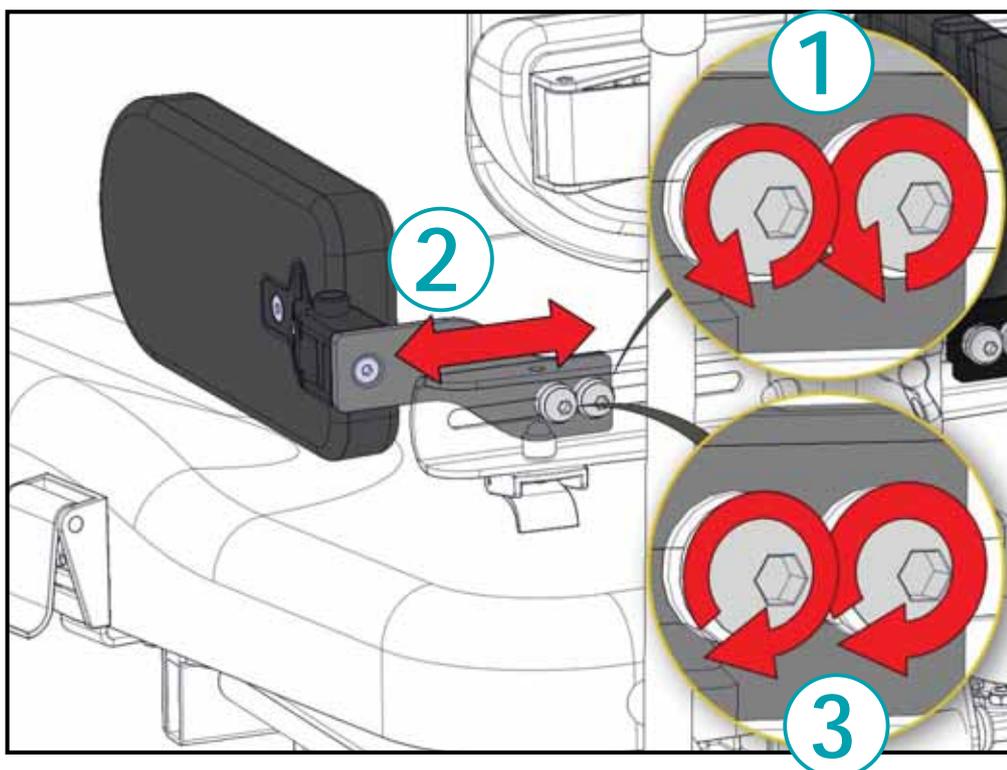


Justering af vinkel på hoftestøtter (kun udløserknap)

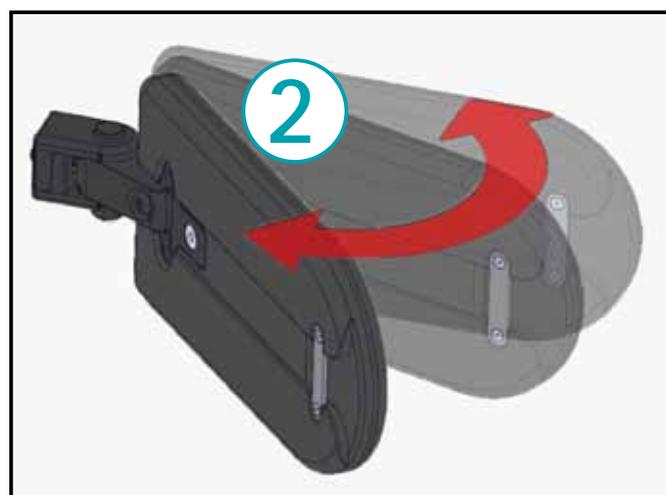


Sandaler

Montering af sandaler

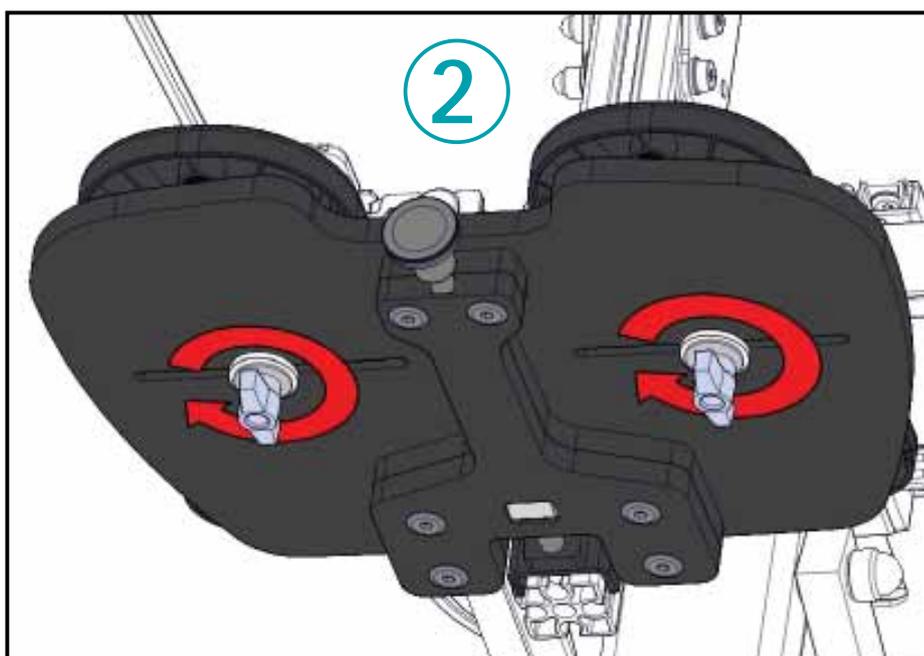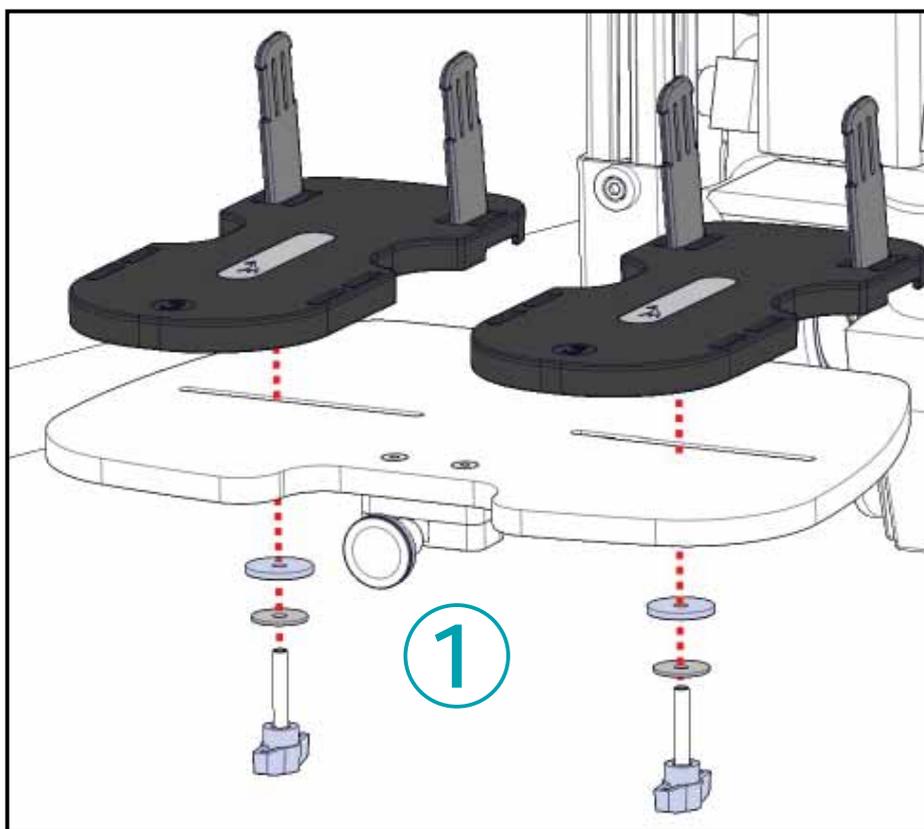


Sandaler

Justering af sandaler

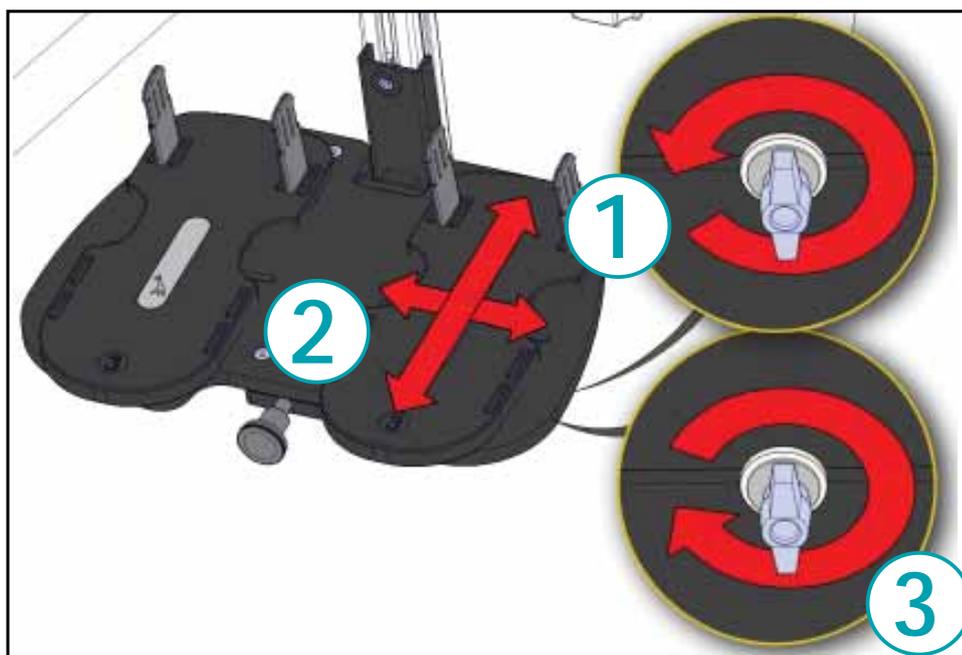

Fodkasse



Montering af fodkasse

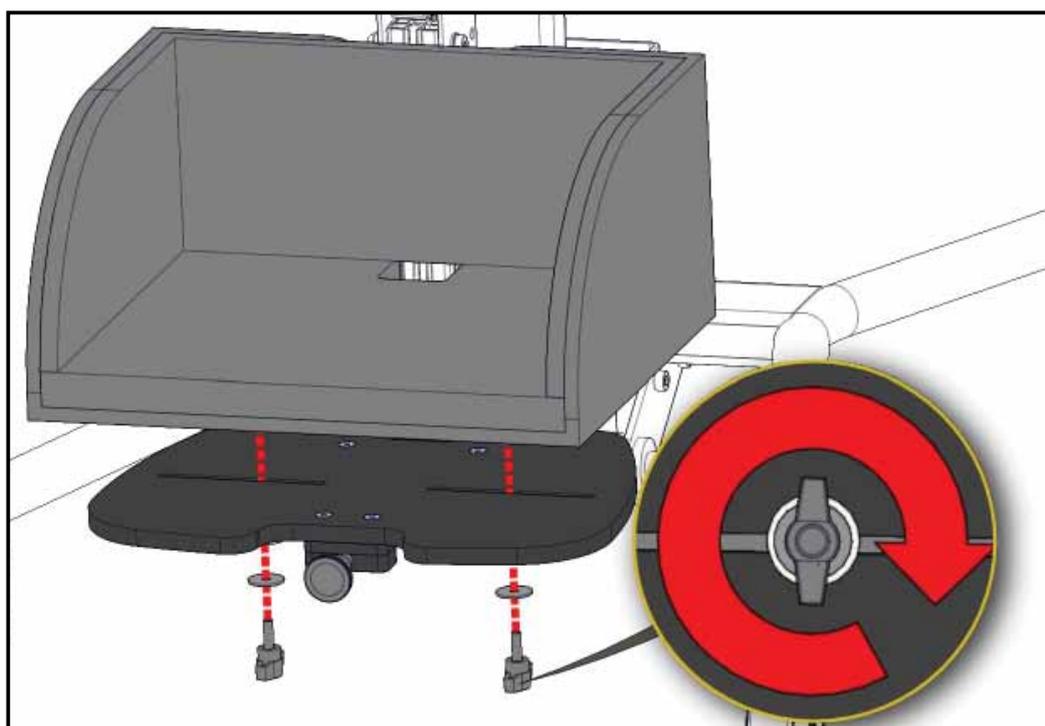

Afstandsstykker for hævnning af sandaler



Montering af afstandsstykker for hævnning af sandaler

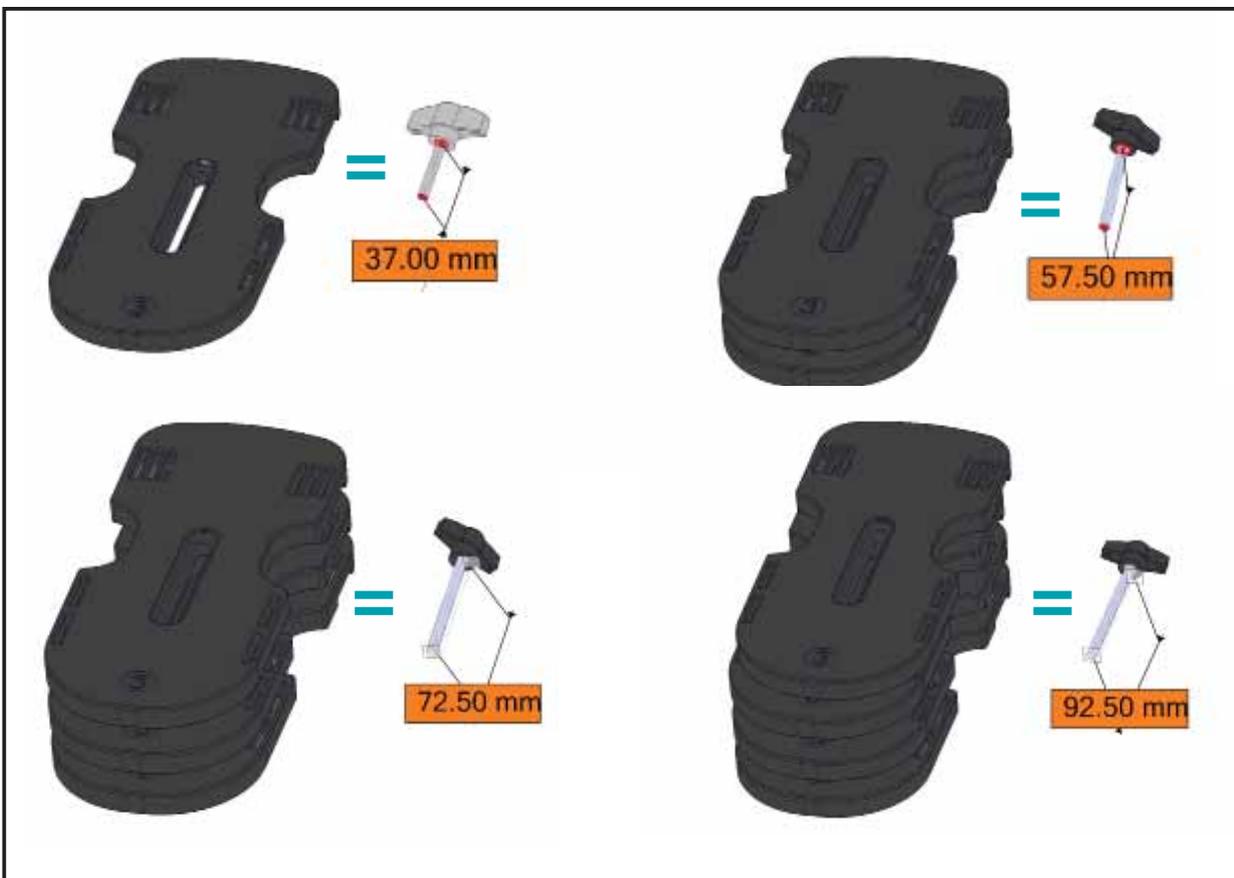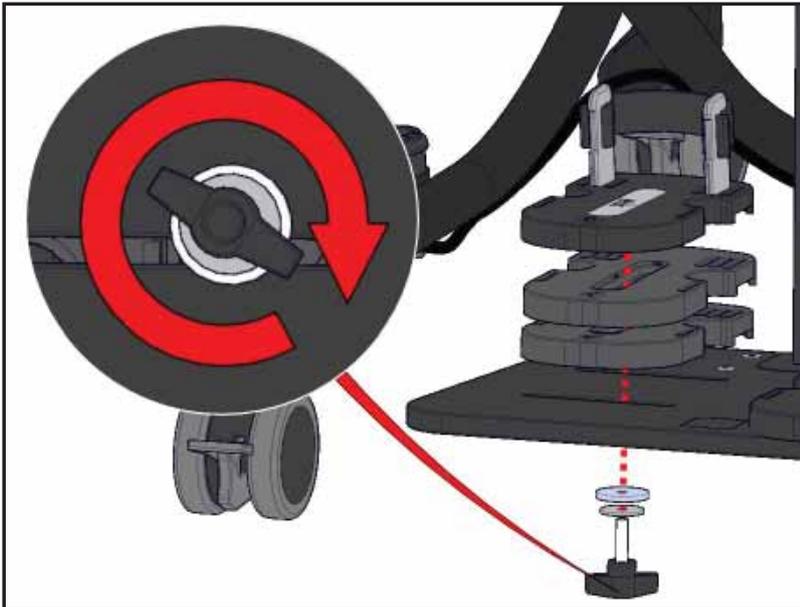

Nakkestøtte




Montering af nakkestøtte



Multigrip-nakkestøtte (MH01)

Oval nakkestøtte (MH02)

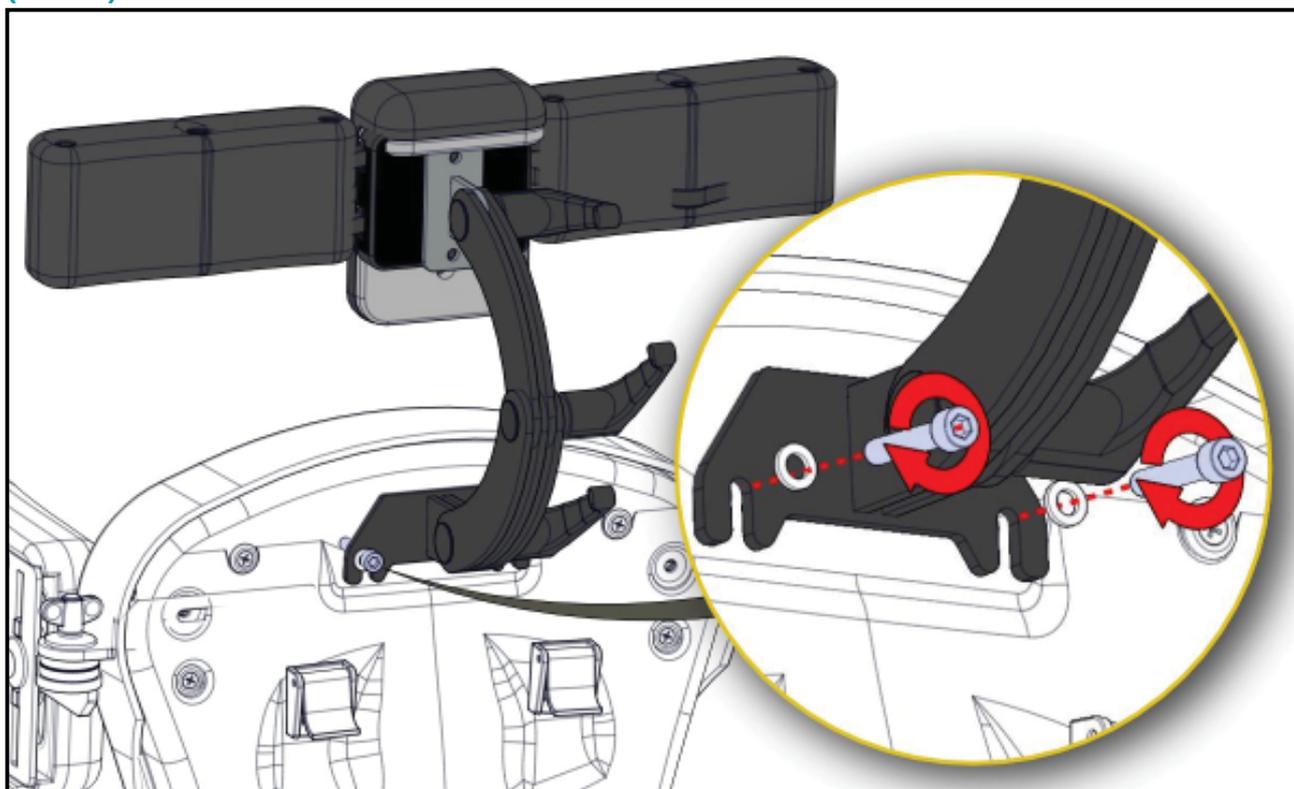

Nakkestøtte



Brug af spændegreb: Løsne



Trin 1: Træk grebet ud for at frigøre



Trin 2: Mens grebet holdes udtrukket, drejes det med uret om i øverste position




Trin 3: Slip grebet



Trin 4: Drej grebet mod uret for at løsne. Gentag trin 1 og 4 ovenfor for at løsne yderligere.

Nakkestøtte

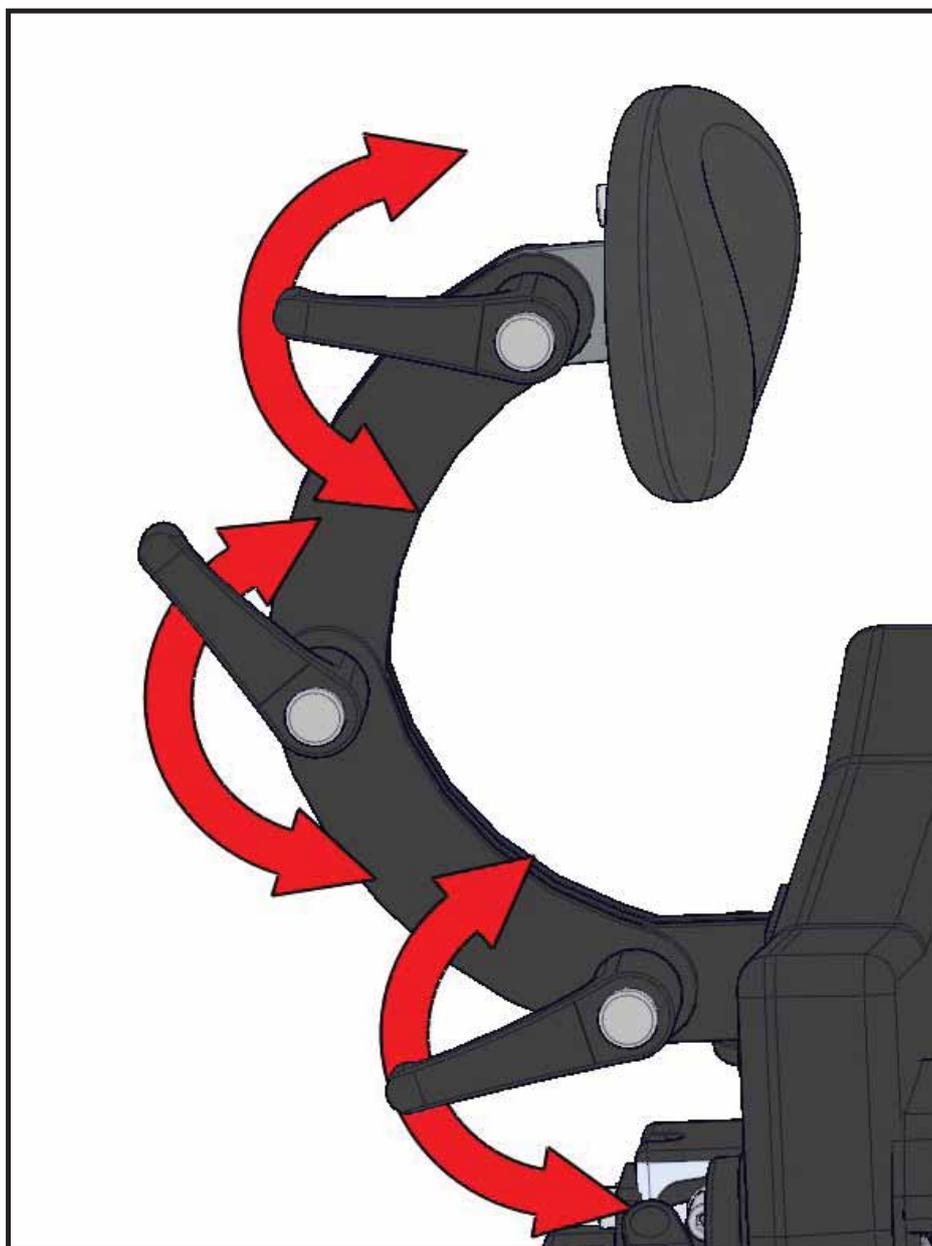

Juster vinklen på den samling, du lige har løsnet



Det skal altid sikres at greb og håndtag efterlades i en hensigtsmæssig og sikker position



Det må sikres at nakkestøtten ikke sættes i en position, hvor brugeren kan komme i berøring med metaldele

Nakkestøtte



Brug af spændegreb Spænd



Trin 1: Drej håndgrebet med uret for at spænde. Hvis nakkestøtten behøver at spændes, yderligere forsæt til trin 2.



Trin 2: Træk grebet ud for at frigøre skralden



Trin 3: Drej grebet mod uret




Trin 4: Slip håndgrebet og vend tilbage til trin 1

Multigrip-nakkestøtte



Anvend disse bolte til at justere vinklen på Multigrip-nakkestøttens led

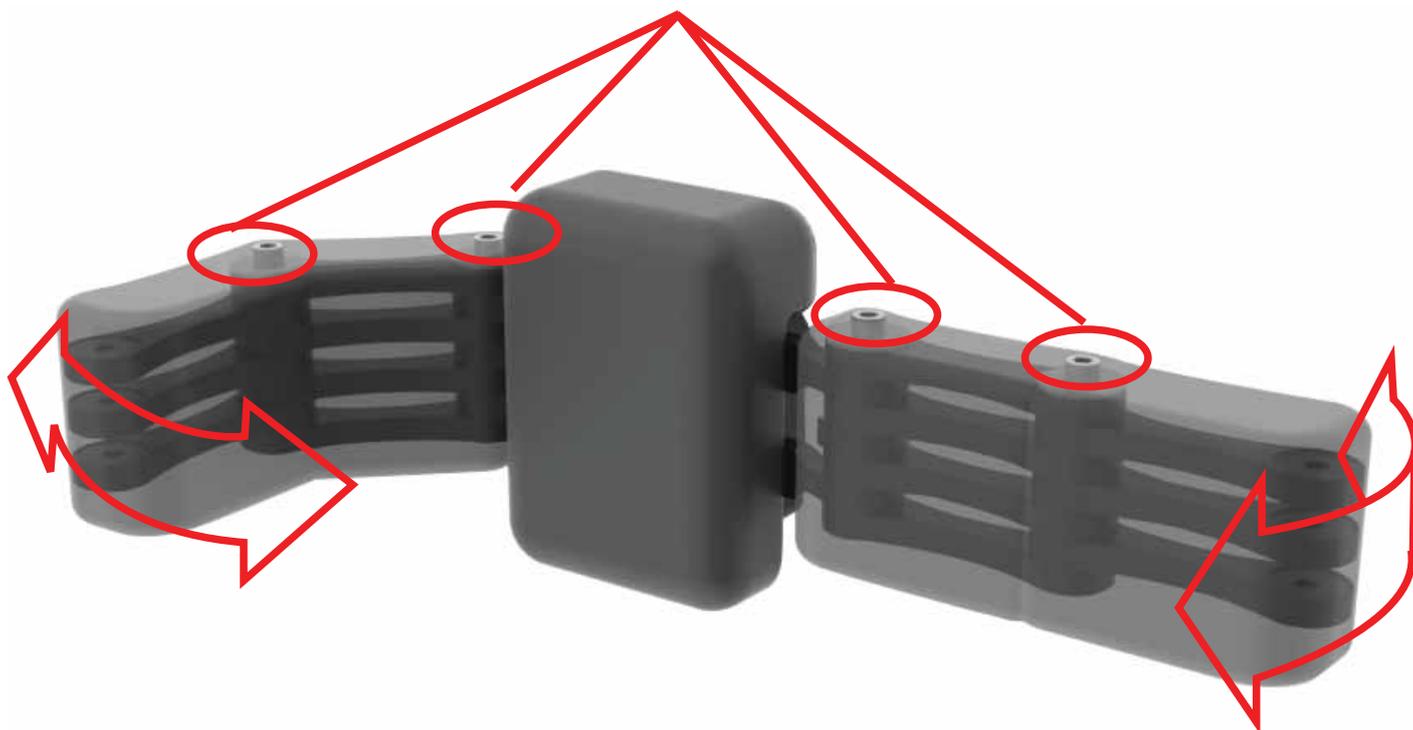


For at flytte leddene på Multigrip-nakkestøtten skal de viste skruer løsnes. Leddene kan derefter let flyttes til den ønskede position. Når den ønskede position er opnået, spændes skruerne sikkert.

Thorakalstøtter




Montering af thorakalstøtter

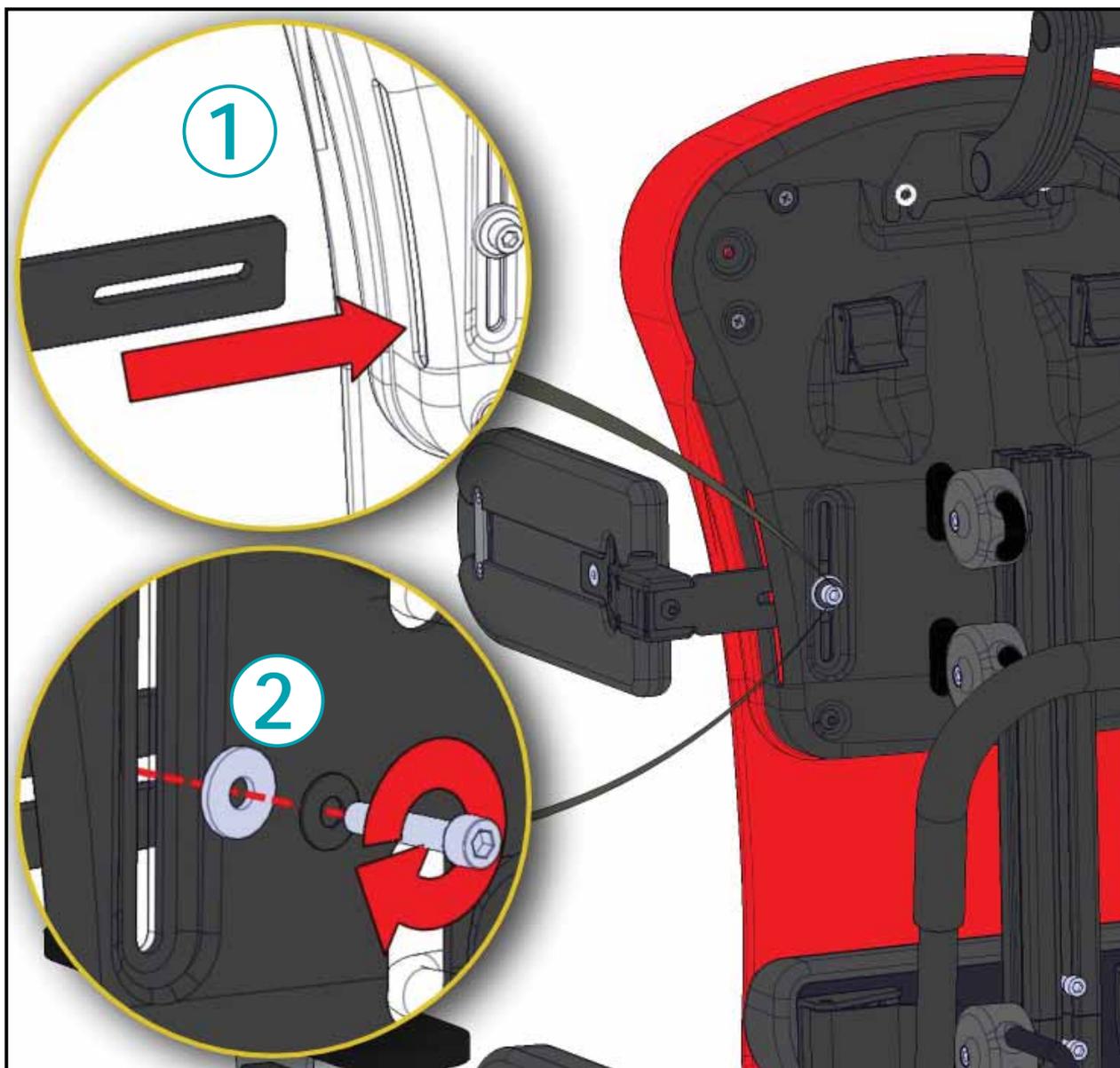


Thorakalstøtter



Justering af bredde og højde på thorakalstøtter

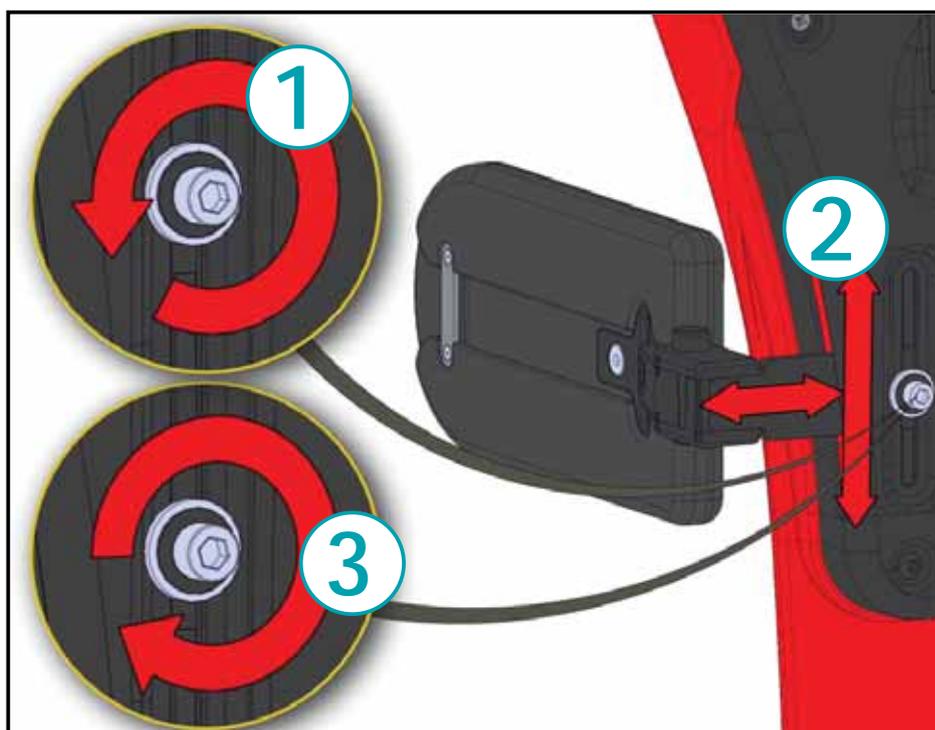


Justering af vinkel på thorakalstøtter (kun udløserknap)

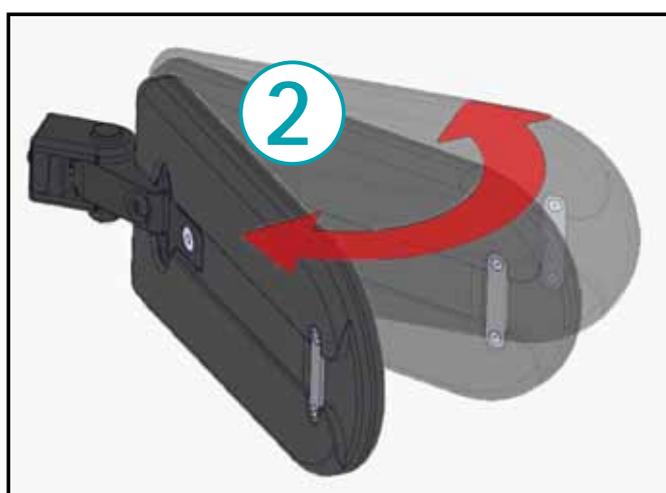

Benkontrol




Montering af beslag for benkontrol

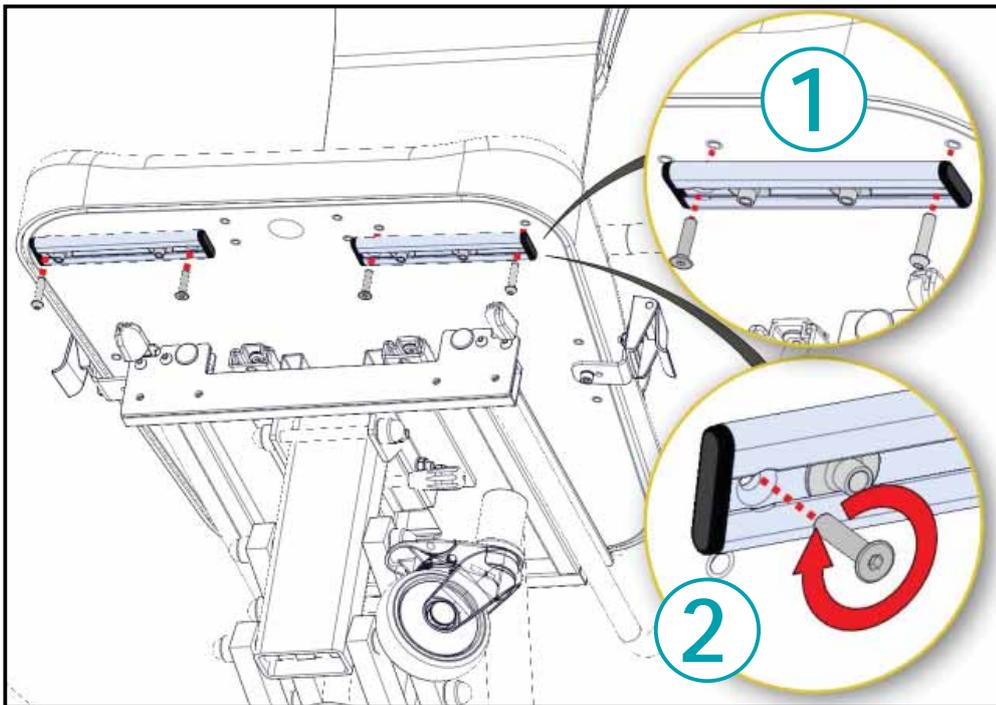

x 4


Montering af benkontrol

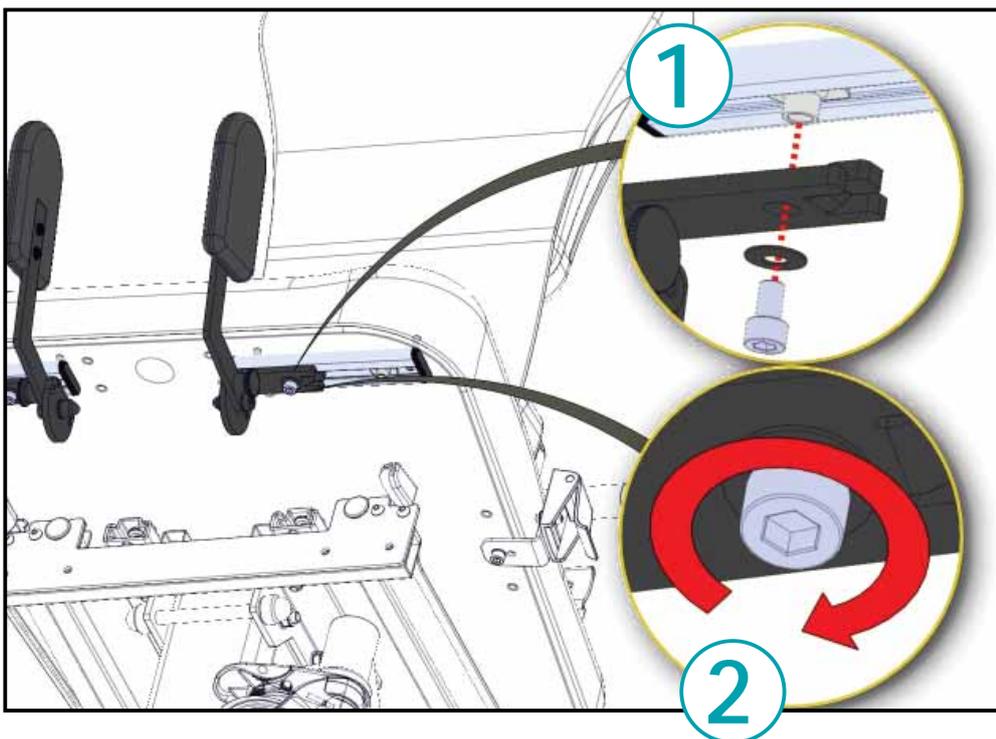


Benkontrol



Justering af vinkel

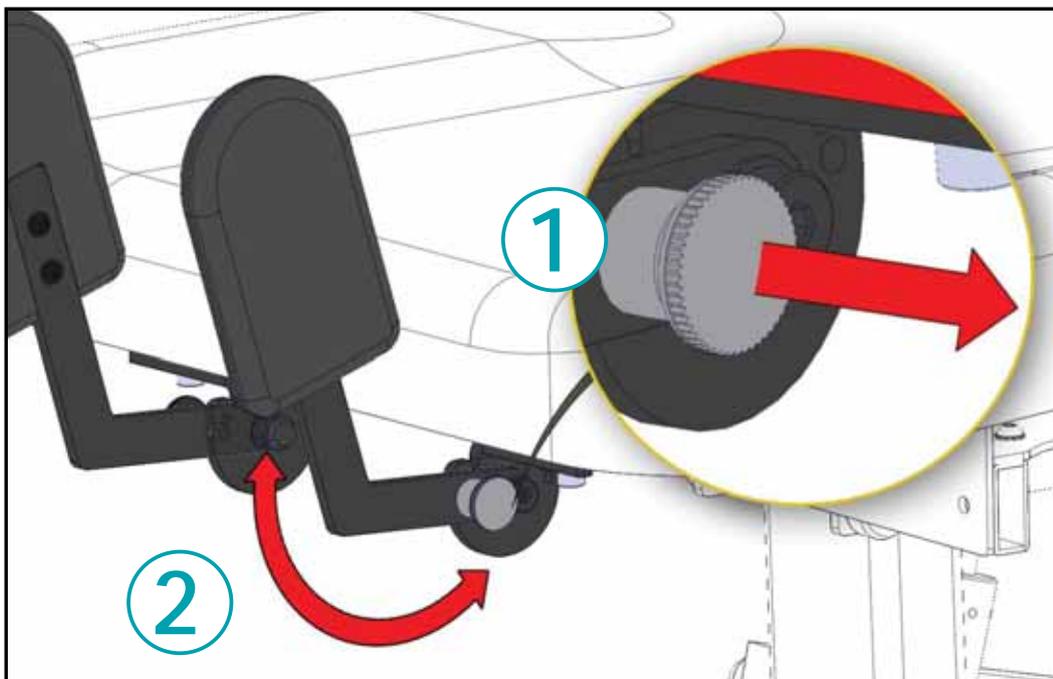


Justering af bredde

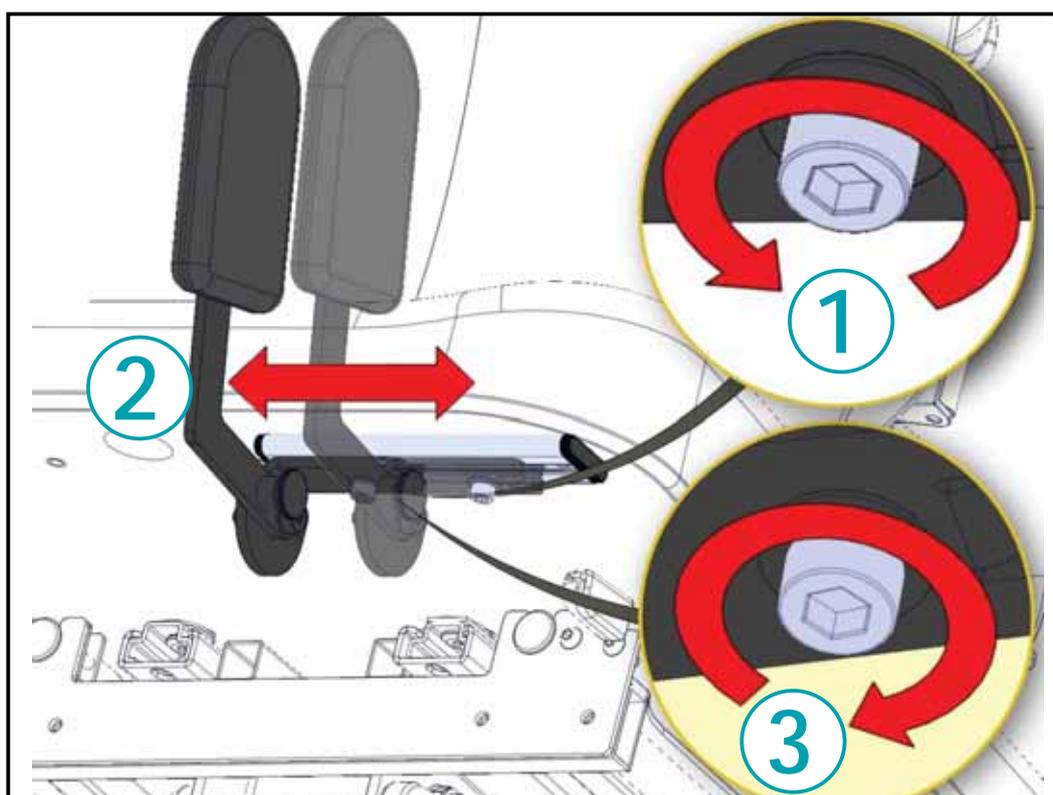

Ischialbjælke



Montering af Ischialbjælke

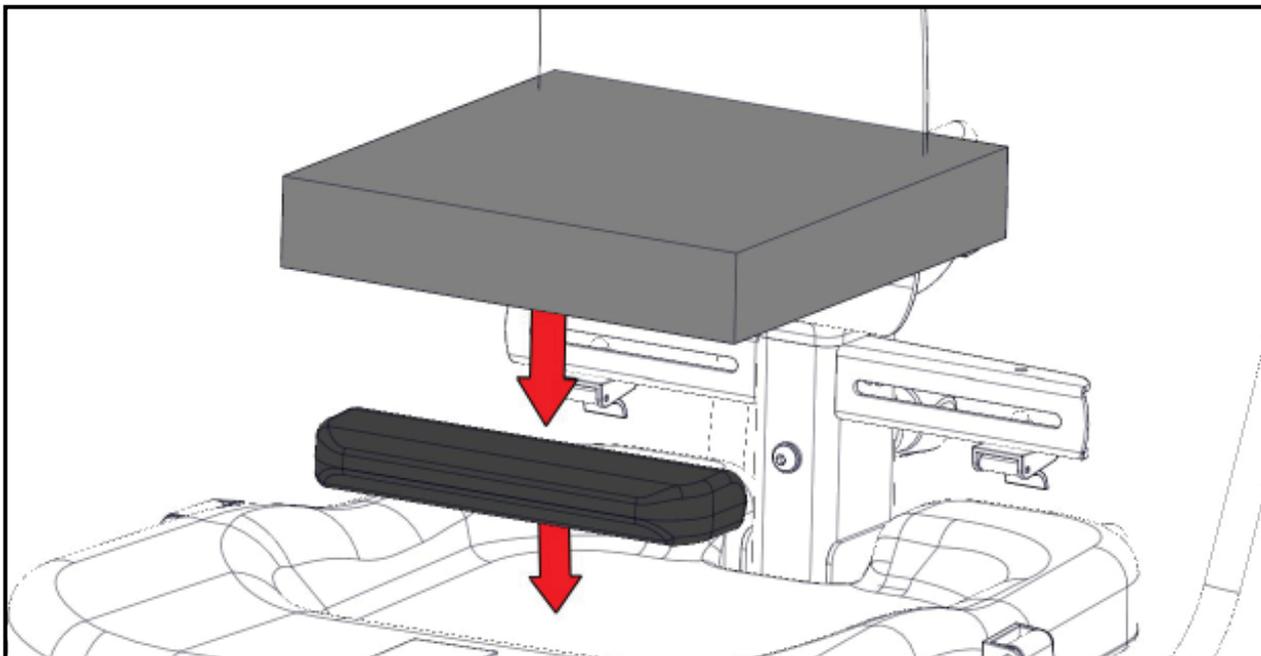

Vestesele med lynlås

Montering af vestesele med lynlås



Vestesele monteres og justeres med klemlås fire steder som vist. To på siden af sædet og to på undersiden af monteringsbeslaget til lændestøtten.

Vestesele med lynlås



Brug af klemlåse



Montering af endebeslag til remme



Endebeslag skal monteres på alle remme når selen først er monteret.



Spænder med hurtigudløser

Tryk i midten af knappen for at udløse spændet. Spændet kan simpelthen klikkes sammen igen.



KAPITEL SYV

Vedligehold og kontrol



Vedligehold og kontrol



Hvert produkt fra Jenx skal inspiceres og kontrolleres i overensstemmelse med de råd der gives i denne instruktion for anvendelse. Gennemføres disse jævnlige kontroller ikke, kan det betyde en risiko for brugeren. Hvert år skal hvert produkt inspiceres omhyggeligt af en person, som er kompetent til at vurdere og korrigere fejl, og som i givet fald kan out-source rettelser. Der bør ikke gå mere end et år mellem hver komplet produktinspektion. Hvis produktet bruges hårdt, bør inspektionsintervallerne 3 år efter anskaffelse sættes ned til 6 måneder. For at være på den sikre side tilbyder Jenx Limited at udføre produktinspektioner. Der beregnes betaling.

Produkter fra Jenx Limited bliver som regel vurderet for enkelt-klienter, og derfor skal de følgende punkter overholdes, før noget Jenx-produkt genudleveres.

- Kontroller med den udleverende terapeut, at produktet er helt standard, og at der ikke er monteret specielle anordninger, eller at der er blevet foretaget ændringer. Hvis der er foretaget ændringer: Kontakt Jenx Limited for rådgivning
- Kontroller at produktet er helt rengjort samt tilstanden for stoffer og indvendigt skum
- Kontroller at alle håndhjul og håndgreb er i god stand og sikkert monteret
- Kontroller produktet og tilbehør nøje for tegn på slid, revner og deformation
- Kontroller at alle produktets funktioner fungerer korrekt, dvs. hældning, højdejustering eller ryghældning, etc.
- Det skal altid sikres at brugsanvisningen følger med produktet og overdrages til den nye bruger. For et nyt sæt instruktioner kontakt venligst vores salgssupportafdeling på 0114 285 3376 eller besøg www.jenx.com
- Hvis dette produkt skal sendes eller leveres, skal det sikres, at det er pakket forsvarligt.
- Vi anbefaler på det kraftigste, at alle remme og seler udskiftes med nye inden gen-udlevering. Kun originale Jenx-dele bør monteres
- Kontroller at håndtagene til gastyksfjedrene ikke er bøjedede. Anvend ikke produktet hvis et eller flere håndtag er blevet bøjet. Kontakt Jenx Limited for at arrangere en udskiftning
- Kontroller at det produkt, som skal gen-udleveres, har de korrekte specifikationer i forhold til den nye bruger. Hver bruger kan have behov for andet tilbehør

Følg produktlogbogen, som leveres separat.

Anvend ekstra sider om nødvendigt. Ekstra sider kan fås fra Jenx Limited hjemmeside: www.jenx.com

Vedligehold og kontrol



Forretninger bør følge retningslinjerne fra MHRA for at opføre, servicere eller reparere produkter i deres varetægt. Check MHRA's hjemmeside for de seneste bulletiner:
www.mhra.gov.uk

- **Stel og rammer:** er produktet strukturmæssigt sundt uden slør eller løse dele?
- **Sikkerhed:** er produktet sikkert og egnet til brug?
- **Remme:** er alle remme i god stand uden nogen tegn på slid? Kontroller alle remme for frynser og manglende eller ødelagte spænder. Kontroller at alle endebeslag er på plads.
- **Stabilitet:** er produktet stabilt på et jævnt underlag, det rokker ikke?
- **Skruer, møtrikker og bolte:** Mangler der møtrikker eller bolte eller er nogen beskadigede?
- **Hjul:** er hjulene i god stand? Virker kugleled og bremseser?
- **Fjedre:** virker alle gasfjedre og kan holde tryk og vægt?
- **Sandaler:** er sandalerne i god stand? Viser remme og Velcro tegn på slid?
- **Polstring og PU:** er polstring og PU i god ren stand uden rifter, slid eller gab i hynderne?
- **Stål og træværk:** er stål og træværk i god stand? Kontroller for deformationer, splinter eller brud.

Hvis der er nogen som helst tvivl om produktets sikkerhed, bør der ikke tøves med at kontakte vore kundesupportafdeling for rådgivning

Produkter bør nøje dekontamineres i følge retningslinjerne fra MHRA og lokale retningslinjer inden inspektion, opbevaring og genudlevering

Jenx Limited kan ikke tage noget ansvar for gen-udlevering af produkter

Ofte stillede spørgsmål



Spørgsmål: Hvem er kvalificeret til at inspicere produkter?

Svar: Det er den erhvervende myndigheds ansvar under retningslinjerne fra MHRA, DB2006 (05) at sørge for oplæring til administrationen af medicinsk udstyr. Check med din myndighed.

Spørgsmål: Gennemfører Jenx tekniske kompetencekurser?

Svar: Ja Se venligst jenx.com for oplysninger om udbudte kurser.

Noter

-  Sidde
-  Stå
-  Søvn
-  Terapi
-  Mobilitet
-  Badeværelse