


Tørreboks til høreapparater, DB100 Plus

Brugervejledning

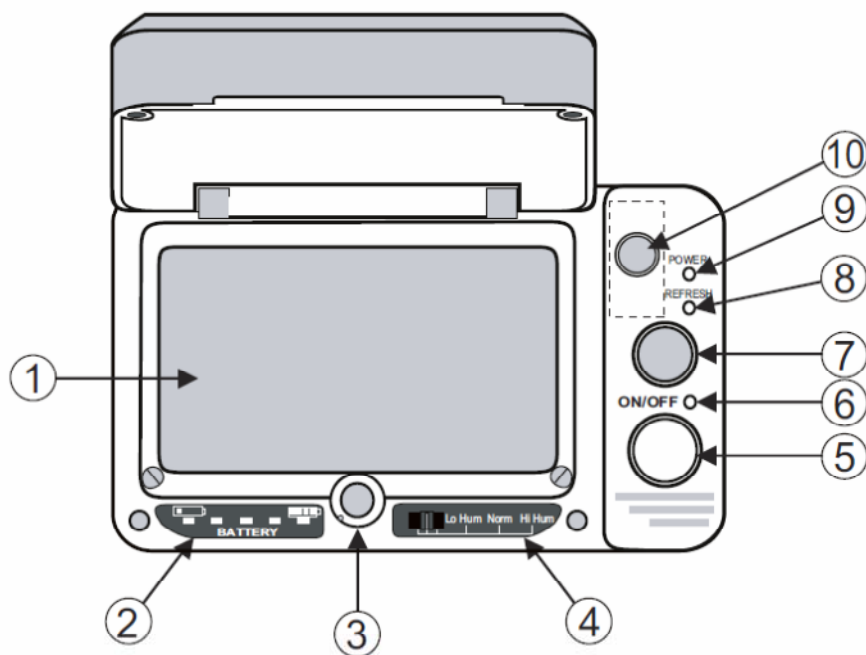

- 1.) Tørrekammer
- 2.) Indikator for batteritester
- 3.) Batteritester terminal
- 4.) Fugtighedsindstilling
- 5.) On/Off knap
- 6.) Indikator for tørreproces startet
- 7.) Opfriskning (UV-behandling)
- 8.) Indikator for opfriskning startet
- 9.) Power-indikator
- 10.) Magnetisk område til placering af batterier

Kom godt i gang:

- 1.) Tilslut strømforsyningen til tørreboksen og til stikkontakt. Power-indikatoren (9) tænder.
- 2.) Indstil fugtighedsindstillingen (4) til én af følgende tørretider:
 - a. Lo Hum (lav fugtighed – venstre position) = 2 timer
 - b. Norm (normal fugtighed – midterposition) = 4 timer
 - c. Hi Hum (høj fugtighed – højre position) = 8 timer
- 3.) Åben batteridækslet på høreapparatet, så det også bliver tørret. Batterierne kan eventuelt tages ud under behandlingen, og placeres på det magnetiske område (10). Husk at indsætte batterierne i høreapparaterne igen efter behandlingen.
- 4.) Placér høreapparaterne i kammeret (5) og luk dækslet ned.
- 5.) Tryk på On/Off knappen (5) for at starte det valgte tørreprogram. Indikatoren (6) tændes.
- 6.) De kan vælge at trykke på opfriskningsprogrammet (Refresh) (7) for at aktivere UV-lysbehandlingen, der virker antibakterielt. Processen tager én time. Indikatoren (8) er tændt i denne periode.

Vigtigt: Se ikke direkte på de to UV lamper i de forreste hjørner af tørrekammeret.

Batteritest

- 1.) Placer et batteri mod batteritest-terminalen (3). Vær opmærksom på at vende den tyndeste runde del (-) nedad mod den gyldne plade.
- 2.) Tryk på batteriet, så det rammer den lille gyldne split ved hulningen.
- 3.) Batterikapaciteten indikeres af hvor mange lys der tændes. 4 eller 5 betyder, at batteriet har stor kapacitet tilbage. 1 eller 2 betyder, at batteriet ikke har så stor kapacitet tilbage, og bør udskiftes.

Bortskaffelse:

Dette produkt skal bortskaffes som elektronikaffald.