

# Brugsanvisning Dørtrinsslidske



## Montering:


- 1) Fjern fejelisten
- 2) Afmærk i dørtrinnet, hvor de 2 skruer skal sidde og skru dem i
- 3) Vælg den ønskede rille i højdejusteringen og hæng slidsken på skruerne
- 4) Til sidst efterses, at skinnen hviler på gulvet



## Materiale:

Aluminium med skridsikker grå gummibelægning

For ekstra sikkerhed anbefales det at fjerne sne, is, vand og lign. fra dørtrinsslidsken

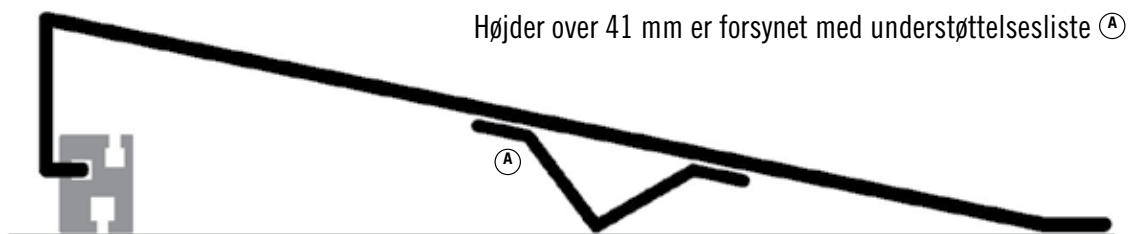

## Vedligeholdelse:

Kan rengøres med almindelige husholdningsrengøringsmidler



**Maks belastning: 350 kg.!!**

## Måltagning Dørtrinsslidske

### Sådan tages mål til dørtrinsslidsken:

- 1) Mål dørtrinnets bredde
- 2) Mål dørtrinnets højde i begge sider og i midten - brug det mindste af de tre mål

