

Trin 1-6

FrontRow To Go Quick Guide

For opsætning af højttaler og mikrofoner henvises til FrontRow To Go quick guiden.

Trin 7

Billede A

Udlægning og tilslutning af teleslyngeledning

- Skil guldstikket på bagsiden af højttaleren.
- Læg teleslyngeledningen rundt i rummet. Teleslyngeledningen skal omkredse lyttearealet og kan evt. fastgøres med tape. Det bedste resultat opnås, hvis høreapparatbrugeren er placeret inden for lyttearealet ca. 1,5 meter fra ledningen.
- Saml de to guldstik igen.

Billede B

Trin 8

Billede A

Tilslutning af strømforsyning

- Tilslut strømforsyningens ene stik i det grå stik på bagsiden af højttaleren markeret med "teleslyngestromforsyning".
- Tilslut strømforsyningens andet stik til en stikkontakt.

Billede B

Trin 9

Justering af lydstyrken på teleslyngen

- Lydstyrken på teleslyngen justeres via to kontroller:
- Justér lydstyrken via volumen-kontrollen på teleslyngeforstærkeren monteret på bagsiden af højttaleren. Det anbefalede niveau er 6.
 - Justér volumen via "AUX OUT" kontrollen på toppen af højttaleren. Det anbefalede niveau er ved strengen.

Billede A

Billede B

Bemærk: Hvis lyden fra teleslyngen forvrænger, skal lydstyrken skrues ned.

Tilbehør

Kontroller lyden på teleslyngen

Med en Hearit MT telemodtager er det muligt at kontrollere lyden på teleslyngeledningen. Hearit MT telemodtageren fungerer i princippet som et høreapparat med telespole og kan også udlånes til høreapparatbrugere uden telespole i høreapparatet.



Trin 1-6



A

Trin 7




B

Trin 9




B

Trin 8

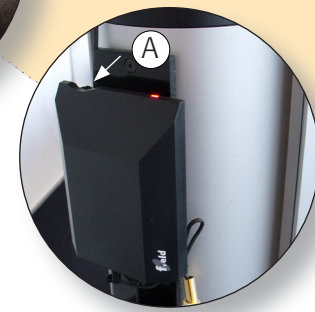

A

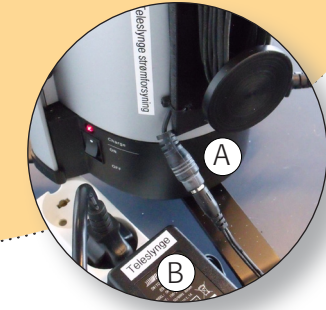

A

B



Tilfykke med deres FrontRow To Go højtalersystem,
som er blevet udvidet til et transportabelt og kombineret
teleslynge- og højtaleranlæg.
Teleslyngeanlægget kan anvendes i mindre lokaler op til
ca. 50 m².

frontrow[™]
to go



Med teleslynge

