



## Ankelbespænding/Vrightholdere



Producent:  
Anatomic SITT AB  
Box 6137, SE-60006 Norrköping  
SWEDEN - Phone +46 (0)11-16 18 00



*Supportserien er fremstillet og CE-mærket passende til kørestole og siddesystemer på det Europæiske hjælpemiddelmarked.*

**Support Vrightholder giver en stabil støtte for at forhindre ufrivillig supination og pronation af foden.**

**Montering på sæde eller kørestol: Support Vrightholder skal monteres og tilpasses af fagpersonale.**

- 1) Markér hvor på fodstøtten båndenes fæstningspunkter skal være. Fæstningspunkterne bør sidde så tæt på foden som muligt.
- 2) Bor hul i fodstøtten ved markeringspunkterne og skru fæstningsbåndene fast med de vedlagte skruer.  
(For at opnå korrekt trækretning, skal båndene monteres så tæt på foden som muligt).

**Justering af vrightholder (billede 1):**

- 1) Monter vrightholderen rundt om fodleddet med åbningen fremad og stram velcrobåndet til.
- 2) Justér højden på vrightholderen ved spændet på siderne

**Efterkontrol:** Kontrollér ved alle monteringer: \* trykket på båndet \* at "lædderet" ikke har lavet folder

**Kontroller:** jævnlig brugeren for eventuelle alvorlige røde mærker. Ved røde mærker der kan give sår, skal man ophøre med brugen af Vrightholderen.

**Kontrol af slitage:** Kontrollér jævnligt båndene og puderne for slitage.

**Vaskeanvisning:** Support Eksklusiv 40° finvask // Support Soft 60° finvask, må ikke tørretumbles eller komme i tørreskab.

**Garanti:** 1 år og 2 års reklamationsret. Anvend kun reservedele fra Anatomic SITT A/S, Danmark

**Produktet passer til:** Siddesystemet Zitzi Delfi, Zitzi Delfi Pro, Zitzi Sharky & Anatomic formstøbt sæde.

For øvrige kombinationer kontakt venligst Anatomic SITT A/S.

**Genanvendelse:** Af en brugt del eller produkt der afmonteres og skrotes. Delene skal opdeles efter type af materiale.