

Oppumping

all up®

heel up®



1

Indsæt adapter i ventilåbning,
Drej og pres let adapteren ned i ventilen til den sidder fast.
Pres kun adapterens yderste "rør" ned i ventilen !



2

Pump pudsen 3/4 op.

3

Træk adapteren ud af ventilen, ved at holde imod
ventilen med 2 fingre, som anvist på figuren.




4

Luk luft ud til løftehøjde med adapteren.
VIGTIGT ! Puden må ikke være hårdt oppumpet.
Den skal være blød og eftergivende for optimal lejring.



5

Luk ventilen.

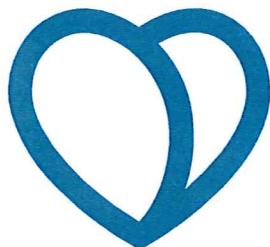

Zibo Athene

Horsens tlf. 76 900 407 - Birkerød tlf.: 49 168 480 - post@ziboothene.dk - www.ziboothene.dk