

**LIFT Labs**  
**Liftware – Brugermanual**  
og vigtig produktinformation

**Produktet består af følgende dele:**

Ske - Liftware håndtag – micro USB til USB 2.0 ledning - USB til stikkontakt adapter – opladestation



**Indhold**

Nedsæt risikoen for ødelæggelse eller fysisk skade.....	2
Sådan bruges Liftware spiseredskab.....	2
Tips – Gode Råd.....	2
Sådan oplades Liftware-håndtaget.....	3
Smart dvaletilstand .....	3
Opbevaring .....	3
Bortskaffelse af Liftware ved slutningen af produktets levetid.....	3
Yderligere oplysninger .....	4

## Nedsæt risikoen for ødelæggelse eller fysisk skade

- Læg altid opladeren fra dig i sikker afstand fra vand.
- Dyp ikke Liftware håndtaget i vand.
- Vask ikke Liftware håndtaget i opvaskemaskinen.
- Tag straks opladeren ud af stikket, hvis den skulle falde ned i noget vand. Brug ikke opladeren, hvis den er faldet ned i vand.
- Læg ikke Liftware skeen i eller i nærheden af et varme- eller kogeapparat.
- Brug aldrig opladeren med en ødelagt ledning eller kontakt.
- Der henvises til 'Garanti og Service', hvis redskabet ikke længere fungerer ordentligt eller behøver reparation.
- Advarsel: Redskabet må ikke modificeres. Modificering vil ugyldiggøre garantien.

## Sådan bruges Liftware spiseredskab

1. Liftware tænder automatisk, når du forbinder skeen med håndtaget.
2. For at forbinde ske og håndtag: Læg begge dele på bordet for at stabilisere delene, og lad skeen glide ind i håndtaget, indtil de klikker sammen.
3. Hold håndtaget i din hånd og tillad at din hånd fortsætter med at ryste. Hold fingrene fri af den bevægelige arm. Den bevægelige arm skal kunne bevæge sig frit for at forhindre rystelser. Du vil forhindre Liftware redskabet i virkningsfuldt at annullere bevægelse, hvis du rører den bevægelige del/arm med fingrene.

4. Det er normalt, at skeen summer lavt og vibrerer. Den vibrerende bevægelse opstår, når skeen forsøger at annullere håndens rystelser.
5. Nyd dit måltid! Vær tålmodig, når du første gang bruger Liftware; det tager måske nogle dage at vænne sig til at spise på denne nye måde.
6. Når du har spist, fjern ske-tilbehøret for at slukke for redskabet og spare på batteriet.

## Tips – Gode Råd

- Træk vejret dybt et par gange og slap af. Det hjælper af og til, hvis den person, der bruger skeen, skal prøve den for første gang, da nervøsitet kan forøge rystelserne.
- Prøv at holde Liftware håndtaget med forskellige håndstillinger, indtil du finder det greb, der passer dig bedst.
- Når du lever med rysten, har du måttet genlære, hvordan du spiser selv. Når du spiser med Liftware, kan det tage et par dage at vænne sig til at spise på denne nye måde. Vi anbefaler at prøve Liftware i mindst en uge for at finde ud af, hvad der er rigtigt for dig.
- Hvis skeens håndtag kommer i vejen, prøv at bruge den med en større, fladere skål.
- Støt ikke hånden, som holder om håndtaget. Det er bedst, hvis hånden får lov til at fortsætte med at ryste frit, således at Liftware kan gøre arbejdet med at stabilisere skeen.
- Det er normalt, at skeen bevæger sig relativt i forhold til håndtaget. Det kan endda synes lidt slattent. Det skal kunne bevæge sig frit, så det kan annullere bevægelse.

Hvis du ikke allerede har set 'At komme godt i gang' videoen, kan den ses på webadressen: <http://bit.ly/1nrVB63>

### Sådan oplades Liftware-håndtaget

1. Indsæt den store ende af USB ledningen (USB 2.0) i USB adapteren og sæt den lille ende af ledningen (micro USB) i opladerstationen.
2. Fjern altid sketilbehøret fra håndtaget, når du oplader redskabet.
3. Sæt håndtaget i opladeren med 'Lift'-logoet på håndtaget vendt den samme vej som LED indikatoren på stationen.
4. LED'en lyser skarpt rødt, når den oplader og slukkes, når opladningen er færdig. Det kan tage op til 3 timer for at oplade håndtaget helt. Når det ikke bruges, kan man godt lade håndtaget sidde i opladeren. Det vil ikke ødelægge batteriet at efterlade håndtaget i opladeren. Batteriet er konstrueret til at holde ca. 3 dage ved almindelig brug mellem opladninger.

### Smart dvaletilstand

Når Liftware er tændt, vil den altid prøve at finde ryster, den kan annullere. Så, når du lægger den på bordet, vil den måske vrikke lidt rundt. For at slukke for den mellem mundfuldene, kan du vende den (således at 'Lift' logoet på håndtaget ligger ned mod bordet). Det vil sætte den i dvaletilstand.

Det er dog stadig vigtigt at fjerne sketilbehøret mellem måltider, fordi skeen vil trække strøm fra batteriet, mens den er i dvale tilstand.

### Rengøring

- Da det kan skade redskabet, bør Liftware-redskabets håndtag aldrig lægges i vand eller vaskes op i en opvaskemaskine. Aftør håndtaget med en fugtig klud eller svamp. Antibakterielle klude kan også bruges til at rengøre håndtaget.
- En vatpind dyppet i varmt vand og mild vaskemiddel kan om nødvendigt bruges til at rense den bløde del af Liftware. Rens aldrig denne fleksible del af håndtaget med noget skarpt (f.eks. tandstikker, pincetter, knive o. lign.)
- Det aftagelige sketilbehør kan renses med en svamp, mild vaskemiddel og varmt vand. Den kan også vaskes i opvaskemaskinen.

### Opbevaring

Opbevar Liftware med ske-tilbehøret afmonteret og håndtaget på et koldt, tørt sted. Når det ikke bruges, kan Liftware-håndtaget også opbevares i opladestationen. Liftware må ikke udsættes for direkte sollys.



### Bortskaffelse af Liftware ved slutningen af produktets levetid

- Liftware forsynes med strøm fra et genopladeligt litium-ion polymer batteri, som ikke bør bortskaffes i et deponeringsanlæg. Det bør bortskaffes ordentligt ifølge lokale regler og lovgivning på området.
- Bemærk venligst, at batteriet først bør fjernes ved slutningen af produktets levetid. Fjernelse af batteriet vil ødelægge Liftware, og garantien vil bortfalde.

### Garanti, Service og reklameret

- Lift Labs garanterer, at Liftware vil fungere i henhold til specifikationer i mindst 1 år fra salgsdatoen, hvis

- det er solgt og brugt i DK. Lift Labs er ikke ansvarlig for nogen fejl, som er forårsaget af vanrøgt, misbrug eller mishandling forårsaget af kunden, herunder at produktet på nogen måde tabes, nedsænkes i væske, udsættes for ekstreme temperaturer, eller ændringer/modifikationer.
- Hvis Liftware ikke opfylder den ovenfor beskrevne garanti, vil Lift Labs' eneste ansvar være, enten (1) at udskifte eller (2) reparere redskabet. Muligheden for at udskifte eller reparere redskabet er på foranledning af Lift Labs. Hvis Lift Labs vælger at udskifte Liftware, skal Lift Labs gives en rimelig tid til at tilvejebringe en erstatning. Når redskabet er udskiftet, vil det udskiftede redskab blive kundens ejendom, og det originale redskab bliver Lift Labs ejendom. Det udskiftede redskab/apparat har en garanti på 1 år fra den oprindelige salgsdato eller 60 dage efter det udskiftede er modtaget af kunden, hvis dette er senere.
  - Lift Labs er kun ansvarlig for reparation eller udskiftning af defekte

dele af redskabet. Lift Labs har ikke pligt til at udskifte redskabet eller skeen, hvis f.eks. opladeren er defekt.

- Garantien dækker ikke kosmetiske skader.
- Kunder uden for USA hæfter for returforsendelsesudgifter. Kontakt Lift Labs for at høre om reparation og udskiftningsmuligheder i forbindelse med internationale ordrer.
- **Reklamationsret:** Du har altid 24 måneders reklamationsret over for din danske forhandler. Dog skal du anmelde fejl og mangler hurtigst muligt, når du opdager dem.
- 

#### Yderligere oplysninger

- Liftware er konstrueret af Lift Labs (of Lynx Design) i San Francisco, Californien.
- Fabrikeret i USA af importerede dele.
- Ved spørgsmål skal der rettes henvendelse til:  
Gloria Mundi Care på tlf. 5115 0110 eller på [info@gmcare.dk](mailto:info@gmcare.dk).



© 2014 Lift Labs (of Lynx Design). All rights reserved.