

## Brugsanvisning (DK)

### Daglig brug

SEQINETIC™ har 6 lysemitterende dioder (LED), som frembringer lys, som reflekteres ind i øjnene via den buede reflektor. SEQINETIC™ bæres som briller. Den nederste kant skal være ud for øjnene eller en anelse højere. Det er ikke nødvendigt at kigge opad og direkte ind i reflektoren.

Anbefalet brug per dag er 15-60 minutter. (1) Tænd/sluk knap. (2) Batteridæksel. (3) Udløserknapper for batteridæksel.

### Udskiftning af batterier

Tryk forsigtigt på udløserne (3) til batteridækslet (2) indtil dette kan tages af. Brug evt. spidsen af en kuglepen. Fjern batterier. Isæt nye batterier. Orientér dem som vist på plastic-delen. Sæt batteridæksel på plads.

### Rengøring

Aftørres med en klud uden organiske opløsningsmidler.

### Begrænsninger for brug

- Kontrast og udsyn kan påvirkes negativt af SEQINETIC™.
- Må ikke anvendes mens man fører bil, andet køretøj eller cykel, skateboards eller lignende.
- Må ikke anvendes mens man betjener farligt værktøj.
- Anvend kun i godt oplyste omgivelser.
- Gå kun rundt med brillen i kendte omgivelser.
- Anvend ikke på børn under 12 år.
- Undgå at gøre produktet vådt.
- Hvis der opleves nogen form for ubehag ved normal brug, skal læge konsulteres.

### Tekniske specifikationer

Lysintensitet: 2.500 Lux

Dimensioner: 177mm\*154mm\*62mm

Vægt: 65 g (med batterier)

Batterier: 2\*AAA