

## Sikkerhedseftersyn

I henhold til international standart EN/ISO 10535 anbefales det at lave et sikkerhedseftersyn en gang årligt.

Proceduren for sejleftersynene skal være grundig, systematisk og vedvarende.

En praktisk og en visuel gennemgang anbefales. Herved opdages stivhed i stoffet, defekte stropper og tyndslidt/mørt stof.

Reparationer må kun udføres af fabrikanten.

### Service fra dag til dag

Vi ved, at din hverdag skal fungere uden lange afbrydelser.

Vi servicerer udstyr fra dag til dag. Både egne produkter og produkter fra andre leverandører.

Varenr.	HMI nr.	Beskrivelse	Størrelse
40025	86835	Toiletsejl med bælte	XSmall
40026	89836	Toiletsejl med bælte	Small
40027	89837	Toiletsejl med bælte	Medium
40028	89838	Toiletsejl med bælte	Large
40029	89839	Toiletsejl med bælte	XLarge
40030	89840	Toiletsejl med bælte	XXLarge

## Kontakt Rehab-Care

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til produkter, priser, reparationer eller service.

Du kan ringe til os på +45 6915 3000, skrive til [info@rehab-care.dk](mailto:info@rehab-care.dk) eller udfylde formularen på [www.rehab-care/kontakt](http://www.rehab-care/kontakt), så kontakter vi dig hurtigst muligt.

### Kontorets åbningstider

Mandag – Torsdag ..... 08:00 – 16:00  
 Fredag ..... 08:00 – 13:00



## TOILETSEJL

Produceret med fokus på både brugervenlighed, komfort og æstetik.


Produkterne fra Rehab-Care er certificeret til medicinsk standard efter ISO 13485. Alle vores produkter er CE-mærket. Dansk kvalitet når det er bedst.

## Tekniske Data:

- Max belastning: 275 kg.  
 Materiale: 100% polyester.  
 Vaskeanvisning: Anvend et vaskemiddel uden optisk hvidt. Ved vask skal spændet være klikket sammen. Kan tørretumblers på lav temperatur.



Str.	Hoftebredde
XS	37 cm.
S	42 cm.
M	48 cm.
L	52 cm.
XL	68 cm.
XXL	78 cm.

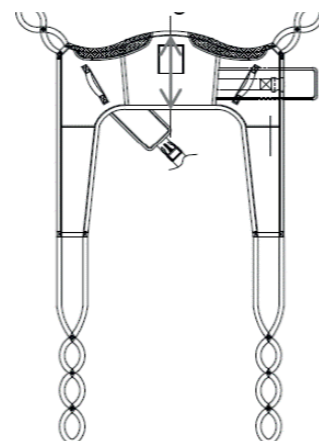

Toiletsejl i kraftig quiltet kvalitet, med ekstra blød polstring ved armhulen. Med indstilleligt bælte og anti skrid på rygstykket.


Til brugere med god kontrol over overkrop og nakke/hoved. Sejlet har en stor hygiejneåbning der letter toiletbesøg og nedre hygiejne. Meget let at tage af og på i siddende stilling.

Har 4 ophængs muligheder på benstroppe og 2 ophængs-muligheder på skulderstroppe. Anvendes ved brug af stationære eller mobile personløftere.

Passer til 2, 3 og 4 punkts åg.

Sejlet er udstyret med:

- Midteindikation både øverst og nederst
- Styrestroppe
- Farvekoder for størrelser

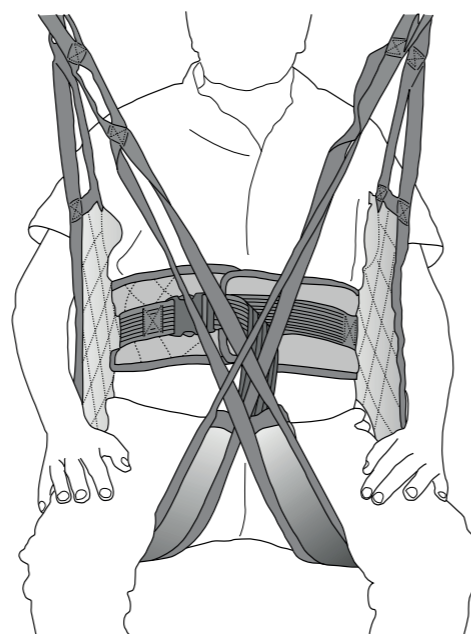

## Løft fra siddende stilling

- 1) Sejlet placeres bag brugerens ryg og skubbes ned til taljen. Midteindikationen skal følge brugerens rygsøjle.
- 2) Lårstroppe trækkes ind under brugerens lår, brug evt. glidestykke, eller placer foden på fod støtte for at hæve lårbenet fra sædet.
- 3) Mavebæltet spændes. Bæltet skal sidde ca. ved navlen.
- 4) Kryds benstroppe, og placer sejlstroppe på åget.
- 5) Løft forsigtigt brugeren op, når stroppe er strammet lidt, kan sejlet rettes til.

## Løft fra liggende stilling

- 1) Brugeren vendes om på siden, sejlet foldes i et Z til midten, og den foldede del skubbes ind under brugeren. Vær opmærksom på at midten skal følge brugerens rygsøjle.
- 2) Brugeren vendes om på ryggen og sejlet foldes ud. Lårstroppe føres ind under benene.
- 3) Mavebæltet spændes. Bæltet skal sidde ca. ved navlen.
- 4) Kryds benstroppe og placer sejlstroppe på åget.
- 5) Hovedgærdet hæves hvis muligt, og stroppe sættes på åg.
- 6) Brugeren kan nu løftes forsigtigt op, og sejlet kan rettes, når stroppe er strakt ud.

## Betingelser for brug af sejlet:

- Sejlet anvendes af uddannet personale eller personer der har modtaget instruktion i det aktuelle sejls brug.
- Sejlet må kun bruges sammen med en personløfter godkendt efter DS/EN ISO 10535:2007 med 2, 3 eller 4 punkts åg.
- Der anvendes den korrekte størrelse sejl. Sejlet må ikke stramme eller gnave.
- Max løfte kapacitet på 275 kg må ikke overskrides.
- Hjælperen er obs. på brugerens velbefindende under brug.
- Sejlet er tjekket iflg. tjekliste.

## Tjekliste inden brug:

Har sejlet et eller flere af følgende mangler skal det kasseres.

- Tjek sejlet for manglende eller ulæselige mærkater.
- Tjek for ødelagte eller slidte syninger.
- Tjek for knuder på stroppe.
- Tjek for flænger, flosser eller huller.
- Tjek for fremmedlegemer i stoffet eller på stroppe.

Mere end  
20 års  
erfaring