



Krabat Sheriff S1/S2

Brugsanvisning



Sikkerhed

Alle Krabat-produkter er CE-mærkede i henhold til MDR 2017/745 og 93/42/EØF, klasse 1 af 14. juni 1993 om medicinsk udstyr. Det certificerer, at det opfylder alle relevante europæiske sikkerhedskrav. Denne håndbog er godkendt i henhold til disse standarder. Produktets holdbarhed svarer til en levetid på ca. 5 år ved normal brug. Efter ca. 5 år bør produktet renoveres af Krabat AS eller en godkendt partner for at forlænge produktets levetid.

Al service skal udføres af Krabat eller en autoriseret partner.

Produkter med elektriske komponenter skal sendes til Krabat til en teknisk gennemgang, inden de frigives til brug igen.



CE-mærket skal fjernes, hvis produktet modificeres, eller ikke-originale dele anvendes!



Justeringer, som ikke er beskrevet i Krabats manualer, må kun udføres af Krabat eller af personale godkendt af Krabat.



Krabat-produkter er ikke legetøj! Forkert brug kan forårsage skade på brugeren og/eller produktet.



Garanti

Krabat giver 2 års garanti på alle produkter. Denne garanti gælder defekter i fremstilling eller materialer. Garantien kan reduceres eller bortfalde, hvis service eller daglig vedligeholdelse ikke overholdes. Det er kundens ansvar at sørge for, at vedligeholdelse gennemføres. Garantien dækker ikke følgeskader, herunder skader forårsaget af forkert brug eller manglende vedligeholdelse. Garantien dækker ikke almindelig slitage eller sliddele.

Garantien er ugyldig, hvis der anvendes uoriginale dele, eller hvis produktet repareres eller ændres af personale, som ikke er godkendt af Krabat

Revisionshistorik:			
Revision:	Dato:	Forfatter:	Notat:
1.0	10.10.2016	A.L. Sørensen	Eableret
2.0	03.05.2021	A.Simensen	Tilføjet ændringslog, advarsler og tegnforklaringer
2.1	022.06.2021	A. Simensen	Side 13 tilføjet

Oplysningerne i denne brugsanvisning var korrekte på publiceringstidspunktet. Oplysningerne kan ændres af producenten uden forvarsel. Referer derfor til www.krabat.no, hvor du finder den til enhver tid opdaterede brugsanvisning og de til enhver tid opdaterede tekniske oplysninger om produktet.



Sheriff S1/S2

	Side
Generelt	06
Hovedkomponenter	07
Anvendelse	08
Individuelle tilpasninger	08
Ekstraudstyr	13
Tekniske data	13
Advarsler og definitioner	14
Garanti	17



Generelt

Krabat Sheriff S1 er tiltænkt børn i aldersgruppen 2-7 år, Krabat Sheriff S2 til aldersgruppen 6-12 år. Kørestolen er meget let og har en cambervinkel på hjulene, som gør, at den er nem at manøvrere.

Siddestillingen kan tilpasses det enkelte barnet via justering af sædevinklen, ryghøjden, placeringen af fodbrættene og de forskellige vinkler på fodbrættene. Siddestillingen er nær identisk med siddestillingen i sadel-stolen Krabat Sheriff. Brug af kørestolen bør reguleres af barnets fysio- eller ergoterapeut.

I Krabat Sheriff S1/S2 er placeringen af fødderne udgangspunktet for en god siddestilling. Her får barnet en bred understøttelsesflade, hvilket giver en god balance, og sammen med sadelsædet giver det bækkenet en neutral og naturlig stilling. Det giver rygsøjlen en naturlig kurve, og barnet får en klar midtlinje, som opretholder balancen og giver et godt udgangspunkt for aktivitet. Det forhindrer barnet i at synke sammen i overkroppen og hjælper barnet til en aktiv siddestilling. Derudover bliver bryst- og hovedkontrollen lettere, når kroppen er placeret i en naturlig stilling, hvilket letter synkning, tale og vejrtrækning.

Sadelstillingen er et dynamisk og godt udgangspunkt for at køre stolen. Overkroppen kan bevæges frit, og armene har stor frihed i forhold til at betjene hjulene, samtidig med at underkroppen holdes på plads i en anatomisk fordelagtig og tæt på ideel stilling til kørestolstransport.

For at sikre en optimal siddestilling er det afgørende, at der gennemføres en test og tilpasning for det barn, der skal bruge stolen, inden den tages i brug. Tag ikke stolen i brug, hvis der ikke er gennemført en individuel test. Lad heller ikke andre børn benytte kørestolen, medmindre en individuel test har fundet sted.

Børn vokser og ændrer siddemønster løbende. Det kan derfor forekomme, at barnet efter nogen tid får brug for en anden sædestørrelse eller andre justeringer. Tag kontakt til barnets fysio- eller ergoterapeut, hvis du ikke synes, at produktet fungerer optimalt, eller hvis du tror, der er behov for justeringer.

Kørestolen er udviklet og testet til en maksimal brugervægt på 60 kg.

BEMÆRK: For svagtsynede anbefales det at downloade brugermanualen til Sheriff S1/S2 fra



Fig. 01

Hovedkomponenter – Sheriff S1/S2

Krabat Sheriff har følgende hoveddele: 01

Sadelsæde med justerbar vinkel,
sædepude 02 Justerbar ryg, rygpude

03 Justerbare fodbrætter

04 Ramme

05 Drivhjul

06 Forhjul

07 Parkeringsbremse

Anvendelse

Inden Krabat Sheriff S1/S2 tages i brug, skal vinklerne på sæde, ryg og fodbræt indstilles for at give barnet en optimal siddestilling. Justeringerne bør foretages af en fysio- eller ergoterapeut, som har modtaget oplæring fra Krabat AS eller af en repræsentant for Krabat AS.

Alle justeringer kan foretages trinløst med den medfølgende unbrakonøgle, som er placeret under sædet. Det er vigtigt, at alle skruer strammes tilstrækkelig, efter at justeringer er foretaget.

Kørestolen er beregnet til indendørs og udendørs brug på hårde og plane overflader. Ved færdsel i **stejlt terræn** skal du sørge for at læne dig mod jordoverfladen og undgå skarpe sving og voldsomme opbremsninger.

PS: Bremsen er en parkeringsbremse. Brug ikke denne til nedbremsning i stejlt terræn.

Aktivér bremsen ved **ind- og udstigning** af kørestolen. Brug gerne dine omgivelser, eller få hjælp af en ledsager for at lette ind- og udstigning.

Hvordan barnet skal anvende kørestolen, bør drøftes med en lokal terapeut eller en, der kender barnet godt. Det bør afklares, i hvilke situationer, man ønsker at anvende kørestolen, hvor længe den skal anvendes ad gangen, og om brugen bør øges gradvist. Dette bør evalueres undervejs, efterhånden som barnet bliver vant til kørestolen.

Ved test og/eller udlevering vil brugeren få oplysninger om, hvordan man kommer ind og ud af kørestolen. Inden brugeren placeres i kørestolen, skal man sikre, at parkeringsbremsen er aktiveret.

Fodbræt

Fødderne placeres på fodbrættene, og remmene over fødderne tilpasses og strammes. Børn, der bruger støttestøvler, bør benytte disse og evt. sko i Krabat Sheriff S1/S2.

Højden på fodbrættene kan justeres ved at justere remmen mellem rammen og fodbrættene. Placering frem og tilbage langs rammen kan foretages ved at løsne de 4 skruer, der fastgør fodbrættene til rammen. (fig. 02a).

Hvert fodbræt er monteret med 2 skruer. Ved at løsne den forreste skrue på oversiden af fodbrættet kan bredden og vinklen justeres (fig. 02b). Stram skruerne godt til, når justeringerne er gennemført. **Stram skruerne godt til, når justeringerne er gennemført.**



Fig. 02a
Højden på fodbrættene justeres ved at løsne 4 skruer



Fig. 02b
Bredden og vinklen justeres ved at løsne to skruer på oversiden af fodbrættet.

Sædevinkel

Barnet placeres på sadelsædet, og hoftebæltet justeres og fastgøres. Sørg for, at barnet placeres helt tilbage på sadelsædet og sidder ret og symmetrisk med underkroppen. Hoftebæltet skal altid anvendes, da det også er barnets sikkerhed mod at falde ud af kørestolen.

Ved hjælp af 4 unbrakoskruer på undersiden af sædet kan sædevinklen justeres, se fig. 03. Løsn de fire skruer, og positioner sædevinklen korrekt.

Stram skruerne godt til, når justeringerne er gennemført.

Fig. 03

Justering af sædevinkel

Sædets højde

Ved hjælp af 2 unbrakoskruer på undersiden af sædet, hvor 2 rør kommer op fra rammen, kan sædehøjden justeres. Løsn skruerne, og positioner sædehøjden korrekt, se fig. 04.

Stram skruerne godt til, når justeringerne er gennemført.



Fig. 04

Justering af sædehøjden

Rygghøjde

Ryghøjden justeres og fikseres med låsehåndtaget placeret bag på rygpladen, fig. 05. Åben låsehåndtaget, og placer ryggen i den ønskede højde. Stram låsehåndtaget for at låse ryggen i den ønskede højde. Efter nogen tids brug kan det være nødvendigt at justere låsehåndtagets låsekraft. Dette gøres ved at rotere plastskiven, som ligger under selve håndtaget. Håndtaget skal være relativt svært at trække til, når ryggen låses fast.



Fig. 05

Justering af rygghøjden

Justering af tyngdepunkt

Justering af tyngdepunktet sker ved at flytte sædet i forhold til rammen. Løsn 2 skruer på undersiden af sædet ved hjælp af en 4 mm unbrakonøgle, se fig. 06. Skub derefter sædet frem og tilbage for at positionere det korrekt.

Stram skruerne godt til, når justeringen er gennemført.

Vi anbefaler for øvrigt, at en repræsentant fra Krabat AS justerer tyngdepunktet i samarbejde med den lokale terapeut for at sikre optimal og sikker brug af kørestolen. Justering af kørestolens tyngdepunkt påvirker også kørestolens væltevinkler og bør foretages med omhu.



Fig. 05
Justering af ryghøjden

Brug af parkeringsbremse

Parkeringsbremsen aktiveres ved at føre bremsehåndtaget nedad, se fig. 07. Parkeringsbremsen låser begge drivhjul samtidig. Parkeringsbremsen løsnes ved at føre håndtaget opad, til det sidder fast i låsemekanismen, se fig. 08.

Parkeringsbremsen skal altid være aktiveret (til), når brugeren skal ind eller ud af kørestolen. Parkeringsbremsen må ikke benyttes, mens stolen kører. Brug af parkeringsbremsen, når kørestolen er i bevægelse, kan forårsage farlige situationer.

Efter længere tids brug kan der være behov for at justere parkeringsbremsens to wirer. Kontakt i så fald **Krabat AS** eller en repræsentant for **Krabat AS**.



Fig. 07
Bremse til



Fig. 08
Bremse fra

Brug af væltesikring (tilbehør)

Krabat Sheriff S1/S2 er udstyret med 2 væltesikringer. Standardpositionen har en tippevinkel på 7 grader, før væltesikringen slår til. Denne tippevinkel kan let ændres til 14 grader. Krabat anbefaler alle brugere at beholde væltesikringen påmonteret.



Fig. 09a
Indre position – deaktiveret



Fig. 09b
Træk stemplet op væltesikringen ud



Fig. 09c
Ydre aktive position



Fig. 09d
Træk stemplet op væltesikringen ud

Breddejustering

Bredden mellem hjulene er kan justeres. Ved at løsne skruen som vist på fig. 10. For at foretage justeringen skal skruerne, som holder væltesikringen, løsnes.



Fig. 10
Justering af afstanden mellem hjulene

Transport

Krabat Sheriff S1/S2 er udstyret med Quick Release-aksler til hurtig og nem afmontering af hjulene, når stolen skal transporteres.

Tryk knappen i midten af akslen ind. Hold knappen nede, og træk hele hjulet af i en lige bevægelse. Ved montering skal du sikre, at knappen springer ud igen, og at hjulet sidder korrekt på plads, inden kørestolen igen tages i brug. Det er vigtigt, at hjulene sidder som beskrevet på kørestolen, og at det sikres, at akslerne er fastlåst, for at undgå farlige situationer. Ryggen kan lægges ned mod sædet for at gøre produktet så kompakt som muligt i forbindelse med transport. Løsn de 2 skruehåndtag på siden som vist på fig. 11.

Krabat Sheriff S1/S2 er ikke egnet til flytransport uden en egnet transportemballage (kasse, kuffert eller lignende). Forsendelse af Krabat Sheriff S1/S2 uden transportemballage kan potentielt forårsage skader på produktet, som kan skabe farlige situationer.

Krabat Sheriff S1/S2 er ikke godkendt til brug i bil.

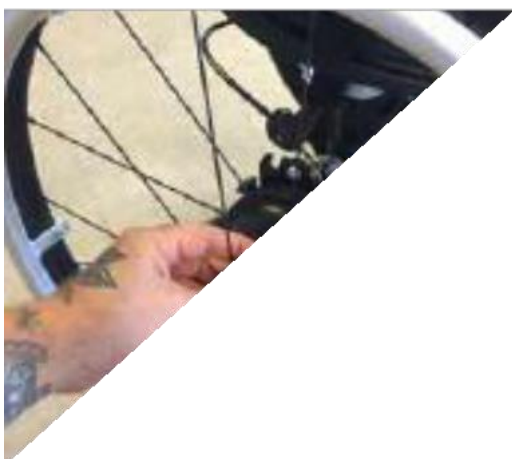


Fig. 11
Afmontering/montering af hjul og nedlægnings af ryg

Tilbehør

Krabat Sheriff har et stort udvalg af ekstraudstyr, som kan monteres eller bestilles efterfølgende, f.eks. bord, hovedstøtte og kørehåndtag. Der findes også et udvalg af forskellige veste, ankelmanchetter etc.

Se [den opdaterede liste over ekstraudstyr på **www.krabat.com**](#). Alt ekstraudstyr har egen brugsanvisning, som følger udstyret.

Ved behov for ekstraudstyr, andet udstyr eller indstilling af din Krabat Sheriff-stol skal du kontakte NAV-hjælpemiddelcentralen, din lokale fysio- eller ergoterapeut eller en repræsentant fra Krabat.

Vedligeholdelse

Alle dele, metal eller plastik, kan rengøres med vand og sæbe. Siddeenhed og stoleryg kan leveres med forskellige typer puder og betræk, enten en "alt-i-én"-pude eller en pude med separat sædebetræk. "Alt-i-én"-puden kan rengøres med en klud og sæbevand eller vaskes i maskine på 40 grader. Det separate sædebetræk kan vaskes i maskine ved 40 grader celsius. Ingen af puderne eller sædebetrækkene kan tørres i tørretumbler.

Krabat Sheriff er et personlig produkt, som er individuelt tilpasset i henhold til medicinske krav og krav fra brugeren. Regelmæssig vedligeholdelse af produktet er ikke nødvendig. Vask stolens komponenter ved behov. Følg de almindelige hygiejneråd, og hold altid stolen ren.

Sæde- og rygpude af mikrofiberstof er fastgjort til stolen med velcro. Råd om pletfjerning findes på www.krabat.no.

Kuglelejer og andre bevægelige dele er vedligeholdelsesfrie og skal ikke smøres.

For at undgå skader må ingen dele af produktet repareres eller vedligeholdes, imens det er i brug.

BEMÆRK: Hvis du oplever, at dele bliver ødelagt eller er tydeligt beskadigede, skal du indstille brugen af stolen og kontakte autoriseret personale med henblik på service eller for at få vejledning om korrigerende tiltag.

Individuelle justeringer og tilpasninger

Hvis barnet vokser ud af produktet, ændrer siddemønster eller af andre grunde har behov for justering eller individuel tilpasning af stolen, skal du kontakte en fysioterapeut, ergoterapeut eller hjælpemiddelcentralen i din region. Tilpassing af produkt skal udføres af kvalificeret personale eller repræsentanter fra Krabat AS.

Foretag under ingen omstændigheder modifikationer eller ændringer på stolen.

Tekniske data

Materialer:

Ramme:	Anodiseret aluminium
Puder:	Brandhæmmende skum
Betræk:	Brandhæmmende mikrofiberstof Neopren
Plastdele:	POM, PA6 og
ABS Øvrige metaldele:	Aluminium og stål



Se anvisninger vedrørende vask af puder og tekstiler på det enkelte produkts vaskeanvisning

	S1		S2		
ISO 7176-15	Min.	Maks.	Min.	Maks.	Kommentar
Maksimal brugervægt		60 kg		60 kg	
Nominelt lufttryk i dæk	6,0 bar	8,0 bar	6,0 bar	8,0 bar	
Diameter hjul		20"		24"	
Bredde	56 cm	64 cm	61 cm	69 cm	
Længde		66 cm		76 cm	
Højde	69 cm	78 cm	79 cm	89 cm	
Vægt		8,9 kg		9,1 kg	Standard uden tilbehør
Sædehøjde over gulv	44 cm	47 cm	48 cm	52 cm	
Vippevinkel m/antivæltefunktion	7°	14°	7°	14°	
Diameter drivring		44,5 cm		53,5 cm	
Akselhøjde		25,5 cm		30 cm	
Sædedybde		28 cm		31 cm	
Sædebredde		24 cm		30 cm	
Sædevinkel	- 15°	+ 15°	- 15°	+ 15°	Total justeringsvinkel - 30°
Rygbredde		26 cm		32 cm	
Rygvinkel	- 15°	+ 15°	- 15°	+ 15°	Fastgjort til sæde
Svingradius	40 cm		44 cm		

Advarsler og definitioner

Generelle advarsler:

Kvælningsfare:

Ved normal brug, når bruger sidder i stolen og evt. er sikret, er der ingen kvælningsfare. For at undgå mulig kvælningsfare må du ikke efterlade et barn alene med Krabat Sheriff.

Klemningsfare:

Der er meget lille fare for klemnings-skader ved normal brug, så længe procedurerne for justering følges. Hjul og andre bevægelige dele vil kunne udgøre en klemningsfare for andre end brugeren, når produktet er i brug. Sørg derfor for, at stolen ikke anvendes uden opsyn af en voksen, og efterlad aldrig barnet i stolen uden opsyn.

Hvis skruer og andre bevægelige dele ikke er strammet korrekt, kan der forekomme bevægelser i produktet – som igen kan udgøre en klemningsfare.

For at forhindre risikoen for sådanne hændelser må barnet aldrig efterlades i stolen uden opsyn.

Vælterisiko:

Der er altid en reel fare for, at et produkt kan vælte, hvis man ikke holder sig inden for de begrænsninger, der er fastsat af en terapeut med oplæring fra Krabat, de oplysninger, der fulgte med produktet, eller de tilgængelige oplysninger på Krabat.no. En generel regel er, at al bevægelse uden for produktets «fodaftryk» mod underlaget, kan udgøre en risiko for, at produktet vælter. Jo højere brugeren er, desto større er vælterisikoen. Det samme gælder ekstra påmonterede komponenter som f.eks. bord, kommunikationsværktøj og taske. For at forhindre risikoen for sådanne hændelser bør dette undgås, og barnet må aldrig efterlades i stolen uden opsyn.

Definitionen på anvendte dele:

Definitionen på anvendte dele er dele af produktet, som kommer i kontakt med BRUGEREN ved normal brug/for at udføre sin funktion.

Definitionen på anvendte dele er: siddeenhed og stoleryg inklusive puder, fodstøtte(r) inklusive ankelstropper/ankelmanchetter og hoftesele, hvis monteret, hovedstøtte, bord og kørehåndtag.

Transport og opbevaring

Ved transport og/eller opbevaring bør Krabat Sheriff forblive operativ ved normal brug inden for sine specifikationer efter transport eller opbevaring i følgende temperaturområder:

- -25 °C til +5 °C, og
- +5 °C til +35 °C ved en relativ luftfugtighed på op til 90 %, ikke-kondenserende;
- >35 °C til 70 °C ved et vanddamptryk på op til 50 hPa,

efter at produktet er taget ud af emballagen, og derefter mellem brug.

Bemærk: Krabat Sheriff skal opbevares indendørs.

Miljømæssige påvirkninger ved brug

Når Krabat Sheriff skal tages i brug, skal den anvendes under følgende miljømæssige betingelser:

- Ved temperaturer på mellem + 5 °C og + 40 °C;
- Ved en relativ luftfugtighed på mellem 15 % og 93 ikke-kondenserende
- Ved et atmosfærisk tryk på mellem 700 hPa og 1.060 hPa

Dette produkt er klassificeret til ikke-kontinuerlig drift.

Normal driftscyklus for anvendelse – 10 % eller 2 minutters drift efterfulgt af 18 minutters stilstand.

Brug efter opbevaring:

Hvis Krabat Sheriff har været opbevaret koldt (under 0 grader celsius), skal der gå 20 minutter, inden stolen tages i brug.

Hvis Krabat Sheriff har været opbevaret på et varmt sted (over 50 grader celsius), skal alle overflader køle ned til omgivelsestemperaturen, inden barnet sættes i stolen. Vent 20 minutter, inden stolen tages i brug.

Undgå brandskader/skoldning:













Hvis Krabat Sheriff er efterladt i direkte sollys, skal du flytte stolen væk fra det direkte sollys og kontrollere, at alle stolens overflader har opnået en acceptabel temperatur, inden du placerer barnet i stolen.

Tips: For at undgå, at stolens overflade bliver for varm, kan Krabat Sheriff tildækkes med et tæppe for at skærme overfladerne mod direkte sollys.

Genanvend komponenter og materialer i overensstemmelse med lokal, statslig og national lovgivning.

Symbolforklaringer

Forklaring på de forskellige symboler, som bruges på produktet og i denne brugsanvisning:

Symbol	Betydning	Betydning	Forklaring
	Symbol til brug ved mærkning af medicinsk udstyr.	Producent	Angiver producenten af medicinsk udstyr
	Medicinsk elektrisk udstyr – Del 1: Generelle krav til grundlæggende sikkerhed og essentiel ydelse	Se brugsanvisning	Angiver behovet for, at brugeren skal se brugsanvisning
	Medicinsk elektrisk udstyr – Del 1: Generelle krav til grundlæggende sikkerhed og essentiel ydelse	Følg brugsanvisning	Se brugsanvisning
	Generelt advarselsskilt	Advarsel: Læs alle advarsler og sikkerhedsregler i brugsanvisningen.	Når en bruger sidder i stolen, og stolen skal flyttes, f.eks. fra rum til rum, anbefales det IKKE at gøre dette med siddeenheden i højeste stilling. For at forhindre, at stolen vælter ved uheld, må du aldrig flytte stolen, når siddeenheden er i højeste stilling.
	Medicinsk elektrisk udstyr	Type BF anvendt del	Identifikation af type BF anvendt del iht. IEC 60601-1.
IPN ₁ N ₂	Medicinsk elektrisk udstyr – Del 1: Generelle krav til grundlæggende sikkerhed og essentiel ydelse	Grad af vand- og støvindtrængning	Producentfastsat grad af beskyttelse mod indtrængning af partikler og vand.
	Symbol til brug ved mærkning af elektriske apparater	Kun til indendørs brug	Identificerer elektrisk udstyr designet primært til indendørs brug.
	Symboler til brug ved mærkning af elektriske apparater.	Risikoklasse 2	Identificerer elektrisk udstyr designet primært til indendørs brug
	Kravene til godkendelse og markedsovervågning relateret til markedsføring af produkter; direktivet om medicinsk udstyr	CE-mærkning	Betegner europæisk teknisk overensstemmelse.
	Symbol til brug ved mærkning af elektriske apparater	Må ikke bortskaffes som restaffald	Viser, at du ikke må smide den elektriske genstand i restaffald (den bør tages med til en lokal genbrugsplads)
	Symbol fra det certificerede organ, som har gennemført tests	Certificeringsmærke	Certificeringsmærke, som betyder, at dette produkt er certificeret til at opfylde kravene i amerikanske og canadiske elektriske sikkerhedsstandarder
	Sikkerhedsskilt, der forbyder, at man sidder på en overflade.	Sid ikke på denne overflade	Identificerer overflader/dele, som er uegnede til at sidde på.
	Sikkerhedsskilt, som forbyder, at man træder på en overflade.	Træd ikke på denne overflade	Identificerer overflader/dele, som er uegnede til at træde på.

Garanti

Producenten af KRABAT-produkter, Hepro AS afd. KRABAT – herefter kaldet «KRABAT» – som har sit forretningssted på Ravnsborgveien 56, 1395 Hvalstad, Asker, Norge – giver køberen af et KRABAT-produkt følgende produktgaranti, herefter kaldet «GARANTI»:

1. Denne GARANTI gives på betingelse af, at køber og enhver person, som køber giver adgang til KRABAT-produktet, overholder følgende SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER
 - I. Sørg altid for at have læst og forstået medfølgende brugsanvisning for produktet, inden du tager produktet i brug.
 - II. KRABAT-produktet er kun beregnet til det tiltænkte formål i henhold til KRABATs brugsanvisning for det relevante KRABAT-produkt.
 - III. Børn eller andre brugere af KRABAT-produktet skal altid være under opsyn af voksne.
 - IV. Tjek, at hofteselen (sikkerhedsseler) er korrekt fastgjort og fungerer, som den skal. Undersøg med jævne mellemrum, at hofteselen er fastgjort korrekt på KRABAT-produktet.
 - V. Brug altid KRABAT-produkter i samråd med en lokal fysioterapeut eller ergoterapeut.
 - VI. KRABAT-produktet er ikke et legetøj. Lad ikke børn eller andre lege med KRABAT-produktet, da det kan forvolde skade på personer og/eller produktet
 - VII. Når KRABAT-produktet ikke er i brug, skal det opbevares, så det ikke kan misbruges eller forvolde skade på andre, på KRABAT-produktet eller dets funktioner.

2. Med forbehold for at vilkårene i GARANTIEN overholdes, garanterer KRABAT, at KRABAT-produktet i en periode på ét (1) år (garantiperioden) fra købstidspunktet vil fungere i overensstemmelse med det tilsigtede formål som anført i KRABATs brugsanvisning efter køb af KRABAT-produktet.

3. Hvis der skulle opstå skader eller fejl på produktet i den nævnte garantiperiode, vil KRABAT tilbyde assistance inden for rimelig tid. Fejlen rettes af enten KRABAT eller en tredjepart, som er godkendt af KRABAT, ved at denne enten tager produktet ind til inspektion/reparation eller fremsender reservedele til udskiftning, forudsat at køber uden unødigt forsinkelse efter at være blevet bekendt med mangler skriftlig har varslet HEPRO eller en repræsentant autoriseret af KRABAT om en eventuel mangel/eventuelle mangler, der opdages. KRABAT forbeholder sig ret til efter eget skøn at fremsende et nyt produkt i stedet for at gennemføre en reparation, hvis produktet har mangler/fejl. Ved fremsendelse af reservedele, dele, der skal udskiftes, eller et nyt produkt (en ny enhed?). Ved fremsendelse af reservedele, dele, der skal udskiftes, eller et nyt produkt anses KRABAT eller dennes autoriserede repræsentanter for at have opfyldt sine forpligtelser, når de relevante dele eller det relevante produkt er gjort tilgængelige/tilgængeligt for afhentning på det sted, hvor det oprindelige KRABAT-produkt blev solgt.

4. I tilfælde af, at en mangel ikke bliver udbedret:
 - I. Køber har ret til en reduktion af købesummen i forhold til den reducerede værdi af KRABAT-produktet, forudsat at reduktionen af købesummen under ingen

omstændigheder overstiger femten procent (15 %) af købesummen for nævnte KRABAT-produkt, eller

- II. Hvis manglen er så væsentlig, at den fratager køber en væsentlig fordel i forhold til formålet med købet, kan køber hæve købet på baggrund af det mangelfulde KRABAT-produkt. Hvis køber har lidt et tab, kan køber have ret til refusion af maksimalt femten procent (15 %) af købesummen for nævnte KRABAT-produkt.
5. Denne GARANTI giver ingen garantier ud over de garantier, der gives i henhold til denne GARANTI.
6. For at undgå tvivl. Denne GARANTI pålægger ikke KRABAT eller KRABATs autoriserede repræsentanter noget ansvar for indirekte tab eller følgeskader, som er blevet påført af køber eller en person, som køber har givet adgang til produktet, bevidst eller ubevidst.
7. Denne GARANTI gælder ikke, hvis KRABAT-produktet er suppleret med eller er blevet tilført dele, som ikke er produceret af KRABAT, eller dele produceret eller leveret af andre, hvor anvendelsen ikke er skriftligt autoriseret af KRABAT.
8. KRABAT er kun ansvarlig for fejl, som opstår under drifts- eller brugsbetingelser, som er forudsat i brugsanvisningen til det relevante KRABAT-produkt.
9. KRABAT kan ikke holdes ansvarlig for mangler forårsaget af forkert vedligeholdelse, fejljusteringer eller reparationer udført af andre end KRABAT eller repræsentanter autoriseret af KRABAT eller for ændringer i produktet, som er udført, uden at der foreligger et skriftligt samtykke fra KRABAT.
10. Denne GARANTI dækker ikke normal slitage
11. KRABAT er under ingen omstændigheder ansvarlig for mangler eller skader på KRABAT-produktets dele i mere end to (2) år efter levering.
12. Bortset fra det, der er anført i denne GARANTI, kan hverken KRABAT eller dennes autoriserede repræsentanter holdes ansvarlige for mangler på et KRABAT-produkt. Dette gælder ethvert tab, herunder produktionstab, tab af fortjeneste eller andre indirekte tab.



krabat[™]

STOLT AV Å VÆRE ANNERLEDES

Hepro AS, afd. Krabat

Ravnsborgveien 56

1395 Hvalstad

Norge

www.krabat.no