



BRUGERVEJLEDNING

Tillykke med dit nye talende armbåndsur!

- **Knap 1** er taleknappen: Tryk på denne knap for at høre hvad klokken er.
- **Knap 2** er kroneknappen til at stille viserne med: Træk knappen ud og drej den til venstre for at stille viserne. Tryk den ind igen for at starte urværket. Vær opmærksom på at viserne skal stilles separat.
- **Knap 3** er en skjult knap som sidder på venstre side af uret. Trykkes på denne knap med en spids genstand, flyttes talen en time frem. Holdes knappen inde, stilles timerne hurtigt frem.
- **Knap 4** er ligeledes en skjult knap som sidder på urets højre side, under kroneknappen. Trykker man på den med en spids genstand stilles talen 1 minut frem. Holdes knappen inde stilles minutterne hurtigere frem.



Udtale af klokkeslættet

Uret kan sige hvad klokken er på to forskellige måder, eksempelvis 15:30 eller halv 4 om eftermiddagen. Ved valg af tidsformatet skal man stille timerne med knap 3, frem til man passerer 00:00 eller 12 om natten. Uret vil nu automatisk skifte tidsformat.

Valg af sprog

Uret kan sige klokkeslættet på 5 forskellige sprog - Polsk, finsk, svensk, norsk og dansk.

For at skifte sprog, gør følgende: Tryk og hold taleknappen, knap 1, indtil der høres et bip. Talen er nu slukket. Tryk og hold taleknappen indtil uret taler igen. Tryk nu gentagne gange på taleknappen indtil uret taler det ønskede sprog. Tryk derefter på en af de skjulte knapper, knap 3 eller knap 4, for at låse sproget. Uret vil herefter sige klokkeslættet på det ønskede sprog når taleknappen trykkes.

Udskiftning af batteri

Uret bruger et batteri som både forsyner talen og viserværket. Lad en urmager skifte batteriet. I reklamationsperioden tilråder vi at man henvender sig til sit hjælpemiddeldepot for at få videre instruktion. Ved henvendelse til lokale urmagere bortfalder reklamationen, såfremt uret efterfølgende er defekt.

Bemærk venligst

Uret er ikke vandtæt. Bør derfor tages af før håndvask, opvask, bad, svømning og så videre.

Instrulog A/S

Bjerringbrovej 116

DK-2610 Rødovre

E-mail: info@instrulog.dk

Web: instrulog.dk

Telefon: +45 44 97 94 77

Skype: Instrulog.dk