




Instruktionsmanual for DressBuddy-Arm

- 1. Sæt DressBuddy stativ ovenpå den blå plade

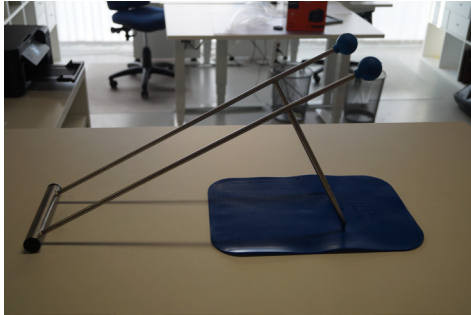

- 2. Monter strømpen på de blå kugler




- 3. Tag fat om glidestykket midt på



- 4. Før armen ind i hullet og helt igennem strømpen. Anvend en handske til at få strømpen til at sidde helt igtigt.



- 5. Tag strømpen af de blå kugler

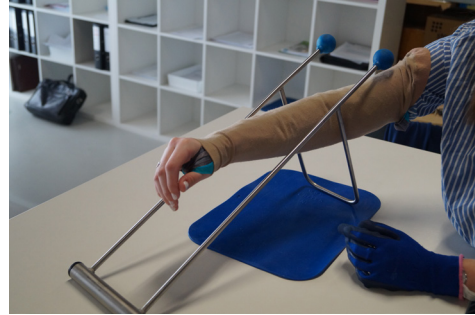

- 6. Sæt enden af glidestykket rundt om dørhåndtaget



- 7. Hold fast om håndledet med den blå handske og gå stille tilbage indtil glidestykket trækkes helt ud af strømpen.



- Aftagning af strømpen: Her kan anvendes en DressBuddy-Aftager til arm. HMI nr.: 74619. Bestilles separat.

