

Manual

Din tablets generelle indstillinger

- ✓ Sørg for at slå den automatiske dvaleindstilling for skærmen fra. Hvis dette ikke er en mulighed på din tablet, så download 'Screen Time Out Toggle' på Google Play.
- ✓ Juster volumen og skærmlysstyrken efter brugerens præference.

Rediger aktivitetskalender og indstillinger

Tilgå indstillingsmenuen ved at bruge et 2- eller 3-finger 'swipe' (strøg) i opadgående retning på skærmen. Indstillingsmenuen har en kalendersektion. Gå tilbage til hovedmenuen ved at trykke på krydset i højre hjørne.

Aktivitetskalender


Når man er nået 'Calendar'-menuen i Clockaid vil en kalender komme til syne. Vælg datoen for begivenheden og angiv begivenhedens navn og tid og indstil en alarm på højre side af skærmen.

Lav en ny begivenhed

- ✓ Vælg den ønskede dag
- ✓ Tryk på +
- ✓ Angiv tidspunktet
- ✓ Brug evt. et af de fem forslag eller skriv din egen besked/tekst
- ✓ Vælg hvor ofte begivenheden gentages: dagligt, ugentligt eller månedligt
- ✓ Tryk 'gem'
- ✓ Tryk på krydset i det øverste højre hjørne, når du er færdig. Derefter lukker kalenderen
- ✓ Du vil herefter se en begivenhed i notifikationsbaren.

Indstillinger

'Indstillinger'-knappen åbner indstillingsmenuen.
VENSTRE: Indstillingerne for personlig indstilling af urskive og sprog
HØJRE: fotogalleriet

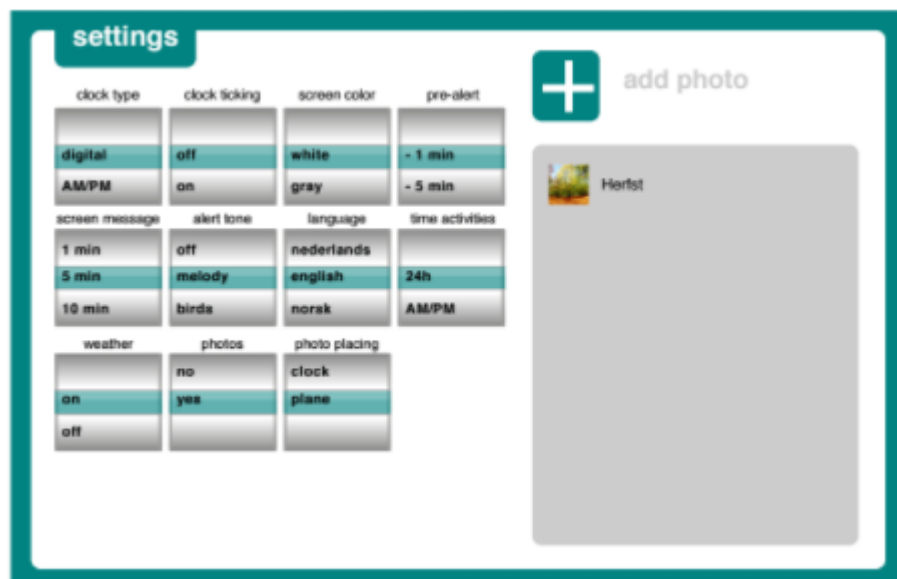

- ✓ Ur: Vælg mellem fire urskiver: Digital, moderne analog, klassisk analog og AM/PM
- ✓ Tikkelyde: Vælg mellem 'On/Off'
- ✓ Skærmfarve: Vælg urets baggrundsfarve: Hvid, sort eller grå
- ✓ For-alarm: Vælg starten af for-alarmen, som vil vare 1 minut
- ✓ Skærmbesked: Vælg, hvor lang tid beskeden skal være synlig, efter alarmen er ovre. **OBS: I tilfælde af begivenhedskonflikter vil den ældste besked blive slettet (overrulet)**
- ✓ Alarmtone: Vælg mellem forskellige alarmtoner eller 'Off'
- ✓ Sprog: Vælg det ønskede sprog

- ✓ Tidsformat: 24 timers format eller AM/PM
 - ✓ Vejr: 'On/Off'
 - ✓ Fotos: Ja/nej. Hvis der er flere fotos, bliver de automatisk placeret i en karrusel (dvs. vises på skift)
 - ✓ Fotoplacering: I uret eller bag uret.
- Tryk på krydset i det øverste højre hjørne, når du er færdig.

Tilgå kalendere og indtast information online

Log ind via Clockaids hjemmeside vha. en e-mailadresse og kodeord, der lå i kassen, du modtog.

Online fjernadgang

Adgang via internettet

- ✓ Gå til hjemmesiden clockaid.com og log ind vha. den e-mailadresse og kodeord, du modtog
- ✓ Vælg den Clockaid All-kalender, du vil redigere
- ✓ Rediger kalenderen: Dato, aktiviteter, tider osv.
- ✓ Gem og log af.

Produkter og konto

Produkter

Her kan du give din/dine Clockaid tablet(s) et navn. Dette er kun relevant, hvis du fjernadministrerer flere kalendere.

Konto

Under 'konto' kan du tilføje og/eller ændre administratorens navn.

Forklar og hjælp til slutbrugeren!

Der opfordres til at give den (ældre) bruger en grundig forklaring af Clockaid-uret: Clockaid er egentlig bare et ur, som altid giver dig den korrekte tid, dag og dato. Clockaid-uret kan også være en fantastisk hjælp til at påminde brugeren om forskellige ting: At tage medicin, lægeaftaler mv.

Valget af alarmtonen og den visuelle alarm bør gøres sammen med slutbrugeren. Glem ikke at checke, om alle funktioner fungerer korrekt, og se om der bør laves nogle justeringer efter nogle dage. Gør dette regelmæssigt og sørg for, at alarmerne bliver fortolket korrekt af brugeren.