



Brugsanvisning

Krykke til børn



Danish **CARE** Supply
- fremtidens hjælpemidler



| HMI-nr. | Varenr. | Varetekst |
|---------|---------|----------------------|
| 70850 | 130060 | Krykke tilbørn - Grå |
| 70851 | 130061 | Krykke tilbørn - Blå |

Sikkerhedsanvisninger:

- Produktet bør ikke bruges til andet en beskrevet.
- Konsulter din læge før brug.
- Krykken skal justeres så den passer til brugeren. Dette skal gøres af en fysioterapeut, læge eller lignende.
- Krykken skal aldrig bruges til at åbne eller lukke døre.
- Dupskoen skal kontrolleres regelmæssigt. En skadet dupsko er u hensigtsmæssig i forhold til balance og kontrol.
- Ved glat underlag bør dupskoen kombineres med en ispig.
- Ved tegn på at højdejusteringen fejler eller mangler en del må produktet ikke anvendes.

Specifikationer:

Vægt: 310 g

Bruger maksvægt: 50 kg

Håndtagshøjde min: 46 cm

Håndtagshøjde max: 58 cm

Albuestøtte længde: 11 cm

Rengøring:

- Produktet kan vaskes emd alkalisk sæbeopløsning. PH-Værdi 5-9.
- Vakes på maks 85°C i maks 3 minutter.

Justering af højden:

1. Højden justeres ved hjælp af trykknappen. Indstil højden efter brugeres behov.
2. Kontroller at trykknappen for højdejusteringen sidder fast. Mangler trykknappen på produktet ikke anvendes.
3. Kontroller dupskoene inden brug. Er disse skadet eller slidte skal de skiftes ud til nye.