


















1. Grundlæggende instruktioner

Produktet skal anvendes i overensstemmelse med denne brugsanvisning, og den skal opbevares et sikkert sted for eventuelle forespørgsler. Den indeholder vigtige oplysninger, som er nødvendige for den tilsigtede anvendelse. Dette hjælper med at undgå skader eller farer som følge af forkert brug.

Hvis der skulle opstå en alvorlig hændelse i forbindelse med dette medicinske udstyr, skal dette straks indberettes til SOFTLINE-Schaum GmbH & Co. KG og den ansvarlige myndighed.

2. Forklaring af symboler

	Producent		Fremstillingsdato		Medicinsk udstyr
	Overensstemmelsesmærkning i henhold til den europæiske forordning om medicinsk udstyr 2017/745 (MDR)		Opmærksomhed Overhold de advarsler og sikkerhedsinstruktioner, der er anført i dette dokument.		Følg brugsanvisningen.
	Bemærk skilt/advarsel		Artikel nummer		Serienummer
	Kan vaskes ved op til 60 °C.		Kan ikke vaskes.		Må ikke stryges.
	Må ikke tørretumbles.		Tør i tørretumbler på skånsomt program.		Må ikke renses.
	Må ikke behandles med blegemiddel.		Egnet til tørre desinfektion.		

3. Produktbeskrivelse

Den universelle pude har en rektangulær form og bruges multifunktionelt til at støtte forskellige dele af kroppen. Pudefyldet består af 100 % polystyrenkugler med små granuler, som tilpasser sig kroppens konturer på grund af deres forskydelighed i pudebetrækket. Kuglerne er fast syet ind i et betræk af bi-elastisk poly amid tekstil (45 %) med en antibakteriel polyurethanbelægning (55 %). Pudebetrækket er uigennemtrængeligt for væsker, vaskbart, kan tørres af og er modstandsdygtigt over for blod og urin.

Se:



Universalpude størrelse S
Artikel nr. P43771



Universalpude størrelse M
Artikel nr. P43772



Universal pude størrelse L
Artikel nr. P43773



Universal pude 2 stk.
Artikel nr. P43774

4. Formål

Den universelle pude tjener som statisk positioneringshjælp for krop, krop og ekstremiteter til både decubitusprofylakse og decubitusbehandlingsstøtte.

4.1 Virkning

Den fungerer efter princippet om blød positionering eller fri positionering og understøtter gennemførelsen af specifikke positioneringsformer og positionering af særligt truede kropsdele eller kropsregioner.

Når puden bruges, flytter polystyrenkuglerne sig i betrækket på grund af trykbelastningen og tilpasser sig således brugerens anatomiske kropskonturer. Den punktelastiske formning understøttes af strækbarheden i pudebetrækkets materiale, hvorved kontaktfladen udvides i de områder, hvor der er risiko for decubitus, hvilket fører til en reduktion og omfordeling af trykket. Dette mindsker risikoen for udvikling af tryksår eller støtter effektivt behandlingen af et eksisterende tryksår.

Puden placeres direkte på de dele af kroppen, der skal støttes.

4.2 Angivelse

Produktet er beregnet til patienter,

- Hvor regelmæssige stillingsskift er nødvendige for at aflaste områder med risiko for decubitus med mellemrum.
- hvor permanent liggende stilling er påkrævet
- som har en øget risiko for tryksår, når de ligger ned
- For hvem der er behov for støtte til behandling

4.3 Anvendelsesområde

Påtænkte brugere

De tiltænkte brugere er alle medlemmer af læge- og sundhedsfaglige erhverv og af sundhedssektoren samt lægfolk, hvis de har den nødvendige uddannelse eller viden og erfaring til brug af produktet *eller* er blevet instrueret i håndteringen af produktet.

Patientgruppe

Den universelle pude er beregnet til personer med begrænset mobilitet på grund af sygdom, handicap eller som har brug for støtte i positionen på grund af deres alder, samt til personer, der er i risiko for tryksår, eller for hvem støtte til behandling af tryksår er indiceret .

Der er ingen begrænsninger med hensyn til alder eller køn.

Brugermiljø

Universalhynden er velegnet til brug på hospitaler, plejehjem og plejehjem samt i hjemmet indendørs og kan anvendes i alle typer senge, kørestole eller andre sidde- eller liggemøbler med en flad eller justerbar liggeflade.

5. Sikkerhedsinstruktioner




- Forordningen om operatører af medicinsk udstyr (MPBetreibV) er bindende for operatøren/brugeren af medicinsk udstyr. Brugeren skal have den fornødne ekspertise til at kontrollere produktets egnethed og vurdere de eksisterende risici.
- Hvis den universelle pude anvendes i medicinske senge med sideskiner, skal puden forhindres i at sidde fast i sideskinnerne for at undgå, at sideskinnerne eventuelt mister deres funktion og dermed udgør en fare for patienten.
- Beskyt produktet mod åben ild (f.eks. cigaretbrænder, stearinlys) eller stærke varmekilder (f.eks. elektriske varmeapparater, gasovne). Der er risiko for brand !

- Sørg for, at der ikke er skarpe hjørner eller kanter i anvendelsesområdet, som kan beskadige puden.
- Direkte påføring på støttepuden er kontraindiceret hos patienter/beboere, der sveder meget og har tendens til maceration eller intolerance over for polyurethanbelagte tekstiler.

i I dette tilfælde anbefaler vi, at der anvendes et tekstilbetræk som supplement. Dette betræk med integreret flammebeskyttelse kombinerer inkontinensbeskyttelse med en hudvenlig tekstiloverflade. Dette er ikke inkluderet i leveringsomfanget.

6. Anvendelse af produktet

- Hovedanvendelsen af den universelle pude er i rygliggende stilling ved at genfodre og blødt positionere de øvre **(a)** eller nedre ekstremiteter, hvor især i området for de nedre ekstremiteter en fri positionering af hælen er mulig **(b)**.
- Den kan også anvendes til støtte og blød placering af hovedet **(c)**.

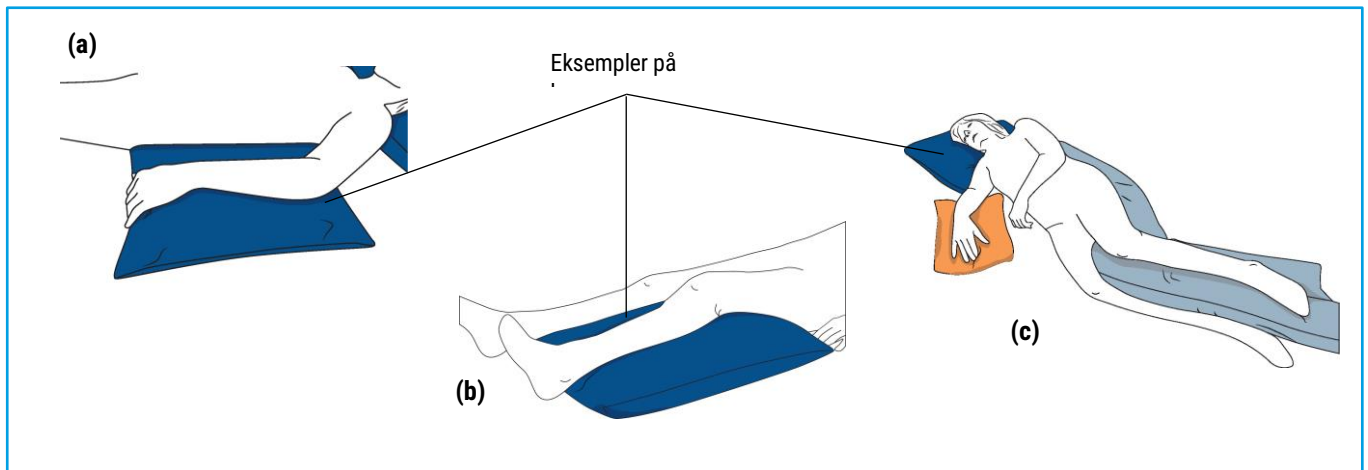

7. Pleje og rengøring

- I tilfælde af forurening kan puden rengøres med varmt sæbevand og desinficeres af brugeren selv. Desinfektion ved hjælp af tørre- eller spraydesinfektion bør kun foretages med klorfrie midler. Brugsanvisningen for de anvendte rengørings- og desinfektionsmidler skal overholdes.
- Det ekstra tekstilbetræk kan vaskes i en vaskemaskine ved 60 °C til maks. 95 °C med almindelige husholdningsvaskemidler og kan tørres i tørretumbler ved lav temperatur.
- Produktet leveres i brugsklar stand og er vedligeholdelsesfrit.
- Det anbefales ikke at genbehandle produktet og genbruge det på en anden patient i hjemmet.
- På det stationære område kan det efter valideret oparbejdning genbruges i tilfælde af patientskift i overensstemmelse med de gældende lovkra for det pågældende hospital.

8. Transport og opbevaring

Universalhynden må kun opbevares på et rent og tørt sted.



Når puden ikke er i brug, må du ikke placere tunge eller skarptskårne genstande på produktet, når det ikke er i brug.


9. Bortskaffelse

I princippet kan det uskadelige produkt bortskaffes med husholdningsaffaldet.

- Hvis der er mulighed for, at produktet kan være potentielt smittefarligt forurennet, skal det desinficeres under overholdelse af beskyttelsesforanstaltningerne og først derefter bortskaffes. I det stationære område skal produktet bortskaffes under overholdelse af beskyttelsesforanstaltninger i overensstemmelse med de gældende lovkra for det pågældende anlæg.

10. Tekniske data

HMV nej.	11.11.05.0011
----------	---------------


Påfyldning	100 % polystyrenkugler (EPS) med små granulater
Ydre skal	bi-elastisk polyamidstof (45 %) med antibakteriel polyurethanbelægning (55 %)
Standard for brandbeskyttelse	Flammehæmmende - DIN EN ISO 12952 del 1+2
Pleje/rengøring	

11. Varianter

Artikel nummer	Mål	Størrelse	Farve	Vægt (± 5 %)	UDI-DI
P43771	45 x 30 cm	S	orange	0,27	4056538004894
P43772	60 x 40 cm	M	blå	0,54	4056538004900
P43773	70 x 50 cm	L	blå	0,9	4056538004917
P43774	40 x 30 cm	(2 stk.)	blå	0,46	4056538004924

12. Ekstra pudebetræk

- Valgfrit tilgængelig

Navn	Tekstilbetræk blå til universel pude		
Artikel nummer	B43818	B43817	B43835
Størrelse	45 x 30 cm	60 x 40 cm	40 x 30 cm (2 stk.)
GTIN	4056538006485	4056538005426	4056538006478
Sammensætning	Materiale af lyocell- og modal fibre med en polyurethanbelægning		
Flammehæmmende egenskaber	permanent flammehæmmende		
Pleje			

Der tages forbehold for eventuelle fejl og stavfejl. Oversættelsen er foretaget af producenten, og er uden ansvar for CarePartner.

Forhandler:


CarePartner
 - din partner til et bedre liv

Lindevej 2, DK-4200 Slagelse

Tel.: +45 58 55 10 99

www.carepartner.dk

