


















1. Grundlæggende instruktioner

Produktet skal anvendes i overensstemmelse med denne brugsanvisning, og den skal opbevares et sikkert sted for eventuelle forespørgsler. Den indeholder vigtige oplysninger, som er nødvendige for den tilsigtede anvendelse. Dette hjælper med at undgå skader eller farer som følge af forkert brug.

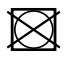Hvis der skulle opstå en alvorlig hændelse i forbindelse med dette medicinske udstyr, skal dette straks indberettes til SOFTLINE-Schaum GmbH & Co. KG og den ansvarlige myndighed.

2. Forklaring af symboler

| | | | | | |
|---|--|---|---|--|------------------------|
|  | Producent |  | Fremstillingsdato |  | Medicinsk udstyr |
|  | Overensstemmelsesmærkning i henhold til den europæiske forordning om medicinsk udstyr 2017/745 (MDR) |  | Opmærksomhed Overhold de advarsler og sikkerhedsinstruktioner, der er anført i dette dokument. |  | Følg brugsanvisningen. |
|  | Bemærk skilt/advarsel |  | Artikel nummer |  | Serienummer |
|  | Kan vaskes ved op til 60 °C. |  | Kan ikke vaskes. |  | Må ikke stryges. |
|  | Må ikke tørretumbles. |  | Tør i tørretumbler på skånsomt program. |  | Må ikke renses. |
|  | Må ikke behandles med blegemiddel. |  | Egnet til tørre desinfektion. | | |

3. Produktbeskrivelse

Det todelt benpositioneringssæt, der består af en basiskile og et underbenmodul, tjener som hjælp til positionering af underbenet. Ekstremiteter. Basen er en kileformet pude med en halvcirkelformet fordybning på den flade side, det nederste benmodul er rektangulært med en bølget top.

Begge dele er fremstillet af polyurethanskum og er helt omgivet af et blåfarvet beskyttelsescover. Det aftagelige betræk af bi-elastisk polyamidstof med polyurethanbelægning er væskeafvisende, vaskbart, kan tørres af, kan desinficeres og er modstandsdygtigt over for blod og urin. Den gråfarvede underside af betrækket er skridsikker.

Se:



4. Formål

Benpositioneringssættet tjener som statisk positioneringshjælp til de nedre ekstremiteter til både decubitusprofylakse og decubitusbehandlingsstøtte.

4.1 Virkning

Benpositioneringssættet fungerer efter princippet om blød positionering eller fri positionering og understøtter gennemførelsen af specifikke positioneringsformer og positionering af særligt sårbare områder af de nedre ekstremiteter.

Når produktet anvendes med patienten i rygliggende stilling - med lårene hvilende på basiskilen - forårsager basiskilen en trykomfordeling i sakralregionen. Underbenmodulet forårsager abduktion på grund af sin bølgeformede overside med en bred kontaktflade. Desuden løftes hælen, og der opnås fuldstændig trykaflastning i dette område gennem fri støtte.

Dette reducerer risikoen for udvikling af tryksår eller støtter effektivt behandlingen af et eksisterende tryksår .

4.2 Angivelse

Produktet er beregnet til patienter,

- hvor permanent liggende stilling er påkrævet
- som har en øget risiko for tryksår, når de ligger ned
- for hvem der er behov for støtte til behandling af tryksår
- for hvem en midlertidig stabilisering af siddestillingen i sengen er nødvendig

4.3 Anvendelsesområde

Påttænkte brugere

De tiltænkte brugere er alle medlemmer af læge- og sundhedsfaglige erhverv og af sundhedssektoren samt lægfolk, hvis de har den nødvendige uddannelse eller viden og erfaring til brug af produktet *eller* er blevet instrueret i håndteringen af produktet.

Patientgruppe

Benpositioningssættet er beregnet til personer, der er begrænset i deres mobilitet på grund af sygdom, handicap eller alder, som har brug for støtte i positionen, og som er i risiko for tryksår. Der er generelt ingen begrænsninger med hensyn til alder eller køn.

Brugermiljø

Positioneringshjælpen er velegnet til brug på hospitaler, plejehjem og plejehjem samt i hjemmet indendørs og kan anvendes i alle typer senge eller liggemøbler med en flad eller justerbar liggeflade.


5. Sikkerhedsinstruktioner



- Forordningen om operatører af medicinsk udstyr (MPBetreibV) er bindende for operatøren/brugeren af medicinsk udstyr. Brugeren skal have den fornødne ekspertise til at kontrollere produktets egnethed og vurdere de eksisterende risici.
- Hvis benpositioneringssættet anvendes i medicinske senge med sideskinner, skal det forhindres, at puden kan komme i klemme i sideskinnerne for at undgå, at sideskinnerne mister deres funktion og dermed udgør en fare for patienten.
- Beskyt produktet mod åben ild (f.eks. cigaretbrænder, stearinlys) eller stærke varmekilder (f.eks. elektriske varmeapparater, gasovne). Der er risiko for brand !
- Sørg for, at der ikke er skarpe hjørner eller kanter i anvendelsesområdet, som kan beskadige puden.
- Direkte påføring på positioneringshjælpemidlet er kontraindiceret hos patienter/beboere, der sveder meget og har tendens til maceration eller intolerance over for polyurethanbelagte tekstiler.

6. Anvendelse af produktet

- Den vigtigste anvendelse er med patienter i en flad rygliggende stilling. Kilen med den halvcirkulære fordybning placeres i højde med patientens balder, så lårene hviler på kilen. Disse er således placeret let hævet, og knæområdet er fysiologisk set placeret i en let vinkel ved pudens brede side **(a)**.
- Desuden muliggør basiskilen en effektiv patientpositionering, f.eks. når der udføres hjertesengeleje eller simple overkroplsøftninger, og forhindrer sikkert patienten i at glide mod fodendenden, samtidig med at yderligere friktion og skubkræfter undgås. Når patienten hæves fra liggende stilling til siddende stilling, reducerer den halvcirkulære fordybning i bundkilen risikoen for, at patientens bløde dele bliver klemmet mellem madrassen og positioneringshjælpen. Patienten kan stabiliseres i en sikker siddestilling i sengen i et individuelt defineret tidsrum **(b)**.
- Basen og modulet kan også anvendes individuelt, afhængigt af den tilsigtede anvendelse.

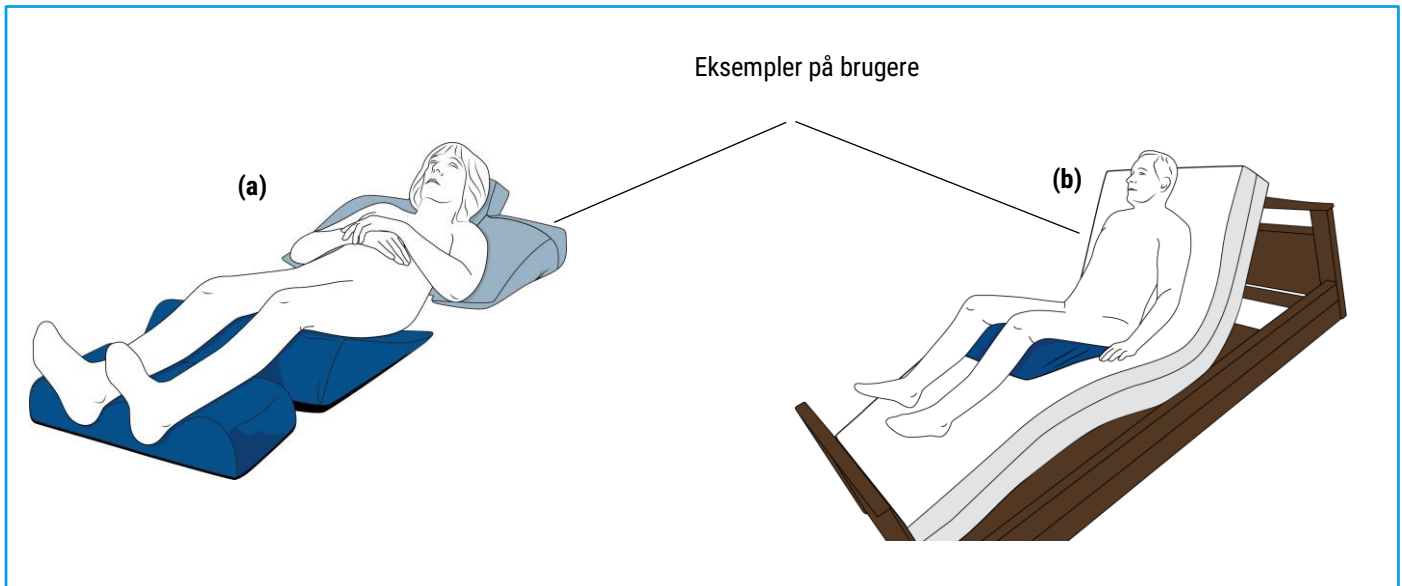

7. Pleje og rengøring

- I tilfælde af forurening kan positioneringshjælpen rengøres med varmt sæbevand og desinficeres af brugeren selv. Desinfektion ved hjælp af tørre- eller spraydesinfektion bør kun foretages med klorfrie midler. Brugsanvisningen for de anvendte rengørings- og desinfektionsmidler skal overholdes.
- Det aftagelige beskyttelsesbetræk kan vaskes i vaskemaskine ved 60 °C til maks. 95 °C med husholdningsvaskemidler og kan tørres i tørretumbler ved lav temperatur.
- Produktet leveres i brugsklar stand og er vedligeholdelsesfrit.
- Det anbefales ikke at genbehandle produktet og genbruge det på en anden patient i hjemmet.
- I det stationære område kan det genbruges efter valideret oparbejdning i tilfælde af patientskift i overensstemmelse med de gældende lovkrav for det pågældende hospital.

8. Transport og opbevaring

Benindstillings sættet må kun opbevares på et rent og tørt sted.





Når produktet ikke er i brug, må du ikke opbevare tunge eller skarpskårne genstande på produktet, når det ikke er i brug.

9. Bortskaffelse

I princippet kan det uskedelige produkt bortskaffes med husholdningsaffaldet.

- Hvis der er mulighed for, at produktet kan være potentielt smittefarligt forurennet, skal det desinficeres under overholdelse af beskyttelsesforanstaltningerne og først derefter bortskaffes. I det stationære område skal produktet bortskaffes i overensstemmelse med de gældende forskrifter for det pågældende anlæg under overholdelse af beskyttelsesforanstaltningerne.

10. Tekniske data

| | | |
|---|---|--|
| HMV nej. | 11.11.05.0038 | |
| Pudekerne Volumenvægt kompressionshårdhed | Polyurethanskum (PUR) 35 - 42 kg/m ³ 3,7 - 4,6 kPa | |
| Fuldt beskyttelsesdække | bi-elastisk polyamidstof (45 %) med antibakteriel polyurethanbelægning (55 %) | |
| Standard for brandbeskyttelse | Skum | flammehæmmende - BS 5852 Crib 5 |
| | Materiale til omslag | flammehæmmende - BS 7175 Crib 5 |
| Pleje/rengøring | Pude kerne |  |
| | Materiale til omslag |  |

11. Varianter

| Artikel nummer | Mål | Farve | Vægt | UDI-ID |
|----------------|--|-------|--------|---------------|
| P43787 | 58 x 55 x 12 cm + 50 x 21 x 10,5 cm | blå | 1,1 kg | 4056538005051 |
| P44455 | 58 x 55 x 12 cm | blå | 0,7 kg | 4056538005563 |
| P44456 | 50 x 21 x 10,5 cm | blå | 0,4 kg | 4056538005570 |

Der tages forbehold for eventuelle fejl og stavfejl. Oversættelsen er foretaget af producenten, og er uden ansvar for CarePartner.

Forhandler:


CarePartner
 - din partner til et bedre liv

Lindevej 2, DK-4200 Slagelse
 Tel.: +45 58 55 10 99
 www.carepartner.dk

