

PIL 1 og 2

(HMI-nr. 22568 og 22567)



TRYGHED - ALSIDIGHED - ARBEJDSGLÆDE



VED SIDELÆNS FORFLYTNING fra anden stol løftes armlænet lodret opad ca. 2.5 cm – herved løsnes det fra låse-systemet (E) og kan frit drejes til siden. Armlænet kan også tages helt af, hvis det hindrer hjælperens bevægelser med skadelige arbejdsstillinger til følge.

VED TOILETBRUG køres stolen ind over toiletkummen, og hjulene fastlåses. Ved brug af toiletspand kan **PIL 1** og **PIL 2** anvendes som toiletstol over alt i boligen. Sørg i disse situationer for, at hjulenes bremses (**1**) ikke "peger ind" under stolen. Hjulene skal **ALTID** låses, inden brugeren placeres i/ tager plads på stolen.

PIL 1 og **PIL 2** har indstillelige (og aftagelige) bækkenglidere, som betyder, at stort set enhver gængs spand på markedet kan anvendes i forbindelse med stolens toiletfunktion.

VED BADEBRUG kan stolens ryglæn (altså HELE ryglænsbøjlen) tages af for at lette hjælperens arbejdsstilling:

- a. de to låseclips (D), som sidder bag på stolen i sædehøjde, tages af.
- b. hele ryglænsbøjlen trækkes lodret op og frigøres herved fra stolens understel.
- c. efter badning sættes ryglænsbøjlen på plads igen, og de to låseclips skubbes i igen.

PUR-sædet er aftageligt og kan vendes, hvis brugeren foretrækker, at toiletåbningen er bredest fortil.

OBS ! SE BAGESTE SIDE FOR BETJENINGSVEJLEDNING FOR STANDARD-FODHVILERE MODEL 01055.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE:

Efterse jævnligt armlæn, ryglæn og undersøg, at deres låsesystemer er intakte. **Check** også hjulenes bremseevne - hjulene holdes fri af hår for at bevare max. køreevne og **efterspændes** om nødvendigt.

Udskift slidte eller ødelagte dele: Hellere én gang for meget end én for lidt !

Undersøg jævnligt for rustangreb (:i tilfælde af, at rustbeskyttelsen er blevet beskadiget).

Rengør med almindelige, *ikke-ætsende* rengøringsmidler, og **spul** derefter stolen. Den **efterfølgende aftørring** sker bedst med en blød klud.


EXTRA TILBEHØR:

AMPUTATIONSSTØTTE højre ben (PIL 1)	MODEL 22568-AKH
AMPUTATIONSSTØTTE højre ben (PIL 2)	MODEL 22567-AKH
AMPUTATIONSSTØTTE venstre ben (PIL 1)	MODEL 22568-AKV
AMPUTATIONSSTØTTE venstre ben (PIL 2)	MODEL 22567-AKV
ARMLÆN med skålføremet (hemi-) PUR-pude	MODEL 01041-H
ELEVÉRBAR benhviler (højre ben)	MODEL 01056-H
ELEVÉRBAR benhviler (venstre ben)	MODEL 01056-V
FODHVILERE højdeindstillelige, par	MODEL 01055
LÆGBÅND t/ model 01055	MODEL 01052
LÅG (=polstret oversæde)	MODEL 01042
SPAND	MODEL 01111-SP
SPANDELÅG	MODEL 01111-SPL

Andet tilbehør kan leveres efter aftale.

dan-rehab a/s, Messingvej 13-15, DK-8940 Randers SV, erklærer på eget ansvar, at **PIL 1** og **PIL 2**, som er omfattet af denne erklæring, er i overensstemmelse med EU-direktiv 93/42, Europæisk Standard EN 1441 (1997).

BETJENINGSVEJLEDNING fodhviler model 01055

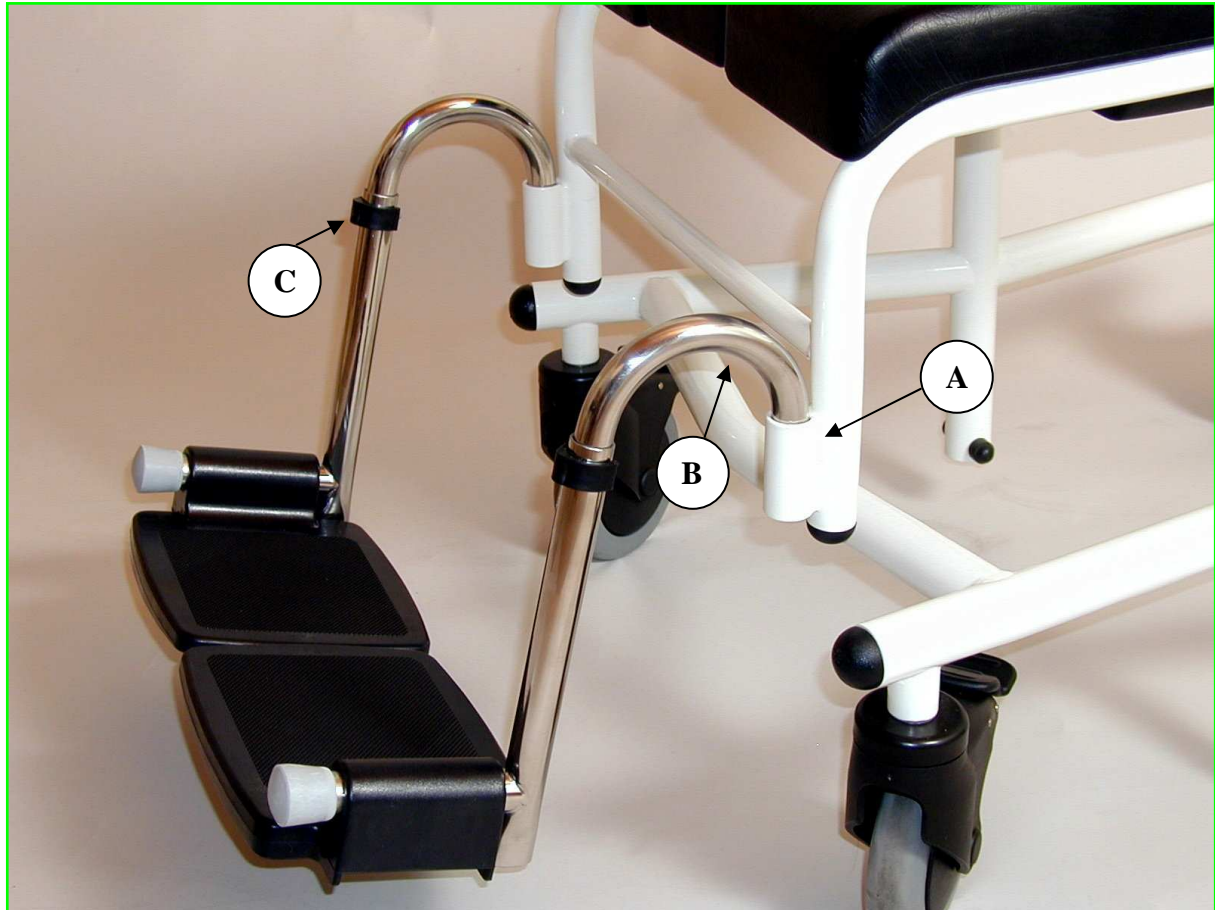

Hvert fodhvilerpar består af to højdeindstillelige fodhviler til højre henholdsvis venstre fod.

1. Anbring fodhvileren i beslaget (A), som er påsvejet stolens forben. I beslaget er indsvæjet en tværstang, som passer til fodhvilerens slidser og derved låser for sidedrej. **Disse slidser kan have skarpe kanter, som man kan rive sig på ved et uheld, når fodhvileren ikke er sat i beslaget.**
2. Ønskes fodhvileren svinget ud til siden, løftes den (nemtest i krumningen (B)) cirka én cm lodret: herved glider de omtalte slidser fri af tværstangen, og fodhvileren kan nu svinges ud (eller tages helt af).
3. Fodhvileren kan indstilles i længden ved at fjerne dens låseclip (C), trække (eller skubbe) fodhvilerens inderrør til den ønskede længde og derefter sætte dens låseclip på plads igen.
4. Fodhvilerne kan også forsynes med et indstilleligt lægbånd **MODEL 01052** fremstillet i skai med velcrolukning til at stramme eller slække samt en udelte, polstret fodplade **MODEL 01055-PL** til at montere med velcrotape oven på de to eksisterende fodplader.

OBS! Under indstillingen skal man tage hensyn til den klemrisiko, der altid er til stede.