


BRUGSANVISNING for bruseklapsæde TIPPE (HMI-nr. 22577)

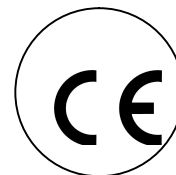

Ofte kan det for personer med funktionsnedsættelse være forbundet med vanskeligheder at tage et brusebad i stående stilling; problemet løses almindeligvis ved brug af en badebænk eller badetaburet.

Men de ydre omstændigheder, baderummets størrelse m.m., kan betinge anvendelsen af et bruseklapsæde, der kun tager begrænset plads op, selv når det er i brug.



A. Lad en fagmand montere bruseklapsædet på væggen. (Det er meget vigtigt at få fastslået væggens fasthed og styrke, da brugerens sikkerhed afhænger af, hvor stabilt sædet er monteret; af samme årsag leveres sædet heller ikke med skruer eller bolte, da disse jo skal passe til den pågældende vægtype.)



B. Sædet slås ned, og brugeren placeres/ placerer sig på det. Da sædet ikke er forsynet med armlæn, kræves en relativ god balance hos den enkelte bruger – hvis sædet monteres i et hjørne, kan en væg fungere som sidestøtte.

C. Efter endt brug klappes sædet op igen.

VEDLIGEHOLDELSE:

- ** Efterse jævnligt stålstel og ophæng. Efterspænd eventuelt boltene.
- ** Check før brug, om PUR-sædet ligger korrekt fastklemt på stellet. I modsat fald, kunne der opstå en tipningsrisiko.
- ** Bruseklapsædet tåler rengøring med almindelige ikke-ætsende rengøringsmidler.

dan-rehab a/s , Messingvej 13-15, DK-8940 Randers SV, erklærer på eget ansvar, at **TIPPE**, som er omfattet af denne erklæring, er i overensstemmelse med EU-Direktiv 2007/47/EC, DIN EN ISO 12182.

www.danrehab.dk