

CORNER- og STAK- badetaburetter





Højdeindstilling på **STAK 3**:


Indstil badetaburettens ben, **før brugeren tager plads !**

Brugeren skal siddende kunne støtte fladt på gulvet med sine fødder:

1. Træk benets låseclip (A) ud.
2. Træk/ skub teleskopbenet (B), indtil den ønskede længde nås.
3. Sæt benets låseclip i igen. **SØRG FOR, at alle låseclips sidder forsvarligt fast.**



- A. Afprøv sædehøjden i forhold til brugeren, som skal kunne støtte på gulvet med **flade** fødder.
- B. Man skal undgå at sætte sig yderligt på sædet, da tipningsfare kan opstå derved.
- C. Sørg for, at brugeren sætter sig i en lodret bevægelse for at undgå en evt. tipningsfare.

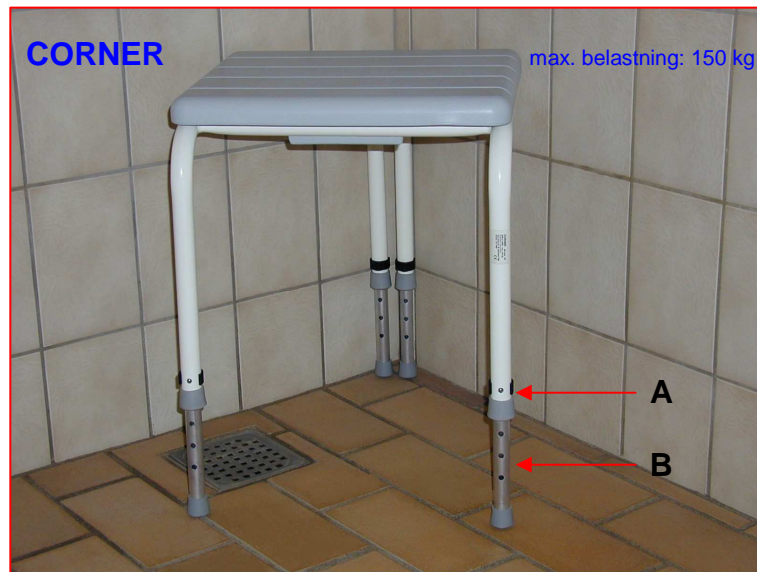

Højdeindstilling på **STAK 3**:

Må **KUN** bruges i hjørner !

Indstil badetaburettens ben, **før brugeren tager plads !**

Brugeren skal siddende kunne støtte fladt på gulvet med sine fødder:

1. Træk benets låseclip (A) ud.
2. Træk/ skub teleskopbenet (B), indtil den ønskede længde nås.
3. Sæt benets låseclip i igen. **SØRG FOR, at alle låseclips sidder forsvarligt fast.**

Vedligeholdelse:

- Kontrollér jævnligt badetaburettens ben – herunder også teleskopbenene på **STAK 3** og **CORNER** – og gummidupper, samt at **PUR**-sædet ligger rigtigt (dvs. fast) på taburetten.
- Ved skråtstilling af **STAK 3** og **CORNER** må forskydningen fra den ene side til den anden max. være to huller (i teleskopbenene).
- Badetaburetterne tåler rengøring med almindelige (ikke-ætsende) rengøringsmidler.
- Anvend IKKE badetaburetterne til en brugervægt, som er større end den anførte max. belastning.

dan-rehab a/s , Messingvej 13-15, DK-8940 Randers SV, erklærer på eget ansvar, at **STAK 1, 2, 3** samt **CORNER**, som er omfattet af denne erklæring, er i overensstemmelse med EU-Direktiv 2007/47/EC, DIN EN ISO 12182