
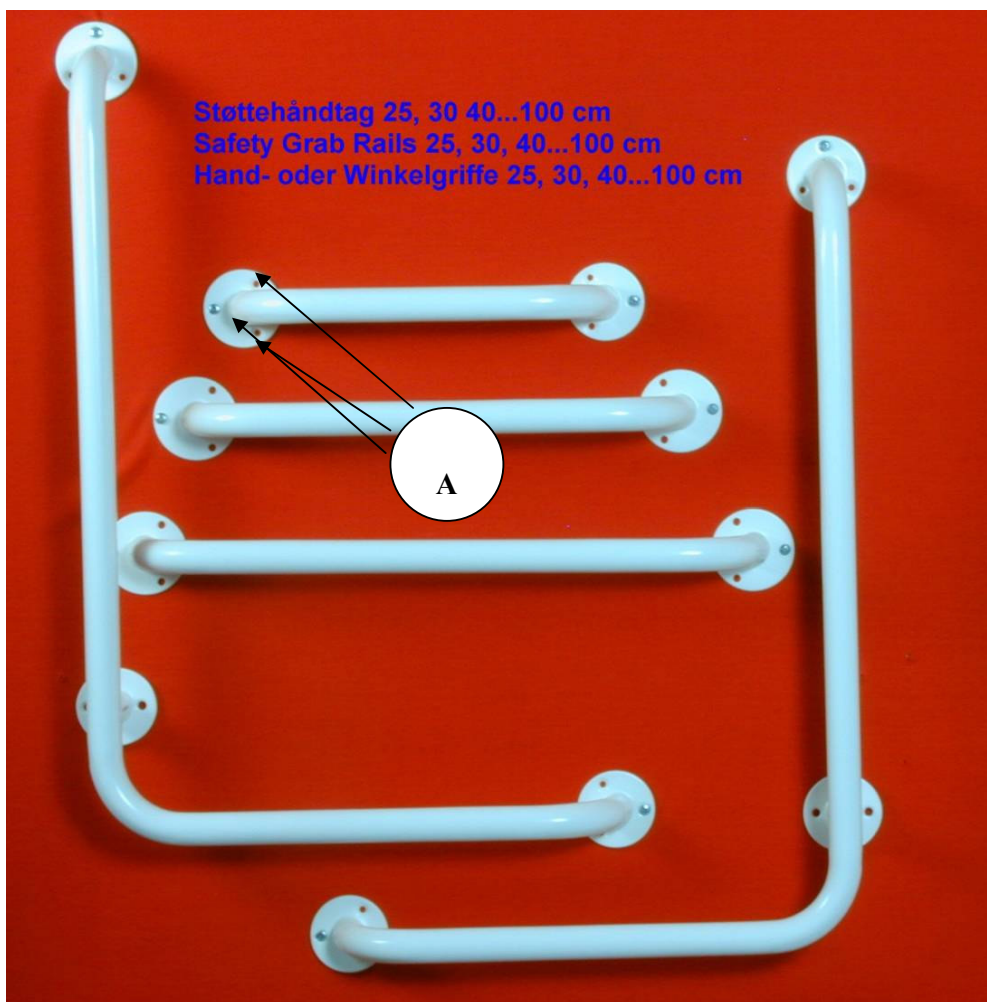


BRUGSANVISNING FOR STØTTEHÅNDTAG M-25...M-100

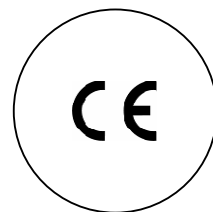

- Undersøg væggenes beskaffenhed (fasthed og styrke). Afprøv, hvor støttehåndtaget skal sidde.
- Afmærk borehullerne (vist med pile (A)) på væggen ved at holde støttehåndtaget op i den afprøvede position.
N.B. For personer med nedsat styrke i arme og hænder placeres håndtaget således, at det giver brugeren et godt greb med LIGE håndled.
- Bor i væggen på de afmærkede steder.
- Skrub støttehåndtaget op vha rawlplugs og skruer eller ekspandere, som er afstemt efter væggenes beskaffenhed (se pkt. a). I TVIVLSTILFÆLDE BØR EN FAGMAND KONSULTERES.
- Efterse jævnligt, at støttehåndtaget sidder godt fast – efterspænd evt. skruerne.

Vi – dan-rehab a/s, Messingvej 13-15, DK-8900 Randers – erklærer på eget ansvar, at disse støttehåndtag er i overensstemmelse med European Standard EN1441 (1997) i henhold til bestemmelserne i EU Directice 93/42 FFC.

www.danrehab.dk
tlf. 8644 7355