

# Cobiflow 500 vekseltryksmadras med Dual Plus pumpe

*Vekseltryks helmadras til behandling og forebyggelse af tryksår til brugere med høj risiko for tryksår*

Cobiflow 500 er specielt udviklet til behandling af tryksår stadie 0-4 samt forebyggelse af tryksår.

Cobiflow 500 kan med fordel anvendes på sygehuse, plejecentre og i hjemmeplejen til brugere, der er alment svækket eller midlertidigt stærkt svækket, og som har brug for en dyb og meget trykaflastende lejrning.

Madrasen kan gøres statisk, hvilket letter plejen af bruger i sengen. Er særdeles velegnet til genbrug på grund af det lukkede system, hvilket letter rengøringen.

Kan leveres med standard pumpe eller automatisk Dual Plus pumpe.

## Madrasen

- Består af 20 forstærkede luftceller (21 cm høje), hvilket sikrer at bruger kan få en dyb og dermed meget trykaflastende lejrning.
- Består af en 5 cm skum undermadras, som er integreret i betrækket, så tilsmudsning undgås.
- Midtersektionen er forsynet med luftperforeringer.
- Luftcellerne pumper op i en 1-2 cyklus, hvilket sikrer både bevægelse under bruger, og at peak pressure området flyttes. Tidscyklus kan ændres fra 10-25 minutter.
- Kan leveres i 2 længder: 200 cm eller 220 cm. Dermed kan selv den meget lange bruger få maksimal trykaflastning over hele liggefladen.

## Betræk

- Er fremstillet i 2/4 vejs strækbart, åndbart og antibakterielt polyuretan-belagt polyamid stof.
- Har svejsede sammenføjninger og lynlås.

## Pumpen

- Indstiller sig automatisk i forhold til brugerens vægt. Med mulighed for op- eller nedjustering.
- Har Autofirm funktion som selv slår fra efter 20 minutter.
- Har Siddefunktion, hvilket er en stor fordel ved for eksempel lunge- og hjertesygge, som sidder meget op i sengen.
- Har audiovisuel alarm ved fejl som strømsvigt eller lufttab.
- Arbejder næsten lydløst.
- Er forsynet med et enkelt og let læseligt display.

## Kontraindikationer

- Personer med instabil fraktur, eller personer med osteoporose bør ikke placeres på vekseltryk.
- Personer med mange smerter for eksempel personer med cancer eller gigt kan opleve at deres smerter forværres, når de ligger på vekseltryk.
- Personer med mange ufrivillige bevægelser kan opleve, at de får flere ufrivillige bevægelser eller smerter, når de ligger på vekseltryk.

- Vekseltryks helmadras
- Kan indstilles helt ned til 30 kg
- Til forebyggelse og behandling af tryksår
- Særdeles velegnet til genbrug
- Let at rengøre

Helmadras med ekstra høje celler for dybere lejrning.

Enkelt og let overskueligt display med audiovisuel alarm.



30-180 KG



### Kan med fordel anvendes til...

Brugere, der har tryksår.

Brugere, der er mere sengeliggende end normalt og hvor sygdomsforløbet ser ud til at være længerevarende.

Brugere, der har brug for en dybere lejring.

Kronisk syge for eksempel Chron, hjertepatienter, sclerose.

TRYKAFLASTNING  
HØJE MENNESKER

## SPECIFIKATIONER

### COBIFLOW 500 VEKSELTRYKSMADRAS

Brugervægt	30-180 kg
Længde	200 / 220 cm
Bredde	83 / 90 cm
Højde	26 cm
Madrassens vægt	10,3 kg
Dual Plus pumpens vægt	2,8 kg
Dual Plus pumpens mål	32 x 21 x 13 cm
Sektionsopdelt madras	Nej
Alarm ved lufttab	Ja
Alarm ved strømsvigt	Ja
Batteribackup	Nej
Lyntømningsfunktion	Ja
Statisk funktion	Ja
Anvendelig direkte på sengebund	Ja
Anvendelig til indstillelig sengebund	Ja
Brandhæmmende betræk	Ja
Inkontinens betræk	Ja
Allergivenligt betræk	Ja
Vask- og desinficerbart betræk	Ja
Tryksårsforebyggende stadie	0-4
Madrasmadræk	42% polyuretan, 58% nylon/polyamid
Celler	100% nylon med TPU laminering
Pumpe	ABS flamme resistent UL
ISO - klassifikation	ISO 18 12 18 - 28



### BESTILLING

Model	Længde cm	Bredde cm	Højde cm	Varenummer	HMI
Cobiflow 500 helmadras med Dual Plus pumpe	200	83	26	2501-083-200	73210
Cobiflow 500 lang helmadras med Dual Plus pumpe	220	83	26	2501-083-220	73293
Cobiflow 500 helmadras med Dual Plus pumpe	200	90	26	2501-090-200	73294
<b>Tilbehør</b>					
Betræk til Cobiflow 500	200	83	26	2500-999-006	
Betræk til Cobiflow 500 lang	220	83	26	2500-999-007	
Betræk til Cobiflow 500	200	90	26	2500-999-008	
Opbevaringstaske Cobiflow				2500-999-100	