



Invacare® | **Vicair® Puder**

Den optimale løsning for trykaflastning og positionering



Vicair puderne giver en optimal kombination af trykaflastning, høj kvalitet og stabil positionering.

Puderne, der er klinisk testet, er individuelt justerbare og tilmed vedligeholdelsesfrie. De er sikre og enkle at anvende både for hjælper og bruger, og der er ikke behov for daglig kontrol. Vægten på puderne er utrolig lav med et gennemsnit på mindre end 750 gram.

Unik teknologi med bløde *SmartCells*™

Vicair puderne benytter sig af **Vicair Technology™**, en unik og innovativ metode til støtte og aflastning af kroppen.

Vicair puderne indeholder flere hundrede små trekantede luftceller med afrundede hjørner kaldet **SmartCells**, der har en meget lav friktionsoverflade. Luftcellerne gør puden blød og komfortabel at sidde på, samtidig med at cellerne bevarer den lave friktion. Cellene glider let mod hinanden og former sig efter kroppens konturer og danner en stor overflade. Resultatet er en stabil og komfortabel støtte til kroppen, kombineret med en optimal trykfordeling.

Puderne er inddelt i flere kamre, der kan justeres i forskellige fyldningsgrader for at minimere tryk og forskydningskræfter, samt give en stabil positionering.



Optimal positionering og trykaflastning

Vicair er klinisk testet med vældigt gode resultater. Puderne kan bruges i de fleste alvorlige tilfælde af tryksår. Derudover giver puderne en høj grad af stabilitet, der medfører nedsat shear, god komfort og øget bevægelsesfrihed

Mange muligheder

Der er en række behov og hensyn, der skal tages højde for indenfor siddestillingsområdet. Puderne skal være trykaflastende, og samtidig kunne imødekomme forskellige individuelle behov for god positionering.

Det kan være for at korrigere eksisterende fejlstillinger eller for at forebygge nye. For at dække disse behov leveres **Vicair** i flere forskellige modeller: **Positioner Plus**, **Vector O2**, og **Adjuster O2**, der alle leveres i højderne 6 og 100 mm. Se også særskilte brochurer om andre **Vicair** puder som **Vicair Active O2** og **Vicair AllRounder O2**.

Alle **Vicair** puder kan justeres individuelt.



Standardpuder



Positioner Plus

Inddelt i 4 kamre. De 2 sidekamre er specielt udviklet til at give sidestabilitet og forhindre udadrotation af benene. Giver optimal trykaflastning og har flere positioneringsmuligheder.



Adjuster O2

Inddelt i 5 kamre for at tilbyde individuelle løsninger til brugere. Gode justeringsmuligheder ved komplekse positioneringsbehov fx asymmetrisk benlængde eller bækkenstilling og optimal trykaflastning. **Adjuster O2** inklusiv celler er vaskbar. Se særskilt brochure om **Adjuster O2**.



Vector O2

Vector O2 er inddelt i 9 kamre for at give øget stabilitet til bækkenet, forhindre ind og udadrotation af lårene samt fremadskridning på puden. En pude, der giver optimal trykaflastning og samtidig en funktionel stabil siddestilling. **Vector O2** inklusiv celler er vaskbar. Se særskilt brochure om **Vector O2**.



Active O2

Den forreste del er opbygget med en blød ergonomisk formet skumdel for at skabe stabilitet. Bagerst har **Active O2 SmartCells** for at give trykaflastning under tuber og os sacrum. Se særskilt brochure.



Multifunctional

Opbygget som en **Adjuster** pude, men med lidt længere kamre bagerst på puden for optimal tilpasning til den ekstra dybde på dybdejusterbare stole som fx el-kørestole eller Invacare's komfortkørestole.

Specialpuder



Pommel

Specialdesignet pude med løs abduktionspude. Velegnet til brugere med behov for trykaflastning samtidig med en abduktionspude. Og med mulighed for at fjerne abduktionspuden ved forflytning eller brug af kolbe.

Betræk



Betræk

Alle puderne leveres med slidstærkt, strækbart og komfortabelt betræk. Vælg mellem standard betræk eller inkontinensbetræk.

Tekniske data

For mere information om dette produkt henvises til www.invacare.dk. For oplysninger om anvendelse se venligst brugervejledningen, der kan downloades på www.invacare.dk.

Størrelser



Vicair Puder

se skema nedenfor

Vægt



0,4-1,2 kg

Max. brugervægt:



250 kg
(Active O2: 200 kg)

Rengøring af betræk



90°



Størrelser, mm (b x d)

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
	Positioner Plus	Adjuster O2	Vector O2	Active O2	Multi-functional	Pommel
350 x 400	x	x	x	x		x
400 x 400	x	x	x	x		x
400 x 450	x	x	x	x		x
430 x 430	x	x	x			x
430 x 450			x			
450 x 400	x	x	x	x		x
450 x 450	x	x	x	x		x
400 x 500	x	x	x	x		x
450 x 500	x	x	x	x		x
450 x 550			x			
500 x 450	x	x	x	x		x
500 x 500	x	x	x	x		x
500 x 550			x			
370 x 520					x	
400 x 520					x	
450 x 520					x	
500 x 520					x	
600 x 500			x			

Størrelser, mm (h)

Positioner Plus	Adjuster O2	Vector O2	Active O2	Multi-functional	Pommel
60/100	60/100	60/100	100	80	100

Betræk

Sort



Tlf.: 3690 0000
Fax: 3690 0001
denmark@invacare.com
www.invacare.dk

Invacare A/S
Sdr. Ringvej 37, 2605 Brøndby
Denmark



Yes, you can.®