

Sof-Care 840

Statisk topmadras



Version 2010. Der tages forbehold for ændringer og trykfejl.


Topmadras

- Topmadrasen anvendes ovenpå standardmadrasen eller i Sof•Care ramme.
- Madrasen er af let, stærk og elastisk polyurethan.
- Opbygget i en 3-lags celleteknologi med i alt 300 absorberende luftceller. Luftcellerne er forbundet via en serie af luftkanaler, som udligner trykket og fordeler brugerens vægt ud over hele madrasen.
- Madrasen støtter kroppens kontur pga. luftudvekslingen mellem de 300 luftlommer og giver optimal komfort.

- Trykket i madrasen indstilles manuelt med og ved hjælp af håndtesten, fyldepumpe og vedligeholdelsespumpe.
- Håndtesten udføres dagligt for at sikre det korrekte tryk.

Rengøring

- Rengøres med mild sæbeopløsning eller decentfiktionsmiddel

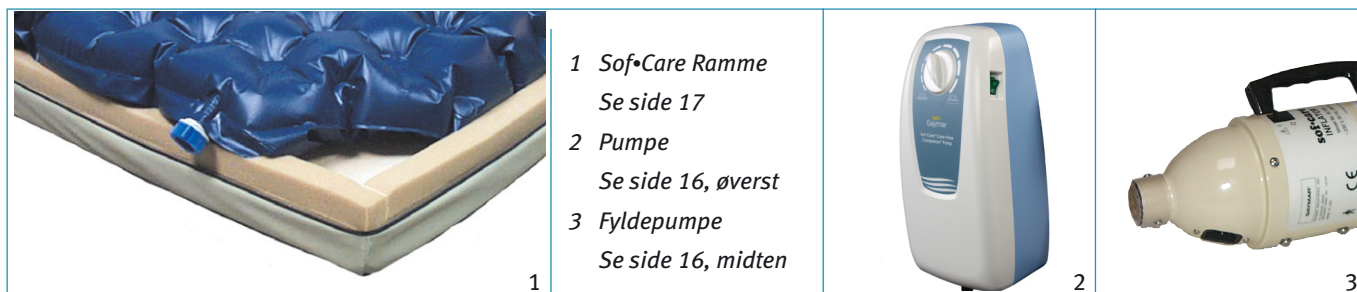

Tekniske data

El	230 V / 50 Hz, 0.5 A
Ledningslængde	4,5 m
Maks. brugervægt	260 kg

	Vare nr.	HMI nr.	Bredde	Længde	Højde	Vægt	Garanti
Sof•Care 840 Plus madras	80-10220	30975	85 cm	190 cm	10 cm	2,1 kg	2 år
Plexus CF-302 vedligeholdelsespumpe	80-10331	54640	13	25,5	9,5	1,5	2
Sof•Care Fyldepumpe	80-10283	37445	10	32	–	1,5	2
Sof•Care Ramme	80-10290	35185	85	200	15	5,5	2
Sof•Care Ramme	*	*	110	200	15	6,5	2

* Tages hjem på bestilling

Pumper til Sof•Care 840 Plus

Plexus vedligeholdelses-pumpen kan også anvendes som fyldepumpe. Luftpåfyldning tager ca. 30 min. Plexus pumpen sikrer konstant og korrekt tryk i madrassen.



Plexus CF-302 Vedligeholdelsespumpe

- Brugervægt fra 40-260 kg.
- Plexuspumpen tilsluttes Sof•Care madrassen ved påfyldningsstudsens med et skrudedæksel. Med drejeknappen indstilles trykket i madrassen ud fra 'håndtest' og individuelle behov. Pumpen sikrer konstant og korrekt tryk i madrassen. Plexus vedligeholdelses pumpen kan også anvendes som fyldepumpe. Luftpåfyldning tager ca. 30 min.

Sof•Care Fyldepumpe fylder Sof•Care madrassen på 1 minut, og måler præcist det modtryk der opstår pga. brugerens vægt. Når brugeren er fri af sengens underlag og 'flyder på luft', stopper fyldningen automatisk.




Sof•Care Fyldepumpe

- Brugervægt op til 260 kg.
- Fylder Sof•Care madrassen på 1 minut.
- Brugeren lægges på madrassen. Pumpens mundstykke tilsluttes fyldestudsens i madrassen.
- Pumpen måler præcist det modtryk der opstår pga. brugerens vægt. Når brugeren er fri af sengens underlag og 'flyder på luft', stopper fyldningen automatisk.
- Til brugere under 40 kg og over 125 kg, fyldes madrassen før brugeren lægges på.

Håndtest

Håndtesten udføres dagligt for at sikre at madrassen holder dette korrekte tryk.

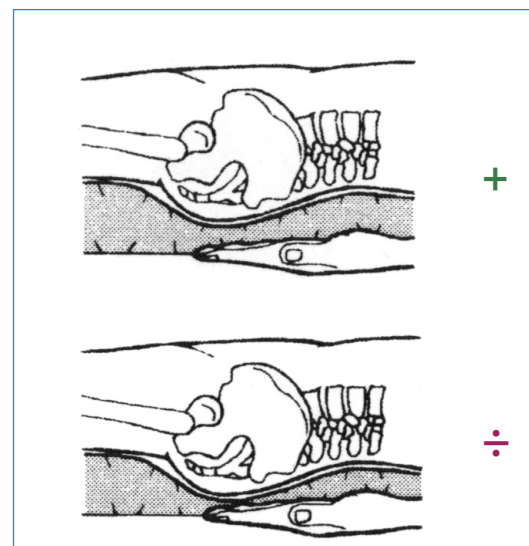

For at sikre optimal trykaflastning, sådan at brugeren ikke ligger igennem topmadrassen, udføres 'Håndtesten'.

En flad hånd med håndfladen opad føres ind under brugerens sædeparti mellem topmadrassens og standardmadrassens. Der skal være 2-4 fingerbredders luft mellem brugeren og den underliggende standardmadras.

Man må ikke 'støde' på brugerens sædeparti. Efterfyld da madrassen.

Sof•Care Ramme

Rammen beskytter Sof•Care og andre luftmadraser, mod at komme i klemme i sengehesten og sikrer korrekt sengehesthøjde. Rammen beskytter også Sof•Care madrassen mod stikhuller.

Madrasen anvendes **uden** standardmadras, direkte på sengebunden. Luftmadrasen holdes på plads af en kant af 3 cm koldskum i siderne og fodenden og 10 cm i hovedgærdet, og vil ikke skride ved ind- og udstigning af sengen. Sof•Care ramme har en bund fremstillet af 5 cm koldskum.

Rammen er betrukket med åndbart, væsketæt TechmaFlex betræk, strækbart i 2 retninger. Betrækket lukkes omkring skumramme og luftmadras med en 2 vejs lynlås.

Rengøring

- Skumrammen kan autoklaveres
- Betrækket afmonteres og vaskes ved 90° C, og tørretumbles ved lav varme.

Sof•Care Rammen kan laves i specialmål.



Tekniske data

Vare nr.	80-10290
HMI nr.	35185
Størrelse	85 x 200 x 15 cm (inkl. Sof•Care madras)
Vægt	5,5 kg (uden luftmadras)
Opbygning	Koldskum HR-40 (kg/m ³), brandhæmmende i henhold til FMVSS 302 samt California 117 A.
Betræk	TechmaFlex blå/lys grå betræk, strækbart i 2 retninger. Absorberer op til 600 gr. vanddamp/m ² /døgn. Brandhæmmende i henhold til BS 5852 Crib 5.
Rengøring	Skummadrasen kan autoklaveres. Betrækket vaskes ved 90° C, kan aftørres med sæbe eller sprit. Tørretumbles ved lav varme.