

HeeLift Glide Trykaflastning af hælen



Produktet:

HeeLift Glide er til trykaflastning af hælen og er en videreudviklet udgave af HeeLift. HeeLift Glide giver med et længere fodstykke bedre støtte til forfoden. Ydersiden er beklædt med smudsafvisende glat stof og sammen med den friktionsfrie beklædning på undersiden sikrer det, at patienten kan være mobil i sengen.

HeeLift Glide er konstrueret så den ene side lukkes henover læggen for at undgå gener fra velcrolukningen. Den fastholdes på benet med 3 bløde velcrobånd, to henover læggen og et henover forfoden.

HeeLift Glide kan tilpasses individuelt enten ved at klippe i skumforet og/eller ved at bruge den medfølgende skumblok som tilpasning.

HeeLift Glide har ventilationshuller som sikrer luftcirkulation og fremmer komforten.

Anvendelse:

HeeLift Glide kan købes med eller uden "æggebakke".

HeeLift Glide Original med "æggebakke" inderside fordeler trykket over et større område, så hælen er helt fri for belastning, den giver god luftcirkulation.

HeeLift Glide med glat inderside er udviklet til patienter med ødematøse ben og meget sart hud. Den glatte inderside anbefales til patienter, der ikke tåler den lidt ujævne "æggebakke" inderside.

Tilbehør:

Der følger en skumblok med hver HeeLift Glide, som kan anvendes til individuel tilpasning.

Vaskeanvisning:

- Luk velcro stropperne
- Læg HeeLift Glide i en vaskepose
- 60° C maskinvask
- Må ikke tørretumbles og må ikke lægges på direkte varme

Sortiment HeeLift Glide:

Beskrivelse	Størrelse	Ref. nr.
Glat	S	DM-HLSPG
Glat	M/L	DM-HLSG
Glat	XL	DM-HLSBG
Original "æggebakke"	S	DM-HLPG
Original "æggebakke"	M/L	DM-HLG