

Zitzi Carseat autostol



Hovedstøtte
Justeres enkelt både i højde og vinkel.

Strop til sikkerhedssele
Giver bekvem seleanvisning og holder selen på rette plads.

Kropsstøtte
Kile for breddejustering.

Sikkerhedsbøjle
Giver bekvem seleanvisning og holder selen på rette plads.

1, 2, 3 og 4
For uddybende forklaring af de funktioner tallene 1-4 repræsenterer, se næste side.

Betræk
Nemt at tage af, at udskifte eller vaske. Endvidere grundigt brandtestet.

Justerbar sædedybde
Samt tilpasning til abduktion, og benlængdeforskel.

3 størrelser

Drejekonsol
For at lette ind- og udstigning.



Zitzi Carseat fakta

 SVENSK KVALITET OG DESIGN

Er udviklet til brugere i bilen med lav eller høj muskeltonus i kroppen og med diagnoser som scoliose, sublux- eller luxation i hoften, bagudklippet bækken eller nedsat hovedkontrol.

Størrelser.....3 stk.
Bruglængde.....90-160 cm
Axilhøjde.....23-45 cm
CrashtestetGodkendt

Sædebredde.....>34 cm
Sædedybde29-45 cm
Kropsbredde.....27-29 cm
Hoftevinkel.....-10°/+40°




1 Højdejusterbar ryg

Ryggen justeres enkelt i højden, så brugeren har mulighed for at vokse i en og samme stol.



2 Ryggen følger med

Rygvinklen er justerbar og følger bilsædets rygvinkel, hvilket giver mulighed for justering undervejs.

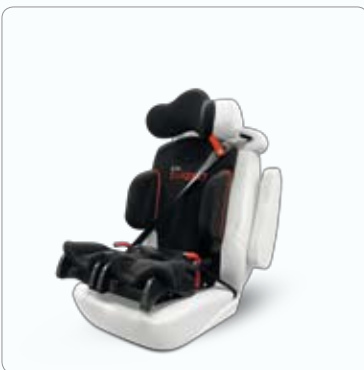

3 Drejeplade

Zitzi Carseat kan bestilles med en drejekonsol, som gør det lettere at få brugeren ind og ud af bilen. Med drejepladen kan Zitzi Carseat enkelt roteres.



1



2

4 Abduktion¹ og benlængdeforskel²

Man kan trinløst abducere eller justere benlængden. Justeringsmulighederne er med til at den enkelte kan opnå en så optimal siddestilling som muligt og samtidigt tillade brugeren at vokse med autostolen. Endvidere er der mulighed for coxitleje.



Zitzi Carseat er en grundig crashtestet autostol specielt fremstillet til funktionshæmmede som behøver støtte og positionering i bilen. Zitzi Carseat er autostolen, når sikkerhed er i højsædet.


Udover de justeringsmuligheder som allerede findes på produktet, tilbyder vi endvidere mulighed for specialtilpasninger. Rådfør dig gerne med vor fysioterapeutiske konsulenter ved behov for idéer og løsninger.



Hovedstøtte std.



Hoftebælte std.

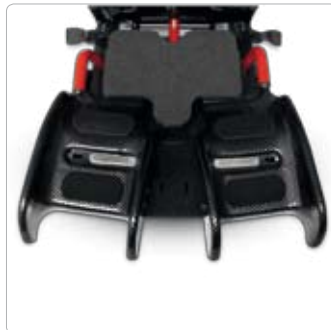

Sædedel



Pandebånd



Drejeplade Carseat Mini



Bord



Lændestøtte og pumpe



Drejeplade std.



Fodstøtte



Sternumstøtte

Crashtestet på VTI Sverige og godkendt efter EU-standarden ECE R44.3. Opfylder endda stillede krav ved Crashtest op til 75 kg brugervægt.

 SVENSK KVALITET OG DESIGN




Autostol	Passer til
Zitzi Carseat Mini 2	Brugere fra 90 cm til 115 cm
Zitzi Carseat Mini 3	Brugere fra 110 cm til 130 cm
Zitzi Carseat	Brugere fra 125 cm til 160 cm



Zitzi Carseat skal placeres fremadvendt både på for- og bagsæde. For yderligere mål og specifikationer, se tekniske data.


TEKNISKE DATA ZITZI CARSEAT

	Zitzi Carseat Mini 2	Zitzi Carseat Mini 3	Zitzi Carseat
Brugervægt	>36 kg	>36 kg	>36 kg
Brugerlængde	90-115 cm	110-130 cm	125-160 cm
Sædebredde	>34 cm	>34 cm	>34 cm
Sædedybde, std.	31 cm	35 cm	39 cm
Sædedybde	29-33,5 cm	33,5-38cm	39-45 cm
Bredde	27 cm	29 cm	29 cm
Axilhøjde	23-35 cm	32-42 cm	39-45 cm
Hoftevinkel	-10°/+40°	-10°/+40°	-10°/+40°
Vægt	6 kg	7 kg	9 kg
Varenr.	152352	152353	152401
HMI-nr.	39893	39892	39891

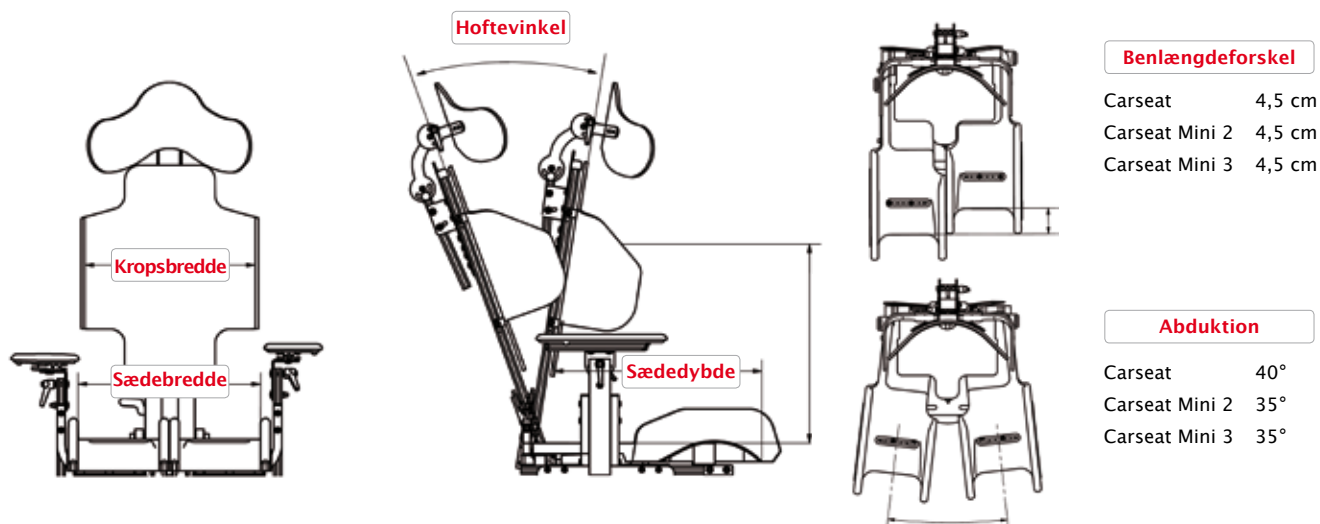


HOVEDSTØTTE

Zitzi Carseat Mini

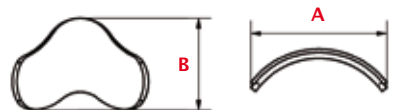


Zitzi Carseat

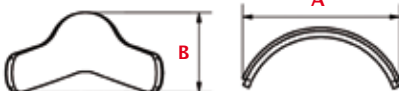

	A	B
Zitzi Carseat Mini	27	20
Zitzi Carseat	31	20


RYG

Alle størrelser passer alle sædedele

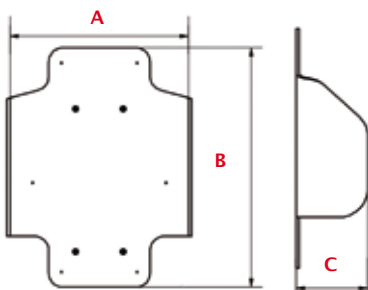

	A	B	C
Carseat Mini 2	22	31	10
Carseat Mini 3	27	35	11
Carseat	29	40	13

FODSTØTTE

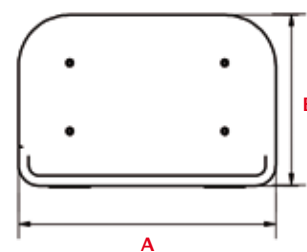

	A	B
Fodstøtte	34	22



Crashtestet på VTI Sverige og godkendt efter EU-standarden ECE R44.3.