

Asklé lejringspuder

Til særlige lejringsbehov

Cobis populære serie af Asklé lejringspuder fremmer og sikrer den optimale lejrning i sengen på en simpel og effektiv måde. Materialets fleksible sammensætning tilgodeser alle typer af underlag uden at øge risikoen for tryk og shear af huden.

Anvendelig til mange patientgrupper

Puderne er særdeles velegnet til lejrning af brugere med blandt andet pareser, sclerose, hjerneskadede, neurologiske patienter, smertepatienter og terminale patienter, hvor få og selv små bevægelser vil udløse smerter. Fælles for disse grupper af patienter er, at langt de fleste af dem er i høj risiko for at udvikle vævsskade og tryksår.

Eksempler på lejrning

Puderne VCP02 lille hovedpude, VCP03 stor hovedpude, VCP04 cylinderpude og VCP09 kropsstøttepuden giver mulighed for at lejre i den anbefalede Semi-Fowler liggestilling.


Mange af os ved, hvor svært det er, at fastholde brugeren i den sideliggende lejringsposition. Søhesten VCP08 klarer dette enkelt og lempeligt.

Beroligende effekt

Foruden at kunne afhjælpe tryk og øge trykfordelingen, er puderne særdeles velegnet til brug for nedsættelse af spasticitet, samt giver en taktile stimuli, hvilket er meget relevant for blandt andet demente. Brugeren får en afgrænsende fornemmelse af kroppen, hvilket ofte har en beroligende effekt og øger komforten.

Konstruktion

Puderne er lufttætte og fyldt med små Krøyer kugler, hvilket sikrer, at stillingen holdes og puderne ikke ændrer form. Det nye betræk er et utroligt strækbart PU materiale, antibakterielt forseget med sølvcoating og ClC-Ag+ (krydsbærekontrol), som gør det ekstra modstandsdygtigt og uigennemtrængeligt for bakterier, og derfor meget hygiejnisk i brug. Betrækket er endvidere åndbart, strækbart og brandhæmmende. Komfortabelt betræk af vaskbar blød frotté fås som tilbehør.

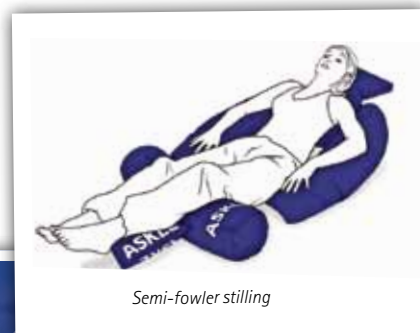

Semi-fowler stilling



- Til særlige lejringsbehov
- Kurver sig omkring knoglefremspring og fordeler trykket
- Perfekt til lejrning i Semi-Fowler position
- Gør det muligt og nemt at lejre sideliggende
- Antibakterielt forseglede
- Aftageligt vaskbart betræk som tilbehør

**TRYKAFLASTNING
LEJRING – SMERTE**

SPECIFIKATIONER

Kan med fordel anvendes til...

Pareser. Neurologiske patienter.
Sclerose. Smertepatienter.
Hjerneskadede. Terminale patienter.



Sidelejring med VCP08



Taske medfølger det komplette sæt

ASKLÉ LEJRINGSPUDE

Kuglemateriale	Ekspanderet polystyren
Kuglestørrelse	Ca. 3 mm
Pudeoverflade	Polyester, polyuretan polycarbonat
Pudebetræk	67% bomuld, 33% polyester
Rengøring	Pudebetrækket er vaskbart. Puderne kan rengøres med almindelige rengøringsmidler eller desinficeres.
ISO - klassifikation	ISO 18 12 15 - 09

BESTILLING

Model	Længde cm	Bredde cm	Varenummer	HMI
Asklé lejringspudesæt komplet med taske, uden betræk				
Asklé VCP01 Nakkestøttepude	60	35	3000-001-000	42627
Asklé VCP02 Lille hovedpude	37	26	3000-002-000	42628
Asklé VCP03 Stor hovedpude	56	40	3000-003-000	42629
Asklé VCP04 Cylinderpude	60	Ø 21	3000-004-000	42631
Asklé VCP05 Læg/hælpude	39	21	3000-005-000	42632
Asklé VCP06 Arm/håndpude	39	21	3000-006-000	42633
Asklé VCP07 Abduktionskile	35	28	3000-007-000	42634
Asklé VCP08 Søhest	182	54	3000-008-000	42630
Asklé VCP09 Kropsstøttepude	137	80	3000-009-000	42635
Tilbehør				
Pudebetræk nakkestøttepude VCP01			3000-001-010	
Pudebetræk lille hovedpude VCP02			3000-002-010	
Pudebetræk stor hovedpude VCP03			3000-003-010	
Pudebetræk cylinderpude VCP04			3000-004-010	
Pudebetræk læg/hælpude VCP05			3000-005-010	
Pudebetræk håndpude VCP06			3000-006-010	
Pudebetræk abduktionskile VCP07			3000-007-010	
Pudebetræk for Søhest VCP08			3000-008-010	
Pudebetræk kropsstøttepude VCP09			3000-009-010	
Opbevaringstaske for Asklé puder			3000-010-000	

**VCP01 Nakkestøttepude /
abduktions halvcirkel**

Abduktions halvcirklen kan anvendes sammen med cylinderpuden, for at tilgode knæ flexion. Nakkestøttepuden/abduktions halvcirkelen kan også anvendes som lejringspude for en hemiplegisk arm med mere.



VCP01

VCP02 Lille hovedpude

Denne hovedpude kan også anvendes til at lægge under maven i maveliggende, eller under læggene, når man lejr i Semi-Fowler liggstilling.



VCP02

VCP03 Stor hovedpude

Den store hovedpude anvendes til rygstøtte, når man lejr i Semi-Fowler liggstilling. Derudover giver den store hovedpude en øget komfort, da den giver en utrolig god støtte til nakken.



VCP03

VCP04 Cylinderpude

Knæ og hase pude, som er uundværlig, når der skal lejres i Semi-Fowler liggstilling og ved flexion af knæet. Puden kan også anvendes ved sidelejring, som stopper i ryggen.



VCP04

VCP05 Læg / hælepude

Puden anvendes til at elevare hælen fra madrassen ved behandling af tryksår. Puden kan også anvendes, hvor hele underbenet elevares for at undgå ødemannelser med mere.



VCP05

VCP06 Arm / håndpude

Puden kan anvendes til at lejre en hemiplegisk arm. Kan også anvendes til brugere med nedsat tonus.



VCP06

VCP07 Abduktionskile

Anvendes for at sikre hoft abduktion, og for at mindske risikoen ved hoft dislokation, når en bruger vendes fra ryg til sidelejring.



VCP07



VCP08

VCP08 Sidelejringspude "Søhesten"

Den komplette sidelejringspude. Alle de nødvendige komponenter for en god sidelejring er samlet i en og samme pude. Puden er mærket, således at man ikke er i tvivl om, hvad der er op og ned. Puden fås i 2 størrelser afhængig af brugerens højde.



VCP09

**VCP09 Kropsstøttepude
(rede med flex arme)**

På grund af sin U-form er denne pude særlig velegnet til at give brugeren en god kropsstøtte. Puden kan enten placeres bag, foran eller rundt om brugeren. Kropsstøttepuden er en af grundstenene i Semi-Fowler lejringsstilling.