

# Cobiflow 600 Summit vekseltryksmadras

Vekseltryks helmadraser med automatisk trykjustering og batteribackup

Cobiflow 600 Summit er specielt udviklet til behandling af tryksår stadie 0-4 samt forebyggelse hos den meget tryktruede bruger.

Cobiflow 600 Summit kan med fordel anvendes på sygehuse, i plejeboliger og i hjemmeplejen til brugere, der er i høj risiko for at udvikle tryksår, eller som har udviklet tryksår stadie 0-4.

Madrasen har fuldautomatisk indstilling og er udstyret med computersensorer, der beregner modtrykket af belastningen og dermed hele tiden optimerer trykaflastningen bedst mulig.

Cobiflow 600 Summit er meget velegnet til brugere, der selv/ægtefælle kan regulere hovedgærdet, da sensor systemet tilpasser madrassen herefter, uden at der skal stilles på pumpen.

Anvendelig til brugervægt 30-300 kg.

## Madrasen

- Består af 21 luftfyldte celler (19 cm høje), hvilket sikrer en dyb og meget trykafastende lejrning.
- Består af en luftfyldt undermadras på 3 cm, som sikrer, at bruger ved strømsvigt eller lignende ikke kommer i kontakt med sengens bund.
- Cellerne pumpes op i sæt og skifter hvert 5. minut i en 10 minutters cyklus.
- De tre øverste celler er statiske og fungerer som hovedpude. Cellerne i hæloområdet er ekstra små for at sikre optimal aflastning af hæloområdet.
- Installationstiden er ca. 10 minutter. I løbet af de 10 minutter fyldes undermadrasen også op. Undermadrasen forbliver fyldt indtil CPR funktionen udløses, hvilket giver øget sikkerhed i tilfælde af strømsvigt. Ved strømsvigt holder undermadrasen luft i op til 3 timer på grund af batterifunktionen.

## Betræk

- Er fremstillet i 2/4 vejs strækbart materiale, anti-bakterielt, vandtæt men åndbart.
- Har svejsede sammenføjninger og lynlås.
- Brand- og oekotex certificeret.

## Pumpe

- Forsynet med et enkelt og let overskuelig 3" LCD skærm.
- Fuldautomatisk.
- Har Autofirm funktion som selv slår fra efter 15 minutter.
- Med batteribackup op til 3 timer.
- Har audiovisuel alarm ved fejl som strømsvigt og lufttab.
- Sensor ved elevring af hoveddel.
- Panel lock.

## Kontraindikationer

- Personer med instabil fraktur, eller personer med osteoporose bør ikke placeres på vekseltryk.
- Personer med mange smerter for eksempel personer med cancer eller gigt kan opleve at deres smerter forværres, når de ligger på vekseltryk.
- Personer med mange ufrivillige bevægelser kan opleve, at de får flere ufrivillige bevægelser eller smerter, når de ligger på vekseltryk.

- Batteribackup
- Fuldautomatisk
- Tryksårforebyggende ved høj risiko forløb
- Sår stadie 0-4
- Max brugervægt op til 300 kg

Pumpe med op til 3 timers batteribackup, som sikrer trykaflastning selv ved strømsvigt.



30-300 KG

Fuldautomatisk helmadraser som sikrer maksimal trykaflastning i alle stillinger.

### Kan med fordel anvendes til...

Brugere, som på grund af deres sygdomsforløb skal sikres maksimal trykaflastning i alle stillinger.

Brugere, der på grund af alvorlig sygdom har et længerevarende sygdomsforløb.

Kronisk syge.

Diabetes patienter.

Amputerede.


Brugere over 180 kg, som ikke har brug for en ekstra bred seng.

### TRYKAFLASTNING

## SPECIFIKATIONER

### COBIFLOW 600 SUMMIT VEKSELTRYKSMADRAS

Brugervægt	30-300 kg
Længde	200 cm
Bredde	82 / 90 cm
Højde	22 cm
Madrassens vægt	10 kg
Pumpens vægt	6 kg
Pumpens mål	37,5 x 32 x 18,5 cm
Sektionsopdelt madras	Ja, 3 sektioner
Alarm ved lufttab	Ja
Alarm ved strømsvigt	Ja
Batteribackup	Ja, 3 timer
Lyntømningsfunktion	Ja
Statisk funktion	Ja
Anvendelig direkte på sengebund	Ja
Anvendelig til indstillelig sengebund	Ja
Brandhæmmende betræk	Ja
Inkontinens betræk	Ja
Allergivenligt betræk	Ja
Vask- og desinficerbart betræk	Ja
Tryksårsforebyggende stadie	0-4
Madrasbetræk	42% polyuretan, 58% nylon/polyamid
Celler	100% nylon med TPU laminering
ISO - klassifikation	ISO 18 12 18 - 28

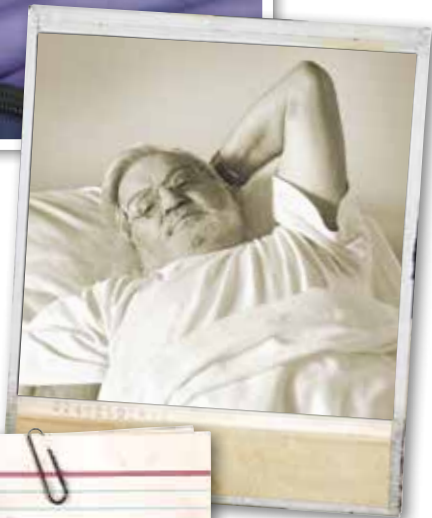

Kræver høje sengeheste.

Fuldautomatisk indstilling.

### BESTILLING

Model	Længde cm	Bredde cm	Højde cm	Varenummer	HMI
Cobiflow 600 Summit helmadras med pumpe	200	82	22	2600-085-200	54696
Cobiflow 600 Summit helmadras med pumpe	200	90	22	2600-090-200	70113
Tilbehør					
Betræk til Cobiflow 600 Summit	200	82	22	2600-999-082	
Betræk til Cobiflow 600 Summit	200	90	22	2600-999-090	