

## Innovativ beskyttelsesovertræk til montering på sengeheste eller sengegavle.

CE

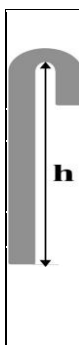
Producent: Ekamed, Tyskland



### Fordele ved anvendelsen:

- Effektiv beskyttelse mod klemnings- og trykskader fra sengehesten fra den 2,5cm. indvendige specielle skumpolstring
- Borgeren beskyttes i sengen mod slagskader på alle kropsdeler; arme, hoved, fødder og ben
- God beskyttelse og stabilitet, når borgeren sidder på beskyttelsesovertrækket ved ind- og udstigning af sengen
- Overtrækket kan anvendes på de almindelige typer af plejesenge i træ eller metal både med enkelt- og forhøjede sengeheste
- "Fast" beskyttelsesovertræk, da velkrobandet på siden sikrer mod, at borgeren selv fjerner det
- De flytbare beskyttelsesovertræk hindrer, at borgeren får følelsen af "indespærring"
- Kan beskytte plejepersonalets knæ og ben i plejesituationer ved at vende overtrækket med den høje side udad
- Montering- og håndtering er hurtigt og let for plejepersonalet, de åbner velkroen og løfter beskytterne af, på eller vende den op
- Hygiejnisk og brugervenligt betræk
  - a) Hudvenligt og økotex 100 godkendt
  - b) Uigennemtrængeligt m.h.t. blod, urin, olie, fedt, og klorfri desinfektionsmiddel
  - c) Åndbart og fremstillet i et kraftigt/holdbart PU materiale
  - d) Udført i et brandhæmmende bi-elastisk PU, der naturligvis er MRSA resistent
- Overtrækkene er lette at rengøre. Kan let aftørres med en fugtig opvredet klud
- Kan produceres i specielle mål efter ønske.
- Betrækket er behandlet for at hæmme MRSA og er Økotex 100 godkendt.
- Rygning og åben ild forbudt.

Standard dimension: Indvendigt højdemål: 35 eller 40 cm. Udvendig højde 40 eller 45 cm  
Dybde: Indvendig beskyttelse: 2,5 cm. Selve ophængs stykket øverst er: 5,5 cm. i diameter  
Bredde: Standardproduktet fås i bredder på 60, 80 og 90cm. Fås også i specielle mål efter ønske!

 <p>Overtræk til montering på sengehest eller gavle. Tegning=h: <u>indvendig mål</u> Vægt 80cm. ca. 2,4kg Vægt 90cm. ca. 2.6kg</p>	L/Bred	højde indvendig	Højde Udv.	Art. Nr.:	HMI nr.:
	L 60cm.	h indv 35cm.	udv. Højde 40cm.	97090004	HMI 69377
	L 60cm.	h indv 40cm.	udv. Højde 45cm.	4500 7503	HMI 55588
	L 80cm.	h indv. 35cm.	udv. Højde 40cm.	97090007	HMI 69378
	L 80cm.	h indv. 40cm.	udv. Højde 45cm.	4510 7503	HMI 55589
	L 90cm.	h indv. 35cm.	udv. Højde 40cm.	97090001	HMI 69379
	L 90cm.	h indv. 40cm.	udv. Højde 45cm.	4511 7503	HMI 69380
	L 110cm.	h indv. 40cm.	udv. Højde 45cm.	97090008	HMI 87032
	L 110cm.	h indv. 35cm.	udv. Højde 40cm.	97090036	HMI 113237

Overtrækbeskytterne leveres både med ”Kort bøjle” og ”lang bøjle”. De korte kan anvendes på senge, hvor der er lav afstand til senge bunden og evt. også ved en lav madrashøjde. Ved brug af denne type sidder borgeren bedre i plan med madrassen ved ind og udstigning af sengen.

**Såfremt ”kort bøjle” ønskes bedes dette oplyst til Surcon ved bestilling!**



Sengehest beskytter med ”kort bøjle”.



Sengehest beskytter med ”lang bøjle”.

Bemærk! Der kan købes aftagelige betræk med hotel-lukning/lynslås til alle vore beskyttelsesovertræk. Få tilsend en video, der viser monteringen af PU- skiftebetrækket.

### Rengøring Desinfektion:

- Almindelig rengøring kan foretages ved aftørring med opvredet klud
- Brug gængse rengørings- og desinfektionsmidler uden Klor, alkohol og tensider
- Rengøringsmidler/Servietter der indeholder klor/alkohol kan reducere levetiden på PU- materialer
- Følg vaskeanvisningen på label, der er fastgjort til betrækket. Surcon PU betræk kan vaskes ved max. 95°C og Purotex - opkradset jersey betræk - kan vaskes ved 60° C