

# UROX®

## Urinsystem




UROX Kop		21 25 30 35 40	Sikker opsamling af urin. Huden holdes tør. Let at tage af og på. Anbefalet udskiftning: efter 30 gange
UROX Gamache 600 ml		S M L XL	Behagelig og anatomisk. Diskret udløb. Udløbshane sikret imod uheld og dryp. Anbefalet udskiftning: efter ca. 7 gange.
UROX Fixeringsbukser Sort eller grå		XS S M L XL	Underbukser med special- gylp til ekstra sikkerhed og komfort ved styring af kop og slange. Ingen generende syninger bagpå. Anbefalet udskiftning: efter 120 gange
UROX Skyllemiddel		250 ml 500 ml	Plejemiddel der forhindrer bakterier og lugt. Anbefalet forbrug: 8-10 ml per behandling.



UROX kan købes på [www.urox.com](http://www.urox.com) eller hos vore  
forhandlere.

Find nærmeste forhandler på: [www.urox.com/kontakt](http://www.urox.com/kontakt)

UROX produceres i Danmark af:  
Urologic ApS, Gershøjvej 4, 4070 Kirke Hyllinge  
E-mail: [urox@urox.com](mailto:urox@urox.com)

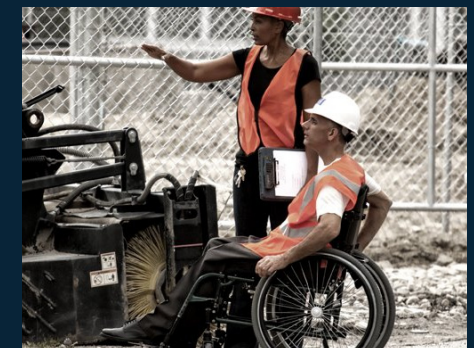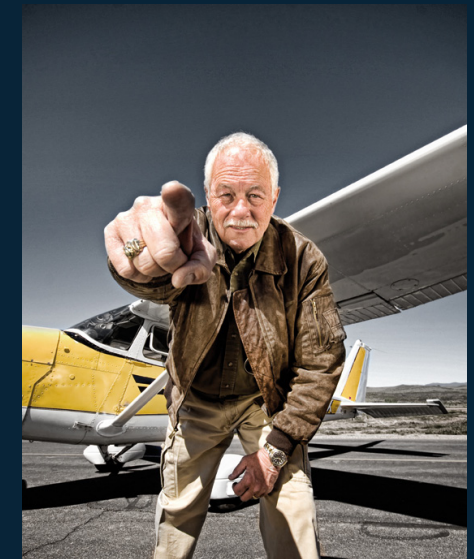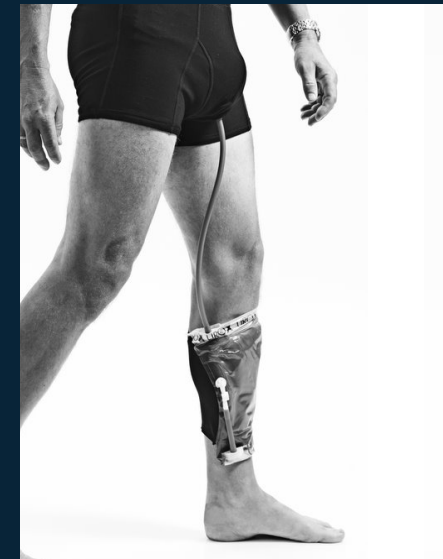


Til mænd med vandladningsproblemer

[www.UROX.com](http://www.UROX.com)

## UROX

UROX er et system til urinopsamling for mænd. Med UROX kan man opretholde en aktiv og udadvendt livsstil - uden at skulle bekymre sig om adgangen til et toilet.

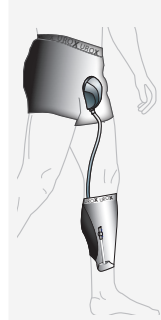

Systemet består af tre dele:

En fleksibel kop, der sidder omkring penis

Fixeringsbukser, der holder koppen på plads

En gamache med integreret opsamlingspose

Systemet rengøres med et specialudviklet skyllemiddel, der forhindrer bakterievækst og lugt.

*Jeg RIK'ker pga. sclerose og er normalt tæt ind imellem. Men på job og på rejse kan jeg ikke være sikkert på at kunne finde et toilet hver 4 time. UROX har allerede sparet mig for mindst to uheldige episoder.*

- Hans Sørensen, Valby



## Når du ikke vil lade dig styre af et vandladnings-problem

Mænd, som generes af hyppig vandladning f.eks. på grund af forstørret prostata, medicin eller slap blære

Mænd, som oplever, at der er kort varsel fra trangen melder sig, til de skal

Mænd med et job eller en hobby, hvor det er svært at komme til toilettet

Mænd, der er blevet utætte pga. prostataoperation, sclerose, parkinsons eller som sidder i kørestol

Hvis vandladningen er et problem, er UROX et godt værktøj. UROX sætter mænd i stand til at fortsætte deres sociale og fysiske aktiviteter.

*Jeg var til koncert i går. Jeg var hjemmefra i 6 timer. For første gang i 1 ½ år - takket være UROX.*

- Ib Albinus, Skanderborg



## Komfortabelt og diskret

UROX Systemet ses ikke under et par normale benklæder og systemet er så behageligt, at man ikke mærker, at man har det på.

UROX er let at tage af og på efter behov. Mange har kun brug for deres UROX i perioder, f.eks. hvis de skal til steder, hvor de ikke kender toiletforholdene på forhånd; på rejsen, til koncerter eller blot i supermarkedet.

UROX har et anatomisk og funktionelt design, der mere ligner sportsudstyr end et hjælpemiddel fra sygehuset.

*UROX har givet mig frihed til at komme omkring - uden altid at skulle være på udkig efter det nærmeste toilet.*

- Arne Aagesen, Kirke Hyllinge

## Designet til genbrug

Systemet er robust. Det kan tåle at blive brugt mange gange.

Genbrug kræver rengøring. Ved at bruge UROX Skyllemiddel er du sikker på at undgå bakterie- og lugtgener.

Genbrug sparer penge, derfor er UROX billigere i længden. Og belaster miljøet mindre.

## UROX Systemet

UROX Koppen ligner en skridtbeskytter. Formen sikrer, at penis holdes tør. Koppen er let at tage af og på. Den tynde og elastiske membran slutter tæt og behageligt om penis og uden brug af klæber.

Koppen holdes på plads af UROX Fixeringsbukserne. Gylpens design sikrer at slangen, der går ned til Gamachen, føres ud i den rigtige vinkel. Fixeringsbukserne ligner normale underbukser.

Den anatomiske UROX Gamache er fabrikeret i elastikstof med urinposen indsyet på forsiden. Posen sidder nøjagtigt hvor den generer mindst muligt.

*Problemer med vandladningen? Mænd har ikke problemer - kun opgaver der skal løses.*

- Per Knudsen, København

Når vandet lades, løber urinen fra koppen gennem slangen ned i posen.

Den tømmes når det er belejligt. Udløbshanen er så lang, at den er let at betjene uden risiko for dryp i skoen.

Når udløbshanen ikke bruges, er den bukket op og fastgøres i en sikkerhedsclips. Man kan ikke se den under buksekanten.

Kop, gamache og fixeringsbukser fås i forskellige størrelser for at give den bedst mulige oplevelse af komfort og sikkerhed.