


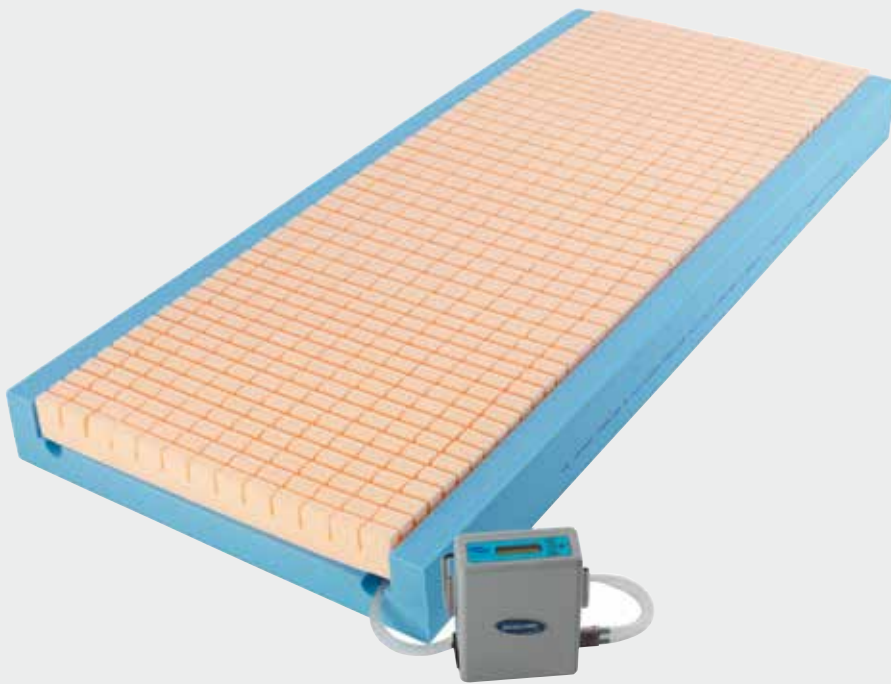

## Statisk/dynamisk antidecubitus madras

Invacare **Softform Premier Active 2** er en videreudvikling af den klinisk gennemprøvede Active madras. Med flere nye egenskaber, forbedres madrassens egenskaber og øger borgerens komfort. **Softform Premier Active 2** er særdeles velegnet til borgere med middel og høj risiko for at udvikle tryksår eller med tryksår i kategori 2 og 3. **Softform Premier Active 2** er en kombinationsmadras, der består af alternerende celler indlagt imellem et lag profileret og et lag stabiliserende skum.

Risikovurderingen af den enkelte borger kan ændre sig fra dag til dag og vare i kortere eller længere tid. Derfor er en madras med indbygget mulighed for at ændre formål en optimal løsning. **Softform Premier Active 2** kan anvendes med eller uden aktivering af vekselrykket.



### Statisk/dynamisk madras

Det dynamiske luftmadrasinlæg imellem de 2 lag skum giver madrassen en tosidig anvendelse. Statisk høj kvalitets skummadrass til middelrisiko borgere samt vekslende dynamisk madras, når borgerens risikoscoring ændres fra middel-til høj risiko eller omvendt. Trykket i cellerne veksler indenfor 10 minutters cyklus og fordeler således trykket optimalt.

**Softform Premier Active** madrassen opleves særdeles komfortabel og forflytninger ved egen hjælp kan ske mere enkelt.

### Digital pumpe

Den digitale pumpe placeres på endegavlen af sengen. Når denne aktiveres, fungerer madrassen som skummadrass med indbygget vekseltryk. Pumpen justerer trykket efter den enkelte borgers vægt, således at trykket tilpasses individuelt og trykfordelingen konstant er optimal. I tilfælde af strømsvigt/fejl vil en audiovisuel alarm starte.

### Strækbart betræk

Madrassbetrækket er strækbart i flere retninger og tilpasser sig skumkernens

formbare overflade og tillader derved brugeren at synke ned i materialet.

## Egenskaber og tilbehør



Vekseltryksmadrassen tilsluttes pumpen ved brug af en slange, som enten kan tilsluttes pumpen umiddelbart, eller når behovet for opgradering opstår.



Slangen er forsynet med en kobling, der er meget enkel at tilslutte pumpen.



Tryk på "on" for at tænde pumpen. Ingen yderligere behov for justering.



Borgeren anvender nu en dynamisk madras og risiko for tryksår er minimeret.

## Egenskaber og tilbehør



Den innovative digitale pumpe er forsynet med LCD skærm samt audiotiv alarm.



"Intelligent" software i pumpen identificerer og adviserer om status via LCD skærmen.



Når madrassen virker med vekslede tryk vil det unikke\* design og konstruktionen af luftcellerne sikre en effektiv understøttelse af borgeren. (\*patenteret)



LED skærm informationerne er tilgængelige på ni (9) forskellige sprog.



Hvis luftcellerne ved et uheld punkteres, kan disse udskiftes individuelt.




Pumpens luftslange er beskyttet for at yde effektiv infektionskontrol.



Pumpens ophængskroge er designet mhp anvendelse på en bredt sortiment af senge.

Kombinationsmadrass med dynamiske luftceller, som giver mulighed for at anvende samme madras ved forskellige behov - ændring fra middel til høj tryksårstrisiko eller omvendt - uden at borger og personale skal ulejliges med besværlige madrasudskiftninger.

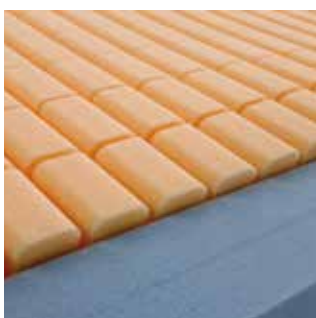

Invacares **Softform** madras er klinisk velafprøvet og trykaflastende.



**Softform Premier Active 2** er forsynet med et flervejs strækbart og vanddamp gennemtrængeligt Datex betræk.



I tilfælde af strømsvigt er borgeren til stadighed aflastet.



Enkel og modulær opbygning af madrassen sikrer nem reservedelshåndtering.


## Tekniske data



Bredde:  
830 - 900 mm



Længde:  
1810 - 2100 mm

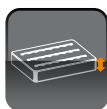

Højde:  
152 mm



Vægt:  
14 kg



Max. brugervægt:  
247.6 kg



Rengøring: 80°

**Softform  
Premier  
Active 2**

### Pumpe

Støjniveau: 32Db  
Syklus tid: 10 min.  
(Princip: 1 op 1 ned)

### Madrasen er produceret i overensstemmelse med:

- European Standard: BS EN 597-1 Cig
- European Standard: BS EN 597-2 Match
- BS7177:1996 Crib 5.

## Farve



Baltisk blå

Invacare A/S  
Sdr. Ringvej 37, 2605 Brøndby  
Tlf.: 3690 0000 - Fax: 3690 0001  
denmark@invacare.com  
www.invacare.dk

© 2016 Invacare International Sàrl  
All rights reserved.

Al information er ved trykningstidspunktet korrekt. Invacare forbeholder sig retten til at foretage konstruktionsændringer uden forudgående varsel.

Softform Premier Active 2 - DK - 05/2016