

Rifton Hygiene and Toileting System (HTS) kan tilpasses næsten alle toiletter og er designet til at forbedre livskvaliteten for brugere med særlige behov, samt lette arbejdet for plejepersonalet.



- ✓ HYGIEJNISK
- ✓ ENKELT
- ✓ ØKONOMISK

Bjørn Nielsen

Rehab & Hospitalsartikler A/S

www.bjorn-nielsen.dk

STOLEN DER VOKSER MED BARNET

TIL ETHVERT BARN, ETHVERT TOILET, ENHVER SITUATION

HTS kan tilpasses brugernes forskellige størrelser, lige fra det mindste barn til den voksne. På billedet er den samme stol i mellemstørrelsen tilpasset en lille 5-årig og en stor 11-årig. HTS findes i 3 størrelser, der spænder fra 76 cm – 188 cm i personhøjde.



TILPASSES
ETHVERT
BEHOV

Rifton HTS er et af de mest økonomiske toiletsystemer på markedet i dag, og det kan tilpasses på et utal af måder, så det passer både til bruger og budget.

Mulighederne spænder fra basismodellen med sæde, ryg, base og armlæn, der anbringes på toiletkummen, til den mobile model med al udstyr samt tilt.

Med sine gashjulpne fjedre vipper Rifton HTS 15 grader frem som hjælp til fx nemmere forflytning, brusebad og hårvask.



PÅ

Rifton HTS kan bruges på enhver toiletmodel, standard eller aflang. Monteringsrammen sikrer et godt fæste på toiletkummen. Afmontering er lige så enkel og uden brug af værktøj.



OVER

Kør Rifton HTS hen over toilettet i næsten enhver størrelse og stil. Eller brug den lavere stationære base, så børn kan sætte deres fødder på gulvet.




AF

Brug også Rifton HTS som en selvstændig toiletstol. Det mobile understel med potte tillader brug af HTS hvor som helst – ikke kun på badeværelset.

DIMENSIONER

Mål og indstillinger (cm)

	Z110 small	Z120 medium	Z130 large
Brugerhøjde bredde i alt	76-117 (54)	106-142 (54)	127-188 (60)
Sæde (forkant) til fodstøtte - højde*	20 – 33	25 – 38	33 – 46
Sæde (forkant) til gulv; mobil tilt-ramme	38 – 55	38 – 55	43 – 57
Sæde (forkant) til gulv; mobile ikke-tilt-ramme	39 – 51	39 – 51	46 – 56
Sæde (forkant) til gulv; stationær ikke-tilt-ramme	32 – 43	32 – 43	38 – 48
Sædedybde	20/23/25/28	29/32/34/37	37/39/42/44
Sædebredde	20/25/30	25/30/36	33/38/43
Armlæn højde	14.5	18	22
Ryglæn højde over sæde	42	50	62
Ryglæn bredde	29	34	41
Tilt af stol FREM	15°	15°	15°
Tilt af stol TILBAGE	15°	15°	15°
Justering af ryglæn (vinkel)	6° frem, 6° og 18° tilbage	6° frem, 6° og 18° tilbage	6° frem, 6° og 18° tilbage
Vægt (kg)	7	13	20
Max. frihøjde under sæde (tilt-ramme)	48	48	51

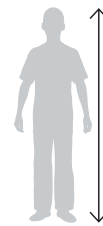

Brugeres højde er en generel guide til hurtigt at vælge den korrekte størrelse HTS. Vælg en model, som tillader brugeren at vokse.

Vigtigt! Sørg for, at sædebredde, sæde dybde og stolens højde er tilstrækkelige (ikke for små) til brugeren, samt at brugerens vægt ikke overstiger den anbefalede maksimumsvægt.

*Når det mobile stel er i den laveste position og fodstøtten er fuldt udtrukket, kan dette forhindre det forreste hjulsæt i at svinge. Opleves dette, juster da fodstøttevinklen eller juster sædet opad, så hjulene får plads til at svinge.

TILBEHØR



HOFTESTØTTE



SIDESTØTTE



**ÅBEN
SÆDEPUDE**



**HYGIEJNISKE
PUDER
- LET AT SKIFTE**



ANKELSELER



**SÆDE PÅ
STANDARD
TOILET**



TILPAS HØJDEN

På samme ramme kan der monteres både små og medium sæder, så stolen vokser med barnet. Højdejustering (sædehøjde) fra 38 cm til 54 cm. Til det store sæde kræves en separat ramme.



TILPAS SÆDEDYBDEN

Sædedybden kan variere 8-10 cm. Den totale variation i sædedybde er fra 20 cm på den lille HTS model til 46 cm på den store model.



TILPAS TILT

Vip Rifton HTS fremad (op til 15 grader) for at opnå den ønskede toiletposition og nemmere forflytning. Vip bagud (op til 15 grader) for behageligere stilling under brusebad og hårvask. Derudover kan ryglænet justeres 6 grader fremad, 6 grader bagud samt 18 grader bagud.



BESTILLING AF RIFTON HTS

			Small HMI-NR. 84843	Medium HMI-NR. 84844	Large HMI-NR. 84845	
FASTE KOMPONENTER	Sæde og ryg		<input type="checkbox"/> Z111	<input type="checkbox"/> Z121	<input type="checkbox"/> Z131	
	Basis	VÆLG	Mobil (vipbar med fodstøtte)	<input type="checkbox"/> Z112	<input type="checkbox"/> Z122	<input type="checkbox"/> Z132
			Mobil (ikke vipbar, med fodstøtte)	<input type="checkbox"/> Z113	<input type="checkbox"/> Z123	<input type="checkbox"/> Z133
			Stationær (ikke vipbar)	<input type="checkbox"/> Z114	<input type="checkbox"/> Z124	<input type="checkbox"/> Z134
			Stationær (ikke vipbar, med fodstøtte)	<input type="checkbox"/> Z184	<input type="checkbox"/> Z185	<input type="checkbox"/> Z186
			Monteringsstang (standard toilet)	<input type="checkbox"/> Z115	<input type="checkbox"/> Z115	Ikke disp.
			Monteringsstang (forlænget toilet)	<input type="checkbox"/> Z125	<input type="checkbox"/> Z125	<input type="checkbox"/> Z135
	Armlæn	VÆLG	Lav	<input type="checkbox"/> Z101	Ikke disp.	Ikke disp.
			Medium	<input type="checkbox"/> Z102	<input type="checkbox"/> Z102	<input type="checkbox"/> Z102
			Høj	Ikke disp.	<input type="checkbox"/> Z103	<input type="checkbox"/> Z103
	Sæde- og rygstøtter (anbefales)	VÆLG	Åben sædestøtte	<input type="checkbox"/> Z153	<input type="checkbox"/> Z163	<input type="checkbox"/> Z173
			Lukket sædestøtte	<input type="checkbox"/> Z154	<input type="checkbox"/> Z164	<input type="checkbox"/> Z174
Nakkestøtte			<input type="checkbox"/> Z104	<input type="checkbox"/> Z104	<input type="checkbox"/> Z104	
Butterfly-sele			<input type="checkbox"/> Z116	<input type="checkbox"/> Z126	<input type="checkbox"/> Z136	
Støttebord			<input type="checkbox"/> Z145	<input type="checkbox"/> Z155	<input type="checkbox"/> Z165	
TILVALGSMULIGHEDER	Sidestøtter (par)	VÆLG	Small	<input type="checkbox"/> Z105	<input type="checkbox"/> Z105	Ikke disp.
			Large	Ikke disp.	<input type="checkbox"/> Z106	<input type="checkbox"/> Z106
			Small med strop	<input type="checkbox"/> Z107	<input type="checkbox"/> Z107	Ikke disp.
			Large med strop	Ikke disp.	<input type="checkbox"/> Z108	<input type="checkbox"/> Z108
Lårstøtter (par)	VÆLG	Small	<input type="checkbox"/> Z109	<input type="checkbox"/> Z109	<input type="checkbox"/> Z109	
		Large	Ikke disp.	Ikke disp.	<input type="checkbox"/> Z149	
Potte			<input type="checkbox"/> Z117	<input type="checkbox"/> Z117	<input type="checkbox"/> Z117	
Stænkile	VÆLG	Standard	<input type="checkbox"/> Z118	<input type="checkbox"/> Z118	<input type="checkbox"/> Z128	
		Stor Stænskærm	<input type="checkbox"/> Z119	<input type="checkbox"/> Z119	<input type="checkbox"/> Z129	
Abduktionsklods			<input type="checkbox"/> Z124	<input type="checkbox"/> Z124	<input type="checkbox"/> Z144	
Ankelspænde (kræver fodstøtte)			<input type="checkbox"/> Z156	<input type="checkbox"/> Z156	<input type="checkbox"/> Z157	
Lægstøtte (kræver fodstøtte)			<input type="checkbox"/> Z158	<input type="checkbox"/> Z158	<input type="checkbox"/> Z159	
Fodstøtte (til monteringsstang)			<input type="checkbox"/> Z146	<input type="checkbox"/> Z147	<input type="checkbox"/> Z148	
Forhøjer			<input type="checkbox"/> Z138	<input type="checkbox"/> Z138	Ikke disp.	
Bærbar basis med bæretaske			<input type="checkbox"/> Z139	<input type="checkbox"/> Z139	Ikke disp.	

Grundmodel består af: Sæde, ryg og hoftesele.

Bjørn Nielsen

Rehab & Hospitalsartikler A/S

**Bjørn Nielsen Rehab &
Hospitalsartikler A/S**

Sønderbyen 7
DK-9510 Arden

Tel. +45 8692 7955
Fax +45 8692 7027

mail@bjorn-nielsen.dk
www.bjorn-nielsen.dk