


Dansk - Danish

SEQINETIC™
Lighting your mood

Bærbart lys i vintermørket

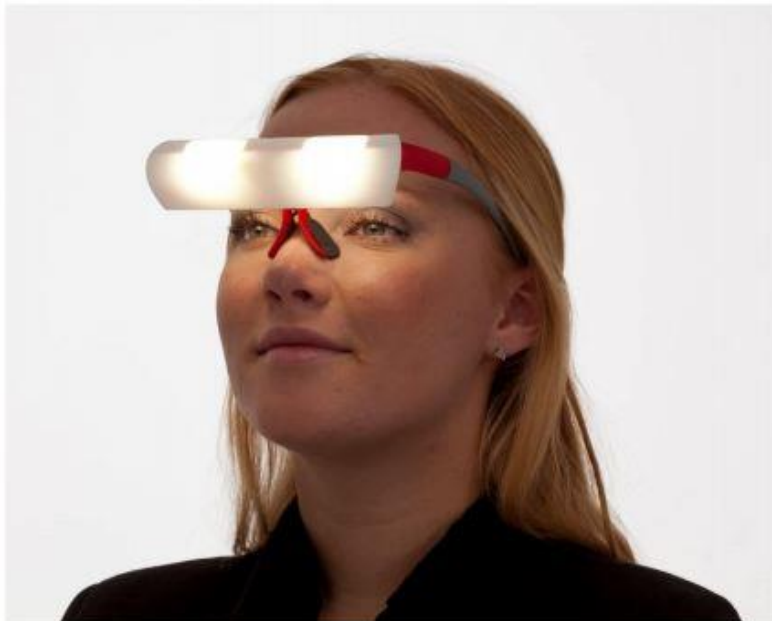

Hvad er SEQINETIC™?

SEQINETIC™ bruges imod vintertræthed, der typisk giver sig udslag i øget søvnbehov, besvær med at vågne op samt trang til søde sager.

SEQINETIC™ har 6 lysemitterende dioder (LED), som frembringer lys, som reflekteres ind i øjnene via den buede reflektor.

SEQINETIC™ bæres som briller. Den nederste reflektor-kant skal være ud for øjenene eller en anelse højere. Det er ikke nødvendigt at kigge opad og direkte ind i reflektoren.

Anbefalet brug per dag er 15-60 minutter.

Begrænsninger for brug

- Kontrast og udsyn kan påvirkes negativt under brug af SEQINETIC™.
- Må ikke anvendes mens man fører bil, andet køretøj eller cykel, skateboards eller lignende.
- Må ikke anvendes mens man betjener farligt værktøj.
- Anvend kun i godt oplyste omgivelser.
- Gå kun rundt med brillen i kendte omgivelser.
- Anvend ikke på børn under 12 år.
- Undgå at gøre produktet vådt.


Hvis der opleves nogen form for ubehag ved normal brug, bør læge konsulteres.

Tekniske specifikationer

Lysintensitet: 2.500 lux
Materialer: Stel i ABS og næsestøtte i Neoprene
Farve: Stel i cool grey og bright red.
Dimensioner: 177 mm * 154 mm * 62 mm
Vægt: 65 g (med batterier)
Batterier: 2 * AAA (engangs- eller genopladelige)

Rengøring

Aftørres med en hårdt opvredet klud uden organiske opløsningsmidler.

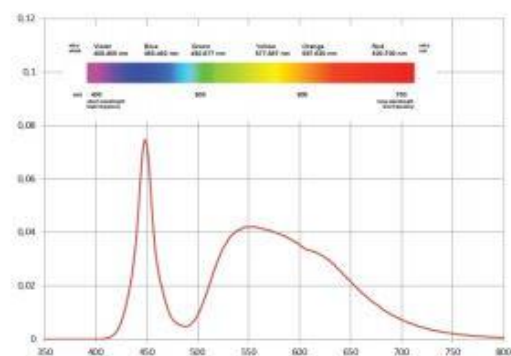

Lysindhold fra SEQINETIC™