

## Heelift AFO (Ankel Fod Ortose) Trykaflastning af hælen



### Produktet:

Heelift AFO (Ankel Fod Ortose) er det nyeste produkt i rækken af trykaflastninger fra Axel Madsen Health Care A/S.

Heelift AFO adskiller sig fra Heelift Glide, da AFO udgaven er forsynet med en skinne af polypropolen. Udover at yde optimal trykaflastning for hælen, støtter og stabiliserer Heelift AFO også foden og anklen ved hjælp af skinnen.

Det bløde indermateriale fordeler trykket over et større område, så hælen er helt fri for belastning. Ydersiden er beklædt med friktionsnedsættende glat stof, som sammen med den skridsikre belægning under foden sikrer, at patienten kan være mobil i sengen og under forflytninger til seng/stol.

Heelift AFO tillader, at man i begrænset omfang kan træde ned på den f.eks. i forbindelse med flytning fra seng til stol.

Heelift AFO kan tilpasses individuelt, så den aflaster og støtter, hvor der er behov for det.

### Anvendelse:

Heelift AFO findes i 2 udgaver.

Heelift AFO Original er med "æggebakke" for optimal luftcirkulation, mens Heelift AFO Glat er udviklet til patienter med ødem og/eller meget sensitiv hud.

### Tilbehør:

Der følger en skumblok med hver Heelift AFO, som kan anvendes til individuel tilpasning.

### Vaskeanvisning:

- Luk velcro stropperne
- Læg Heelift AFO i en vaskepose
- 60° C maskinvask
- Må ikke tørretumbles og må ikke lægges på direkte varme

### Sterilisering:

Autoclaves ved 121° C. Efterfølgende køles Heelift AFO et par timer til den er helt tør.

### Sortiment Heelift AFO:

Beskrivelse	Str.	Ref. nr.
Original "æggebakke"	One size	DM-HL-AFO
Glat	One size	DM-HLS-AFO